



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



АЯ74

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

ОКП 94 5210

Кровать травматологическая КТ4-2
Паспорт тЦДЗ.541.002 ПС

1. Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1. Кровать предназначена для помещения на ней взрослых больных.

Кровать применяется в медицинских учреждениях.

Габаритные размеры, мм: длина – 2360 ± 50 ; высота – 1100 ± 30 ; ширина – 986 ± 20 .

Габарит ширины установлен по зажимам навесных приспособлений.

1.3. Размеры подматрачной рамы, мм $2000 \pm 10 \times 800 \pm 6$

Высота рамы от пола без матраца 600 ± 20

1.4. Масса, кг, не более 120

1.5. Допускаемая нагрузка на кровать, массой, кг, не более 160

1.6. Углы наклона от горизонтали не менее:

спинной панели – 60° , тазобедренной панели – 30° ,

рамы в сторону головы (вниз) – 10° .

1.7. Средний срок службы, лет, не менее 5

1.8. Усилие перемещения кровати, кгс, не более 20

1.9. Усилие на рукоятках при изменении углов спинной и тазобедренной панелей с допускаемой нагрузкой, кгс, не более 5

1.10. Усилие расфиксирования ножной секции панели, кгс, не более 12

1.11. Усилие включения тормоза, кгс, не более 15

1.12. Комплектность приведена в таблице.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Примеч.
1.	Кровать травматологическая КТ4-2(без съемных частей, указанных ниже)	тЦДЗ.541.002	1	
<u>Съемные части (поставляются по заявке потребителя)</u>				
2.	Кронштейн для шин	КТБ.35.00	2	
3.	Упор для ног	тЦД6.278.001	1	
4.	Корзина под судно	тЦД6.122.008	1	
5.	Приспособление для подтягивания	тЦД6.153.003-01	1	
6.	Штатив для вливаний	2055312000	1	
	Матрац в чехле из ткани	тЦД6.409.000-1	1	
7.	Матрац в чехле из винилскожи	тЦД6.409.009	1	
8.	Матрац в чехле из ткани и винилскожи	тЦД6.409.009-05	1	
9.	Паспорт	тЦДЗ.541.002 ПС	1	

Допускается поставка кроватей в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенными в отдельный пакет. В соответствии с условиями договора допускается поставка любой комплектности.

По отдельному заказу кровать может комплектоваться:

- Установкой для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей УВК – «ДЗМО» (поз.13)

2. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

Кровать при максимальной комплектации состоит из основания 1, установленного на колеса 18 с тормозом 19, подматрачной рамы, состоящей из спинной 3, тазобедренной 5 и ножной 7 панелей (секций), дуг спинки 2 и 8, стенок 10, корзины под судно 17, матраца 6, приводов 14 и 15, панелей, фиксатора 16.

Кровать снабжена упором для ног 12, кронштейном 11 для поддержания шин в отведенном положении, приспособлением для подтягивания 4, штативом для вливаний.

2.2. Принцип работы кровати основан на создании условий для лечебного процесса и обслуживания посредством ручного регулирования положений панелей и различных приспособлений и устройств.

2.3. Распаковать кровать, установить съемные части согласно рисунка, спинку закрепить винтами 9.

2.4. Панели кровати могут устанавливаться в следующие основные положения: «Полусидя», «Кресло», «Согнувшись», «Тренделенбург» или любые промежуточные им. Установку положений производить вращением рукояток 14 спинной и 15 тазобедренной панелей и поднятием рукой ножной панели. Опускание ножной панели производить после нажатия вверх рукоятки 16 фиксатора, при этом необходимо удерживать панель от резкого падения другой рукой. При опускании ножной панели и подъеме тазобедренной не допускать соприкосновение ее с основанием. При опускании тазобедренной панели необходимо своевременно опускать ножную панель, если она находится в приподнятом положении.

Для снятия стенок 10 приподнять стенку, вывести ее вправо (влево) до выхода стержней из увеличенного отверстия с одной стороны, снять стенку.

Для снятия скоб 2 и 8 вывернуть до упора винты 9.

Для перестановки корзины 17 под судно отогнуть стопорную шайбу, отвернуть гайку и переставить на другую сторону основания. Порядок крепления обратный.

Для затормаживания колеса нажать ногой вниз на педаль 19, для растормаживания поднять педаль вверх.

2.5. Запрещается использование неисправной кровати.

2.6. Следить за тем, чтобы при подъеме спинной и тазовой секции панелей руки больного не находились в зоне перемещения ограждения.

2.7. Не допускается одновременная работа механизмами привода панелей. Нерабочая рукоятка должна быть опущена вниз.

3. Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке.

3.1. Техническое обслуживание кровати перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями изношенных, смазке раз в два года подшипников колес, включая на вертикальной оси, а так же винтов и подшипников механизма подъема, промывке моющими растворами и санитарной обработке частей кровати.

3.2. Проверку технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования кровати проводить на соответствие техническим характеристикам и комплектности раздела 1, при этом проверить отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, работу тормозов колес.

3.3. Возможные неисправности кровати: ослабление крепежных, резьбовых и других элементов устранить подтягиванием. При затрудненном вращении колес и винтов механизмов смажьте подшипники колес и винтов тг. А также винты любой консистентной технической смазкой, предварительно очистив трущиеся поверхности.

4. Консервация

4.1. Металлические детали кровати и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кровать травматологическая КТ4-2, зав.№_____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-020-07614107-2003.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80% при температуре +25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя(поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-020-07614107-2003.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность кровати и не гарантирует ее работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"
607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь(сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Кровать травматологическая

наименование изделия

КТ4-2

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

М.П.

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

