

Кровати медицинские «КМ-Магма»
ТУ 9452-003-32494920-2008
паспорт

Г. Кострома



Кровати медицинские «КМ-Магма» ТУ 9452-003-32494920-2008 предназначены для оснащения лечебно - профилактических учреждений.

Условия эксплуатации кроватей соответствуют климатическому исполнению УХЛ.2 по ГОСТ 15150: t от +10°C до +35°C; относительная влажность – 80% при t 25°C.

1. Основные технические данные

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Номинальная нагрузка, кг, не более	Масса, кг, не более	Средний срок службы, лет, не менее
1	КМ (медицинская)	2080х900х1000 500- выс.лежания	120±20	85±2	7
2	КМм (мед. с матрасом)	2000х840х760 500- выс.лежания	130±20	25±1	7
3	КМФ-01 (мед. функциональ.)	2135х975 470-820-выс.лежания	130±20	45±1,5	7
4	КМФ-02 (функ. 2секц.)	2160х940х1000 550- выс.лежания	200±25	50±1,5	7
5	КМФ-03 (функ. 3секц.)	2160х940х1000 550- выс.лежания	200±25	52±1,5	7
6	КМФ-04 (функ. 4секц.)	2160х940х1000 550- выс.лежания	200±25	53±1,5	7
7	ККМм (кушетка массажная)	1900х600х650	130±20	30±1	7
8	ККМс (куш. смотровая)	1900х500х540	130±20	30±1	7

2. Устройство изделий

Кровати медицинские «КМ-Магма» представляют собой сборно-сварные конструкции в стационарном и подвижном исполнении (на колесных опорах), из стального (в т.ч. из нержавеющей стали) профиля, сетки, пластмассы, мягких элементов. Кровати имеют стационарные и регулируемые по высоте и наклону ложа.

Металлические поверхности кроватей покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагостойчивое покрытие.

Конструктивные особенности кроватей отражены в Таблице 2

Таблица 1

п/п	Обозначение	Конструктивное исполнение
1	КМ (медицинская)	Односекционное реечное ложе и съемные торцевые панели кровати изготовлены из пластика. Ножки металлические с каучуковым основанием
2	КМм (мед. с матрасом)	Ложе кровати изготовлено из стального профиля и сварной сетки. Прямоугольные или полукруглые спинки кровати изготовлены из тонкостенной стальной трубы. Кровать комплектуется матрасом
3	КМФ-01 (мед. функциональ.)	Каркас кровати изготовлен из стального профиля. Спинки кровати изготовлены из стальной или нержавеющей тонкостенной трубы. Кровать установлена на колесные опоры.

		имеет многосекционное ложе, четыре регулировочных электропривода.
4	КМФ-02 (функ. 2секц.)	Каркас кровати изготовлен из стального профиля и сетки. Спинки кровати изготовлены из стальной или нержавеющей тонкостенной трубы. Кровать установлена на колесные опоры, имеет двухсекционное ложе. Бесступенчатая регулировка угла наклона секций при помощи винтового устройства.
5	КМФ-03 (функ. 3секц.)	Каркас кровати изготовлен из стального профиля и сетки. Спинки кровати изготовлены из стальной или нержавеющей тонкостенной трубы. Кровать установлена на колесные опоры, имеет трехсекционное ложе. Бесступенчатая регулировка угла наклона секций при помощи винтового устройства.
6	КМФ-04 (функ. 4секц.)	Каркас кровати изготовлен из стального профиля и сетки. Спинки кровати изготовлены из стальной или нержавеющей тонкостенной трубы. Кровать установлена на колесные опоры, имеет четырехсекционное ложе. Бесступенчатая регулировка угла наклона секций при помощи винтового устройства.
7	ККМм (кушетка массажная)	Кровать-кушетка медицинская массажная представляет собой сборно-сварную конструкцию в виде каркаса с настилом из древесно-стружечной плиты с мягким элементом из пенополиуретана, покрытым кожзаменителем. Регулируемый подголовник имеет два положения фиксации. Кушетка комплектуется дополнительными функциональными элементами.
	ККМс (куш. смотровая)	Кровать-кушетка медицинская смотровая представляет собой сборно-сварную конструкцию в виде каркаса с настилом из древесно-стружечной плиты с мягким элементом из пенополиуретана, покрытым кожзаменителем. Регулируемый подголовник имеет два положения фиксации.

3. Правила эксплуатации

3.1. Для исключения повреждений кровати не следует нагружать выше нагрузки, указанной в технических данных.

3.2. Дезинфекцию и мойку наружных поверхностей кроватей проводить 3% раствором хлорамина в комплекте с моющим средством типа «Лотос». После дезинфекции и мойки поверхности кроватей вытирают насухо.

4. Сведения об упаковке

4.1. Кровати поставляются и упаковываются в соответствии с требованиями нормативных документов (НД).

4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую упаковку и прикрепляются к корпусу кровати.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование кроватей должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.4. Изделия в упаковке должны храниться в закрытом помещении при t от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$ в вертикальном положении.

5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям НД при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации стойки - 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская модели.....«КМ-Магма» зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9452-003-32494920-2008 и признана годной.

МП _____



личная подпись

И.О.Ф.

Дата

Регистрационное удостоверение ФСН в сфере здравоохранения и соцразвития №
Сертификат соответствия №