


«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Представительства компании

Дентсплай Россия Лимитед

Нижник О.В.

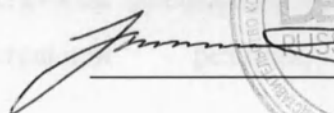

« » _____ 2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Материалы стоматологические Торех для фторирования и снижения чувствительности зубов с принадлежностями»,

производства Sultan Healthcare (Султан Хэлскэа), 411 Hackensack Avenue, 9th floor, Hackensack, NJ 07601, USA.

2011

Материал стоматологический Торех для фторирования за 60 секунд. (Torrex 60 Second APF Fluoride Gel).

Состав:

Содержит 1,23 % APF - фторид натрия, подкисленный фосфорной кислотой. Вкусы: Вишни, Мята, Пина-Колады, Жевательной резинки, Апельсина.

Показания:

Фторидная терапия применяется в целях предупреждения разрушения зубов, для реминерализации повреждений в начальной стадии, снижения повышенной дентинной чувствительности и уменьшения нарастания зубного налета.

Способ применения:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.

Материал стоматологический Торех для фторирования на основе 0,4% фторида олова (Torrex Take Home Care 0.4% Stannous Fluoride Gel).

Содержит 0,4 % фтористое олово. Густой прозрачный гель.

Показания:

Препятствует кариесогенному микробному процессу, помогает реминерализации слабой эмали, чтобы предотвратить кариес, лечит гиперчувствительность. Идеален для пациентов, предрасположенных к кариесу, ортодонтических пациентов, после воздействия облучения и отбеливания.

Применение:

Нанести на щетку небольшое количество геля. Мягкими массажными движениями щетки нанести гель по всем поверхностям зубов в течении 1 минуты. Не разбавлять водой!!!

После применения сплюнуть остатки геля. Рот не полоскать водой. После процедуры воздержаться от еды и питья течение 30 – 40 минут.

Материал стоматологический Торех для фторирования на основе 1,1% фторида натрия и нейтральным pH. (Torrex Take Home Care 1.1% Neutral pH Sodium Fluoride Gel).

Состав: 1,1% нейтральный фтористый натрий (0,5 % ион фторида). Содержит ксилитол. Однородный гелевый состав.

Показания:

Останавливает развитие кариеса корня на ранней стадии, повторное разрушение коронки/края зуба и сильное разрушение зубов; идеален для пациентов с фарфоровыми зубами или непереносимостью кислого фторида из-за ксеростомии, булемии, облучения, общего заболевания, химиотерапии или обесцвечивания; мягкое действие на мосты, коронки и пломбы.

Применение:

Нанести на щетку небольшое количество геля. Мягкими массажными движениями щетки нанести гель по всем поверхностям зубов в течении 1 минуты. Не разбавлять водой!!!

После применения сплюнуть остаткигеля. Рот не полоскать водой. После процедуры воздержаться от еды и питья течение 30 – 40 минут.

Материал стоматологический Торех для фторирования на основе 1,1% фторида натрия и нейтральным натрием (Torrex White Care 1.1% Neutral Sodium Fluoride).

Состав:

1,1 % Нейтральный содиум флюорид. Содержит Ксилитол. Не содержит красителей.

Показания:

Идеальное средство после отбеливания. Применяется для пациентов: страдающих ксеростомией (сухостью рта), хроническими заболеваниями, а также в период постоперационного восстановления. Мягко воздействует на мосты, коронки, пломбы, ослабляет формирование кислых составляющих в зубном налете, снижает прилипание налета и меняет состав микрофлоры налета, предотвращая таким образом появление участков, пораженных кариесом и предотвращает кариес на ранних стадиях. Снижает гиперчувствительность зубов после прохождения химиотерапии и отбеливающих процедур.

Применение:

Нанести на щетку небольшое количество геля. Мягкими массажными движениями щетки нанести гель по всем поверхностям зубов в течении 1 минуты. Не разбавлять водой!!!

После применения сплюнуть остаткигеля. Рот не полоскать водой. После процедуры воздержаться от еды и питья течение 30 – 40 минут.

Материал стоматологический Торех для фторирования за 60 секунд (Torrex 60 Sec. APF Foam Fluoride).

Состав:

Содержит 1,23 % APF - фторид натрия, подкисленный фосфорной кислотой.

Показания:

Предназначен для профессионального применения. Фтористые соединения оказывают активное воздействие на эмаль зубов, которое характеризуется трансформацией ее

кристаллической структуры (увеличивает пенетрацию флюоридных ионов в эмаль зуба) благодаря пористому составу лучше проникает в межзубные промежутки. Состав материала подавляет рост бактерий, что способствует снижению уровня образования зубного налета, а так же повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.

Применение:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.

Материал стоматологический Torex Neutral для фторирования (Torex Neutral Foam Fluoride).

Состав:

2% фтористый натрий (0,9 % ион фторида).

Однородный, кремообразный и тиксотропный. Четырехминутная формула.

Нейтральный показатель pH (6,5 – 7,5).

Показания:

- уменьшает риск возобновления и разъедания или потускнения;
- предпочтительно для пациентов проходящих химиотерапию, радиотерапию или применяющих лекарственные препараты, вызывающие ксеростомию;
- идеально для пациентов, которые не переносят кислые фториды, с уменьшением слюноотделением, стеклонаполненными пломбами со смолами или косметическими пломбами.

Применение:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.

Материал стоматологический Torex для фторирования и реминерализации (Torex Renew Tooth paste).

Состав:

2% фтористый натрий (0,9 % ион фторида).

Показания:

- уменьшает риск возобновления и разъедания или потускнения;
- предпочтительно для пациентов проходящих химиотерапию, радиотерапию или применяющих лекарственные препараты, вызывающие ксеростомию.

Применение:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.

Материал стоматологический Топех для фторирования DuraShield (Topex DuraShield 5% Sodium Fluoride Varnish).

Характеристика:

Одноразовый гигиенически запечатанный пакет.

Готовая смесь содержит 40мл лака с 5% содержанием фтористого натрия.

Светлый янтарно-желтый оттенок. Приятный вкус. Подслащен натуральным ксилитом.

Входит в контакт со слюной и сохраняется до 8 часов. Минимальные ограничения в еде/питье после применения.

Компактная картонная коробка с отверстием для постепенного высыпания содержимого.

Преимущества:

Помощь в асептическом контроле; исключает риск вторичного загрязнения. Не требует измерений; обеспечивает постоянный уровень фторида при каждом применении.

Для удобного, правильного применения. Увеличивает визуальный контроль. Приятен и хорошо принимается пациентами всех возрастов.

Помогает уменьшить разрушение зуба, препятствует формированию пятен; не оставляет неприятного послевкуся.

Увеличивает поглощение фторида. Увеличивает восприимчивость пациента.

Удобен в хранении и дозировке.

Помогает в соблюдении больным режима и схемы лечения после применения.

Применение:

Протрите зубы тампоном размером 2 x 2 и нанесите фторосодержащий материал при помощи одноразовой щетки на всю поверхность зубов. Продолжайте "протирать и наносить материал" до тех пор, пока не обработаете все зубы. Материал вступит в контакт

со слюной. Следует помнить, что материал имеет желтоватый цвет и может быть видимым в течение нескольких часов. Не следует применять щетку до следующего дня, чтобы сохранить лаковое покрытие как можно дольше.

Материал стоматологический Torrex Gel для снижения чувствительности, Материал стоматологический Torrex Metered Spray для снижения чувствительности, Материал стоматологический Torrex Liquid для снижения чувствительности, Материал стоматологический Torrex Handicaine для снижения чувствительности.

Состав:

Содержит 20 % раствор бензокаина, что обеспечивает быстрое действие, без абсорбции мягкими тканями, отсутствие специфического горького вкуса как во время, так и после лечения. Спрей обладает приятным вкусом вишни.

Применяется для снижения чувствительности.

Капы предназначены для индивидуального использования материалов.

Применение:

Нанести на щетку небольшое количество геля. Мягкими массажными движениями щетки нанести гель по всем поверхностям зубов в течении 1 минуты. Не разбавлять водой!!!

После применения сплюнуть остатки геля. Рот не полоскать водой. После процедуры воздержаться от еды и питья течение 30 – 40 минут.

ПРОШУ ПРОНУМЕРОВАНО
ЛИСТА (-ОВ)
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВА
ДЕНТСПЛАИ РОССИЯ ЛТД.
НИЖНИК О.В.

Подпись

