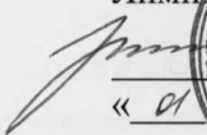


ОКП 93 9800

УТВЕРЖДАЮ

Глава Представительства
компании Дентсплай Россия
Лимитед


« 01 » _____ 2011г.


Руководство по эксплуатации

Маски медицинские одноразовые COMFIT

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ 50444-92
и технической документации изготовителя

2011

Медицинские одноразовые COMFIT предназначены для механической защиты органов дыхания стоматолога от микро-капель слюны и микрочастиц тканей и биологического материала, находящихся в процессе стоматологических манипуляций, а также от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Маски медицинские одноразовые COMFIT обеспечивают фильтрацию и предотвращают попадание в дыхательные пути 99% микрочастиц размером от 0.1 микрона

Маски Comfit могут быть снабжены защитным экраном из плотного прозрачного полиэтилена, который также защищает органы зрения врача от попадания микро-капель слюны.

Маски медицинские одноразовые COMFIT производятся в следующих вариантах исполнения: Fluid Resistant, Super High Filtration, EasyBreathe, Super Sensitive, Groovy.



Наденьте маску, полностью закрыв нос и рот.



Убедитесь в том, что маска прилегает к лицу по бокам.



Согните носовую фиксирующую часть для того, чтобы обеспечить плотное прилегание в области носа



Не спускайте маску ниже уровня носа

Не спускайте маску на шею.



Помойте руки перед тем как одеть маску.

Не носите маску более 2 часов.

Меняйте маску для каждого нового пациента.

Поменяйте маску, если она стала влажной.

Утилизируйте использованную маску, согласно правилам ЛПУ. Не кладите маску в карман. Не используйте маску повторно.