


«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Московского Представительства
Фирмы ТОО "Мёлнлике Хелс Кэа"
(Эстония)

 Айн Кальюранд

« 1 » сентября 2008 г.

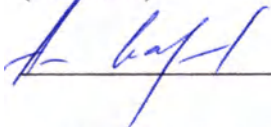

ИНСТРУКЦИЯ

«Перчатки медицинские»

о применении

(наименование изделия медицинского назначения)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Перчатки медицинские»

производства компании Mölnlycke Health Care AB (Швеция, Малайзия).

BIOGEL

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL – стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel.

Предназначение

BIOGEL предназначены для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL M

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL M – Стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel; обеспечивает превосходную эластичность и тактильную чувствительность. Наружная поверхность перчаток препятствует выскальзыванию инструментов и обеспечивает их надежное удержание.

Предназначение

Перчатка BIOGEL M предназначен для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для использования в офтальмологии, сосудистой микрохирургии, кардио- торакальной, ЛОР- и пластической хирургии, хирургии кисти, гинекологии, нейрохирургии и общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит. Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегревания.

Срок годности – 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

Biogel Super-Sensitive

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL Super-Sensitive – стерильная неопудренная хирургическая перчатка телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel. Тонкая эластичная перчатка, точно повторяет контуры кисти, обеспечивая повышенную тактильную чувствительность и четкость движений пальцев.

Предназначение

Перчатка Super-Sensitive предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для использования в кардиохирургии, нейрохирургии и общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.

3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL Super-Sensitive Optifit

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL Super-Sensitive – Стерильная неопудренная хирургическая перчатка телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel. Тонкая эластичная перчатка, точно повторяет контуры кисти, обеспечивая повышенную тактильную чувствительность и четкость движений пальцев. Перчатка имеет плотно прилегающую удлиненную манжету.

Предназначение

Перчатка Super-Sensitive Optifit предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для использования в кардиохирургии, нейрохирургии и общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности - 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL Orthopedic Optifit

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная

Описание продукта:

BIOGEL Orthopedic Optifit – Стерильная неопудренная хирургическая перчатка телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel. Эластичная перчатка, максимально точно повторяет контуры кисти, обеспечивая высокую тактильную чувствительность. Перчатка имеет плотно прилегающую удлиненную манжету.

Предназначение

Перчатка Orthopedic Optifit предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для использования в травматологии и ортопедии, а также общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL D

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, нестерильная

Описание продукта:

BIOGEL D – стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, телесного цвета, из натурального латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel.

Предназначение

BIOGEL D предназначен для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для применения в стоматологии.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности - 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL Diagnostic

Перчатка латексная с полимерным покрытием, неопудренная, нестерильная.

Описание продукта:

BIOGEL Diagnostic – стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, из натурального латекса, телесного цвета, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel.

Предназначение

BIOGEL Diagnostic предназначен для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для применения при проведении диагностических процедур.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности - 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Инструкция по применению

BIOGEL Eclipse

Перчатка депротеинизированная латексная с полимерным покрытием, неопудренная, стерильная

Описание продукта:

BIOGEL Eclipse – Стерильная неопудренная хирургическая перчатка телесного цвета, из депротеинизированного латекса, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel. Тонкая эластичная перчатка, точно повторяет контуры кисти, обеспечивая повышенную тактильную чувствительность.

Предназначение

Перчатка BIOGEL Eclipse предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур. Рекомендована для использования в хирургии высокого риска, педиатрической практике и общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

1. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
2. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
3. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
4. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

BIOGEL Eclipse Indicator

Система двойных перчаток с индикацией прокола, состоящая из зеленой внутренней и наружной телесного цвета перчаток депротеинизированных латексных с полимерным покрытием Biogel, неопудренных, стерильных.

Описание продукта:

BIOGEL Eclipse Indicator – 2 пары стерильных неопудренных хирургических перчаток из депротеинизированного латекса, зеленого и телесного цвета, изнутри покрытых специальным полимерным слоем Biogel, с индикацией прокола. Biogel Indicator - запатентованная система индикации прокола.

Предназначение

BIOGEL Eclipse Indicator предназначены для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур у инфицированных пациентов.

Инструкция по применению

5. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
6. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
7. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
8. Поочередно извлеките и наденьте перчатки сначала зеленого, а затем телесного цвета, в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Противопоказания

Перчатки не рекомендуются к использованию людям с индивидуальной непереносимостью натурального латекса.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит. Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегревания.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

BIOGEL Skinsense Indicator

Система двойных перчаток с индикацией прокола, состоящая из зеленой внутренней и наружной телесного цвета перчаток из синтетического эластомера, с полимерным покрытием Biogel, неопудренных, стерильных.

Описание продукта:

BIOGEL Skinsense Indicator – 2 пары стерильных неопудренных хирургических перчаток из синтетического эластомера, зеленого и телесного цвета, с индикацией прокола, изнутри покрытых специальным полимерным слоем Biogel. Biogel Indicator - запатентованная система индикации прокола.

Предназначение

BIOGEL Skinsense Indicator предназначены для защиты рук персонала, имеющих аллергические реакции на натуральный латекс, при проведении стандартных медицинских процедур, особенно у инфицированных пациентов. Рекомендована для использования в хирургии высокого риска, педиатрической практике и общехирургических вмешательствах.

Инструкция по применению

9. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
10. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
11. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
12. Поочередно извлеките и наденьте перчатки сначала зеленого, а затем телесного цвета, в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

BIOGEL Skinsense

Перчатка безлатексная с полимерным покрытием Biogel, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL Skinsense – стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, телесного цвета, из синтетического эластомера, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel.

Предназначение

BIOGEL Skinsense предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур, особенно при наличии или подозрениях на аллергические реакции на натуральный латекс.

Инструкция по применению

13. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
14. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
15. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
16. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки.

Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит.

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

BIOGEL Skinsense Polyisoprene (PI)

Перчатка безлатексная с полимерным покрытием Biogel, неопудренная, стерильная.

Описание продукта:

BIOGEL Skinsense Polyisoprene (PI) – стерильная неопудренная хирургическая перчатка анатомической формы, телесного цвета, из синтетического полиизопрена, изнутри покрытая специальным полимерным слоем Biogel.

Предназначение

BIOGEL Polyisoprene (PI) предназначена для защиты рук персонала при проведении стандартных медицинских процедур, особенно при наличии или подозрениях на аллергические реакции на натуральный латекс.

Инструкция по применению

17. Вскройте упаковку, потянув за свободные края.
18. Извлеките бумажный конверт с маркировкой.
19. Расположите бумажный конверт лицом к себе символами L (левая) и R (правая) соответственно.
20. Поочередно извлеките и наденьте перчатки в соответствии с маркировкой на левую и правую руку.

Стерильность и хранение

Стерильность продукции гарантирована при сохраненной целостности упаковки. Однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит. Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте. Избегать замораживания и перегрева.

Срок годности – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.