

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медкомплект»
Сычева И.Г.
«01» сентября 2010 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ЗОНДЫ УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ**

2010 г.

1. Назначение.

Зонды урогенитальные одноразовые стерильные производства Cixi City Hualaisi Medical Apparatus Instruments Co., LTD, Китай используются при обследовании в гинекологии и урологии для взятия биологических проб в виде соскобов эпителиальных клеток для исследований в лабораторных условиях:

- Тип А «Универсальный» (Sample brush) - для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование или бактериологическое методом ПЦР.
- Тип D «Цитошетка» (Rambrush) - для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование.
- Тип F «Комбинированный» (Cervix brush) - для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование или бактериологическое методом ПЦР.

Класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 2а.

2. Основные технические характеристики.

Зонды урогенитальные одноразовые стерильные:

- Тип А «Универсальный» - произведен из полипропилена, рабочая часть изготовлена на основе сложных эфиров целлюлозы.
- Тип D «Цитошетка» - на основе из нержавеющей стали закреплена щетина из полиэтилена, ручка из ABS акрилонитрилбутадиенстирол.
- Тип F «Комбинированный» произведен из полипропилена, рабочая часть изготовлена на основе сложных эфиров целлюлозы.

Зонды урогенитальные одноразовые стерильные изготовлены методом термообработки под высоким давлением из гранул PP и ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса под давлением поступает в форму-матрицу.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование зондов урогенитальных одноразовых стерильных при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку зонда.
- После того, как пациентка будет готова к осмотру, достаньте из упаковки инструмент и приступите к работе.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку зондов урогенитальных одноразовых стерильных непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности зондов урогенитальных одноразовых стерильных 5 лет с даты стерилизации.

Сшито и заверено печатью 2

(*И.Г. Сычева*)
Сычева И.Г.

