

ОКП 93 9800

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ»

Г. Любимова
Любимова Г.В.

« 01 »

2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинских изделий

**Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные
в комплектах и отдельных упаковках
по ТУ 9398-001-14948607-2015**

Настоящая инструкция распространяется на медицинские изделия «Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные в комплектах и отдельных упаковках», выпускаемых ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» в соответствии с ТУ 9398-001-14948607-2015.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 9398-001-14948607-2015 представляют собой изделия полной заводской готовности, используются в лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), диагностических центрах, санаторно-курортных учреждениях, в социальных учреждениях. медицинским персоналом и пациентами при уходе, диагностике, лечении и восстановлении больных (кроме хирургических и других инвазивных процедур).

Одежда медицинская одноразовая нестерильная используется во время медицинских процедур, при обследовании, осмотре пациентов с целью предохранения (защиты) как медицинского персонала, так и пациентов от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе.

Медицинские одноразовые нестерильные простыни, наволочки, пододеяльники, подголовники и другие изделия применяются для обеспечения гигиенических условий и создания физического барьера от переноса микроорганизмов и жидкостей между пациентом и кроватью, кушеткой, одеялом, подушкой и т.д. при использовании в ЛПУ.

Чехлы медицинские одноразовые нестерильные используются для обеспечения гигиенических условий и создания физического барьера от переноса микроорганизмов и жидкости между человеком и поверхностью изделий (наушник, кресло, матрас и др.).

Чехлы на инструментальный стол предназначены для использования в качестве неспециализированного защитного покрытия медицинских инструментов и оборудования, и обеспечения физического барьера с целью предотвращения взаимного загрязнения в различных клинических условиях.

Полотенца и салфетки медицинские одноразовые нестерильные, в том числе впитывающие, используются для обтирания или высушивания неповрежденной кожи пациентов, оборудования или окружающих предметов, например, после утечки жидкости.

Впитывающие изделия имеют верхний слой из тонкого нетканого материала, позволяющего жидкости равномерно проходить в средний впитывающий слой, нижний слой изготовлен из влагонепроницаемого полимерного материала для надежной защиты от протекания.

Бахилы одноразовые используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Бахилы на ступню (носки) используются для обеспечения гигиенических условий и создания физического барьера от переноса микроорганизмов между ступней пациента и окружающей средой.



Внимание!

Указанные в настоящей Инструкции изделия не могут быть связаны с уходом за ранами.

Область применения: широкого применения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные включают ассортимент следующих изделий:

- Халат медицинский,
- Халат процедурный,
- Костюм медицинский (рубашка и брюки),
- Комбинезон,
- Фартук,
- Нарукавники,

- Накидка для пациента,
- Бахилы низкие из нетканого материала,
- Бахилы низкие полиэтиленовые,
- Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках,
- Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала,
- Тапочки процедурные,
- Шапочка «Берет»,
- Шапочка «Колпак»,
- Маска медицинская (на завязках, на резинке; однослойная, двухслойная или трехслойная),
- Простыня медицинская,
- Салфетка медицинская,
- Брюки процедурные для пациента,
- Трусики процедурные женские,
- Трусики бикини женские,
- Шорты процедурные,
- Рубашка для роженицы,
- Пеленка,
- Пододеяльник,
- Наволочка,
- Чехол на матрас с резинкой или без резинки,
- Чехол на кресло,
- Чехол на наушник,
- Подголовник на кресло,
- Простыня впитывающая,
- Пеленка впитывающая,
- Салфетка впитывающая,
- Салфетка-нагрудник,
- Полотенце впитывающее,
- Чехол на инструментальный стол.

2.1.1. Описание изделий

2.1.1.1. *Халат медицинский* должен быть свободного покроя. Тип рукава: втачной или реглан, длинный с вязанным трикотажным манжетом, на завязках или собранным на резинку. Тип горловины: круглый или V-образный вырез без воротника или с воротником-стойкой. Перед халата может быть на кокетке, включать складки, обеспечивающие свободу движения. Горловина халата фиксируется на завязки. Халат должен фиксироваться сзади на 2-е или 4-е завязки или на пояс в области талии или спереди – на завязки. Низ халата не обработан.

2.1.1.2. *Халат процедурный* должен быть свободного покроя, с накладными карманами или без. Тип горловины: круглый или прямоугольный, или V-образный вырез, с воротником или без. Тип застежки: спереди на контактную ленту типа «Контакт». Тип рукава: короткий или длинный, собранный на резинку или без. Низ халата не обработан

2.1.1.3. *Костюм медицинский (рубашка)* должна быть с коротким или длинным рукавом, собранным на резинку. Полочка может быть с накладными карманами или без них. Спинка с кокеткой или без нее. Тип горловины: круглый или прямоугольный или V-образный, с планкой или без. Низ куртки не обработан.

2.1.1.4. *Костюм медицинский (брюки)* должны быть свободного покроя. Верх брюк собран на резинку или завязки (кулиску), возможно наличие карманов спереди или сзади. Низ брюк собран на резинку или не обработан.

2.1.1.5. *Комбинезон* должен быть с длинным втачным рукавом, который оканчивается резинкой. Перед цельнокроеный, спинка должна быть цельнокроеная. Вырез горловины должен быть округлый. Комбинезон может иметь притачанный капюшон с резинкой или кулисой по краю. При разрезной передней полочке застежка на пластмассовую молнию или на застежку «Контакт». Комбинезон может на уровне талии фиксироваться резинкой или завязками.

2.1.1.6. *Фартук* должен быть фигурным, цельнокроеным, с двумя завязками на уровне талии, лямкой или завязками, фиксирующей его на шее. Края не обработаны.

2.1.1.7. *Нарукавники* должны быть одношовными, верх и низ собран на резинку. Края не обработаны.

2.1.1.8. *Накидка для пациента* должна быть без воротника, с увеличенной проймой для свободного движения, без рукавов. Полочка должна быть цельнокроеной со спинкой или состоять из 2-х половинок. Может фиксироваться завязками. Низ накидки не обработан.

2.1.1.9. *Бахилы низкие из нетканого материала* должны быть собраны по верхнему краю на резинку. Края не обработаны.

2.1.1.10. *Бахилы низкие полиэтиленовые* должны быть собраны по верхнему краю на резинку.

2.1.1.11. *Бахилы высокие* могут быть с одинарной или двойной подошвой, собраны по верхнему краю на резинку или на завязки (кулиску).

2.1.1.12. *Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала* должны быть собраны по верхнему краю на резинку. Края не обработаны.

2.1.1.13. *Тапочки процедурные* должны быть с открытым или закрытым носком, состоять из подошвы и верхней части. Края могут быть не обработаны.

2.1.1.14. *Шапочка «Берет»* должна быть собрана на резинку по краю вдоль окружности. Края могут быть не обработаны.

2.1.1.15. *Шапочка «Колпак»* должна быть цилиндрической формы, с подворотом или без, состоять из стенки и донышка круглой или овальной формы, с обработанными краями или без. Шапочка фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер колпака.

2.1.1.16. *Маска медицинская 2-х слойная*, не резинках, может быть на с обработанными краями или без. Маска выполнена из двух слоев Спанбонда и оснащена фиксатором.

2.1.1.17. *Маска медицинская 3-х слойная*, на резинках, может быть с обработанными краями или без. Маска выполнена из Спанбонда (наружный и прилегающий к лицу слой), Мельтблаун (внутренний слой) и оснащена фиксатором.

2.1.1.18. *Простыня медицинская, салфетка медицинская, пеленка, простыня впитывающая, пеленка впитывающая, салфетка впитывающая, полотенце впитывающее* должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны.

2.1.1.19. *Брюки процедурные для пациентов* должны быть свободного покроя. Верх брюк собран на резинку или завязки (кулиску), возможно наличие карманов спереди или сзади. Низ брюк собран на резинку или не обработан.

2.1.1.20. *Трусики процедурные женские* на уровне талии собраны на резинку или фиксируются при помощи завязок. Низ трусов собран на резинку или не обработан.

2.1.1.21. *Трусики бикини женские* с глубоким вырезом спереди и сзади, на уровне талии собраны на резинку.

2.1.1.22. *Шорты процедурные* на уровне талии собраны на резинку или фиксируются при помощи завязок. Низ шорт собран на резинку или не обработан.

2.1.1.23. *Рубашка для роженицы* должна быть свободного покроя, прямого или расширенного к низу силуэта, с коротким цельнокроеным рукавом или без него. Передняя часть может быть на кокетке. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: с разрезом на завязки. Края могут быть не обработаны.

2.1.1.24. *Пододушечник и наволочка* представляют собой шивные изделия прямоугольной или квадратной формы. Края обработаны и не обработаны.

2.1.1.25. *Чехол на матрас* должен быть прямоугольной формы с бортиком или без, фиксироваться при помощи резинки или на завязки.

2.1.1.26. *Чехол на кресло* должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

2.1.1.27. Чехол на наушник должен стягиваться на резинке.

2.1.1.28. Подголовник на кресло должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

2.1.1.29. Салфетка-нагрудник прямоугольной формы с вырезом для горловины и завязками

2.1.1.30. Чехол на инструментальный стол должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

2.2. Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные поставляются в комплектах по нескольку позиций и в отдельных упаковках – в зависимости от требований и нужд потребителя.

2.2.1. Состав изделий в комплектах и их исполнение

1. Комплект одежды медицинской для персонала одноразовый нестерильный в составе:

- 1.1 Халат медицинский (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 1.2 Костюм медицинский (рубашка и брюки) (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 1.3 Комбинезон (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 1.4 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 1.5 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см.), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 1.6 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 1.7 Наручники (длина от 35 до 50 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 1.8 Фартук (длина от 100 до 150 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 1.9 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см; длина 36,0-44,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см; длина 45,0-55,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см; длина 55,0-65,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см; длина 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 1.10 Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки

2. Комплект одежды медицинской для пациента одноразовый нестерильный в составе:

- 2.1 Брюки процедурные для пациента (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.2 Шорты процедурные (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.3 Трусики процедурные женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.4 Трусики бикини женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.5 Халат процедурный (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 2.6 Накладка для пациента (длина от 100 до 120 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 2.7 Чехол на кресло (длина 85,0-95,0см, ширина 65,0-75,0см, 85,0 – 95,0см; длина 100,0 – 200,0см, ширина 65,0-75,0см, 85,0 – 95,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.8 Подголовник на кресло (ширина 27,0-35,0см, 37,0-43,0см, длина от 28 до 60 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.9 Простыня впитывающая (длина 120,0-140,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см; длина 140,0-160,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-

65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см; длина 160,0 – 180,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см; длина 180,0-200,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см; длина 200,0-220,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина 220,0-240,0см, 120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см; длина 240,0-260,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 220,0-240,0см, 240,0-260,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

- 2.10 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы низкие полиэтиленовые (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары
- 2.11 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 2.12 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, 36,0-95,0см, ширина 23,0-33,0см, 36,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

3. Комплект одежды для медицинской сестры одноразовый нестерильный в составе:

- 3.1 Халат медицинский (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 3.2 Костюм медицинский (рубашка и брюки) (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 3.3 Комбинезон (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 3.4 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 3.5 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см.), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 3.6 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 3.7 Нарукавники (длина от 35 до 50 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 3.8 Фартук (длина от 100 до 150 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.

4. Комплект одежды медицинской для персонала №1 одноразовый нестерильный в составе:

- 4.1 Халат медицинский (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 4.2 Костюм медицинский (рубашка и брюки) (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 4.3 Комбинезон (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 4.4 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 4.5 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см.), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 4.6 Чехол на наушник (универсальный) (длина от 10,0 до 15,0см, ширина от 10,0 до 15,0), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 4.7 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 4.8 Нарукавники (длина от 35 до 50 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 4.9 Фартук (длина от 100 до 150 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 4.10 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, 36,0-95,0см, ширина 23,0-33,0см, 36,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 4.11 Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

5. Комплект белья медицинского одноразовый нестерильный в составе:

- Простыня медицинская (длина от 100 до 120см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см; длина 120 до 140см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 130 до 160см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 до 190см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см; длина от 190 до 220см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина от 240 до 300см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см, 220,0-240,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Наволочка (длина 18,0-22,0см, ширина 18,0-22,0см; длина 27,0-33,0см, ширина 18,0-22,0см, 27,0-33,0см; длина 36,0 - 44,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 - 44,0см; длина 45,0 - 55,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 - 44,0см, 45,0 - 55,0см; длина 55,0 - 65,0см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см; длина 65,0 - 75,0см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см; длина 85,0 - 95,0 см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см, 85,0 - 95,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Пододеяльник (длина от 120 до 140 см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 140 до 160см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 см до 200см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0; длина от 200 см до 220см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0, 190,0-210,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Чехол на матрас с резинкой или без резинки (длина от 120 до 140см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 140 до 160см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см; длина от 160 до 180см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см; длина от 180 до 220см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 160,0-180,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, 36,0-95,0см, ширина 23,0-33,0см, 36,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

6. Комплект одежды и белья медицинские для предоперационной, одноразовый, нестерильный в составе:

- Простыня медицинская (длина от 100 до 120см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см; длина 120 до 140см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 130 до 160см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 до 190см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см; длина от 190 до 220см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина от 240 до 300см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см, 220,0-240,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Наволочка (длина 18,0-22,0см, ширина 18,0-22,0см; длина 27,0-33,0см, ширина 18,0-22,0см, 27,0-33,0см; длина 36,0 - 44,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 - 44,0см; длина 45,0 - 55,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 - 44,0см, 45,0 - 55,0см; длина 55,0 - 65,0см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см; длина 65,0 - 75,0см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см; длина 85,0 - 95,0 см, ширина 45,0 - 55,0см, 55,0 - 65,0см, 65,0 - 75,0см, 85,0 - 95,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Чехол на кресло (ширина 65,0-75,0см, 85,0 - 95,0см, длина 85,0-95,0см, 100,0 - 200,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Чехол на наушник (универсальный) (длина от 10,0 до 15,0см, ширина от 10,0 до 15,0), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Подголовник на кресло (ширина 27,0-35,0см, 37,0-43,0см, длина от 28 до 60 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Чехол на инструментальный стол (длина 85,0-95,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см; длина 100,0-120,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП

- «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 6.8 Брюки процедурные для пациента (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 6.9 Шорты процедурные (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 6.10 Трусики процедурные женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 6.11 Трусики бикини женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

7. Комплект одежды медицинской для пациента №1 одноразовый нестерильный в составе:

- 7.1 Халат медицинский (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 7.2 Костюм медицинский (рубашка и брюки) (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 7.3 Комбинезон (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 7.4 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 7.5 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 7.6 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 7.7 Наручники (длина от 35 до 50 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 7.8 Фартук (длина от 100 до 150 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 7.9 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, 36,0-95,0см, ширина 23,0-33,0см, 36,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 7.10 Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

8. Комплект одежды медицинской для партнерских родов одноразовый нестерильный в составе:

- 8.1 Рубашка для роженицы (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.2 Накидка для пациента (длина от 100 до 120 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 8.3 Тапочки процедурные (длина следа от 25,0 до 29,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 8.4 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.5 Простыня медицинская (длина от 100 до 120см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см; длина 120 до 140см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 130 до 160см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 до 190см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см; длина от 190 до 220см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина от 240 до 300см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см, 220,0-240,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.6 Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.7 Пеленка впитывающая (длина 55,0-65,0см, ширина 37,0-43,0см, 55,0-65,0см; длина 85,0-95,0см ширина 37,0-43,0см, 55,0-65,0см, 85,0-95,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.8 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см.), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 8.9 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках

- или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 8.10 Трусики процедурные женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

9. Комплект медицинский для косметологии одноразовый нестерильный в составе:

- 9.1 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, 36,0-95,0см, ширина 23,0-33,0см, 36,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.2 Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» или Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.3 Тапочки процедурные (длина следа от 25,0 до 29,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 9.4 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.5 Трусики процедурные женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.6 Трусики бикини женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.7 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.8 Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала (высота от 12,0 до 16,0 см., длина следа от 25,0 до 29,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 9.9 Простыня медицинская (длина от 100 до 120см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см; длина 120 до 140см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 130 до 160см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 до 190см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см; длина от 190 до 220см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина от 240 до 300см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см, 220,0-240,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 9.10 Пеленка (ширина от 40 до 60 см, длина 55,0- 75,0см, 80,0- 95,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

10. Комплект белья медицинского для стоматологии одноразовый нестерильный в составе:

- 10.1 Чехол на кресло (ширина 65,0-75,0см, 85,0 – 95,0см, длина 85,0-95,0см, 100,0 – 200,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 10.2 Подголовник на кресло (ширина 27,0-35,0см, 37,0-43,0см, длина от 28 до 60 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 10.3 Бахилы низкие полиэтиленовые (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 10.4 Салфетка-нагрудник (длина 45,0-55,0см, ширина 45,0-55,0см ; длина 65,0-75,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

2.2.2. Состав изделий в отдельных упаковках

- 1 Халат медицинский (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 2 Халат процедурный (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 3 Костюм медицинский (рубашка и брюки) (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 4 Комбинезон (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 5 Фартук (длина от 100 до 150 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 6 Наручники (длина от 35 до 50 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 7 Накладка для пациента (длина от 100 до 120 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 шт.
- 8 Бахилы низкие из нетканого материала (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.

- 9 Бахилы низкие полиэтиленовые (высота от 14,0 до 25,0 см., длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 10 Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках (высота от 35,0 до 55,0см, длина следа от 35,0 до 41,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 11 Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала (высота от 12,0 до 16,0 см., длина следа от 25,0 до 29,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 12 Тапочки процедурные (длина следа от 25,0 до 29,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 пары.
- 13 Шапочка «Берет» (диаметр от 25,0см до 30,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 14 Шапочка «Колпак» (высота изделия 14,0 от 35,0см.), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 15 Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная (длина 16,0 – 19,0см, ширина 9,0 – 10,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
Простыня медицинская (длина от 100 до 120см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см; длина 120 до 140см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 130 до 160см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 до 190см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см; длина от 190 до 220см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина от 240 до 300см, ширина 36,0-44,0см, 65,0-75,0м, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см, 220,0-240,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 16 Салфетка медицинская (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 17 Брюки процедурные для пациента (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, рост 160-180 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 18 Трусики процедурные женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 19 Трусики бикини женские (размеры 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 20 Шорты процедурные (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 21 Рубашка для роженицы (размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 22 Пеленка (ширина от 40 до 60 см, длина 55,0- 75,0см, 80,0- 95,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 23 Пододеяльник (длина от 120 до 140 см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 140 до 160см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см; длина от 160 см до 200см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0; длина от 200 см до 220см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 130,0-150,0см, 140,0-160,0, 190,0-210,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 24 Наволочка (длина 18,0-22,0см, ширина 18,0-22,0см; длина 27,0-33,0см, ширина 18,0-22,0см, 27,0-33,0см; длина 36,0 – 44,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 – 44,0см; длина 45,0 – 55,0см, ширина 27,0-33,0см, 36,0 – 44,0см, 45,0 – 55,0см; длина 55,0 – 65,0см, ширина 45,0 – 55,0см, 55,0 – 65,0см, 65,0 – 75,0см; длина 65,0 – 75,0см, ширина 45,0 – 55,0см, 55,0 – 65,0см, 65,0 – 75,0см; длина 85,0 – 95,0 см, ширина 45,0 – 55,0см, 55,0 – 65,0см, 65,0 – 75,0см, 85,0 – 95,0 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 25 Чехол на матрас с резинкой или без резинки (длина от 120 до 140см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина от 140 до 160см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см; длина от 160 до 180см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см; длина от 180 до 220см, ширина 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 160,0-180,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 26 Чехол на кресло (длина 85,0-95,0см, ширина 65,0-75,0см, 85,0 – 95,0см; длина 100,0 – 200,0см, ширина 65,0-75,0см, 85,0 – 95,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 27 Чехол на наушник (универсальный) (длина от 10,0 до 15,0см, ширина от 10,0 до 15,0), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 28 Подголовник на кресло (ширина 27,0-35,0см, 37,0-43,0см, длина от 28 до 60 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 29 Простыня впитывающая (длина 120,0-140,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см; длина 140,0-160,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см; длина 160,0 – 180,0см, ширина
- 30

- 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см; длина 180,0-200,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см; длина 200,0-220,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см; длина 220,0-240,0см, 120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 200,0-220,0см; длина 240,0-260,0см, ширина 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0см-75,0см, 85,0см-95,0см, 100,0-120,0см, 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, 140,0-160,0см, 180,0-200,0см, 220,0-240,0см, 240,0-260,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 31 Пеленка впитывающая (длина 55,0-65,0см, ширина 37,0-43,0см, 55,0-65,0см; длина 85,0-95,0см, ширина 37,0-43,0см, 55,0-65,0см, 85,0-95,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 32 Салфетка впитывающая (длина от 10 до 100 см, ширина от 10 до 100 см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 33 Салфетка-нагрудник (длина 45,0-55,0см, ширина 45,0-55,0см ; длина 65,0-75,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 34 Полотенце впитывающее (длина 27,0-33,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см; длина 36,0-44,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см; длина 45,0-55,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см; длина 65,0-75,0см, 75,0-85,0см, 85,0-95,0см, ширина 23,0-27,0см, 27,0-33,0см, 36,0-44,0см, 45,0-55,0см, 55,0-65,0см, 65,0-75,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.
- 35 Чехол на инструментальный стол (длина 85,0-95,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см; длина 100,0-120,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см; длина 120,0-140,0см, 140,0-160,0см, ширина 45,0-55,0см, 65,0-75,0см, 85,0-95,0см, 100,0-120,0см), производства ООО «УПП «ОСКОЛЬСКОЕ» - не менее 1 штуки.

По согласованию с заказчиком при необходимости комплектация может быть изменена.

2.3. Основные линейные размеры изделий должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 1 – 36.

Таблица 1

Халат медицинский

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина рукава, см	Ширина рукава внизу, см	Длина завязок (при наличии), см	Схематическое изображение
88-92	110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0	60,0±5,0	62,0±5,0	18,0±2,0	не менее 60,0	
96-100		65,0±5,0				
104-108		70,0±5,0				
112-116		75,0±5,0				

Таблица 4.

Костюм медицинский (брюки)

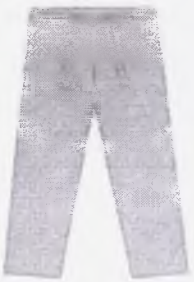
Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина шагового шва, см	Ширина брюк внизу, см	Схематическое изображение
88-92	110,0±10,0	60,0±5,0	85,0±5,0	30,0±3,0	
96-100		65,0±5,0			
104-108		70,0±5,0			
112-116		75,0±5,0			

Таблица 5

Комбинезон

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина рукава, см	Ширина рукава внизу, см	Длина шагового шва, см	Ширина брюк внизу, см	Ширина капюшона, см	Высота капюшона, см	Схематическое изображение
88-92	160,0±10,0 180,0±10,0	60,0±5,0	62,0±5,0	18,0±2,0	85,0±5,0	30,0±3,0	26,0±2,0	37,0±3,0	
96-100		65,0±5,0							
104-108		70,0±5,0							
112-116		75,0±5,0							

Таблица 6

Фартук

Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина завязок, см	Схематическое изображение
110,0±10,0 140,0±10,0	80,0±5,0 88,0±5,0	не менее 40,0	

Таблица 7

Нарукавники

Длина изделия, см*	Ширина изделия в верхней части, см	Ширина изделия в нижней части, см	Схематическое изображение
от 35,0 до 50,0	$25,0 \pm 2,0$	$17,0 \pm 2,0$	

Таблица 8

Накидка для пациента

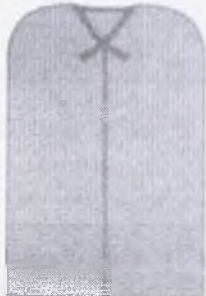
Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина завязок, см	Схематическое изображение
$110,0 \pm 10,0$	$140,0 \pm 10,0$	$25,0 \pm 3,0$	

Таблица 9

Бахилы низкие из нетканого материала

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см	Схематическое изображение
$15,0 \pm 1,0$ $18,0 \pm 1,0$ $20,0 \pm 5,0$	$38,0 \pm 3,0$	

Таблица 10

Бахилы низкие полиэтиленовые

Высота изделия, см	Длина ступни, см	Схематическое изображение
$15,0 \pm 1,0$ $18,0 \pm 1,0$ $20,0 \pm 5,0$	$38,0 \pm 3,0$	

Таблица 11

Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см	Длина завязок (при наличии) (В), см	Схематическое изображение
40,0±5,0 50,0±5,0	38,0±3,0	40,0±10,0	

Таблица 12

Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала

Высота изделия, см	Длина ступни, см	Схематическое изображение
13,0±1,0 15,0±1,0	27,0±2,0	

Таблица 13

Тапочки процедурные

Длина, см	Ширина, см	Схематическое изображение
27,0±2,0	10,0±1,0 11,5±1,5	

Таблица 14

Шапочка «Берет»

Диаметр внутренней окружности при растянутой резинке, см	Диаметр донышка, см	Длина в сложенном виде, см (если в готовом виде шапочка представляет собой гофрированную ленту)	Ширина в сложенном виде, см (если в готовом виде шапочка представляет собой гофрированную ленту)	Схематическое изображение
от 25,0 до 30,0	30,0 ± 0,5	20,0 ± 2,0	2,5±1,0	

Таблица 15

Шапочка «Колпак»

Высота изделия, см	Диаметр внутренней окружности, см	Длина завязок, см (при наличии)	Длина потопоглощающей полосы, см (при наличии)	Высота потопоглощающей полосы, см (при наличии)	Схематическое изображение
16,0±2,0 20,0±2,0 23,0±2,0	от 26,5 до 31,5	не менее 20,0	20,0±2,0	4,0±1,0	

Таблица 16

Маска медицинская на резинке (двухслойная или трехслойная)

Длина маски, см	Ширина маски, см	Длина резинок в растянутом состоянии, см	Схематическое изображение
17,5 ± 1,5	9,5 ± 0,5	не менее 30,0	

Таблица 17

Простыня медицинская

Длина простыни, см	Ширина простыни, см	Схематическое изображение
110,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0	
130,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0	
150,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0	
170,0±10,0 190,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0	

	140,0±10,0 150,0±10,0	
200,0±10,0 210,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 190,0±10,0	
	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 190,0±10,0 210,0±10,0 230,0±10,0	
250,0±10,0 270,0±10,0 290,0±10,0	40,0±4,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 190,0±10,0 210,0±10,0 230,0±10,0	

Таблица 18

Салфетка медицинская

Ширина салфетки, см от 10,0 до 100,0	Длина салфетки, см от 10,0 до 100,0	Схематическое изображение
		

Таблица 19

Брюки процедурные для пациента

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина шагового шва, см	Ширина брюк внизу, см	Схематическое изображение
88-92	110,0±10,0	60,0±5,0	85,0±5,0	30,0±3,0	
96-100		65,0±5,0			
104-108		70,0±5,0			
112-116		75,0±5,0			

Таблица 20

Трусики процедурные женские

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия в области талии (в растянутом состоянии), см	Длина шагового шва, см	Ширина трусов внизу, см	Длина завязок (при наличии), см	Схематическое изображение
88-92	40,0±4,0 50,0±5,0	54,0±2,0	10,0±2,0 15,0±2,0	30,0±3,0	20,0±5,0	
96-100		58,0±3,0				
104-108		68,0±3,0				

112-116	74,0±3,0			
---------	----------	--	--	--

Таблица 21

Трусики бикини женские

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия в области талии (в растянутом состоянии), см	Схематическое изображение
88-92	40,0±4,0 50,0±5,0	54,0±2,0	
96-100		58,0±3,0	
104-108		68,0±3,0	
112-116		74,0±3,0	

Таблица 22

Шорты процедурные

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина шагового шва, см	Ширина изделия внизу, см	Длина завязок (при наличии), см	Схематическое изображение
88-92	45,0±5,0	60,0±5,0	30,0±5,0	30,0±3,0	не менее 10,0	
96-100		65,0±5,0				
104-108		70,0±5,0				
112-116		75,0±5,0				

Таблица 23

Рубашка для роженицы

Размер	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Длина рукава, см	Ширина рукава внизу, см	Длина завязок (при наличии), см	Схемати- ческое изображе- ние
88-92	110,0±10,0	60,0±5,0	8,0±1,0	21,0±3,0	21,0±3,0	
96-100		64,0±5,0				
104-108		68,0±5,0				
112-116		72,0±5,0				

Таблица 24

Пеленка

Длина пеленки, см	Ширина пеленки, см	Схематическое изображение
60,0±5,0	40,0±4,0 60,0±5,0	
70,0±5,0		
90,0±10,0		

Таблица 25

Пододеяльник			
Длина пододеяльника, см	Ширина пододеяльника, см	Ширина входа в пододеяльник, см	Схематическое изображение
130,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0	30,0±3,0 50,0±5,0	
150,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 140,0±10,0	30,0±3,0 50,0±5,0	
170,0±10,0 190,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0	30,0±3,0 50,0±5,0	
210,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 200,0±10,0	30,0±3,0 50,0±5,0	

Таблица 26

Наволочка		
Длина наволочки, см	Ширина наволочки, см	Схематическое изображение
20,0±2,0	20,0±2,0	
30,0±3,0	20,0±2,0 30,0±3,0	
40,0±4,0	30,0±3,0 40,0±4,0	
50,0±5,0	30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0	
60,0±5,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0	
70,0±5,0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0	
90,0±5,0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0	

Таблица 27

Чехол на матрас с резинкой или без резинки			
Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Ширина стенки изделия, см	Схематическое изображение
130,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0	10,0±1,0 20,0±2,0	
150,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0	30,0±3,0 40,0±4,0	
170,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0	50,0±5,0	
190,0±10,0 210,0±10,0	70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0		

Таблица 28

Чехол на кресло		
Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Схематическое изображение
90,0±5,0	70,0±5,0 90,0±5,0	
110,0±10,0		
130,0±10,0		
150,0±10,0		
170,0±10,0		
190,0±10,0		
210,0±10,0		

Таблица 29

Чехол на наушник (универсальный)

Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Схематическое изображение
от 10,0 до 15,0	от 10,0 до 15,0	

Таблица 30

Подголовник на кресло

Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Схематическое изображение
30,0±3,0	24,0±2,0 28,0±2,0	
32,0±3,0		
40,0±3,0		

Таблица 31

Простыня впитывающая

Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Схематическое изображение
130,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0	
150,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0	
170,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0	
190,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0	
210,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0 190,0±10,0	
230,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0 190,0±10,0 210,0±10,0	
250,0±10,0	40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0 190,0±10,0 210,0±10,0 230,0±10,0 250,0±10,0	

Таблица 32

Пеленка впитывающая

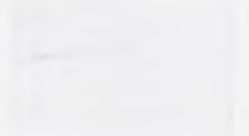
Длина пеленки, см	Ширина пеленки, см	Схематическое изображение
60,0±5,0	40,0±3,0 60,0±5,0	
90,0±5,0	40,0±3,0	
	60,0±5,0 90,0±5,0	

Таблица 33

Салфетка впитывающая

Ширина салфетки, см	Длина салфетки, см	Схематическое изображение
от 10,0 до 100,0	от 10,0 до 100,0	

Таблица 34

Салфетка-нагрудник

Ширина салфетки, см	Длина салфетки, см	Длина лямок, см	Схематическое изображение
50,0±5,0	50,0±5,0	не менее 30,0	
70,0±5,0	50,0±5,0 70,0±5,0		

Таблица 35

Полотенце впитывающее

Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Схематическое изображение
30,0±3,0	25,0±2,0 30,0±3,0	
40,0±4,0	25,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0	
50,0±5,0	25,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0	
60,0±5,0	25,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0	
70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0	25,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0	

Таблица 36

Чехол для инструментального стола

Длина чехла, см	Ширина чехла, см	Длина впитывающей вставки, см	Ширина впитывающей вставки, см	Длина завязок (при наличии), см	Схематическое изображение
90,0±5,0	50,0±5,0	70,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0	не менее 30,0	
	70,0±5,0	90,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0		
	90,0±5,0		30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0		
110,0±10,0	50,0±5,0	70,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0		
	70,0±5,0	90,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0		

		110,0±10,0	70,0±5,0		
	90,0±5,0		30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0		
	110,0±10,0		30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0		
130,0±10,0	50,0±5,0	70,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0		
150,0±10,0	70,0±5,0	90,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0		
		110,0±10,0	70,0±5,0		
	90,0±5,0		30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0		
	110,0±10,0		30,0±3,0 50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0		

2.4. Состав изделий

2.4.1. Для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья используются материалы, имеющие сертификаты качества, прошедшие входной контроль на предприятии-изготовителе, обладающие высокими барьерными свойствами для проникновения микроорганизмов (бактериальная проницаемость не более 3-5%), и отвечающие таким требованиям, как воздухопроницаемость, сочетание прочности и тонкости материала, устойчивость на разрыв, высокая сопротивляемость влаге, мягкость при касании, приятный контакт с телом и отсутствие побочных эффектов (раздражение, потертости, опрелости, аллергические реакции и пр.), хорошая драпируемость (способность собираться в складки).

2.4.2. Комплекты и отдельные изделия должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 37. Изделия выпускаются окрашенными или неокрашенными.

Таблица 37

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд), плотность 17±3 г/м ²	ООО «Завод Эластик», Россия ТУ 8390-010-74582615-2009	– Шапочка «Берет», – Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная)
2. Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд), плотность 30±5 г/м ²	ООО «Завод Эластик», Россия ТУ 8390-010-74582615-2009	– Халат медицинский, – Халат процедурный, – Костюм медицинский (рубашка и брюки), – Комбинезон, – Фартук, – Наручники, – Накладка для пациента, – Бахилы низкие из нетканого материала, – Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках, – Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала, – Шапочка «Колпак», – Простыня медицинская, – Салфетка медицинская, – Брюки процедурные для пациента, – Трусики процедурные женские, – Трусики бикини женские, – Шорты процедурные, – Рубашка для роженицы,

		- Пеленка, - Пододеяльник, - Наволочка, - Чехол на матрас с резинкой, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Салфетка-нагрудник, - Чехол на инструментальный стол.
3. Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд), плотность $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ООО «Завод Эластик», Россия ТУ 8390-010-74582615-2009	- Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка и брюки), - Комбинезон, - Фартук, - Нарукавники, - Накидка для пациента, - Бахилы высокие из нетканого материала, на завязках, - Шапочка «Колпак», - Простыня медицинская, - Салфетка медицинская, - Брюки процедурные для пациента, - Трусики процедурные женские, - Шорты процедурные, - Рубашка для роженицы, - Пеленка, - Пододеяльник, - Наволочка, - Чехол на матрас без резинки, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Салфетка-нагрудник, - Чехол на инструментальный стол.
4. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность $17 \pm 3 \text{ г/м}^2$	ООО «Авгол Рос», Россия ТУ 8390-001-77056896-2008	- Шапочка «Берет»,
5. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность $30 \pm 5 \text{ г/м}^2$	ООО «Авгол Рос», Россия ТУ 8390-001-77056896-2008	- Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка), - Комбинезон
6. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ООО «Авгол Рос», Россия ТУ 8390-001-77056896-2008	- Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка и брюки), - Комбинезон, - Фартук, - Нарукавники, - Накидка для пациента, - Бахилы высокие из нетканого материала, на завязках, - Шапочка «Колпак», - Тапочки процедурные; - Простыня медицинская, - Салфетка медицинская, - Брюки процедурные для пациента,

		- Трусики процедурные женские, - Шорты процедурные, - Рубашка для роженицы, - Пеленка, - Пододеяльник, - Наволочка, - Чехол на матрас с резинкой или без резинки, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Салфетка-нагрудник, - Чехол на инструментальный стол.
7. Спанлейс (материал нетканый) плотность $40 \pm 5 \text{ г/м}^2$	ООО «Авангард», Россия ТУ 8390-003-56176857-2007	- Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка и брюки), - Комбинезон, - Накидка для пациента, - Тапочки процедурные, - Шапочка «Берет», - Шапочка «Колпак», - Простыня медицинская, - Салфетка медицинская, - Брюки процедурные для пациента, - Трусики процедурные женские, - Шорты процедурные, - Рубашка для роженицы, - Пеленка, - Пододеяльник, - Наволочка, - Чехол на матрас без резинки, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Простыня впитывающая, - Пеленка впитывающая, - Салфетка впитывающая, - Салфетка-нагрудник, - Полотенце впитывающее, - Чехол на инструментальный стол.
8. Пленка полиэтиленовая, толщиной $25 \pm 5 \text{ мкм}$	ЗАО «ПолиМакс», Россия ТУ 2245-030-18425183-2010	- Бахилы низкие полиэтиленовые; - Нарукавники.
9. Молния пластмассовая	ООО «Велл Трейд», Россия ГОСТ 15470	Фиксирующий элемент (молния): - Комбинезон.
10. Фиксирующая резинка	ООО «ФИ-ТЕКС» по ТУ 8151-001-59722763-2004	- Фиксирующий элемент (резинка): - Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка и брюки), - Комбинезон, - Нарукавники, - Бахилы низкие из нетканого материала, - Бахилы низкие полиэтиленовые, - Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках, - Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала, - Шапочка «Берет»,

		- Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная, - Брюки процедурные для пациента, - Трусики процедурные женские, - Трусики бикини женские, - Шорты процедурные, - Чехол на матрас с резинкой, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Чехол на инструментальный стол.
11. Застежка «Контакт» из текстильных и полимерных материалов	ООО «АПИА», Россия ГОСТ 15470	- Фиксирующий элемент (липучка): - Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка), - Комбинезон.
12. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ООО «Арго ДС», Россия ГОСТ 6309	- Халат медицинский, - Халат процедурный, - Костюм медицинский (рубашка и брюки), - Комбинезон, - Фартук, - Наручники, - Накидка для пациента, - Бахилы низкие из нетканого материала, - Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках, - Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала, - Тапочки процедурные, - Шапочка «Берет», - Шапочка «Колпак», - Простыня медицинская, - Салфетка медицинская, - Брюки процедурные для пациента, - Трусики процедурные женские, - Трусики бикини женские, - Шорты процедурные, - Рубашка для роженицы, - Пеленка, - Пододеяльник, - Наволочка, - Чехол на матрас с резинкой или без резинки, - Чехол на кресло, - Чехол на наушник, - Подголовник на кресло, - Салфетка-нагрудник, - Чехол на инструментальный стол
13. Проволока	«PHARMAPIA INTERNATIONAL LTD», Китай	Фиксатор: Маска медицинская на резинке, двухслойная или трехслойная
14. Мельтблаун (нетканый материал Мельтблаун), плотность 17±3 г/м²	фирма «PHARMAPIA INTERNATIONAL LTD», Китай	Внутренний слой: Маска медицинская на резинке трехслойная
15. Краситель (каталожный номер MP67245C)	«Tosaf Compounds Ltd», Израиль	Для изделий, выполненных из окрашенных материалов

2.4.3. Описание материалов по сырьевому составу, из которых изготавливаются изделия собственного производства, приведено в таблице 38.

Таблица 38

Наименование материала	Описание материала/состав
1	2
Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд)	Нетканый материал на основе полипропилена. Состав: 100% полипропилен
СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»)	Изготовлен из трехслойного водоотталкивающего нетканого материала на основе полипропилена. Состоит на 100% полипропиленовых волокон: между двумя слоями спанбонда (S) находится прослойка из мелтблауна.
Спанлейс (материал нетканый Спанлейс)	Нетканый материал, состоящий из вискозных (70-80%) и полиэфирных волокон (20-30%)
Пленка ПЭ,	Состав: 100% полиэтилен, марка РЕ6FE68
Мельтблаун	Нетканый материал на основе полипропилена. Состав: 100% полипропилен
Полотно трикотажное из хлопчатобумажной пряжи	Изготовлено из пряжи и нитей из натуральных и химических волокон и их различных сочетаний.
Молния пластмассовая, тип 5	Молния представляет собой изделие из двух тканых лент со звеньями, соединяемыми при движении замка. Звенья-молнии изготовлены из пластмассы. Состав: лента тканая – 100% полиэфир, звенья молнии – полиэфир марки ПЭТФ
Фиксирующая резинка	Состав: хлопок 100% и латекс, марка СКС-50
Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	Состав хлопчатобумажных ниток: хлопок. Состав синтетических ниток: полиамид; полиэфир
Застежка «Контакт» из текстильных и полимерных материалов	Состоит из двух текстильных лент, лицевая сторона одной из которых покрыта петлями из полиамидных монопнитей, а лицевая сторона второй – с крючками (лента петельная и лента крючковая). При соединении двух лент крючки входят в петли, и происходит быстрое и прочное сцепление элементов изделия.
Проволока	Состав: 100% алюминий

2.4.4. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 39.

Таблица 39.

Наименование материала.	Поверх- ностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водо- упор- ность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в про- дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении	в про- дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Нетканый материал (СМС (спан-мелът-спан), Спанлейс, Спанбонд,)	15,0	2,0	1,5	1,8	1,2	-
	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	55,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
2. Маска медицинская двухслойная	30,0	4,0	—	3,5	—	—
3. Маска медицинская трехслойная	40,0	4,5	—	4,0	—	—
4. Пеленка впитывающая (покровный слой)	—	2,0	1,5	2,0	1,5	—
6. Полиэтиленовая пленка	20,0	3,0	2,0	-	-	500,0

2.4.4.1. Поглощительная способность при одностороннем и ограниченном контакте с жидкостью простыни впитывающей, пеленки впитывающей; салфетки впитывающей и полотенца впитывающего должна быть не менее 5 г/г.

2.4.4.2. Скорость смачивания простыни впитывающей, пеленки впитывающей, салфетки впитывающей и полотенца впитывающего должна быть не более 10 с.

2.4.4.3. Паропроницаемость маски медицинской однослойной, двухслойной или трехслойной должна быть не менее 4,5 мг/см² х час

2.4.4.4. Обратная сорбция для простыни впитывающей, пеленки впитывающей; салфетки впитывающей и полотенца впитывающего должна быть не более 5 г.

2.4.5. Масса изделий в комплектах и отдельных упаковках должны соответствовать параметрам, указанным в таблицах 40 - 41.

Таблица 40.

Масса изделий в комплектах

№	Наименование изделия	Масса, г
1	2	3
1	Комплект одежды медицинской для персонала одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
2	Комплект одежды медицинской для пациента одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
3	Комплект одежды для медицинской сестры одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
4	Комплект одежды медицинской для персонала №1 одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
5	Комплект белья медицинского одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
6	Комплект одежды и белья медицинские для предоперационной, одноразовый, нестерильный	от 200,0 до 2000,0
7	Комплект одежды медицинской для пациента №1 одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
8	Комплект одежды медицинской для партнерских родов одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
9	Комплект медицинский для косметологии одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0
10	Комплект белья медицинского для стоматологии одноразовый нестерильный	от 200,0 до 2000,0

Таблица 41

Масса изделий в отдельных упаковках

№	Наименование изделия	Масса, г
1	2	3
1	Халат медицинский	от 50,0 до 300,0
2	Халат процедурный	от 45,0 до 300,0
3	Костюм медицинский (рубашка и брюки)	от 120,0 до 350,0
4	Комбинезон	от 160,0 до 350,0
5	Фартук	от 25,0 до 200,0
6	Нарукавники	от 10,0 до 50,0
7	Накидка для пациента	от 30,0 до 200,0
8	Бахилы низкие из нетканого материала	от 6,0 до 25,0
9	Бахилы низкие полиэтиленовые	от 4,0 до 20,0
10	Бахилы высокие из нетканого материала, на резинках или завязках	от 8,0 до 30,0
11	Бахилы на ступню (носки) из нетканого материала	от 4,0 до 20,0
12	Тапочки процедурные	от 8,0 до 70,0
13	Шапочка «Берет»	от 5,0 до 25,0
14	Шапочка «Колпак»	от 5,0 до 25,0
15	Маска медицинская на резинке двухслойная	от 8,0 до 25,0
16	Маска медицинская на резинке трехслойная	от 10,0 до 30,0

17	Простыня медицинская	от 10,0 до 550,0
18	Салфетка медицинская	от 10,0 до 40,0
19	Брюки процедурные для пациента	от 45,0 до 170,0
20	Трусики процедурные женские	от 10,0 до 20,0
21	Трусики бикини женские	от 8,0 до 20,0
22	Шорты процедурные	от 15,0 до 35,0
23	Рубашка для роженицы	от 30,0 до 200,0
24	Пеленка	от 10,0 до 125,0
25	Пододеяльник	от 30,0 до 420,0
26	Наволочка	от 5,0 до 125,0
27	Чехол на матрас с резинкой или без резинки	от 60,0 до 220,0
28	Чехол на кресло	от 10,0 до 450,0
29	Чехол на наушник	от 2,0 до 125,0
30	Подголовник на кресло	от 3,0 до 125,0
31	Простыня впитывающая	от 90,0 до 450,0
32	Пеленка впитывающая	от 15,0 до 255,0
33	Салфетка впитывающая	от 5,0 до 125,0
34	Салфетка-нагрудник	от 5,0 до 200,0
35	Полотенце впитывающее	от 15,0 до 255,0
37	Чехол на инструментальный стол	от 90,0 до 220,0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят изделия в комплектах, указанные в п. 2.2.1 и в отдельных упаковках, указанные в п. 2.2.2.

Примечания:

–допускается, по согласованию с заказчиком, изменять количество изделий, входящих в состав Комплектов;

–допускается, по согласованию с заказчиком, изменять состав изделий в Комплектах;

–допускается, по согласованию с заказчиком, поставка Комплектов по составу и количеству входящих в него изделий, выполненных по спецификации заказчика;

–допускается, по согласованию с заказчиком, поставка изделий отдельными упаковками по количеству, входящих в неё изделий, выполненных по спецификации заказчика.

4. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные предназначены для замены хлопчатобумажных одежды и белья, используемых в медицинских целях, и, как следствие, профилактики внутрибольничных инфекций и снижения профессиональных заболеваний медицинских работников.

Противопоказаний не выявлено.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Достать комплект из индивидуальной упаковки, развернуть и использовать по назначению.

5.2. Медицинские изделия предназначены для одноразового применения. Повторное использование запрещено.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Каждая потребительская упаковка должна быть снабжена товарной этикеткой, на которой печатным способом должно быть указано:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- обозначение технических условий;

- наименование изделия, размеры изделия с указанием материалов и количеством изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- наименование комплекта, состав комплекта, размеры изделий с указанием материалов, входящих в комплект и количеством изделий (для изделий в комплектах);
- назначение;
- надпись «нестерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- надпись о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары;
- номер партии;
- слова «годен до...» (месяц и год);
- условия хранения;
- условия утилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- штрих-код (при наличии).

Примечание

Допускается наносить на упаковку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

6.2. На групповой таре изделий типографским способом должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);
- наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);
- количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- надпись «нестерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и две последние цифры года);
- годен до (месяц и две последние цифры года);
- условия хранения;
- масса брутто;
- штамп ОТК.

6.3. На упаковочном листе, вложенном в каждую транспортную тару должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, адрес;
- наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);
- наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);
- количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- номер и фамилия упаковщика и дата упаковывания.

6.4. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На поверхности транспортной тары должны быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

7. УПАКОВКА

7.1. Изделия должны быть упакованы в потребительскую упаковку, представляющую собой герметичные полиэтиленовые пакеты, выполненные из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354, толщиной не менее 40 мкм.

7.2. Потребительские упаковки должны быть уложены в групповую упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

7.3. Групповые упаковки должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или по ГОСТ Р 54463. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Примечание:

1. *Допускается в транспортную упаковку укладывать изделия в потребительских упаковках.*

2. *Допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки изделий другие виды материалов, обеспечивающих их сохранность и разрешенных к применению в установленном порядке.*

7.4. Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки по группе 5 ГОСТ 15150. При транспортировании изделий следует обеспечивать их защиту от загрязнений, атмосферных осадков и механических повреждений.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Одноразовая медицинская одежда и белье должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых). В отделениях должен храниться суточный запас чистого белья в отдельных помещениях или в отдельных местах на постах медсестер и других помещениях с чистым режимом при наличии специально выделенных для этой цели шкафов. Белье и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированного белья не допускается.

9.2. Средний срок годности изделий 5 лет с даты изготовления. Критерии предельного состояния – несоответствие требованиям п. 2.4.4. таблица 39 (разрывная нагрузка в сухом и во влажном состоянии в продольном и поперечном направлениях; водоупорность); п.п. 2.4.4.1-2.4.4.3; повреждение индивидуальной упаковки.

9.3. Использованная одноразовая медицинская одежда и белье собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную грязную бельевую. Все процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой одноразовой одежды, должны быть максимально механизированы.

Временное хранение (не более 12 часов) использованной одноразовой медицинской одежды и белья грязного белья в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции).

Для работы с использованной одноразовой медицинской одеждой и бельем персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, шапочка или косынка, перчатки, маска).

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, не загрязненные биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, загрязненные биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), должны подвергаться обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях, или в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. После дезинфекции или стерилизации использованные одноразовые одежда и белье должны собираться в биксы или в камерные мешки. Продезинфицированные одежда и белье должны упаковываться в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожаются на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе обезвреживания производится в печах мусоросжигательных заводов.



Внимание!

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Одежды и белья медицинских одноразовых нестерильных в комплектах и отдельных упаковках требованиям ТУ 9398-001-14948607-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и использования. Гарантийный срок годности – 36 месяцев со дня изготовления.

Сержант 31 / 10 / 2017
Сержант 31 / 10 / 2017



Средства и материалы
для оказания
первой помощи

