

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20 ____ г. № _____

Директор НИИГБ РАМН



Аветисов С.Э.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ

6. НАЗНАЧЕНИЕ
7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Мягкие контактные линзы применяются для коррекции зрения строго по медицинским показаниям, в том числе:

- для коррекции миопии и гиперметропии высокой степени;
- для коррекции врожденной миопии и гиперметропии у детей и подростков;
- коррекции зрения детей первых месяцев жизни после удаления

врожденной катаракты.

Мягкие контактные линзы применяются также с бандажной и терапевтической целью при различных заболеваниях роговицы.

Линзы подбираются врачом – специалистом по контактной коррекции зрения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкие контактные линзы изготавливаются из заготовок полимерного гидрофильного материала Vistagel plus Hydrophilic марки VSO68 (влагосодержание 68%) и марки VSO42 (влагосодержание 42%) производства фирмы Vista Optics Lim., Англия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Основными медицинскими противопоказаниями являются воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, аллергические реакции, синдром «сухого глаза», непроходимость слезных путей и др. Из общих заболеваний – психические расстройства.

Вопрос о назначении линз решает врач – специалист по контактной коррекции.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использовать линзу, изготовленную для пациента в соответствии с параметрами, заданными врачом, можно только после прохождения обучения в подразделениях контактной коррекции зрения.

Длительность ежедневного использования линз определяется индивидуально в процессе обучения пациента с учетом рекомендаций врача.

Вопрос использования контактных линз одновременно с применением каких-либо лекарственных препаратов необходимо согласовывать с врачом – специалистом по контактной коррекции зрения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После каждого применения линзы необходимо обрабатывать средствами для ухода и хранения мягких контактных линз, разрешенными к применению в установленном порядке и рекомендованными врачом – специалистом по контактной коррекции (Например, ОПТИ – ФРИ экспресс” фирмы Alcon, рег.уд. № ФСЗ 2009/03920 ; “RENU MultiPlus” фирмы Bausch & Lomb, рег. уд. № ФСЗ 2007/00771) и др.

Не разрешается использование средств, приобретенных вне аптечной сети.