

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200 г. № _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИГБ РАМН

Аветисов С.Э.

«17» 09 2009 г.

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ЖЕСТКИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Жесткие газопроницаемые контактные линзы применяются для коррекции зрения строго по медицинским показаниям.

Линзы подбираются врачом – специалистом по контактной коррекции зрения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткие газопроницаемые контактные линзы выпускаются трех типов:

ГЖКЛ (I) – осесимметричные линзы;

ГЖКЛ (II) – кератоконусная линза;

ГЖКЛ (III) – сфероторическая линза.

Линзы изготавливаются из заготовок жесткого газопроницаемого полимерного материала “Add Value F 100” производства фирмы Vista Optics Limited (Англия)

Линзы выпускаются в пластиковых контейнерах с маркировкой на крышке «R» или «L» («правая» или «левая» линза).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Основными медицинскими противопоказаниями являются воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, аллергические реакции, синдром «сухого глаза», непроходимость слезных путей и др. Из общих заболеваний – психические расстройства.

Вопрос о назначении линз решает врач – специалист по контактной коррекции.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использовать линзу, изготовленную для пациента в соответствии с параметрами, заданными врачом, можно только после прохождения обучения в подразделениях контактной коррекции зрения.

Вопрос использования контактных линз одновременно с применением каких-либо лекарственных препаратов необходимо согласовывать с врачом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После каждого применения линзы необходимо обрабатывать средствами для ухода и хранения жестких газопроницаемых контактных линз “Delta” и “Delta-plus” производства фирмы “Sauflon Pharmaceuticals Ltd.”, England или иными средствами, разрешенными к применению в установленном порядке и рекомендованными врачом – специалистом по контактной коррекции.

Всего пронумеровано прошнуровано
и скреплено печатью 2
два лист(-а;ов)



г. Мухомовская