

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Р.У. Хабриев

« 13 » 12 2006 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСИТЕЛЯ-ФИКСАТОРА ЭОЗИНА
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО ТИПА ЛЕЙШМАНА
(МиниМед-Л)**

Рекомендована к утверждению Научно-экспертным Советом
по медицинским изделиям.

Назначение

Краситель-фиксатор МиниМед-Л предназначен для фиксации и окраски
форменных элементов крови в клинико-диагностических и биохимических
лабораториях.

1 л красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию 1000 мазков крови и на
фиксацию с окраской от 450 до 1000 мазков.

Принцип метода

Метод фиксации основан на фиксации форменных элементов крови, ко-
торая, вызывая коагуляцию белка, приводит к прикреплению препарата к
стеклу.

Метод окрашивания основан на том, что в результате взаимодействия с
красителем-фиксатором форменные элементы крови приобретают
специфическую окраску и это позволяет произвести подсчет их количества.

Состав красителя-фиксатора

0,20% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий типа
Лейшмана в метаноле – 11 бутылок (по 1 л).

Меры предосторожности

Потенциальный риск применения красителя-фиксатора – класс 3.

В состав красителя-фиксатора входит метанол-яд, класс опасности III,
токсичен при ингаляции, контакте с кожными покровами и особенно при
попадании внутрь. Огнеопасен. Концентрация паров метанола в помещении
при использовании красителя не должна превышать ПДК = 5 мг/м³.

Инструкция составлена заведующим химической лабораторией
ООО «МиниМед» В.А. Бабичем.

