

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Набора реагентов**  
**"Калия теллурид, раствор 2%"**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Используют в качестве супплемента при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий.

**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ**

Раствор калия теллурида оказывает бактерицидное действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к калию теллуриду бактерии образуют окрашенный в черный цвет осадок (теллур).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

В асептических условиях вскрыть флакон с реагентом. Реагент набрать стерильной пипеткой и внести в питательную среду в соответствии с ее прописью.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

10 ампул (по 5 мл) с инструкцией по применению в групповой упаковке.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

**Хранение**

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 18 до 25 °С в течение всего срока годности. Замораживание не допускается.

**Транспортирование**

*Handwritten signature and date: 16.1*

Транспортирование - всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре до 25 °С. Замораживание не допускается.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности реагента – 2 года. Реагент с истекшим сроком годности применению не подлежит.

### Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4.

Т/ф (4832) 41-63-56, 69-10-71, 92-97-97, 92-97-01.

По вопросам, касающимся качества изделия, следует обращаться по адресу: ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер.

Комсомольский, 4 и в Институт контроля лекарственных средств ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а,

тел. (495) 120-60-96.

Начальник ОТК ООО "МиниМед"  
«26» *декабрь* 2008г.



Захаров А.Н.



*hls* 20.11.11