

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Р.У. Хабриев
« 22 » 2006 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСИТЕЛЯ-ФИКСАТОРА ЭОЗИНА
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО ПО МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ
(МиниМед-М-Г)**

Рекомендована к утверждению Научно-экспертным Советом по медицинским изделиям.

Назначение

Краситель-фиксатор МиниМед-М-Г предназначен для фиксации и окраски форменных элементов крови в клинично-диагностических и биохимических лабораториях.

1 л красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию 1000 мазков крови и на фиксацию с окраской от 450 до 1000 мазков.

Принцип метода

Метод фиксации основан на фиксации форменных элементов крови, которая, вызывая коагуляцию белка, приводит к прикреплению препарата к стеклу.

Метод окрашивания основан на том, что в результате взаимодействия с красителем-фиксатором форменные элементы крови приобретают специфическую окраску и это позволяет произвести подсчет их количества.

Состав красителя-фиксатора

0,25% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле – 11 бутылок (по 1 л).

Меры предосторожности

Потенциальный риск применения красителя-фиксатора – класс 3.

В состав красителя-фиксатора входит метанол-яд, класс опасности III, токсичен при ингаляции, контакте с кожными покровами и особенно при попадании внутрь. Огнеопасен. Концентрация паров метанола в помещении при использовании красителя не должна превышать ПДК = 5 мг/м³.

Инструкция составлена заведующим химической лабораторией
ООО «МиниМед» В.А. Бабиным.

