

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ДЕНТИС»

С.В. Новиков

2015 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НММ.01.00.00РЭ

Мебель медицинская

по ТУ 9452 - 003- 14967361 – 2015

2015 г.

Содержание

I. Описание и работа:	
1.1. Назначение изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.3
1.3. Состав изделия.....	стр.20
1.4. Устройство и работа.....	стр.24
1.5. Маркировка.....	стр.27
1.6. Упаковка.....	стр.28
II. Показания к применению.....	стр.29
III. Противопоказания к применению.....	стр.29
IV. Использование по назначению.....	стр.29
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.29
4.2. Подготовка изделия к работе.....	стр.30
4.3. Использование изделия.....	стр.30
V. Техническое обслуживание.....	стр.30
VI. Хранение:	стр.30
6.1. Условия хранения.....	стр.30
6.2. Гарантийные сроки хранения.....	стр.30
VII. Транспортирование.....	стр.31
VIII. Утилизация.....	стр.31
IX. Контактные данные производителя.....	стр.31
X. Лист регистрации изменений.....	стр.32

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на мебель медицинскую (далее - мебель), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

I. Описание и работа:

1.1. Назначение изделия.

Мебель медицинская предназначена для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

Область распространения: широкого применения.

1.2. Технические характеристики.

Мебель представляет собой группу однородной продукции: отдельные изделия мебели объединенные общим функциональным назначением.

Виды мебели:

Мебель по эксплуатационному назначению: мебель медицинская

Мебель по функциональному назначению: мебель для хранения

Мебель по конструктивным признакам: мебель неразборная

Мебель по технологии изготовления и материалам: мебель металлическая.

В группу мебельных изделий входят:

1) столы рабочие: арт.СРТ1Т, СРТ2РМ, СРТ2Т, СРТ2Тут, СРТГ, СРТВ, арт.СРВМ.

Габаритные размеры столов: СРТ1Т, СРТ2РМ, СРТ2Т, СРТ2Тут, СРТГ, СРТВ, СРВМ представлены на рис.1 – 7 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 1.

Масса – таблица № 9.

2)столики подкатные: арт. СПп-2, СПпв-2.

Габаритные размеры: СПп, СПпв-2 представлены на рис.8 – 9 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 2.

Масса – таблица № 9.

3) шкафы с распашными дверями: арт. ШМВ, ШМР-1, ШМР-2.

Габаритные размеры: ШМВ, ШМР-1, ШМР-2 представлены на рис.10 – 12 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 3.

Масса – таблица № 9.

4) шкафы комбинированные: арт. ШМРВ, ШМХСИ.

Габаритные размеры: ШМРВ, ШМХСИ представлены на рис.13, 14 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 4.

Масса – таблица № 9.

5) шкаф для одежды: арт. ШМР.

Габаритные размеры ШМР представлены на рис.15

Функциональные размеры представлены в таблице № 5.

Масса – таблица № 9.

6) шкафы навесные: арт. ШНМ, ШНХСИ.

Габаритные размеры: ШНМ, ШНХСИ представлены на рис.16,17 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 6.

Масса – таблица № 9.

7) тумбы выкатные: арт. ТП-3, ТП-4.

Габаритные размеры: ТП-3, ТП-4 представлены на рис.18, 19 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 7.

Масса – таблица № 9.

8) тумбы: арт. ТРМ-1, ТРМ-2, ТВ-3, ТВ-4, ТВ-5, ТРВ, ТРХСИ.

Габаритные размеры: ТРМ-1, ТРМ-2, ТВ-3, ТВ-4, ТВ-5, ТРВ, ТРХСИ представлены на рис.20– 26 соответственно.

Функциональные размеры представлены в таблице № 8.

Масса – таблица № 9.

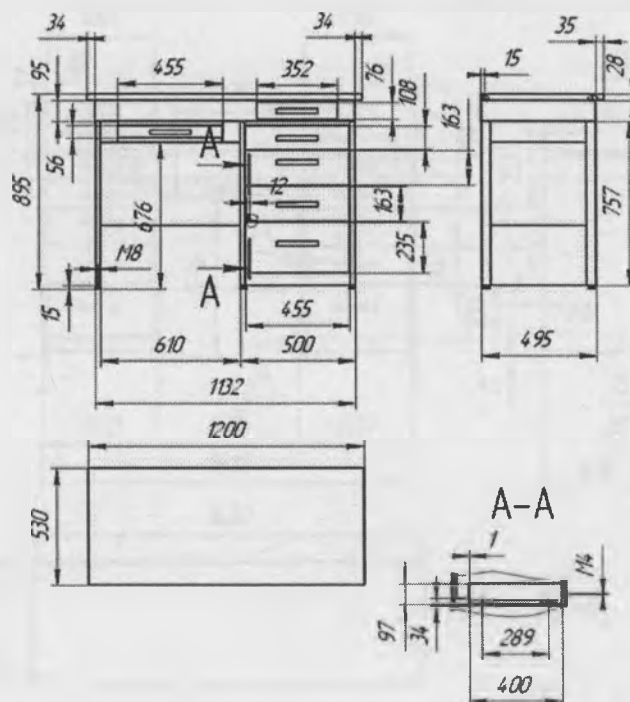


Рис.1. Габаритные размеры: стол рабочий одностумбовый, арт.СРТ1Т

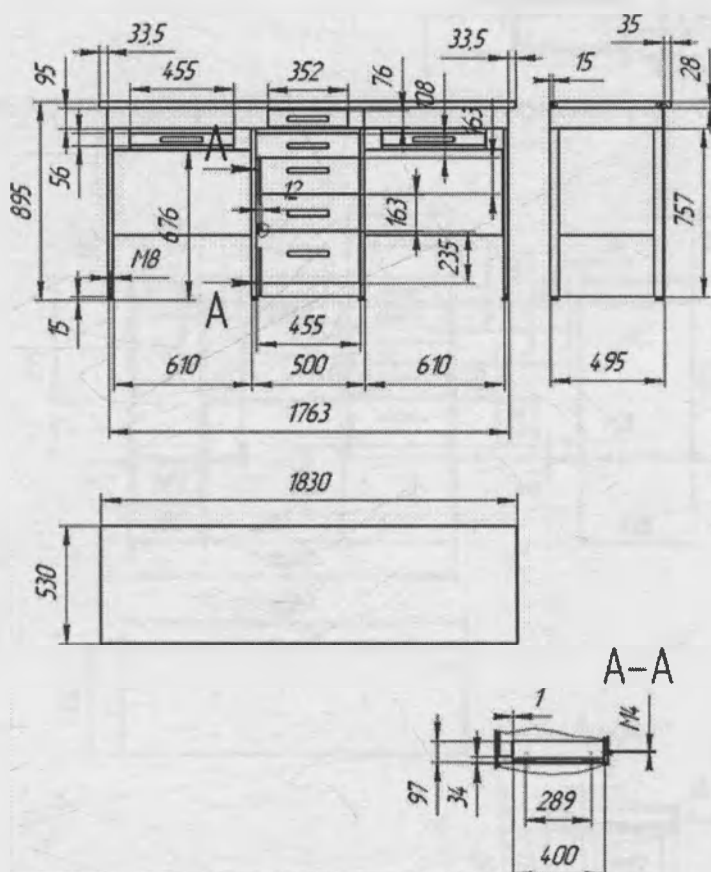


Рис.2. Габаритные размеры: стол рабочий одностумбовый на 2 рабочих места, арт.СРТ2РМ

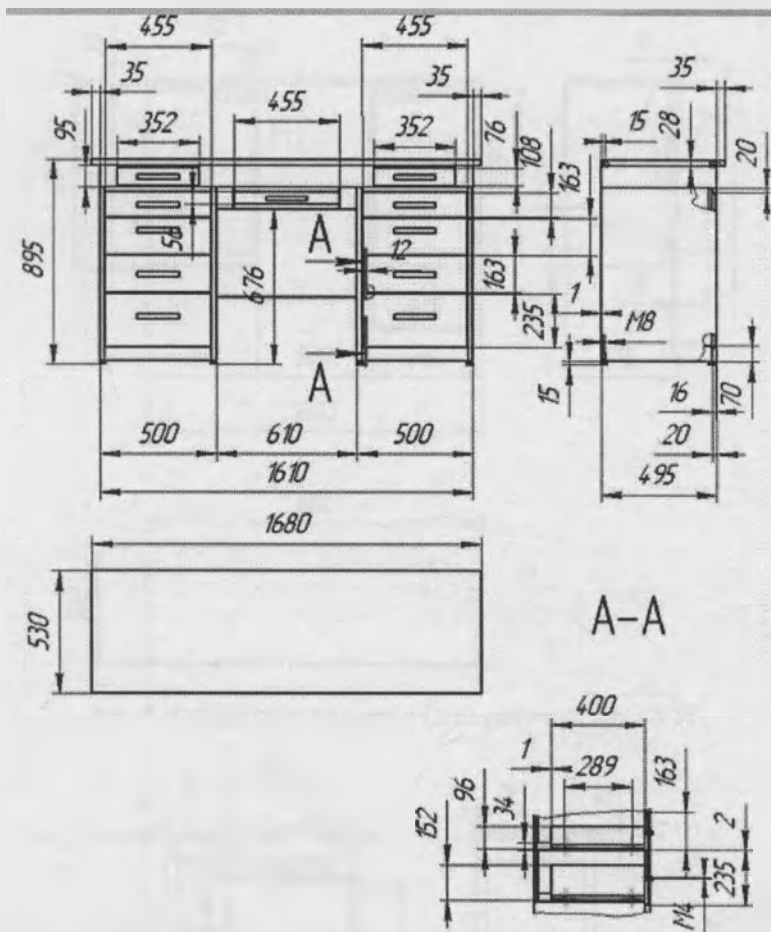


Рис. 3. Габаритные размеры: стол рабочий двухтумбовый, арт. CPT2T

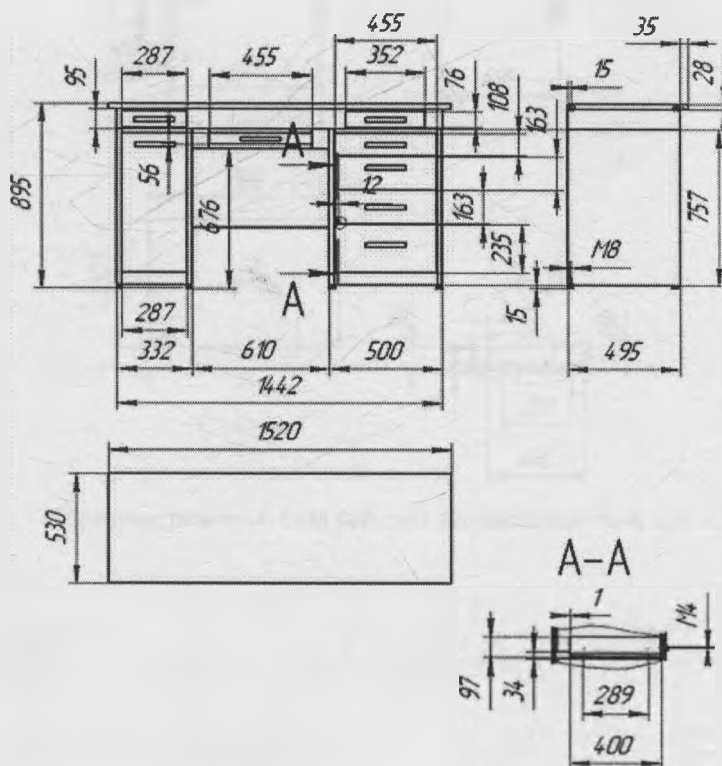


Рис. 4. Габаритные размеры: Стол рабочий двухтумбовый, арт. CPT2Tут

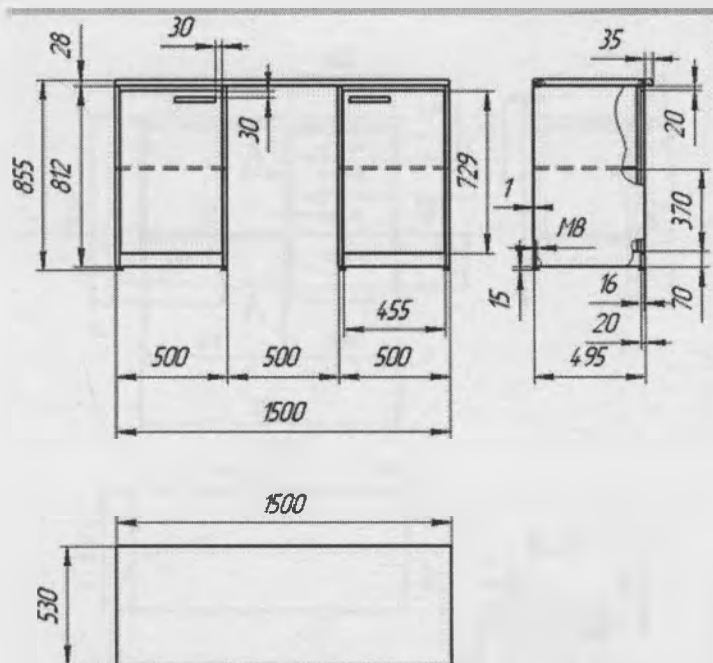


Рис. 5. Габаритные размеры: Стол рабочий, арт.СРТГ

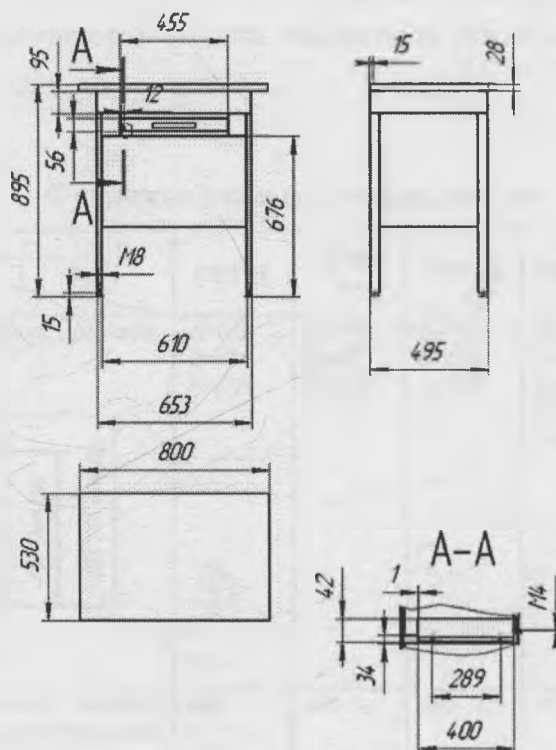


Рис. 6. Габаритные размеры: стол рабочий вспомогательный, арт. СРТВ.

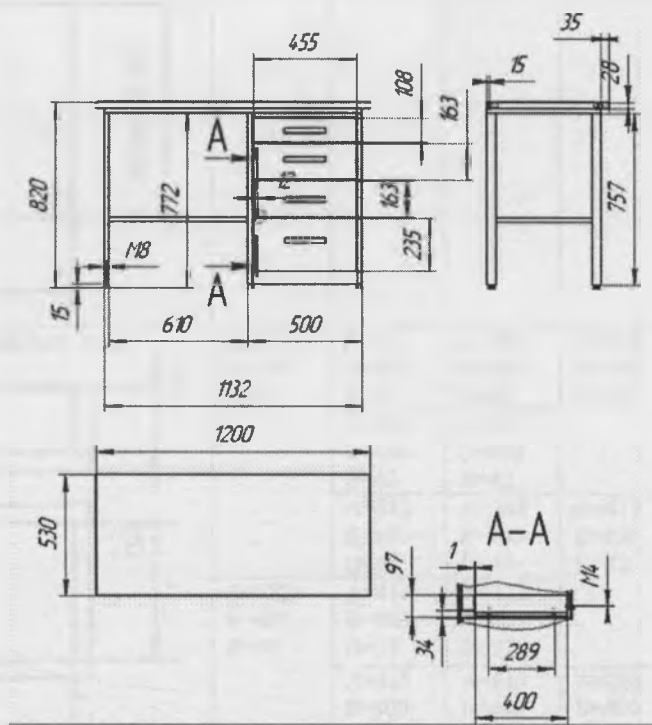
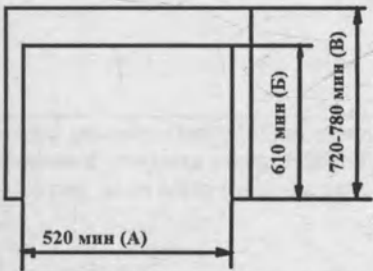
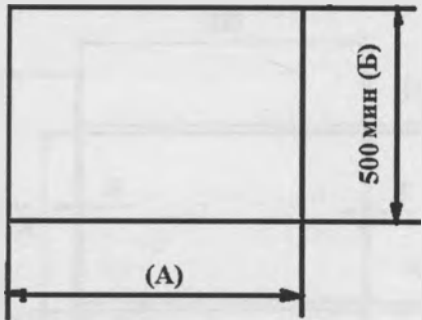
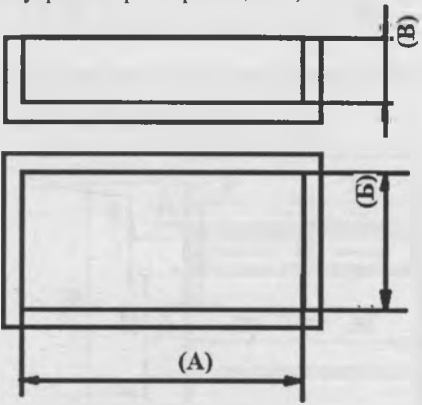


Рис. 7. Габаритные размеры: стол рабочий врача, медсестры, арт.СРВМ

Таблица № 1

Функциональные размеры столов

№ п/ п	Описание	Арт.	СРТ1Т	СРТ2Р М	СРТ2Т	СРТ2Тут	СРТГ	СРТВ	С
1	рис."Общий вид стола спереди", размеры в мм 		A=610 Б=676 В=895	A=610 Б=676 В=895	A=610 Б=676 В=895	A=610 Б=676 В=895	A=500 Б=812 В=855	A=610 Б=676 В=895	A=610 Б=676 В=895
2	Расстояние между передней кромкой крышки стола и ограничивающими элементами и в глубине не должно быть не менее 400 мм		495	495	495	495	495	495	495
3	Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения работ с применением средств орг. техники должно быть не менее 650 мм (если применимо указать)		895	895	895	895	855	895	820
4	Размеры столешницы, в мм		A=1200 Б=530	A=1830 Б=530	A=1680 Б=530	A=1520 Б=530	A=1500 Б=530	A=750* Б=530	A=1200 Б=530

							
Внутренние размеры ящиков, в мм  (сверху - вниз и слева - направо)	A=411 Б=390 В=42 A=282 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=42 A=282 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=282 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=225 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=42 A=282 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=42 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=97 A=413 Б=400 В=152
Размеры полезные(внутренние) каждого отделения в тумбочке стола, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз и/или слева -направо)	-	-	-	272x460x655	440x460x340 440x460x370 440x460x340 440x460x370	-	-

* Размеры столешницы для стола арт. СРТВ отличаются от указанных в ГОСТ 13025.3 - так как данный стол является вспомогательным, что указано в его название.

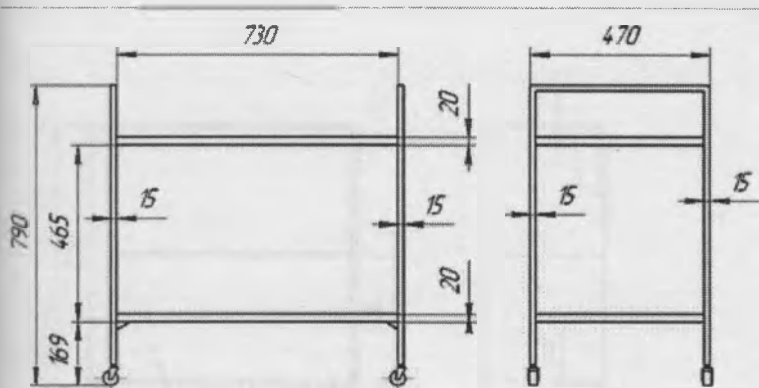


Рис.8. Габаритные размеры: столик подкатной с полками, арт. СПп-2


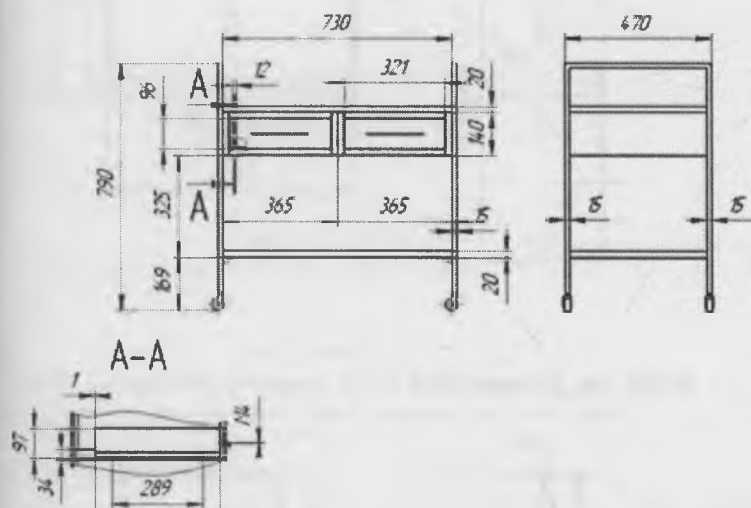


Рис.9. Габаритные размеры: столик подкатной с полками и выдвижными ящиками, арт. СПпв-2

Таблица № 2

Функциональные размеры столов журнальных (подкатных)

Внутренние размеры ящиков, в мм	СПп-2	СПпв-2
(слева направо)	-	A=278 Б=400 В=42
		A=278 Б=400 В=42

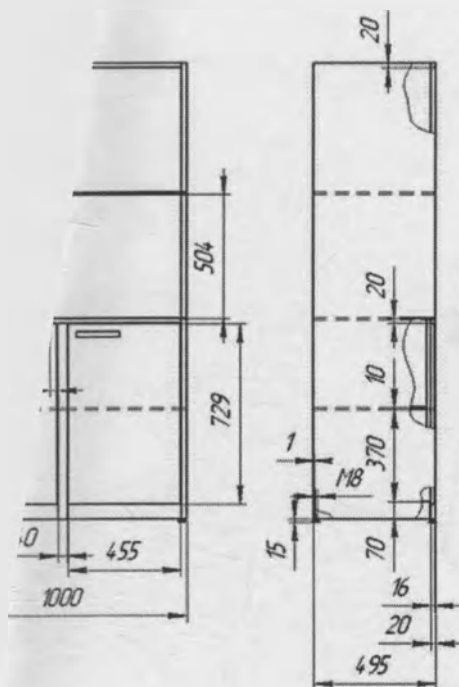

Габаритные размеры: шкаф медицинский, арт. ШМВ

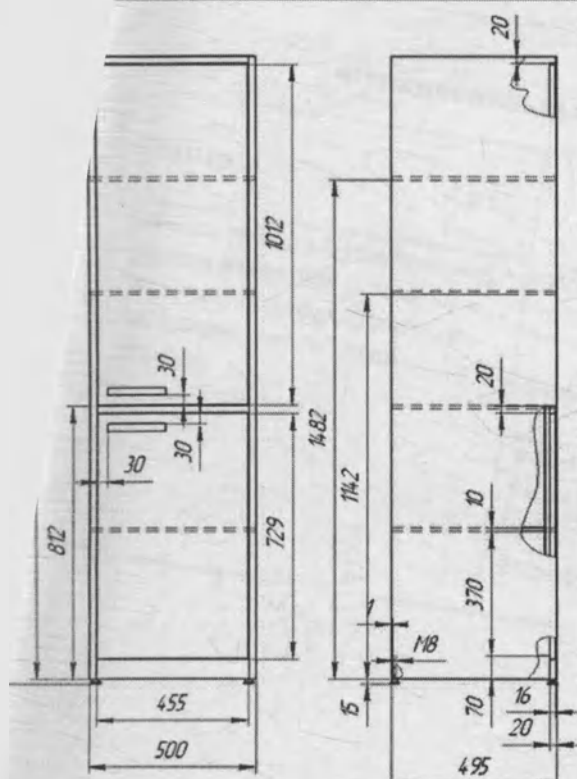


рис. 11. Габаритные размеры: шкаф медицинский одностворчатый с распашными дверьми и полками, арт. IMP-1

арт.

№ 3

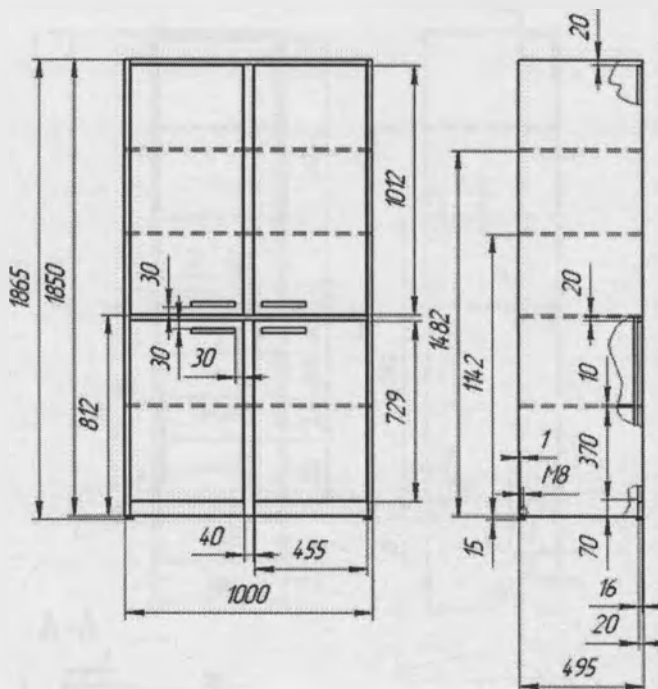


Рис. 12. Габаритные размеры: шкаф медицинский одностворчатый с распашными дверьми и полками, арт. ШМР-2

Таблица № 3

Функциональные размеры шкафов с распашными дверьми

Размеры \ Арт.	ШМВ	ШМР-1	ШМР-2
Размеры полезные (внутренние) каждого отделения (открытых и закрытых) в шкафах, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз и слева - направо)	940x470x490	440x470x330	940x470x330
		440x470x330	940x470x330
	940x470x490	440x470x330	940x470x330
			940x470x340
			940x470x370
	940x470x340	440x470x340	940x470x330
	940x470x370		940x470x330
	940x470x340	440x470x370	940x470x330
	940x470x370		940x470x340
			940x470x370

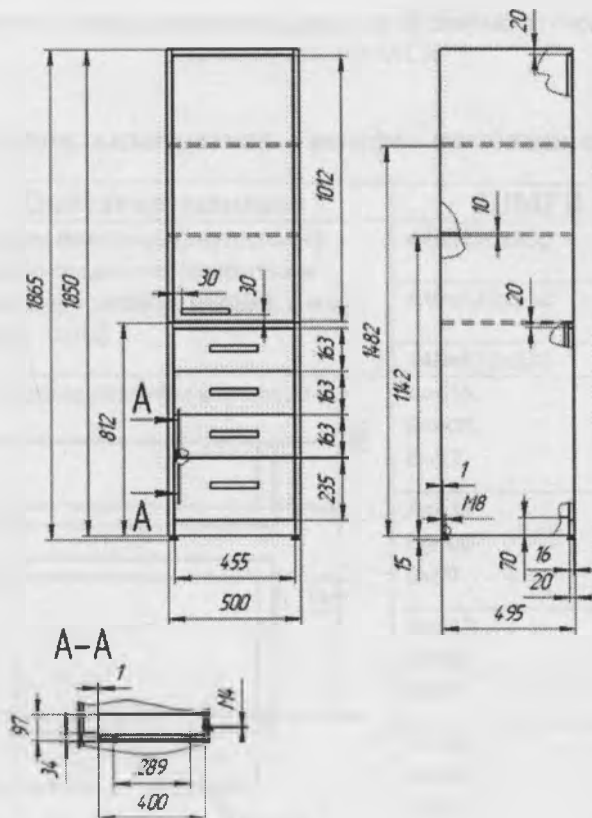


Рис. 13. Габаритные размеры: шкаф медицинский с распашными дверьми, полками и выдвижными ящиками, арт. ШМПВ

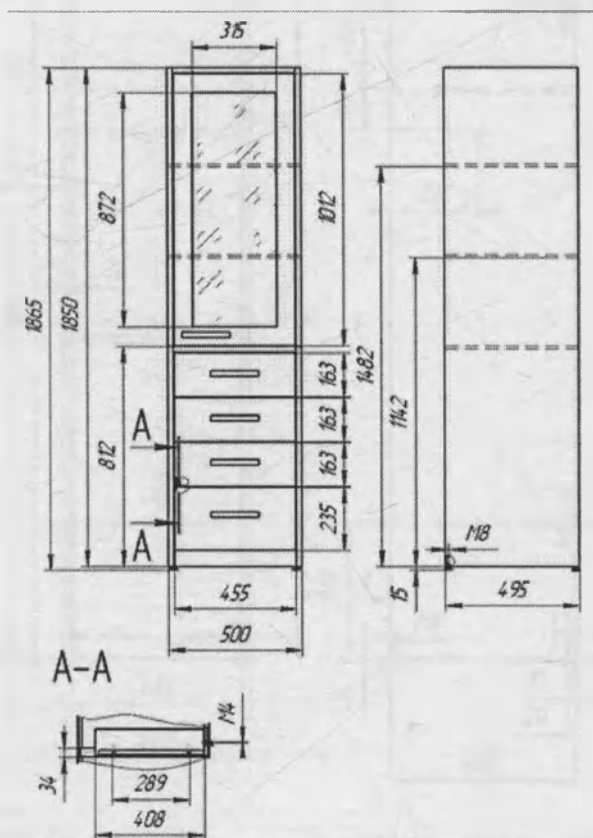
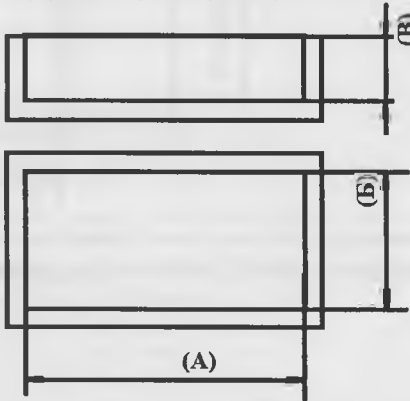


Рис.14. Габаритные размеры: шкаф медицинский с распашной дверью из стекла, полками, выдвижными ящиками, арт. ШМХСИ

Таблица № 4

Функциональные размеры шкафов комбинированных

№ п/п	Описание размеров	ШМРВ	ШМХСИ
1	Размеры полезные (внутренние) каждого отделения (открытых и закрытых) в шкафах, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз)	440х470х330	440х470х330
		440х470х330	440х470х330
		440х470х330	440х470х330
2	Внутренние размеры ящиков, в мм  (сверху -вниз и слева -направо)	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=97
		A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=97
		A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=97
		A=413 Б=400 В=150	A=413 Б=400 В=97

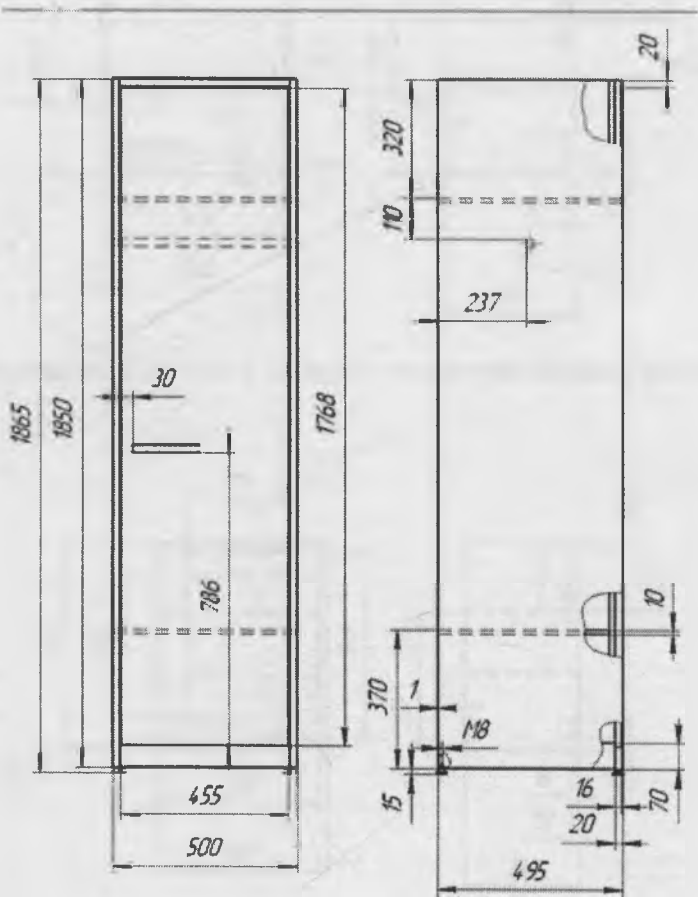
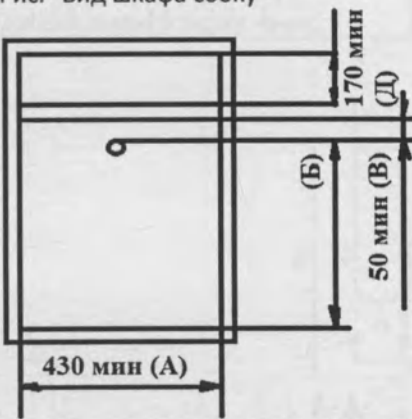


Рис.15. Габаритные размеры: шкаф с полкой и перекладиной для вешалок, арт. ШМР

Таблица № 5

Функциональные размеры шкафа для одежды

№ п/п	Описание размеров	ШМР
1	Размеры шкафа для одежды, в мм Рис. "Вид шкафа сбоку" 	A=440 Б=1150 В=110 Д=320
2	Размеры полезные (внутренние) каждого отделения (открытых и закрытых) в шкафах, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз)	440x470x320 440x470x370

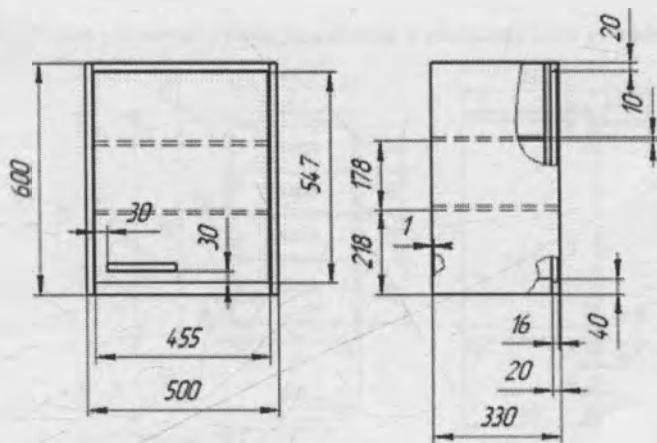


Рис.16. Габаритные размеры: Шкаф навесной с распашной дверью и полками, арт.ШНМ

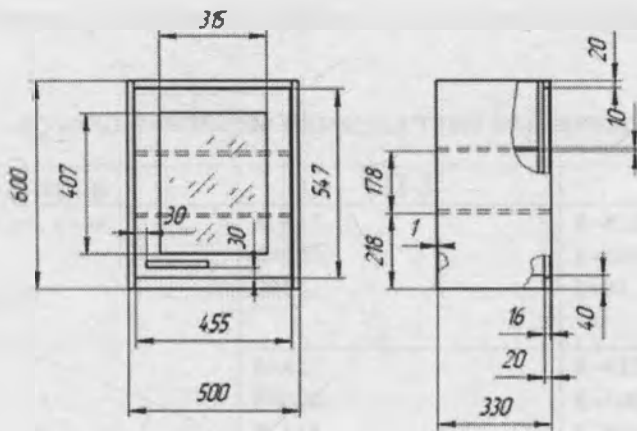


Рис.17. Габаритные размеры: шкаф навесной с распашной дверью из стекла и полками из стекла, арт.ШНХСИ

Функциональные размеры шкафов навесных

Описание размеров	ШНМ	ШНХСИ
Размеры полезные (внутренние) каждого отделения (открытых и закрытых) в шкафах, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз)	440х300х170	440х300х170
	440х300х168	440х300х168
	440х300х178	440х300х178

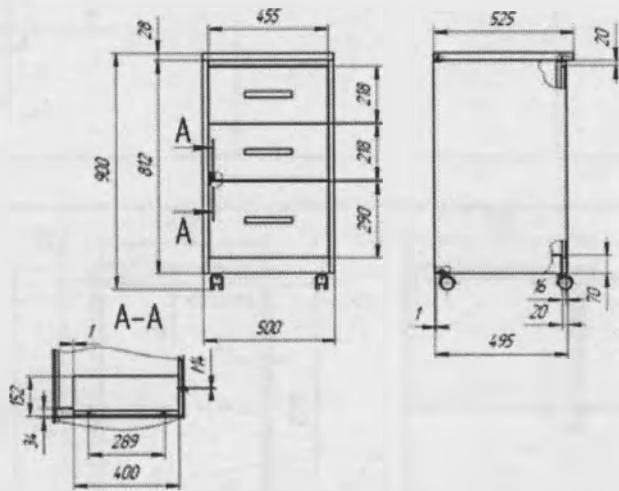


Рис.18. Габаритные размеры: тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-3

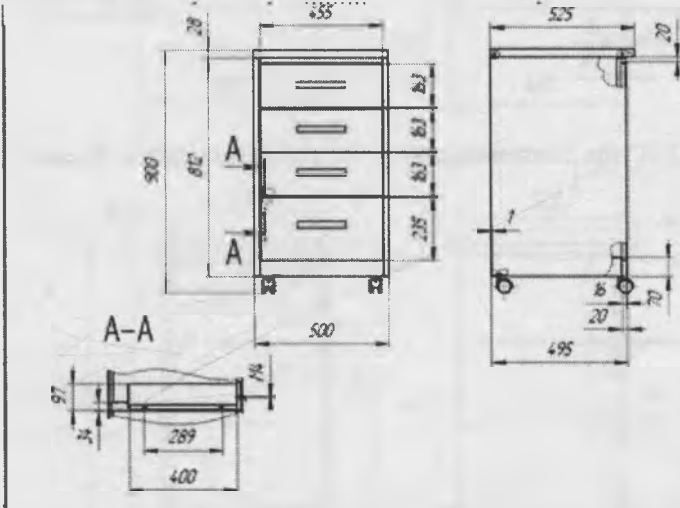
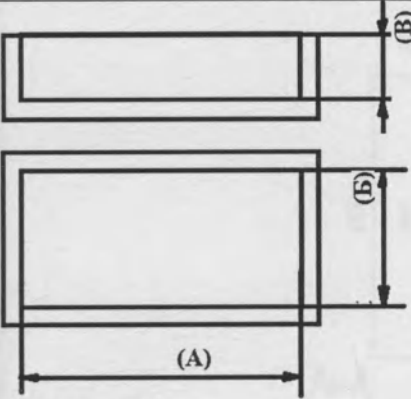


Рис.19. Габаритные размеры: тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-4

Функциональные размеры тумб выкатных

Описание размеров	ТП-3	ТП-4
Внутренние размеры ящиков, в мм	A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=97
	A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=97
	A=413	A=413

 (сверху - вниз)	$B=400$ $B=152$	$B=400$ $B=97$
		$A=413$ $B=400$ $B=152$

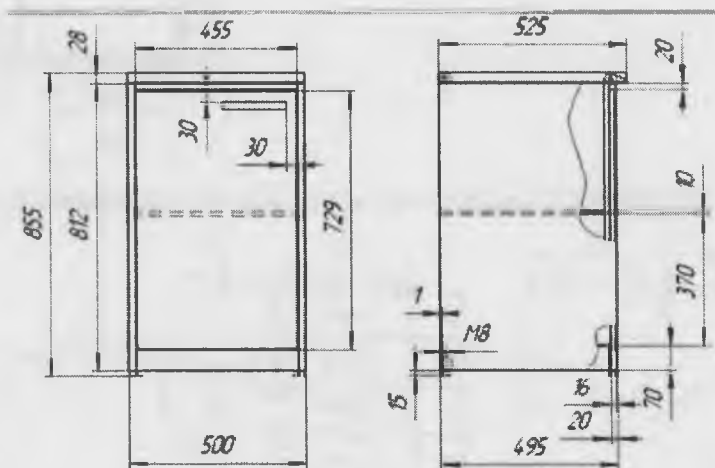


Рис.20. Габаритные размеры: тумба распашная, арт. ТРМ-1

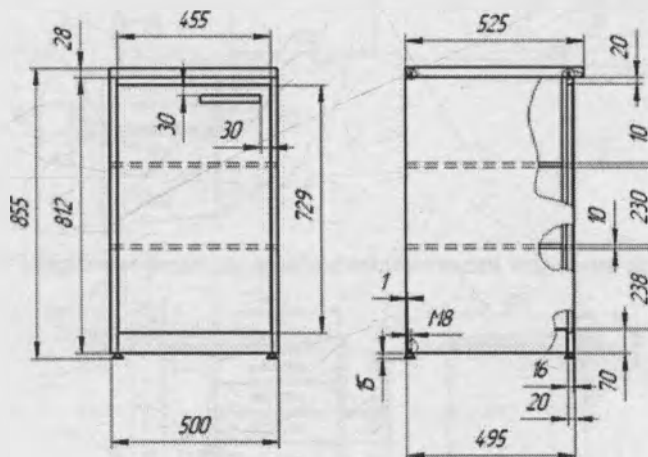


Рис.21. Габаритные размеры: тумба распашная, арт. ТРМ-2

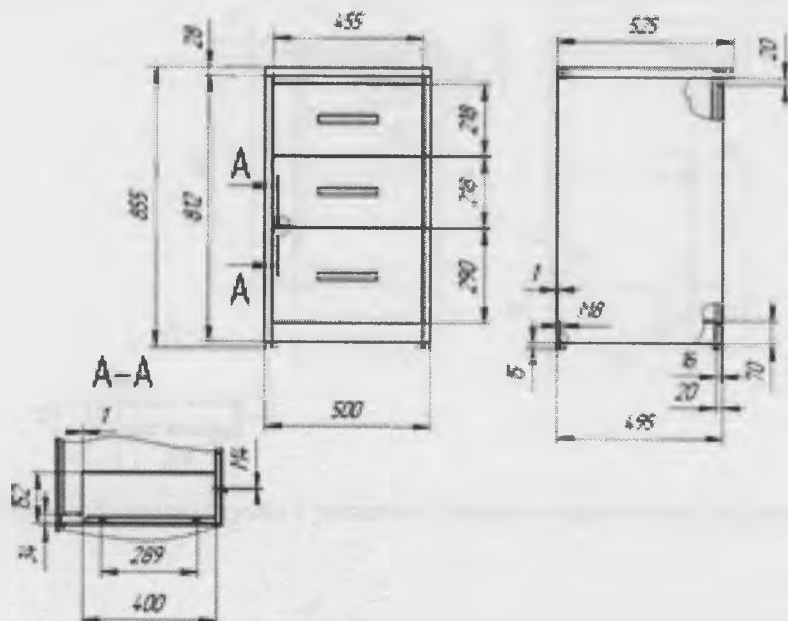


Рис.22. Габаритные размеры: тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-3

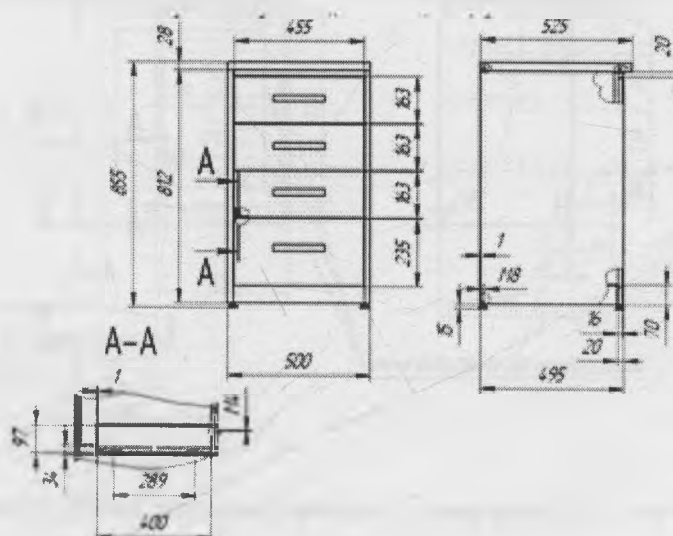


Рис.23. Габаритные размеры: тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-4

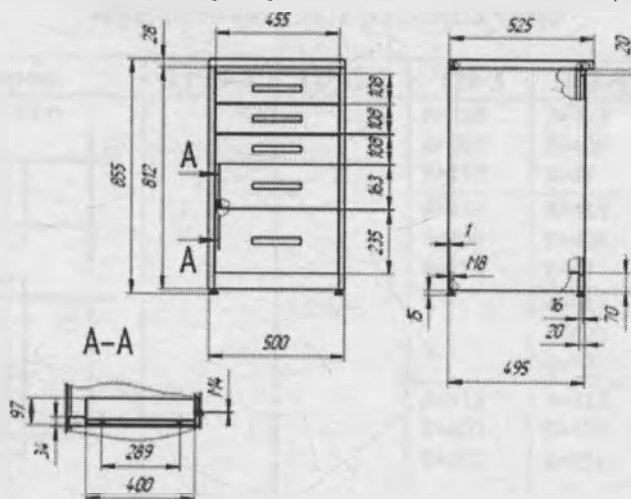


Рис.24. Габаритные размеры: тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-5

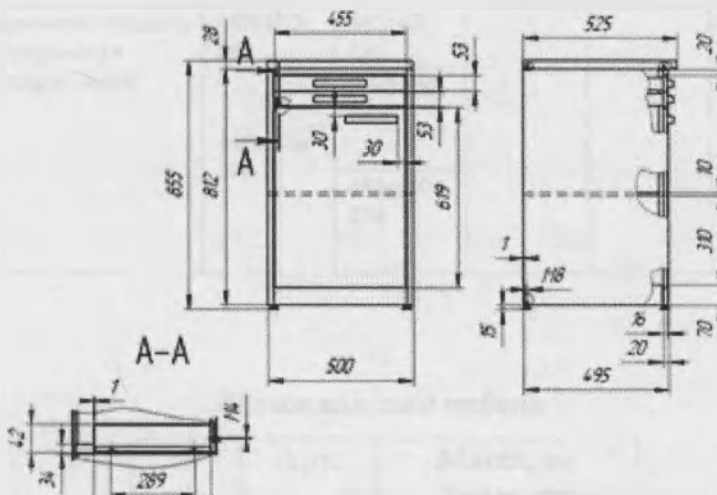


Рис.25. Габаритные размеры: тумба с распашной дверью и выдвижными ящиками, арт. ТРВ

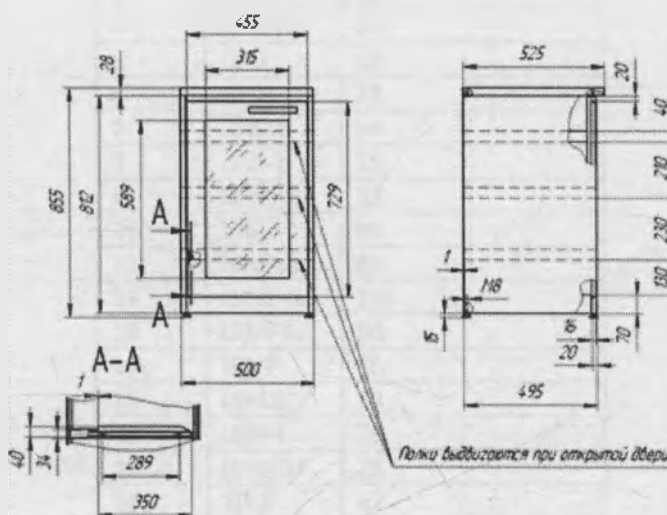
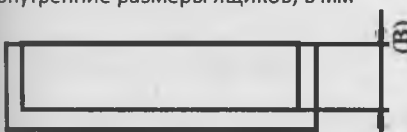
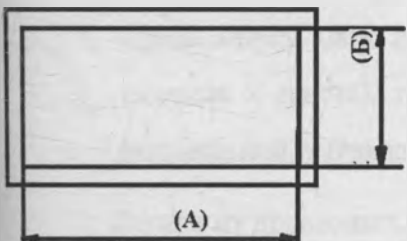


Рис.26. Габаритные размеры: тумба с распашной дверью из стекла и выдвижными полками, арт. ТРХСИ

Таблица № 8

Функциональные размеры тумб

Описание размеров	ТРМ-1	ТРМ-2	ТВ-3	ТВ-4	ТВ-5	ТРВ	ТРХСИ
Внутренние размеры ящиков, в мм			A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=42	
			A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=42	
			A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=152	A=413 Б=400 В=97	A=413 Б=400 В=42	
(сверху - вниз)					A=413 Б=400 В=152		

Размеры полезные (внутренние) каждого отделения (открытых и закрытых) в тумбах, (ДхШхВ, в мм) (сверху -вниз)	440x460x340	440x460x230	-	-	-	440x460x285	440x460x110
	440x460x370	440x460x230				440x460x310	440x460x170
		440x460x238					440x460x190
							440x460x130

Таблица № 9

Масса изделий мебели

№ п/п	Арт.	Масса, не более, кг
1	CPT1T	65
2	CPT2PM	85
3	CPT2T	95
4	CPT2Tyt	87
5	CPTГ	59
6	CPTB	38
7	CPBM	54
8	СПп-2	15
9	СПпв-2	23
10	ШМВ	85
11	ШМР-1	65
12	ШМР-2	125
13	ШМРВ	80
14	ШМР	60
15	ШМХСИ	78
16	ШНМ	25
17	ШНХСИ	23
18	ТП-3	42
19	ТП-4	46
20	ТРМ-1	32
21	ТРМ-2	35
22	ТВ-3	43
23	ТВ-4	47
24	ТВ-5	52
25	ТРВ	39
26	ТРХСИ	42

1.3. Состав изделия.

Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

1. Сталь марки 08пс в листах холоднокатаных размером 1х1250х250 (толщина х ширина х длина), группы прочности K270В, категории 6, группы отделки II, нормальной вытяжки.
2. Детали из древесных плит облицованы:
 - детали щитовые декоративные на основе древесных плит: столешницы класс

эмиссии формальдегида E1;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса;

3. Для окраски стали применяется порошковая белая краска RAL 9003.

В таблице № 11 комплектность, согласно документации.

Металлические части изделий мебели изготовлены из коррозионостойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032.

Таблица №11

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование	Обозначение документа или тип и производитель	Количество
1	Стол рабочий однотумбовый, арт.СРТ1Т	НММ.01.01.00/СРТ1Т	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	6
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
2	Стол рабочий однотумбовый на 2 рабочих места, арт. СРТ2РМ	НММ.01.02.00/СРТ2РМ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	8
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
3	Стол рабочий двухтумбовый, арт. СРТ2Т	НММ.01.03.00/СРТ2Т	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	8
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
4	Стол рабочий двухтумбовый, арт. СРТ2Тут	НММ.01.04.00/СРТ2Тут	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	8
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
5	Стол рабочий, арт. СРТГ	НММ.01.05.00/СРТГ	1
	Принадлежности		

	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	8
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
6	Стол рабочий вспомогательный, арт. СРТВ	НММ.01.06.00/СРТВ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
7	Стол рабочий врача, арт. СРВМ	НММ.01.07.00/СРВМ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	6
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
8	Столик подкатной с полками, арт. СПп-2	НММ.01.08.00/СПп-2	1
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
9	Столик подкатной с полками и выдвижными ящиками, арт. СПпв-2	НММ.01.09.00/СПпв-2	1
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
10	Шкаф медицинский, арт. ШМВ	НММ.01.10.00/ШМВ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
11	Шкаф медицинский одностворчатый с распашными дверьми и полками, арт. ШМР-1	НММ.01.11.00/ШМР-1	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
12	Шкаф медицинский двухстворчатый с распашными дверьми и полками, арт. ШМР-2	НММ.01.12.00/ШМР-2	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1
13	Шкаф медицинский с распашными дверьми, полками и выдвижными ящиками, арт. ШМРВ	НММ.01.13.00/ШМРВ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	НММ.01.00.00РЭ	1

14	Шкаф с полкой и перекладиной для вешалок, арт. ШМР	HMM.01.14.00/ШМР	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
15	Шкаф медицинский с распашной дверью из стекла, полками и выдвижными ящиками, арт. ШМХСИ	HMM.01.15.00/ШМХСИ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
16	Шкаф навесной с распашной дверью и полками, арт. ШНМ	HMM.01.16.00/ШНМ	1
	Принадлежности		
	Навесной уголок	45x45 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Саморез	4x25 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Винт	М5 производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Дюбель	8 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
17	Шкаф навесной с распашной дверью из стекла и полками из стекла, арт. ШНХСИ	HMM.01.17.00/ШНХСИ	1
	Принадлежности		
	Навесной уголок	45x45 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Саморез	4x25 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Винт	М5 производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Дюбель	8 мм производства ООО "Северсталь-Метиз"	2
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
18	Тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-3	HMM.01.18.00/ТП-3	1
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
19	Тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-4	HMM.01.19.00/ТП-4	1
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
20	Тумба распашная, арт. ТРМ-1	HMM.01.20.00/ТРМ-1	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		

	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
21	Тумба распашная, арт. ТРМ-2	HMM.01.21.00/ТРМ-2	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
22	Тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-3	HMM.01.22.00/ТВ-3	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
23	Тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-4	HMM.01.23.00/ТВ-4	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
24	Тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-5	HMM.01.24.00/ТВ-5	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
25	Тумба с распашной дверью и выдвижными ящиками, арт. ТРВ	HMM.01.25.00/ТРВ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1
26	Тумба с распашной дверью из стекла и выдвижными полками, арт. ТРХСИ	HMM.01.26.00/ТРХСИ	1
	Принадлежности		
	Опора	"Бинго" малая А004 резьбовая М8 производитель ООО "ЭЛМЕТ" (Россия)	4
	Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	HMM.01.00.00РЭ	1

1.4. Устройство и работа.

Вся мебель предоставляется в собранном виде. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно. Выдвижные и раздвижные элементы изделий мебели иметь свободный ход без заеданий. (Все изделия мебели, за исключением арт. СПп-2).

Двери изделий имеют петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

(Арт. СРТ2Тут, СРТГ, ШМВ, ШМР-1, ШМР-2, ШМРВ, ШМР, ШМХСИ, ШНМ, ШНХСИ, ТРМ-1, ТРМ-2, ТРВ, ТРХСИ).

Изделия мебели (арт. ШМХСИ, ШНХСИ, ТРХСИ) имеют комбинированную дверь из металла и стекла, которое прижимается уголками.

Изделия мебели установленные на роликовые (колесные) опоры (арт. СПп-2, СПпв-2, ТП-3, ТП-4):

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилии;
- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели установленные на опоры (все кроме арт. СПп-2, СПпв-2, ТП-3, ТП-4) стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

1. Столы рабочие:

-стол рабочий однотумбовый, арт.СРТ1Т: Стол с крышкой прямоугольной формы на вертикальных опорных стойках, с боковым (левым) ребром жесткости, с задней стенкой жесткости. В подстолье царговый пояс с выдвижным ящичком по правой стороне фасада и два отделения по ширине: одно отделение открытое с выдвижным ящичком по центру, другое отделение с четырьмя выдвижными ящиками;

-стол рабочий однотумбовый на 2 рабочих места, арт.СРТ2РМ: Стол с крышкой прямоугольной формы на вертикальных опорных стойках, с боковыми ребрами жесткости, с задней стенкой жесткости. В подстолье царговый пояс с выдвижным ящичком по центру фасада и три отделения по ширине: левое и правое отделение открытое с выдвижным ящичком по центру, центральное отделение с четырьмя выдвижными ящиками;

-стол рабочий двухтумбовый, арт. СРТ2Т: Стол с крышкой прямоугольной формы с задней стенкой жесткости. В подстолье царговый пояс с двумя выдвижными ящичками по левой и правой стороне фасада и три отделения по ширине: левое и правое отделение с четырьмя выдвижными ящиками, центральное отделение открытое с выдвижным ящичком по центру;

-стол рабочий двухтумбовый, арт. СРТ2Тут: Стол с крышкой прямоугольной формы с задней стенкой жесткости. В подстолье царговый пояс с двумя выдвижными ящичками по левой и правой стороне фасада и три отделения по ширине: левое отделение за одной распашной дверью, центральное отделение с выдвижным ящичком по центру, правое отделение с четырьмя выдвижными ящиками.

-стол рабочий, арт.СРТГ: Стол с крышкой прямоугольной формы. Два крайних отделения по ширине в каждом по одной стационарной полке, каждое отделение за одной

распашной дверью.

-стол рабочий вспомогательный, арт. СРТВ: Стол с крышкой прямоугольной формы на вертикальных опорных стойках, с боковыми ребрами жесткости, с задней стенкой жесткости. В подстолье царговый пояс и одно отделение по ширине с выдвижным ящичком по центру.

-стол рабочий врача, медсестры, арт.СРВМ: Стол с крышкой прямоугольной формы на вертикальных опорах, с левой горизонтальной опорой ребром жесткости, с задней горизонтальной опорой ребром жесткости с отделением с правой стороны с четырьмя выдвижными ящиками.

2.Столики подкатные:

-столик подкатной с полками, арт. СПп-2: Столик прямоугольной формы на вертикальных опорах с двумя горизонтальными открытыми полками, на четырех колесных опорах;

-столик подкатной с полками и выдвижными ящиками, арт. СПпв-2: Столик прямоугольной формы на вертикальных опорах с двумя горизонтальными открытыми полками, на четырех колесных опорах, . Под верхней горизонтальной полкой размещены два выдвижных ящика.

3.Шкафы с распашными дверями:

-шкаф медицинский, арт. ШМВ: Шкаф с двумя отделениями по высоте: верхнее в с двумя горизонтальными открытыми полками, нижнее с двумя отделениями. Каждое нижнее отделение имеет одну стационарную полку за одной распашной дверью;

-шкаф медицинский одностворчатый с распашными дверьми и полками, арт. ШМР-1: Шкаф с двумя отделениями по высоте: верхнее отделение имеет две стационарные полки за одной распашной дверью, нижнее отделение имеет одну стационарную полку за одной распашной дверью;

-шкаф медицинский одностворчатый с распашными дверьми и полками, арт. ШМР-2: Шкаф с четырьмя отделением, двумя верхними и двумя нижними : каждое верхнее отделение имеет две стационарные полки за одной распашной дверью, каждое нижнее отделение имеет одну стационарную полку за одной распашной дверью.

4.Шкафы комбинированные:

-шкаф медицинский с распашными дверьми, полками и выдвижными ящиками, арт. ШМРВ: Шкаф с двумя отделениями по высоте: верхнее отделение имеет две стационарные полки за одной распашной дверью, нижнее отделение состоит из четырех выдвижных ящиков.

-шкаф медицинский с распашной дверью из стекла, полками, выдвижными

ящиками, арт. ШМХСИ: Шкаф с двумя отделениями по высоте: верхнее отделение имеет две стационарные полки за одной комбинированной распашной дверью из стали и стекла, нижнее отделение состоит из четырех выдвижных ящиков.

5. Шкаф для одежды:

-шкаф с полкой и перекладиной для вешалок, арт. ШМР: Шкаф имеет три отделения посредством разделения пространства двумя стационарными полками за одной распашной дверью. Среднее (большее) отделение имеет встроенную горизонтальную штангу.

6. Шкафы навесные:

-шкаф навесной с распашной дверью и полками, арт. ШНМ: Шкаф с двумя стационарными полками за одной распашной дверью;

-шкаф навесной с распашной дверью из стекла и полками из стекла, арт. ШНХСИ: Шкаф с двумя стационарными полками за одной комбинированной распашной дверью из стали и стекла.

7. Тумбы выкатные:

-тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-3: Тумба с тремя выдвижными ящиками на четырех колесных опорах;

-тумба подкатная с выдвижными ящиками, арт. ТП-4: Тумба с четырьмя выдвижными ящиками на четырех колесных опорах.

8) тумбы:

-тумба распашная, арт. ТРМ-1: Тумба с одной стационарной полкой за одной распашной дверью;

-тумба распашная, арт. ТРМ-2: Тумба с двумя стационарными полками за одной распашной дверью.

-тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-3: Тумба с тремя выдвижными ящиками;

-тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-4: Тумба с четырьмя выдвижными ящиками;

-тумба с выдвижными ящиками, арт. ТВ-5: Тумба с пятью выдвижными ящиками;

-тумба с распашной дверью и выдвижными ящиками, арт. ТРВ: Тумба с двумя выдвижными ящиками и отделения с одной стационарной полкой за одной распашной дверью;

-тумба с распашной дверью из стекла и выдвижными полками, арт. ТРХСИ: Тумба с тремя полками выдвигающимися вместе с открыванием комбинированной распашной двери из стали и стекла.

1.5. Маркировка.

1.5.1. Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование изделия мебели;
- год изготовления изделия (или две последние цифры);
- номер изделия по системе нумерации производителя;
- наименование фирмы-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя;
- обозначение настоящих ТУ.

1.5.2. Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

1.6. Упаковка.

1.6.1. Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Вредным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

1.6.2. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

1.6.3. При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

1.6.4. Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения

изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

1.6.5. Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

1.6.6. Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

1.5.7. Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

1.5.8. Упаковывание, транспортирование и хранение стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

1.5.9. На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

1.5.10. При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

II. Показания к применению.

Мебель медицинская предназначена для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

III. Противопоказания к применению.

Мебель противопоказаний к применению не имеет.

IV. Использование по назначению.

4.1. Эксплуатационные ограничения:

- мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);
- беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного нерационального физического воздействия;
- беречь от открытого огня;
- не использовать мебель по иному назначению;

4.2. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

1) вскрыть упаковку, достать мебель (вся мебель поставляется в собранном виде) и принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

2) прикрутить опоры на мебель (при наличии)

2.1) установка навесных шкафов ШНМ, ШНХСИ:

- закрепить навесной уголок к шкафу на винт М5, через резьбовую втулку на шкафу;

- просверлить в стене 2 отверстия диаметром 8мм, используя сверло по бетону 8мм;

- в отверстия вставить дюбеля и вкрутить в него саморезы диаметром 4мм, не закрутив 5 мм;

- повесить шкаф (навесные уголки) на саморезы.

3) визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений;

4) установить мебель в необходимом месте;

5) провести уборку мебели с применением моющего средства.

4.3. Использование изделия.

Использовать мебель согласно своему функциональному назначению.

V. Техническое обслуживание.

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

VI. Хранение

6.1. Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;

6.2. Гарантийные сроки хранения.

6.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

6.2.2. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем.

6.2.3. Средний срок службы не менее 5 лет.

VII. Транспортирование

7.1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

7.2. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

7.3. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

VIII. Утилизация.

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

XI. Контактные данные производителя.

Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»

Юридический адрес: 394019, Воронежская обл., г.Воронеж, Краснодонская ул., д.

16е, оф. 5

Тел.: 8(473)2604447, 8(473)2604448

E-mail: dentis-vrn@yandex.ru

																				Номер изменения		Номера страниц
																				заменённых		
																				дополнительных		
																				исключенных		
																				Измененных		
																				Всего страниц после внесения изменения		
																				Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного документа)		
																				Подпись лица, внесшего изменения		
																				Фамилия этого лица и дата внесения изменения		

 INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 33 (тридцать три) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Дентис»
С.В. Новиков

