

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОНДОВ ЖЕЛУДОЧНО-ПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ

1. Назначение

Зонды желудочно-питательные резиновые предназначены для промывания желудка или отбора желудочного сока, для искусственного кормления новорожденных и для введения пищи больным через желудочную стому или кишечный свищ, предназначены для эксплуатации при температуре $+ 42^{\circ}\text{C}$, поставляются в нестерильном виде, класс в зависимости от потенциального риска применения - 1 по ГОСТ Р 51609.

2. Основные типы и размеры

Зонды желудочно-питательные изготавливаются следующих типов и номеров:

тип I — зонды желудочные № 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39;

тип II — зонды питательные № 24, 30,

тип III — зонды питательные для новорожденных № 12, 14, 16

тип IV — зонды желудочные для промывания при отравлениях № 45

3. Комплектность

В комплект поставки зондов должны входить:

- зонд одного типоразмера - 1 шт,
- руководство по эксплуатации - 1 экз.

4. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация

Зонды желудочно-питательные дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде (ГОСТ 6709) в течение (30 ± 5) мин, затем проводят предстерилизационную очистку в моющем растворе содержащем: 0,5 % раствор перекиси водорода и 0,5 % раствор моющего средства (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс) при температуре $(50 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ в течение (15 ± 1) мин. После проведения предстерилизационной очистки зонды стерилизуют в 6 % растворе перекиси водорода при полном погружении изделия в раствор и выдержке в нем в течение (360 ± 5) мин, при температуре не менее 18°C .

После обработки изделия при визуальном осмотре не должны иметь механических дефектов, деформации, изломов, изменения цвета и состояния поверхности.

5. Хранение

Зонды, упакованные в картонные коробки, должны храниться в условиях 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре не более 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Зонды в процессе эксплуатации и хранения не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, бактерицидных ламп, масел, бензина и др. веществ, разрушающих резину.

6. Сведения о приемке

Соответствуют ТУ 9398-010-05769082-2004

7. Гарантии поставщика

Изготовитель гарантирует соответствие зондов требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, применения и хранения.

Гарантийный срок годности - 2 года со дня изготовления.

8. Порядок предъявления рекламаций

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию - изготовителю с приложением инструкции по подготовке к эксплуатации и по хранению по адресу:

302011 г.Орел Новосильское шоссе 14. Завод резиновых изделий.