

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗОНДОВ ДУОДЕНАЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОЛИВОЙ ЗД-ОЗРИ**

1. Назначение

Зонды дуоденальные предназначены для извлечения желчи из печени - дуоденального дренирования. Выпускаются в двух исполнениях:

- зонды дуоденальные из резиновой смеси ИР - 152
- зонды дуоденальные рентгеноконтрастные из резины ИР-47.

Зонды предназначены для эксплуатации при температуре до + 42 С, поставляются в нестерильном виде, класс в зависимости от потенциального риска применения - 1 по ГОСТ Р 51 609.

Зонды дуоденальные изготавливаются цельными и представляют собой резиновую трубку, снабженную металлическим грузиком-оливой.

2. Комплектность

В каждый комплект дуоденального зонда должно входить:

- зонд - 1 шт
- инструкция по подготовке к эксплуатации и по хранению - 1 экз.

3. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация

Зонды дезинфицируют методом кипячения в дистиллированной воде (ГОСТ 6709) при температуре $(98 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение $(30 + 5)$ мин, предстерилизационную очистку проводят в моющем растворе содержащем: 0,5% раствор перекиси водорода и 0,5% раствор моющего средства (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс) при температуре $(50 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение (15 ± 1) мин. После проведения предстерилизационной очистки зонды стерилизуют в 6% растворе перекиси водорода при полном погружении изделия в раствор и выдержке в нем в течение (360 ± 5) мин при температуре не менее 18°C .

После проведенной обработки на поверхности зондов не должны появляться трещины, видимые невооруженным глазом, не должны деформироваться.

4. Хранение

Зонды, упакованные в картонные коробки, должны храниться в условиях 1(Л) ГОСТ 15150, но при температуре не более 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

В процессе хранения и эксплуатации зонды не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, бактерицидных ламп, смазочных масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.



5. Сведения о приемке

Соответствуют ТУ 9398-008-05769082-2004

6. Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует соответствие зондов дуоденальных требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок годности зондов - 2 года со дня изготовления.

7. Порядок предъявления рекламаций

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением инструкции по подготовке к эксплуатации и по хранению по адресу:

302011 г.Орёл Новосильское шоссе 14. Завод резиновых изделий.