

УТВЕРЖДЕНА

УТВЕРЖДАЮ

Приказом Росздравнадзора

Генеральный директор
ООО Пауль Хартманн

От _____ 2011 г. № _____

Калабин Ю.В.

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средства специальные перевязочные.

Гидроактивные губчатые повязки:

- HydroTac / ГидроТак;
- HydroTac comfort / ГидроТак комфорт;
- HydroTac sacral/ ГидроТак сакрал.

Гидроактивные суперабсорбирующие повязки:

- TenderWet plus/ Тендервет плюс;
- TenderWet plus cavity/ Тендервет плюс кевити

Производства: "Paul Hartmann AG" Германия, Пауль Хартманн штрассе 12,
D89522 Хаденхайм, пост 1420-D895604 Хаденхайм, тел. 07321360 факс. 07321363636,
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, Switzerland
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Неухаусен, Швейцария

(наименование изделия медицинского назначения)

2011г.

1. Средства специальные перевязочные

1. Для очищения и кондиционирования ран, для интерактивной терапии ран во влажной среде, для временного покрытия кожных дефектов большой площади и открытых переломов трофические и диабетические язвы, пролежни, плохозаживающие раны различного происхождения, для лечения ран с сильным и умеренным экссудатом

2. Технические характеристики

Материал Гидротак	губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана. Со стороны раны повязка покрыта гидрогелем. Гель состоит из водосодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полимочевины, содержащего пропиленгликоль.
Гидротак комфорт, ГидроТак сакрал	губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана. Со стороны раны повязка покрыта гидрогелем. Гель состоит из водосодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полимочевины, содержащего пропиленгликоль; имеет самоклеящийся рант, покрытый полиакрилатным клеем.
Тендервет плюс	гидроактивная повязка на рану, центральная составная часть которой содержит суперабсорбирующий полиакрилат (САП), активированный раствором Рингера полиакрилат (САП) связан с антибактериальным веществом полигексаметилен бигуанидом (ПГМБ); верхний слой: трикотажная полипропиленовая ткань с нанесенными, с одной стороны (обратную к ране) зелеными полосками, а с другой стороны (на контактирующий с раной слой повязки) нанесены силиконовые полосы, которые дополнительно противодействуют прилипанию повязки к ране; водонепроницаемая полипропиленовая пленка на стороне повязки, не прилегающей к ране
Тендервет плюс кевити	гидроактивная повязка на рану, центральная составная часть которой содержит суперабсорбирующий полиакрилат (САП), активированный раствором Рингера полиакрилат (САП) связан с антибактериальным веществом полигексаметилен бигуанидом (ПГМБ); верхний слой: трикотажная полипропиленовая ткань

2. Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

3. Подготовка к работе:

Подобрать повязку соответственно размеру раны таким образом, чтобы она выступала за края раны на 2 см. Вскрыть стерильную упаковку, достать повязку. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

4. Правила хранения и использования:

HydroTas / ГидроТак, HydroTas comfort / ГидроТак комфорт, HydroTas sacral/ ГидроТак сакрал - Хранить в сухом месте, при температуре от 5 до 40 градусов.

TenderWet plus/ Тендервет плюс, TenderWet plus cavity/ Тендервет плюс кевити - Хранить в сухом месте, при температуре от 5 до 25 градусов.

5. Срок годности:

Срок хранения HydroTas / ГидроТак, HydroTas comfort / ГидроТак комфорт, HydroTas sacral/ ГидроТак сакрал – 3 года от даты производства,

TenderWet plus/ Тендервет плюс, TenderWet plus cavity/ Тендервет плюс кевити – 2 года от даты производства.

Руководство по эксплуатации

Средства специальные перевязочные:

- TenderWet plus/ Тендервет плюс,
- TenderWet plus cavity/ Тендервет плюс кевити.

Использование:

Подобрать размер и форму повязки в соответствии с размером и формой раны, таким образом, чтобы она слегка выступала за края раны. Вскрыть стерильную упаковку, достать повязку, наложить повязку на рану так, чтобы она надежно контактировала с раневой поверхностью и слегка закрывала края раны. Зафиксировать повязку бинтом или пластырем. Смена повязки осуществляется через 72 часа. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом месте.

Транспортировка:

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, отапливаемых герметизированных отсеках, на самолетах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и условиями хранения по ГОСТ 15150-69

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.

Средства специальные перевязочные:

- HydroTas / ГидроТак,
- HydroTas comfort / ГидроТак комфорт
- HydroTas sacral/ ГидроТак сакрал

Использование: Подобрать повязку соответственно размеру раны таким образом, чтобы она выступала за края раны на 2 см. Вскрыть стерильную упаковку, достать повязку. Наложить повязку белой стороной на рану так, чтобы бежевый покрывающий слой оказался наверху. Зафиксировать повязку. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом месте.

Транспортировка:

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, отапливаемых герметизированных отсеках, на самолетах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и условиями хранения по ГОСТ 15150-69

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.





Процессуально
и сфериально
представлено
Человек

Чел.