


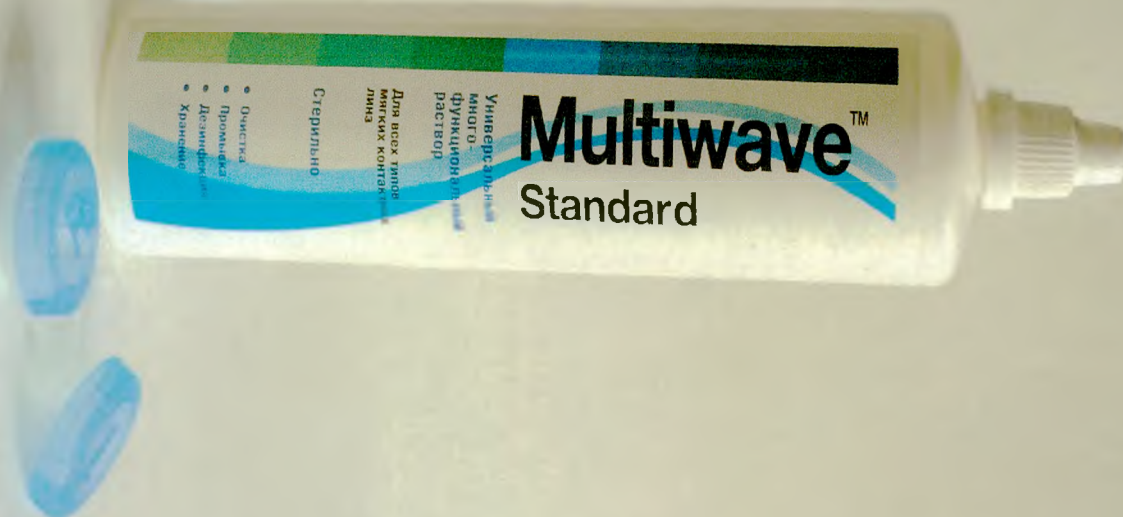

1. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.
 Состав набора:
 - раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.



2. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.



3. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз - 1 шт.;
- пинцет для контактных линз – 1 шт.;
- палочка для контактных линз – 1 шт.



4. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
- дорожный набор для контактных линз – 1 набор (контейнер для контактных линз – 1 шт., флакон для раствора объемом 10 мл. – 1 шт., пинцет для контактных линз – 1 шт., палочка для контактных линз – 1 шт., футляр для набора – 1 шт)



5. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
- раствор для дезинфекции рук при уходе за контактными линзами «MULTIWAVE-DEZ» объемом 30 мл - 1 шт.;
- салфетка гигиеническая одноразовая – 1 шт.

Условия хранения:

Хранить универсальный
многофункциональный раствор при
температуре от +4 до +30°C в вертикальном
положении, в недоступном для детей месте.

Срок хранения:

**30 (тридцать) месяцев
в неповрежденной упаковке.**

После вскрытия флакона содержимое
использовать в течение трех месяцев.

Изготовитель:

Чистая река

ООО «Чистая река», Республика
Беларусь, 220021, г. Минск,
ул. Центральная, 49, к.8,
т/ф (+375-017)291-32-99,
E-mail: Clear.river@open.by



TU BY 192002495.001-2015

Регистрационное Удостоверение
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № ИМ-7.102121

Инструкция находится внутри упаковки

Дата изготовления и номер партии указаны
на коробке и этикетке

130405

13042015

Номинальный объем 250 мл



6. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.



7. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.



8. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе

Состав набора:


- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.;
- пинцет для контактных линз – 1 шт.;
- палочка для контактных линз – 1 шт.



9. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.;
- дорожный набор для контактных линз – 1 набор (контейнер для контактных линз – 1 шт., флакон для раствора объемом 10 мл. – 1 шт., пинцет для контактных линз – 1 шт., палочка для контактных линз – 1 шт., футляр для набора – 1 шт.)
- раствор для дезинфекции рук при уходе за контактными линзами «MULTIWAVE-DEZ» объемом 30 мл. – 1 шт.;

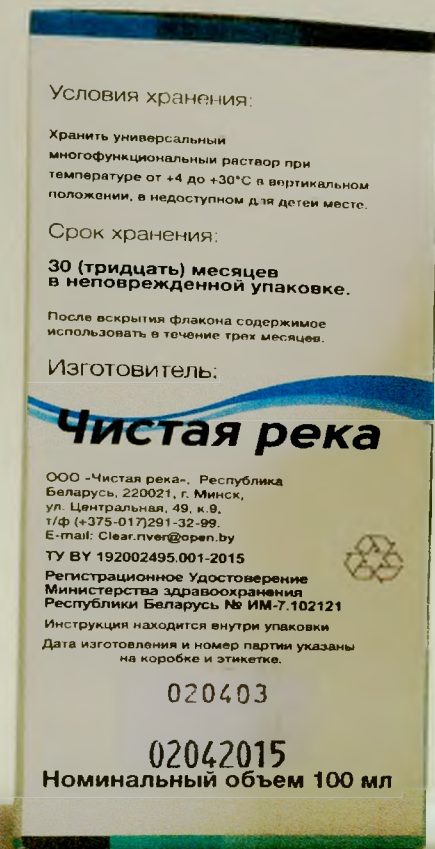

10. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTI WAVE-STANDARD» в наборе

Состав набора:


- раствор во флаконе объемом 100 мл. – 1 шт.





11. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл. – 1 шт.;
- раствор для дезинфекции рук при уходе за контактными линзами «MULTIWAVE-DEZ» объемом 30 мл. – 1 шт.;
- салфетка гигиеническая одноразовая – 1 шт.

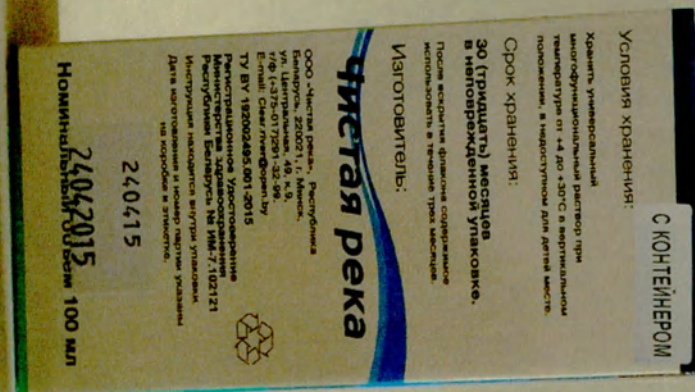

12. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

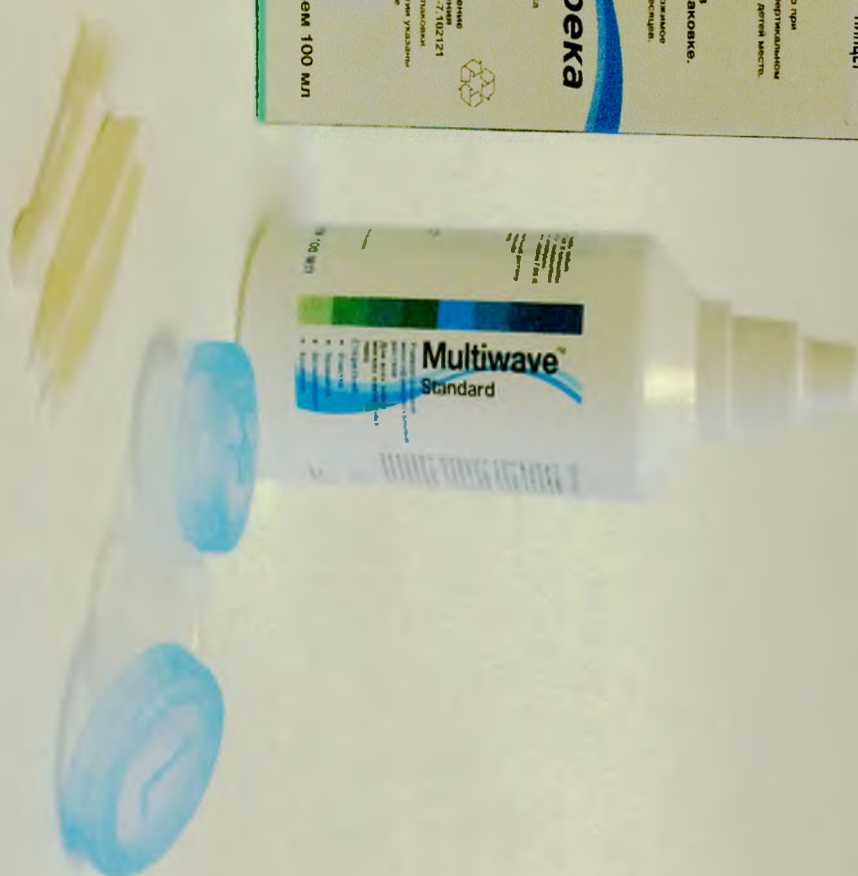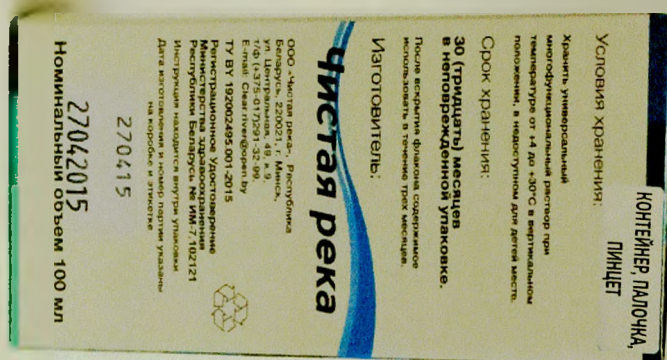

13. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 100 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.;
- пинцет для контактных линз -1 шт.;



14. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.



15. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;

- контейнер для контактных линз – 1 шт.



16. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.
Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.;
- пинцет для контактных линз – 1 шт.;



17. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.
Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
- дорожный набор для контактных линз – 1 набор (контейнер для контактных линз – 1 шт., флакон для раствора объемом 10 мл. – 1 шт., пинцет для контактных линз – 1 шт., палочка для набора – 1 шт.)



18. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.
- Состав набора:
- раствор во флаконе объемом 350 мл – 1 шт.;
 - раствор для дезинфекции рук при уходе за контактными линзами «MULTIWAVE-DEZ» объемом 30 мл – 1 шт.;
 - салфетка гигиеническая одноразовая – 1 шт.



19. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл. – 1 шт.



20. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.



21. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл -1 шт.;
- контейнер для контактных линз -1 шт.;
- пинцет для контактных линз – 1 шт.;



22. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.
Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл – 1 шт.;
- дорожный набор для контактных линз – 1 набор (контейнер для контактных линз - 1 шт., флакон для раствора объемом 10 мл. – 1 шт., пинцет для контактных линз – 1 шт., палочка для контактных линз – 1 шт., футляр для набора – 1 шт.)



23. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 250 мл -1 шт.;
- раствор для дезинфекции рук при уходе за контактными линзами «MULTIWAVE-DEZ» объемом 30 мл – 1 шт.;



24. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTI WAVE-NEW» в наборе.
Состав набора:
- раствор во флаконе объемом 100 мл – 1 шт.



25. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе.

Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 100 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.



26. Раствор универсальный офтальмологический для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-NEW» в наборе. Состав набора:

- раствор во флаконе объемом 100 мл – 1 шт.;
- контейнер для контактных линз – 1 шт.;
- пинцет для контактных линз – 1 шт.;
- палочка для контактных линз – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КОМПЛЕКТЫ РАСТВОРОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ «MULTIWAVE-STANDARD» И «MULTIWAVE-NEW»**

Регистрационный номер: ИМН 192002495 001-2014

ТУ ВУ 192002495.001-2015

Регистрационное Удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь № ИМ-7.102121

Торговое название препарата: КОМПЛЕКТЫ РАСТВОРОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ «MULTIWAVE-
STANDARD»TM И «MULTIWAVE NEW»TM

Описание: Растворы представляют собой прозрачную бесцветную жидкость, в которой при встряхивании наблюдается незначительное пенообразование.

Состав раствора многофункционального универсального «MULTIWAVE-STANDARD»TM: deionised water (деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода); sodium chloride (натрия хлорид); boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти водный); ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid disodium dehydrate (соль динатриевая этилендиамин- N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б)); polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); benzalkonium chloride (бензалкония хлорид); hydroxypropylmethicellulose (гидроксипропилметилцеллюлоза); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-стеариловый спирт); patented antioxidant complex FGS ® (запатентованный антиоксидантный комплекс FGS ®).

Состав раствора многофункционального универсального «MULTIWAVE-NEW»TM: deionised water (деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода); sodium chloride (натрия хлорид); boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти водный); ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid disodium dehydrate (соль динатриевая этилендиамин- N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б)); polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); fumaric acid (фумаровая кислота); sodium fumarate (натрия фумарат); hyaluronic acid (гиалуроновая кислота); sodium hyaluronate (натрия гиалуронат); benzalkonium chloride (бензалкония хлорид); hydroxypropylmethicellulose (гидроксипропилметилцеллюлоза); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-стеариловый спирт); patented antioxidant complex FGS ® (запатентованный антиоксидантный комплекс FGS ®).

Показания к применению: Предназначаются для бактериостатической обработки, очистки, хранения, промывки мягких контактных линз.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам растворов многофункциональных универсальных «MULTIWAVE-STANDARD»TM и «MULTIWAVE-NEW»TM.

Фармакологические свойства: Представляют собой изотонические растворы в рН-буфере с добавлением поверхностно-активных веществ. Обладает антисептическими свойствами в отношении штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и др.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
24 ЛИСТОВ

Генеральный директор

Шевчук Е.В. *Е.В. Шевчук*

