

**Столы медицинские металлические
«КМ – Магма»**

ТУ 9452-005-32494920-2008

паспорт

Г. Кострома



Столы медицинские металлические «КМ - Магма», ТУ 9452-005-32494920-2008, предназначены для оборудования предприятий и учреждений здравоохранения.

Столы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ.2 по ГОСТ 15150.

1. Основные технические данные:

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	Номинальная нагрузка на столешницу кг, не более	Номинальная нагрузка, кг, не более	Масса, кг, не более	Средний срок службы, лет, не менее
1	СМП-01 (процедурные-*)	1100х600х790	35±2	5±0,5 (дно ящика-*)	40	7
2	СМП-02 *	1100х600х790	35±2	5±0,5 *	40	7
3	СМИ-ММ-01 (инструментальные-**)	670х430х820	20±1	15±1 (на полку металл.-**)	12	7
4	СМИ-ММ-02**	670х430х820	20±1	15±1**	12	7
5	СМИ-СМ-01**	670х430х820	20±1	15±1** 3±0,5***	12	7
6	СМИ-СМ-02**	670х430х820	20±1	15±1** 3±0,5***	12	7
7	СМИ-СС-01**	670х430х820	20±1	3±0,5 (стекл. полка-***)	12	7
8	СМИ-СС-02**	670х430х820	20±1	3±0,5***	12	7
9	СМК(д/забора крови)	340х410х700 (800,100)	20±1	-	8	7
10	ПМ(подставки п/стерилизаторы)	800х500х500	68 (ном нагрузка на каркас)	-	6	7
11	СМ01 (манипуляционные)	700х400х800	20±1	3±0,5 (дно ящика мал.)	10	7
12	СМТ-01 (транспортные)	1000х600х850	20±1	15±1**	14	7
13	СМТ-02	1000х600х850	20±1	15±1**	14	7

1.

2. Устройство изделия

2.1. Столы представляют собой сборно-сварные конструкции из металла, которые устанавливаются на регулируемые стационарные или подвижные (колесные) опоры.

Столы изготавливаются из листа углеродистой стали по ГОСТ 380, толщиной не менее 0,4 мм, трубы стальной профильной по ГОСТ 1050 и ГОСТ 10705, нержавеющей стали по ГОСТ 4543. Металлические поверхности столов покрываются эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагоустойчивое покрытие.

Конструктивные особенности столов «КМ - Магма» отражены в Таблице 2

Таблица 2

п/п	Обозначение	Конструктивное исполнение
1	СМП-01 (процедурные-*)	Стол представляет собой стационарную сборно-сварную

		конструкцию из металла на регулируемых по высоте ножках, в состав которой входят – боковые и задняя панели, столешница и три выдвижных ящика на роликовых направляющих.
2	СМП-02 *	Стол представляет собой подвижную сборно-сварную конструкцию из металла на колесных опорах, в состав которой входят – боковые и задняя панели, столешница и три выдвижных ящика на роликовых направляющих.
3	СМИ-ММ-01 (инструментальные- **)	Стол представляет собой стационарную сборно-сварную конструкцию из металла в виде двух п-образных элементов и двух полок.
4	СМИ-ММ-02**	Стол представляет собой подвижную сборно-сварную конструкцию из металла на колесных опорах в виде двух п-образных элементов и двух полок.
5	СМИ-СМ-01**	Стол представляет собой стационарную сборно-сварную конструкцию из металла в виде двух п-образных элементов и двух полок: верхняя-стекло, нижняя-металл
6	СМИ-СМ-02**	Стол представляет собой подвижную сборно-сварную конструкцию из металла на колесных опорах в виде двух п-образных элементов и двух полок: верхняя-стекло, нижняя-металл.
7	СМИ-СС-01**	Стол представляет собой стационарную сборно-сварную конструкцию из металла в виде двух п-образных элементов и двух стеклянных полок .
8	СМИ-СС-02**	Стол представляет собой подвижную сборно-сварную конструкцию из металла на колесных опорах в виде двух п-образных элементов и двух стеклянных полок
9	СМК(д/забора крови)	Столы представляют собой стационарную сборно-сварную конструкцию, состоящую из четырех ножек и столешницы, с мягким покрытием из кожзаменителя
10	ПМ(подставки п/стерилизаторы)	Столы представляют собой стационарную сборно-сварную конструкцию из металла в виде обрешетки с дном-полкой
11	СМ01 (манипуляционные)	Стол представляет собой сборно-сварную конструкцию из металла на четырех подвижных опорах. Стол имеет под столешницей четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих и две металлические полки. На боковой поверхности стола, в верхней его части, расположены: с одной стороны – ручка для транспортировки, с другой стороны – дополнительная, выдвигающаяся панель.
12	СМТ-01 (транспортировоч ные)	Стол представляет собой сборно-сварную конструкцию на колесных опорах из двух п-образных элементов и двух металлических полок, снабженную одной ручкой для транспортировки.
13	СМТ-02	Стол представляет собой сборно-сварную конструкцию на колесных опорах из двух п-образных элементов и двух металлических полок, снабженную двумя ручками для транспортировки.

3. Использование изделия

3.1. При эксплуатации столов необходимо избегать чрезмерных механических воздействий на них;

3.2. Выдвигать и задвигать ящики столов следует плавно и мягко, без рывков и ударов;

3.3. Дезинфекцию и мойку наружных поверхностей столов проводить 3% раствором хлорамина в комплексе с моющим средством типа «Лотос». После дезинфекции и мойки поверхности вытирают насухо.

4. Сведения об упаковке

4.1. Столы упаковываются в соответствии с требованиями ТУ 9452-005-32494920-2008.

4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую упаковку и прикрепляется к корпусу стола.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование столов должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования столов крытыми транспортными средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столов требованиям ТУ 9452-005-32494920-2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации столов - 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке

Стол медицинский металлический модели «МТ – Магма» зав. №
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9452-005-32494920-2008 и
признан годным к эксплуатации.

МП _____

Должность _____

Подпись _____

И.О.Ф. _____

Дата _____

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора в сфере здравоохранения и соопознания №
Сертификат соответствия № РОМА