

U-Check Baby Test (Ю-Чек Бэби Тест)

U-Check Baby Test (Ю-Чек Бэби Тест)

(Струйный тест для определения беременности по наличию ХГЧ в моче) 0123

Инструкция по применению теста для определения беременности

Данное устройство состоит из стекловолокнистых полосок с моноклональными антителами к человеческому хорионическому гонадотропину (ХГЧ), мембраны из твердой нитроцеллюлозы с антимышиным иммуноглобулином класса G и связывающих веществ из абсорбирующего коллоидного золота – моноклональных антител к ХГЧ. Принцип действия основан на методе двойных антител (сэндвич-методе) и иммунохроматографии с целью проверки ХГЧ в моче.

Назначение:	Применяется для раннего определения беременности
Модель:	Струйный
Использование:	Для самостоятельного тестирования
Состав:	Каждый пакет содержит одно тест-устройство и один десикант Каждая упаковка содержит один пакет и одну инструкцию по применению

Способ применения:

Перед использованием, пожалуйста, подготовьте таймер.

1. Удалите струйный тест из пакетика из фольги.
2. Снимите колпачок и отложите, оставив открытым наконечник с абсорбирующим веществом.
3. Обхватите пальцем полоску так, чтобы открытый наконечник был направлен вниз. Держите абсорбирующий наконечник под струей мочи до тех пор, пока он не станет абсолютно влажным.



4. Положите тест-устройство на гладкую поверхность окошком вверх, ожидая результатов теста.
5. Оцените результат в течение 5 минут.
6. Выбросьте тест после разового применения в контейнер для мусора.

Оценка результата

Отрицательный:	Если розовая полоска появляется только в контрольной зоне, можно считать, что Вы не беременны.
Положительный:	Если розовые полоски появляются и в контрольной, и тестовой зонах, можно считать, что Вы беременны.
Ошибочный:	Если розовая полоска появилась только в тестовой зоне или она не имеет отчетливо розово-фиолетового цвета в тестовой и

контрольной зонах, то невозможно сделать окончательный вывод. В данном случае рекомендуется повторно выполнить тест. Если проблема сохраняется, обратитесь к местному торговому агенту.

Меры предосторожности

Только для диагностики *in vitro*

1. Как и в случае всех диагностических тестов, соответствующий диагноз не должен основываться только на результатах однократной проверки, если только он не поставлен врачом после оценки всех данных клинических и лабораторных исследований.
2. Перед выполнением теста прочитайте внимательно все инструкции по применению. Обратите особое внимание на положение линий в контрольной и тестовой зонах.
3. Не использовать по истечении указанного срока годности.
4. Только для одноразового применения. После разового применения выбросите в контейнер для мусора.
5. Не использовать, если пакет поврежден или открыт.
6. Не прикасаться к мембране, которая находится внутри окошка.
7. Тест-устройство необходимо использовать сразу же после вскрытия пакета. Длительное воздействие влажности окружающей среды приведет к повреждению данного устройства.
8. Просанируйте образцы мочи и используемые устройства, если они являются потенциальными возбудителями инфекции. Избегайте попадания на кожу.

Перечень символов:

	Внимание, смотрите инструкции по применению
	Только для диагностики <i>in vitro</i>

	Храните при 2-30 ⁰ С
	Кол-во тест-устройств в комплекте

Произведено для:
Наари АГ
Швейцария



**ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТА (ОВ)**