

КОПИЯ



[Signature]
Jose Osvaldo Caputto Flosi
 International Sales Manager
 FANEM LTDA.

FANEM

САН-ПАУЛУ - БРАЗИЛИЯ

Руководство по эксплуатации

Колыбель для новорожденных «007 – Панда»

23

Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros

Tabelião

Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02036-021

Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de

0071421-JOSE OSVALDO CAPUTTO FLOSI

São Paulo, 31 de Agosto de 2015. Valor R\$ 4.80

Em test. da verdade:

LUCIANA GUIMARAES NEVES - ESCRIVENTE

Selo(s): 1046-AA655281

Valido somente com selo de Autenticidade

Rua Duarte de Azevedo, 311

CEP 02036-021 - Santana

São Paulo - SP - Tel: 4063-8885

OS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS

DESTE DOCUMENTO, PRODUZIRÃO

EFEITOS SOMENTE NO EXTERIOR.

Para que produza efeitos no BRASIL,

deverá, este documento, ter seu

texto vertido em vernáculo e ser

REGISTRADO em REGISTRO PUBLICO.

23

LEGISLAÇÃO NOTARIAL DO BRASIL

11/23

0071421-JOSE OSVALDO CAPUTTO FLOSI

1046AA655281

LUCIANA GUIMARAES NEVES

Escritor de A

Rua Duarte de A

Santana-Sp -

Редакция: 02/03
 Издание: 09/03

1. Мое

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 – Описание изделия2

2 – Техническая спецификация3

2.1 – Коды для заказа3

2.2 – Физические характеристики.....3

2.3 – Максимальная нагрузка4

2.4 – Символы5

2.5 – Условия окружающей среды.....5

2.6 – Дополнительная информация6

3 – Детали и принадлежности7

3.1 – Дополнительные детали и принадлежности.....7

3.2 – Схема сборки и список деталей9

4 – Меры предосторожности, ограничения и предупреждения11

5 – Сборка оборудования12

6 – Правила работы14

7 – Техническое обслуживание и очистка14

7.1 – Очистка.....14

7.2 – Техническое обслуживание.....15

7.3 – Требования к охране окружающей среды и утилизация16

7.4 – Запасные части16

7.5 – Диагностика неполадок17

8 – Гарантия и техническая поддержка17

1 – Описание изделия

Колыбели для новорожденных «007-Панда» производства «ФАНЕМ ЛТДА» отвечают всем требованиям, необходимым для новорожденного в послеродовом периоде, и предназначены для специального ухода за новорожденными в палатах родильных домов.

Колыбель для новорожденных «007 – Панда» обладает приятным и эргономичным дизайном, что упрощает уход за новорожденными.

Конструкция каркаса позволяет регулировать угол наклона корзины.



Колыбель для новорожденных «007 – Панда» имеет следующие технические характеристики:

- Стенки корзины выполнены из прозрачного оптического акрила;
- Корзина крепится на металлический трубчатый каркас с четырьмя колесами диаметром 3”(7,62 см.) с двумя тормозами;
- Каркас выполнен из металла. Железные части покрываются алкидной краской с порошковым напылением. Толщина покрытия: эмалевая краска – 147 мкм.
- Встроенное устройство для установки положения Тренделенбурга, наклонного и горизонтального;
- Полка для принадлежностей большая с возможностью размещения различных принадлежностей для новорожденных, таких как бутылочки, пеленки, ватные шарики и др.;
- Полка для принадлежностей малая для небольших предметов по уходу за новорожденными;
- Матрац с чехлом из нетоксичного и невозгораемого поливинилхлорида;
- Переднее защитное ограждение (опция, заказ оговаривается отдельно).

Колыбель для новорожденных «007 – Панда» поставляются в следующей комплектации:

1. Корзина акриловая – 1 шт.
2. Каркас колыбели металлический – 1 шт.
3. Колеса (4 шт./упак.) – 1 уп.
4. Полка для принадлежностей большая – 1 шт.
5. Полка для принадлежностей малая – 1 шт.
6. Матрац с чехлом – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2 – Техническая спецификация

2.1 – Коды для заказа

Коды для заказа	Цвет и материал
007.007.600	Окрашенная (Синий)
007.008.600	Хромированная
007.010.600	Окрашенная (Песочный)
007.011.600	Окрашенная (Розовый)
007.012.600	Окрашенная (Светло-зеленый)

2.2 – Физические характеристики

Габаритные размеры и масса колыбели	
• Ширина	485 мм
• Высота	940 мм
• Длина	1065 мм
• Масса	14.7 кг
Габаритные размеры и масса корзины	
• Ширина	345 мм
• Высота	210 мм
• Длина	665 мм
• Масса	1.6 кг
Габаритные размеры и масса матраца с чехлом	
• Ширина	335мм
• Высота	15мм
• Длина	645мм
• Масса	0.2кг
Габаритные размеры и масса полки для принадлежностей большой	
• Ширина	460мм
• Высота	115мм
• Длина	750мм
• Масса	2.5кг

Габаритные размеры и масса полки для принадлежностей малой	
• Ширина	120мм
• Высота	50мм
• Длина	470мм
• Масса	0.50кг
Габаритные размеры и масса каркаса металлического	
• Ширина	450мм
• Высота	750мм
• Длина	1040мм
• Масса	9.45кг
Колеса	
• Плавающее колесо диаметром 3” (7.62 см) – с тормозом	2 штуки
• Плавающее колесо диаметром 3” (7.62 см) – без тормоза	2 штуки

2.3 – Максимальная нагрузка

• Корзина	10 кг
• Полка для принадлежностей большая	5 кг
• Полка для принадлежностей малая	1 кг
• Максимальная нагрузка на опору (решетку)	3 кг
• Максимальная нагрузка на ручку	2 кг

2.4 – Символы

	Подъемное движение колыбели		Предупреждение: см. прилагаемую документацию
---	--------------------------------	---	--

2.4.1 – Символы – упаковка

	Хрупкое		Эта сторона вверх
	Защищать от прямых солнечных лучей		Защищать от дождя
	Максимальная высота штабеля		Предупреждение: см. прилагаемую документацию

2.5 – Условия окружающей среды

♦ Диапазон рабочих температур	от -5 °C до +40 °C
♦ Диапазон рабочей влажности	от 10% до 90% - Не допускается конденсация

2.5.1 – Условия транспортировки и хранения

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок данного типа грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

♦ Диапазон температур хранения	от -5 °C до +55 °C
♦ Диапазон влажности	от 30% до 75%

2.6 – Дополнительная информация

Коррозионная стойкость	Электростатическое покрытие (стойкость 500 часов в солевом тумане)
Угол наклона корзины	0°, 15°, 30°
Устойчивость	Абсолютная устойчивость, фиксируется
Зазор между одним колесом и полом	1.8 мм
Усилие, необходимое для перемещения колыбели	22 Н
Усилие для вращения колес на горизонтальной поверхности	0.3 Н
Усилие, приложенное к педали для включения тормоза	64 Н
Усилие, необходимое для наклона корзины	28 Н
Марка акрила (корзина)	Прозрачный акрил, полиметилметакрилат Altuglas
Марка ПВХ (чехол для матраца)	Нетоксичный поливинилхлорид (SG-3)
Марка пены (матрац)	Негорючая полиуретановая пена (NulliFire FF 197)

3 – Детали и принадлежности

3.1 – Дополнительные детали и принадлежности

3.1.1– Матрац – Код для заказа: 007.088.600

Матрац из негорючей полиуретановой пены, покрытый пластичным чехлом из нетоксичного, гипоаллергенного невосгораемого ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3.

3.1.2– Корзина акриловая – Код для заказа: 007.100.320

Корзина выполнена из прозрачного акрила марки Artuglas с закругленными углами, которые облегчают очистку и антисептическую обработку.

	Предупреждение: Максимальная нагрузка на корзину - 10 кг.
--	--

3.1.3 – Полка для принадлежностей большая – Код для заказа: 007.102.321

Полка для принадлежностей большая выполнена из пластика и имеет отсеки для различных принадлежностей для новорожденных, таких как бутылочки, пеленки, ватные шарики и др.

	Предупреждение: Максимальная нагрузка на полку для принадлежностей большую - 5 кг.
--	---

3.1.4 – Полка для принадлежностей малая

Полка для принадлежностей малая входит в состав колыбели, сделана из пластика и предназначена для небольших предметов по уходу за новорожденными.

	Предупреждение: Максимальная нагрузка на полку для принадлежностей малую - 1 кг.
--	---

3.1.5– Переднее защитное ограждение – Код для заказа: 007.103.321

Защитное ограждение сделано из пластика и предназначено для уменьшения воздействия от удара колыбели при случайном ее передвижении.

	Предупреждение: Переднее защитное ограждение - это опция, заказ оговаривается отдельно.
--	---

3.1.6– Стойка для внутривенных инфузий – Код для заказа: 007.100.600


Стойка для внутривенных инфузий, хромированная, с основанием для фиксации, также может быть привинчена к металлическому каркасу колыбели для новорожденных «007 – Панда».

	Предупреждение: Стойка для внутривенных инфузий - это опция, заказ оговаривается отдельно.
--	--

3.1.7 – Держатель для карточки – Код для заказа: 092.206.321

Акриловый держатель устанавливается на колыбель для размещения карточки с фамилией ребенка.

	Предупреждение: Держатель для карточки - это опция, заказ оговаривается отдельно.
--	---

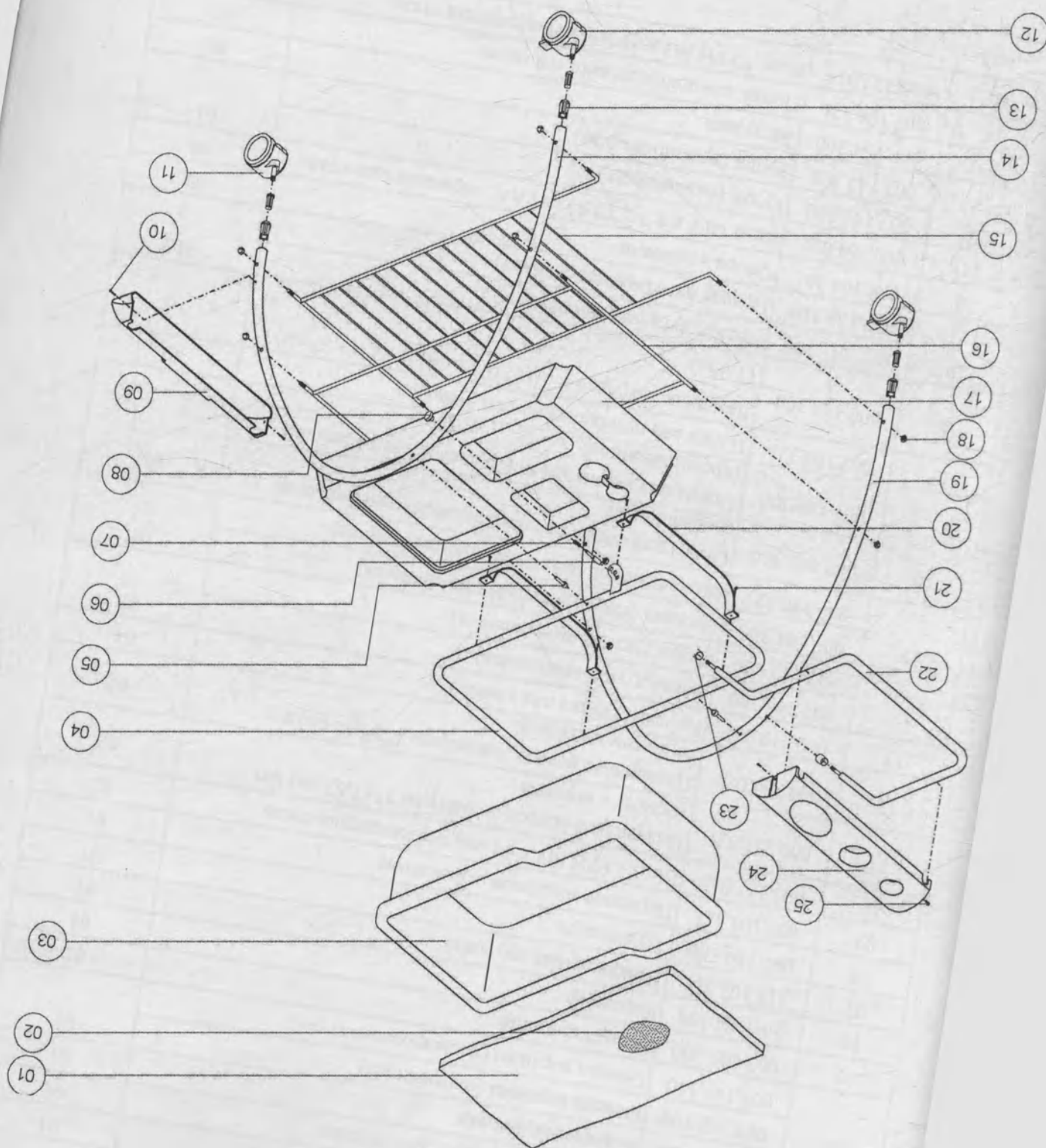

3.2 - Схема сборки и список деталей

Номер	Код	Название	Количество
01	000.131.100	Негорючая полиуретановая пена (матрац)	01
02	000.615.023	Белый чехол из ПВХ для матраца	01
03	007.100.320	Корзина акриловая	01
04	007.142.300	Основа корзины (окрашенная)	01
	007.147.300	Основа корзины (хромированная)	
05	007.105.300	Малый цилиндр	02
06	004.104.300	Фиксатор	01
07	315.102.050	Незакаленная пружина	01
08	007.189.300	Тяга запора	01
09	007.103.321	Переднее защитное ограждение	01
10	000.341.015	Винт СРРН М3 х 16 мм, нержавеющая сталь	02
11	000.231.021	Плавающее колесо диаметром 3" (7,62 см) без тормоза с втулкой	02
12	000.230.021	Плавающее колесо диаметром 3" (7,62 см) с тормозом с втулкой	02
13	000.219.021	Круглая втулка для колеса	04
14	007.146.300	Левая дуга (окрашенная)	01
	007.152.300	Левая дуга (хромированная)	
15	007.144.300	Нижняя опора (решетка) (окрашенная)	01
	007.150.321	Нижняя опора (решетка) (хромированная)	
16	007.143.300	Опора для полки для принадлежностей большой (окрашенная)	01
	007.149.300	Опора для полки для принадлежностей большой (хромированная)	
17	007.102.321	Полка для принадлежностей большая	01
18	000.119.300	Латунная заглушка R 5/16" (0,79 см) х 1/2" (1,27 см) х 11,0 мм.	10
19	007.145.300	Правая дуга (окрашенная)	01
	007.151.300	Правая дуга (хромированная)	
20	004.104.301	Опора колыбели	02
21	000.764.001	Винт CPF 6 х 3/8" (0,95 см) АА, нержавеющая сталь	04
22	007.141.300	Ручка (окрашенная)	01
	007.147.300	Ручка (хромированная)	
23	007.154.300	Заглушка	02
24	007.104.321	Полка для принадлежностей малая	01
25	000.337.015	Винт СРРН М3 х 10 мм, нержавеющая сталь	02

4 – Меры предосторожности, ограничения и предупреждения



Предупреждение: Данный раздел Руководства по эксплуатации содержит крайне важную информацию, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасности пациента и бесперебойной работы оборудования. Пожалуйста, прочитайте эту главу **ВНИМАТЕЛЬНО!!!**

- ♦ Если колыбель не нужно перевозить, убедитесь, что колеса зафиксированы тормозами, во избежание случайных передвижений колыбели.
- ♦ Неправильное использование колыбели может быть опасно для новорожденного, поэтому колыбель должна использоваться только персоналом, обладающим базовыми навыками и знанием функций колыбели.
- ♦ Очень важно проводить своевременный уход и техническое обслуживание, особенно тщательно следует проверять части и детали, подверженные износу.
- ♦ Не рекомендуется оставлять новорожденного в колыбели без наблюдения.
- ♦ При использовании положения Тренделенбурга обязательно проверяется стабильность конструкции и правильное положение тормозов.
- ♦ Никогда не используйте чистящие средства, которые могут повредить акриловую корзину.
- ♦ Никогда не превышайте допустимую нагрузку на колыбель, указанную в п. 2.3.
- ♦ При использовании лампы фототерапии, убедитесь в том, что оборудование работает корректно по отношению к колыбели для новорожденных «007-Панда».
- ♦ Всегда используйте только оригинальные запасные части производства ФАНЕМ ЛТДА.


5 – Сборка оборудования

Возможны два варианта заводской упаковки оборудования:

5.1 – Сборка для местного рынка

Оборудование поступает в практически собранном виде, следует только прикрутить малую полку для принадлежностей при помощи ключа на $\frac{1}{2}$ " (1,27 см) и двух латунных заглушек $5/16$ "(0,79 см)x $1/2$ "(1,27 см).

После этого остается только установить акриловую корзину колыбели на своё место.

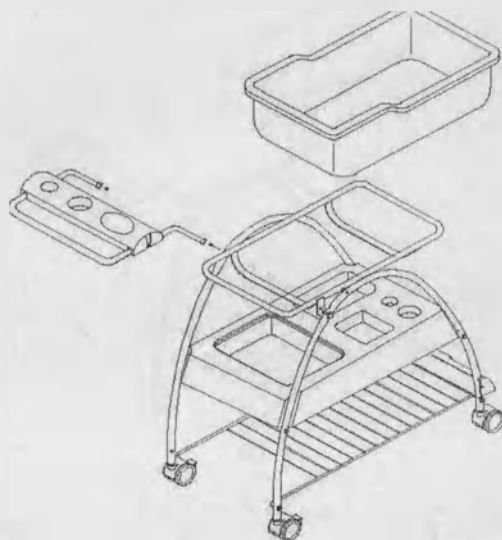

Предупреждение: Убедитесь в том, что все соединения надежно зафиксированы и регулярно проверяйте все части и детали, подверженные износу.

5.2 – Поставка для внешнего рынка

Оборудование поставляется заказчику в частично смонтированном виде, окончательная сборка проводится в два отдельных этапа:

• Этап 1


Расположите одну из боковых дуг колыбели, как это показано на схеме ниже, между дугами, после чего расположите и зафиксируйте нижнюю опору (решетку), привинтив ее с помощью ключа на $\frac{1}{2}$ "(1,27 см) и двух латунных заглушек $5/16$ "(0,79 см)x $1/2$ "(1,27 см).

Прикрутите опору для большой полки для принадлежностей к дуге с помощью ключа на $\frac{1}{2}$ " и двух латунных заглушек $5/16$ "(0,79 см)x $1/2$ "(1,27 см).

Соедините малый цилиндр с дугой, и смонтируйте основу корзины, убедившись, что малый цилиндр, гайка и болт блока положения Тренделенбурга совпали правильно.

Установите большую полку для принадлежностей на место, и продолжите сборку другой боковой дуги, повторив описанные ранее этапы.

После этого этапа у вас будет собранный каркас колыбели, готовый ко второму этапу сборки – ее завершению.

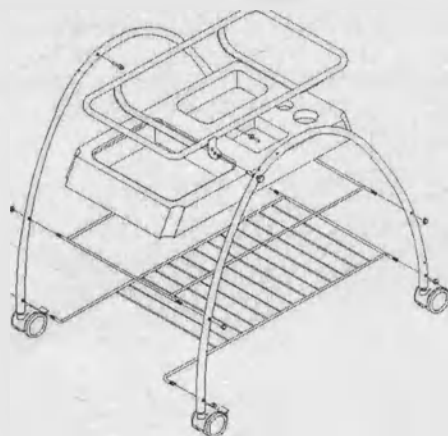


Этап 2

После завершения первого этапа сборки, присоедините и зафиксируйте переднюю ручку с малой полкой для принадлежностей, прикрутив ее при помощи ключа на $\frac{1}{2}$ " (1,27 см) и двух латунных заглушек $\frac{5}{16}$ " (0,79 см) x $\frac{1}{2}$ " (1,27 см).

Переднее защитное ограждение закрепите под боковыми углами, воспользовавшись малым ключом и 2 винтами CRRH 13 x 16 мм.

После этого установите акриловую корзину для замороженного на своё место.

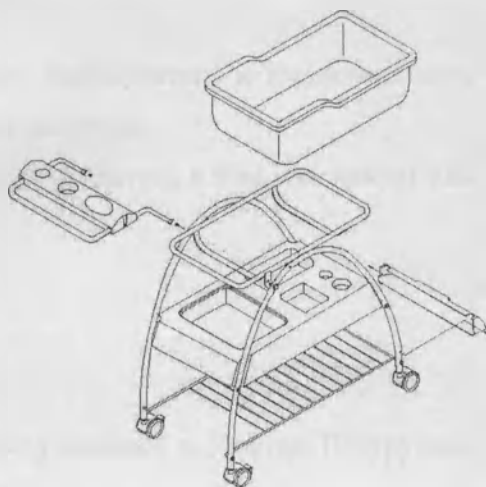

Предупреждение: Убедитесь в том, что все соединения надежно зафиксированы и регулярно проверяйте все части и детали, подверженные износу.

6 – Правила работы

Управление оборудованием заключается в придании наклонного, приподнятого и горизонтального положения с помощью устройства для установки положения Тренделенбурга.

Когда колыбель используется совместно с лампами фототерапии, убедитесь в том, что лампы для фототерапии соответствуют всем нормам безопасности.

7 – Техническое обслуживание и очистка

В данном разделе представлены инструкции по техническому обслуживанию и очистке. Инструкции по сборке и разборке представлены в разделах 3 и 5. Правильное техническое обслуживание – это в первую очередь, своевременная профилактика, и тщательная проверка частей и деталей, подверженных износу.

7.1 – Очистка

Очистку рекомендуется проводить при получении оборудования и каждый раз после смены пациента, или же в соответствии с протоколами местного комитета по инфекционному контролю.

Очистка и антисептическая обработка колыбели обязательна.

- ♦ Аккуратно протрите колыбель мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Можно использовать только такие дезинфицирующие средства, которые не повреждают акриловые и металлические детали колыбели, и не разъедают краску (например, дезинфицирующее средство для поверхностей от фирмы Ammonia Quaternary).
- ♦ Протрите все влажные поверхности сухой мягкой тканью, чтобы удалить любые остатки жидкости.
- ♦ Не используйте дезинфицирующие средства, в состав которых входит спирт, поскольку спирт может растворить акрил.



Предупреждение: Никогда не ставьте акриловую корзину непосредственно под лампу для фототерапии, не снабженную соответствующими фильтрами. Ультрафиолетовое излучение способно вызывать трещины в акриле и значительно снизить его прозрачность. Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие абразивные вещества, спирт или гипохлорит натрия, так как это может повредить акриловые и другие детали колыбели. Не используйте чистящие губки из абразивных материалов и/или металла.

7.2 – Техническое обслуживание

7.2.1 – График профилактического технического обслуживания

Часть (деталь)	Вид проверки	Исполнитель
Устройство для установки положения Тренделенбурга	Постоянная проверка	Пользователь / Техник
Корзина акриловая	Постоянная проверка	Пользователь / Техник
Каркас и колеса диаметром 3”(7,62 см)	Каждые 3 месяца (проверка)	Пользователь / Техник
Матрац с чехлом	Ежегодно (замена)	Пользователь / Техник
Очистка и дезинфекция	При каждой смене пациента	Пользователь

7.2.2 – Контакты

- Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «РИПЛ»

Россия, 125130, г.Москва,

Старопетровский проезд, д.7А, стр. 3.

Телефон: (495) 258-25-24,

Факс (495) 648-0363.

E-mail: info@reepl.ru

- По техническим вопросам обращаться к:

Orlando Rossi Filho

CREA/SP 98.435/D

- Официальный представитель в странах Центральной и Восточной Европы

Francisco Ruiz Cofrades

Helianthus Medical S.L.

FANEM EUROPE L.R.

HELIANTHUS MEDICAL S.L.

C-FISICAS 67 - POL.IND. URTINSA II

28923 – ALCORCON - MADRID – SPAIN (МАДРИД, ИСПАНИЯ)

ТЕЛ. - +34-91-611-1912

7.3 – Требования к охране окружающей среды и утилизация

С целью защиты окружающей среды утилизируйте изделие согласно местному законодательству. В случае если необходима утилизация оборудования или его деталей, и пользователь не определил конкретного способа, то оборудование и его детали подвергаются переработке и/или повторному использованию в соответствии с действующим местным законодательством.



Предупреждение: Оборудование и его детали должны утилизироваться после очистки и дезинфекции.

Несоблюдение данных условий снимает с поставщика, или с его официального представителя всю ответственность за возможные отрицательные последствия для окружающей среды и/или человека.

7.4 – Запасные части

Список доступных запасных частей представлен в разделе 3 настоящего Руководства: «Детали и принадлежности» вместе с кодами для заказа. Для приобретения принадлежностей и других необходимых товаров обращайтесь напрямую в сервисный центр ФАНЕМ ЛТДА или к официальному представителю.

Безопасность и безотказная работа настоящего оборудования гарантируются только в том случае, если техническое обслуживание и ремонт произведены специалистами службы технической поддержки ФАНЕМ ЛТДА или персоналом, обученным в ФАНЕМ ЛТДА, и получившим соответствующее разрешение.

ФАНЕМ ЛТДА. не несет ответственности за повреждения оборудования и, как следствие, за вред, нанесенный пациенту, в том случае, если ремонт или замена деталей осуществлялись не уполномоченным на то персоналом, или же были использованы неоригинальны запасные части.

Все материалы, используемые в частях и деталях, подверженных износу, гарантируют безупречную работу в соответствии со своими исходными характеристиками, они нетоксичны, не воспламеняются и являются биосовместимыми.



Предупреждение: Всегда используйте только оригинальные запасные части ФАНЕМ ЛТДА.

Руководство по эксплуатации
Колыбель для новорожденных «007 – Панда»


7.5 – Диагностика неполадок

Признак	Причина	Решение
Затруднение работы устройства для установки положения Тренделенбурга	Смещение устройства для установки положения Тренделенбурга и фиксатора	Правильно соедините устройство для установки положения Тренделенбурга и фиксатор
	Деформация фиксатора	Обратитесь в службу технической поддержки

8 – Гарантия и техническая поддержка

- ◆ Срок службы колыбели для новорожденных «007 – Панда» составляет 7 (семь) лет.
- ◆ Как и остальное оборудование ФАНЕМ ЛТДА., колыбель для новорожденных «007 – Панда» имеет гарантию в 1 (один) год в отношении любых дефектов деталей и производства (см. прилагаемый гарантийный сертификат).
- ◆ За помощью в гарантийном и негарантийном обслуживании обращайтесь только к квалифицированным специалистам службы технической поддержки и не позволяйте неквалифицированным работникам наносить повреждения или менять характеристики оборудования.
- ◆ Всегда используйте только оригинальные запасные части ФАНЕМ ЛТДА.
- ◆ Не нуждается в регистрации в ANVISA.
- ◆ Адрес сервисного центра:



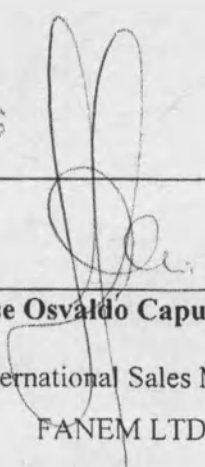

Jose Osvaldo Caputto Flosi
International Sales Manager
FANEM LTDA.

5.23° TAP

23 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
TABELIAO DE NOTAS
Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4599 www.23tabeliao.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
Edelfonso JOSE OSVALDO CAPUTO FLORES
São Paulo 31 de Agosto de 2015. Valor R\$ 4.80
em test. da verdade
LUCIANA GUIMARAES NEVES - ESCRIVENTE
Selo(s): 1046-AA655282
Válido somente com selo de Autenticidade

23 Luciana Guimarães Neves
Escritora
Rua Duarte de Azevedo, 311
TABELIAO DE NOTAS Santana-SP
FIRMA 1
1046-AA655282

23 TABELIAO DE NOTAS

23 Rua Duarte de Azevedo, 311
CEP 02036-021 - Santana
São Paulo - SP - Tel: 4063-8885

OS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS
DESTE DOCUMENTO, PRODUZIRÃO
EFEITOS SOMENTE NO EXTERIOR.
Para que produza efeitos no BRASIL,
deverá, este documento, ter seu
texto vertido em vernáculo e ser
REGISTRADO em REGISTRO PÚBLICO.



Перевод с английского языка на русский язык

Штамп:

/Подпись/

Хосе Освальдо Капутто Флоси

Менеджер по международным продажам

FANEM LTDA

Печать: FANEM LTDA

Г. Сан-Паулу, Бразилия

Перевод с португальского языка на русский язык

Штамп:

Жизелль Диас Родригез Оливьера де Баррос

Настоящим я подтверждаю подлинность подписи г-на Хосе Освальдо Капуто Флоси.

Г. Сан Пауло, 31 августа 2015 г., пошлина: 4,80 бразильских реала

Наклейка: Аутентификация нотариат Бразилии. 1046AA655281

Перевод с португальского языка на русский язык

Штамп:

Жизелль Диас Родригез Оливьера де Баррос

Настоящим я подтверждаю подлинность подписи г-на Хосе Освальдо Капуто
Флоси.

Г. Сан Пауло, 31 августа 2015 г., пошлина: 4,80 бразильских реала

Наклейка: Аутентификация нотариат Бразилии. 1046AA655282

Переводчик,

Егорова Алина Алексеевна

Город Москва.

Одиннадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Егоровой Алиной Алексеевной, в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-40.275

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Нотариус:



Нотариус:

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 20 лист (-а, -ов)



14 09 15

Город Москва

Я, Сухова Эльвира Викторовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо оmissions нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа, соответствия изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за №

по тарифу



скреплено печатью
страниц

Нотариус