

Инструкция по применению изделия

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ (подпись)

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский

Василий Михайлович

«24» _____ 11



ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Пакетов полипропиленовых одноразовых с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов - «АБРИС+» (далее Пакеты).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пакеты предназначены для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов методами автоклавирования и обработки в СВЧ-поле.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакеты представляют собой пакеты 12 типоразмеров (таблица 1).

Ширина (мм)	Высота (мм)
255	400
300	400
300	500
300	600
400	600
400	750
500	700
500	750
400	780
650	780
650	700
650	750

Таблица 1.

Пакет изготовлен из прозрачного материала в соответствии с СанПин 2.1.7.728.

Пакет изготовлен из прозрачного термостойкого полипропилена (температурная устойчивость до 150°C).

Пакет снабжён индикатором паровой стерилизации, который меняет цвет индикаторной полосы со светло-бежевого на коричневый при достижении 134°C.

Пакет изготовлен из прозрачного материала для визуализации его наполняемости.

На пакете флесографическим способом нанесена информация об изделии и инструкция по применению.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Перед применением проверить целостность пакета.
2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть края наружу и накрыть крышкой или разместить в напольном держателе (стойке-тележке).

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно завязать, для обеспечения доступа воздуха. Пакет завязывают замком из полимера, бумажным или хлопковым шпагатом или другим изделием, выдерживающим соответствующий температурный режим.

Закрытый пакет транспортировать к месту утилизации.

2. Изделия, имеющие колющие и режущие поверхности, собирать в специальный контейнер для использованных игл, лезвий и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.
3. Пакет, расположенный в напольном держателе (стойке-тележке), после заполнения снять с держателей, загнуть край пакета петлей и закрыть (см. п. 3).
4. Поместить пакет в установку для обеззараживания без использования дополнительных емкостей и провести обработку при одном из следующих режимов:
 - утилизацию отходов с биологическими загрязнениями методом автоклавирования при температуре 134 °C в течение 30 минут;
 - обеззараживание отходов ЛПУ классов Б и В в СВЧ установке в течение 60 минут.
5. Индикатор при достижении температуры 134 °C меняет цвет индикаторной полосы со светло-бежевого на коричневый.
6. При обеззараживании отходов в СВЧ установке использовать индикатор на 110 °C

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок хранения пакетов в упаковке предприятия-изготовителя не менее 5 лет.

Пакеты при эксплуатации, транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 при температурах от (-40) °C до (+40) °C, относительной влажности 98% при температуре (+25) °C.

Должность ответственного за
производство

Продукт-медицина ООО "НПФ АТЕМИС +"
Буркина Светлана Николаевна Ф.И.О.
(подпись)

Должность руководителя ЛПУ,
проводившего медицинские
испытания

Ф.И.О.
(подпись, печать)

Согласовано
"26" апр. 2017 г. № 17/Н-78
(подпись, печать)

Прошито и пронумеровано
2 (два) лист
Генеральный директор
ООО «НПО АБРИС»
Степановский

