

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

изделия медицинского назначения

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: «Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария» (далее – контейнеры).

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Контейнеры предназначены для сбора, дезинфекции, транспортировки и уничтожения колющих и режущих медицинских отходов классов Б и В в медицинских учреждениях и их подразделениях с целью снижения риска профессиональных заболеваний, профилактики внутрибольничных инфекции и создания эргономичных условий работы медицинского персонала.

Изделие предназначено для самостоятельного использования медицинскими работниками, для сбора медицинских отходов, образующихся при проведении инъекций и других медицинских манипуляций, связанных с применением колющих и режущих медицинских инструментов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1. Перед началом работы контейнер закрепляют в фиксаторе на поверхности рабочего стола с целью предотвращения его случайного опрокидывания.

2. После проведения медицинских манипуляций с использованием одноразовых колющих или режущих медицинских инструментов (шприцы, вакуумные системы для отбора венозной крови, скарификаторы, скальпели и др.), открывают клапан контейнера и инструмент помещают в основную емкость контейнера (за исключением одноразовых вакуумных систем для отбора венозной крови и одноразовых шприцев). С одноразовых вакуумных систем для отбора венозной крови и одноразовых шприцев (за исключением самоблокирующихся, для которых рекомендуется использовать игло-отсекатели, или деструкторы игл) снимают иглу с использованием подходящего пластикового профиля внутри горловины. Иглу сбрасывают внутрь контейнера, а корпус шприца (без иглы) – в отдельную, специально выделенную для этой цели емкость с дезинфицирующим раствором. Клапан контейнера после помещения туда использованных инъекционных игл (скарификаторов, скальпелей и др.) закрывают.

3. Контейнер заполняют отходами на $\frac{3}{4}$ объема. После этого клапан контейнера плотно закрывают и фиксируют при помощи липкой ленты. Закрытый контейнер транспортируют к месту временного хранения, или уничтожения.

Не рекомендуется помещать в контейнер перевязочный материал и другие предметы, не предусмотренные в названии изделия.

При использовании дезинфицирующих растворов их необходимо удалить из контейнера до его уничтожения.

Генеральный директор _____



В.М. Марковский