

Инструкция по применению изделия

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20__ г. № _____

_____ (подпись)

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский

Василий Михайлович

«24» _____ 11



ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Пакетов полиэтиленовых одноразовых,
для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г -
«АБРИС+»(далее Пакеты).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пакеты предназначены для сбора, хранения и утилизации отходов ЛПУ классов А, Б, В, Г.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакеты представляют собой пакеты основных типоразмеров (таблица 1).

Ширина (мм)	Высота (мм)
600	500
800	600
1000	600

Таблица 1.

По согласованию с заказчиком пакеты могут исполняться и в других типоразмерах.

Пакеты изготавливаются из полиэтилена низкого давления в соответствии с цветовой маркировкой согласно классам отходов ЛПУ: А-белый, Б-желтый, В-красный, Г-черный, (в соответствии с СанПин 2.1.7.728). При изготовлении пакетов с добавкой обеспечивающей биоразложение полиэтилена - полиэтилен имеет в своем составе специальную добавку d2w, обеспечивающую способность к биоразложению в течение : от 90 суток до 3 лет.

На пакете флесографическим способом нанесена информация об изделии и маркировочные поля (в соответствии с СанПин 2.1.7.728).

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Перед применением проверить целостность пакета. Внести информацию в маркировочные поля (в соответствии с СанПин 2.1.7.728).

2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть края наружу и накрыть крышкой или разместить в напольном держателе (стойке-тележке).

1. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, плотно завязать. Пакет завязывают замком из полимера, на котором закрепляют маркировочную бирку из бумаги. На бирке дублируется информация нанесенная на пакет.

2. Изделия, имеющие колющие и режущие поверхности, собирать в специальный контейнер для использованных игл, лезвий и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.


4. При использовании физических методов обеззараживания отходов ЛПУ: поместить пакет в установку для обеззараживания в пакете для термической утилизации, либо в специальной термостойкой емкости.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пакеты при эксплуатации, транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 при температурах от (-40) °С до (+40) °С, относительной влажности 98% при температуре (+25) °С.

3а Бродяж.-мешочничество в ВЛГ "НПР. МВРС + "
Буркина Свободы Николаевки Дурн Ф.И.О.
(ПОДПИСЬ)

_____ Ф.И.О
(подпись, печать)

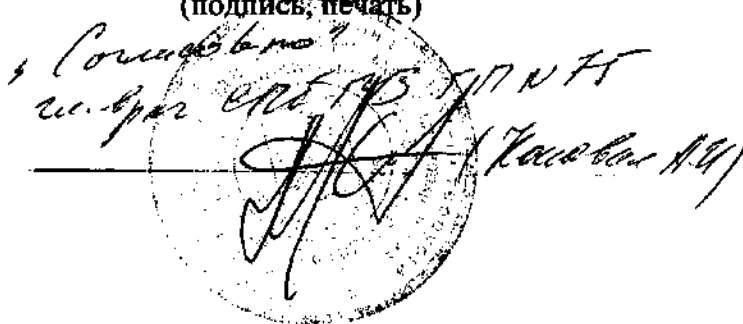

Прошито и пронумеровано
2 (296-01) лист

Генеральный директор
ООО «НПС «АРИС+»

В.М. Марковский

