

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
 От _____ 201__ г.
 № _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский
 _____ 2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГЕЛЬМИНТЫ ПО РАБИНОВИЧУ (ДИАХИМ-Набор реагентов для исследования на гельминты по Рабиновичу)

1. Назначение

Набор реагентов для исследования на гельминты по Рабиновичу предназначен для обнаружения яиц гельминтов в клинико-диагностических лабораториях.

Набор рассчитан на анализ 50 проб.

2. Характеристика набора

2.1. Принцип метода

Яйца гельминтов обнаруживают в перианальных соскобах, сделанных с помощью клеевого состава.

2.2 Состав набора:

1. Клеевой состав (диэтиловый эфир диметиленгликоля, 12,5 мл, касторовое масло 6,5 мл, клеол 22, 5 мл, этиловый спирт 6, 25 мл. - 1 флакон (50 мл).
2. Стекланные палочки (лопатки) (размер 0,3×10 мм) - 50 шт.

3. Меры предосторожности

Потенциальный риск применения набора – класс 1 (ГОСТ Р 51609-2000).

При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР", Москва, 1981 г.

При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы биологических жидкостей

человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять или передавать возбудителей различных инфекций.

Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

4. Оборудование и материалы:

- стекла предметные;
- палочки стеклянные или деревянные;
- валик или резиновая пробка;
- пинцет;
- секундомер;
- микроскоп.

5. Анализируемые пробы

Соскобы с периаанальных складок.

6. Проведение анализа

Клеевой состав - готов к применению.

После вскрытия флакона реактив можно хранить при комнатной температуре (18-25) °С в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора.

6.1 Обработка стеклянных лопаток клеевым составом.

Сухую лопаточку обмакнуть в клей; просушить не менее 2-4 ч (стеклянная палочка при этом должна находиться лопаточкой вверх для стекания избытка клея и образования равномерной пленки). Клей, обтекая лопаточку, образует прозрачную клейкую пленку, сохраняющуюся после высыхания не менее недели (что позволяет готовить палочки заранее). Установить глазные палочки (лопаточки) в специальный штатив, где каждая ячейка имеет свой номер, или использовать пронумерованные пенициллиновые флаконы, предварительно закрепив ручку глазной палочки в резиновой пробке от этого пузырька.

6.2 Проведение исследования

Обработать периаанальные складки лопаткой с высохшим клеевым составом и микроскопировать при увеличении: объектив $\times 8$ или $\times 10$, окуляр $\times 7$ или $\times 10$ (для уточнения морфологического строения яиц гельминтов объектив $\times 40$)

7. Оценка результатов

Яйца гельминтов выявляются согласно видовой принадлежности.

Позволяет просмотреть в 20-30 раз больше препаратов, чем в нативном мазке.

8. Условия хранения и эксплуатации набора

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при комнатной температуре (18-25) °С в течение всего срока годности.

Срок годности – 2 года.

Клеевой состав после вскрытия флакона можно хранить при комнатной температуре в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора.

Стеклянные лопатки можно хранить при комнатной температуре в течение срока годности набора.

По вопросам, касающимся качества набора, обращаться в ООО «НПФ «АБРИС+» по адресу: 196135, Россия, Санкт-Петербург, а/я 355; 196143, Россия, С.Петербург, пр. Гагарина, 65 ; тел./факс:(812) 727-24-40, 727-88-18; e-mail: abris@abrisplus.ru; <http://www.abrisplus.ru>.

Заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики
ГОУ ДПО СПбМАПО
д.м.н., профессор

А.В.Козлов

Директор по науке
ООО «НПФ «АБРИС+», к.б.н.

Ю.Г.Попов

«СОГЛАСОВАНО»

Заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики
ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России
д.м.н., профессор

до 07.12

В.В. Долгов

Подпись _____
удостоверяю:
Специалист по кадрам РМАПО
Подпись _____
“ ” 20__ года