

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
«ЛЕОНАРДА-СЕРВИС»

Резвов А.В.

« 15 » декабря 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению бинта медицинского эластичного антимикробного

Бинт медицинский эластичный антимикробный (далее по тексту бинт) предназначен для профилактики и лечения варикозной болезни и её осложнений, предупреждение травм суставов, связок, мышц, посттравматические восстановления помогая зафиксировать в нужном положении пострадавшую конечность или предотвратить отек.

Антимикробные свойства при использовании предложенного бинта достигнуты благодаря тому, что обращённая к телу грунтовая многофиламентная синтетическая нить, с антимикробной добавкой, постоянно находится в контакте с кожей и препятствует размножению грибков, грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также, пропуская влагу, отводит её в верхний слой бинта, состоящий из покровной нити, которая впитывает влагу и выводит её наружу, обеспечивая сухость тела в период использования бинта.

Стирать бинт следует в ручную, мыльным раствором, по мере загрязнения, в воде с температурой до 40 ° С. Аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Категорически запрещено глажение.

Гарантийный срок эксплуатации бинта 3 месяца со дня приобретения.

Срок годности изделия – 5 лет.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы.

Проконсультироваться с врачом по вопросам использования и техники наложения бинта эластичного антимикробного.

Время использования бинта определяет врач.


Предостережение! Появление онемения, болей, ощущения пульсации говорят о необходимости перебинтования.

Подготовка к работе изделия: подобрать бинт по длине, вскрыть упаковку, достать бинт, наложить на больную конечность и зафиксировать.

Правила хранения и использования:

- бинт должен храниться при комнатной температуре на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, не сушить на отопительных приборах.
- использовать согласно инструкции.

Генеральный директор

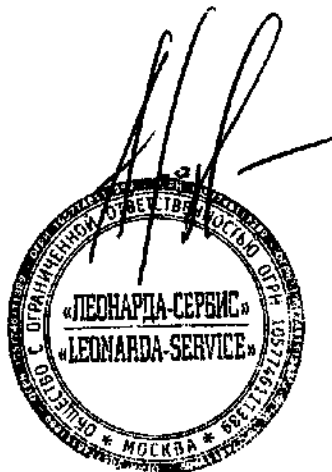

А.В. Резвов