



«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ООО "Элита-Проф"

Арсланова Ф.З.

«20» февраля 2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГБОУ ВПО Тверской ГМУ
Минздрава России

М.Н. Калинин

«20» февраля 2016 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ НМЛ 001.00.0000

Мебель медицинская

по ТУ 9452-001-89184702-2015

2016 г.

Содержание

Описание и работа:

1.1. Назначение изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.3
1.3. Состав изделия.....	стр.26
1.4. Устройство и работа.....	стр.50
1.5. Маркировка.....	стр.51
1.6. Упаковка.....	стр.51
II. Показания к применению.....	стр.53
III. Противопоказания к применению.....	стр.53
IV. Использование по назначению.....	стр.53
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.53
4.2. Подготовка изделия к работе.....	стр.53
4.3. Использование изделия.....	стр.53
V. Техническое обслуживание.....	стр.54
VI. Хранение:	
6.1. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения.....	стр.54
6.2. Гарантийные сроки хранения.....	стр.54
VII. Транспортирование.....	стр.54
VIII. Утилизация.....	стр.54
IX. Контактные данные производителя.....	стр.55
X. Лист регистрации изменений.....	стр.56
XI. Приложение.....	стр.57.

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на мебель медицинскую (далее - мебель), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

I. Описание и работа:

1.1. Назначение изделия.

Мебель медицинская предназначена для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

Область распространения: широкого применения (для обстановки больниц, поликлиник и других медицинских учреждений).

1.2. Технические характеристики.

Мебель представляет собой группу (группа мебельных изделий с широкой вариативностью по составу, объединенных между собой архитектурно-художественной (стилистической) задачей, предназначенных для обстановки различных функциональных зон помещения ЛПУ).

1. Столы рабочие:

СМЛ-1 стол с прямоугольной столешницей, бортом со стороны задней стенки на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы соединенных боковинами и задней стенки;

СМЛ-3 стол с прямоугольной столешницей, бортом со стороны задней стенки и двумя встроенными ящиками на всю площадь под столешницей на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы соединенных боковинами и задней стенки;

СМЛ-5 стол с прямоугольной столешницей, бортом со стороны задней стенки и встроенной тумбой под столешницей с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной двери на металлическом каркасе из пяти ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

СМЛ-7 стол с прямоугольной столешницей, бортом со стороны задней стенки и двумя встроенными тумбами под столешницей вдоль левой и правой боковины на расстоянии друг от друга, каждая тумба с двумя горизонтальными отделениями с распашными дверями на металлическом каркасе из восьми ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

Габаритные размеры: СМЛ-1 рис.1, СМЛ-3 рис. 2, СМЛ-5 рис.3, СМЛ-7 рис. 4.

Функциональные размеры столов таблица № 1.

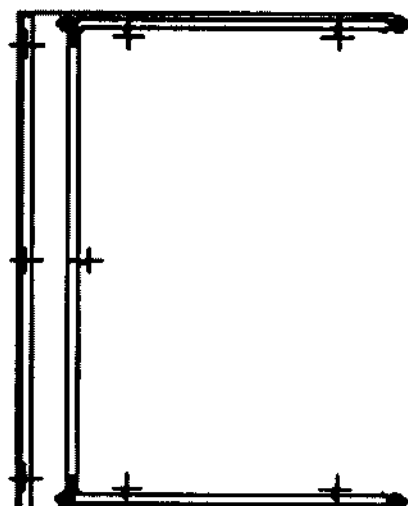
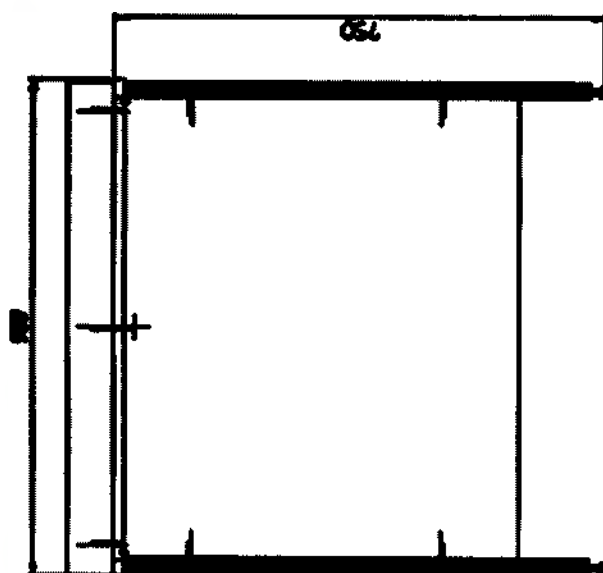
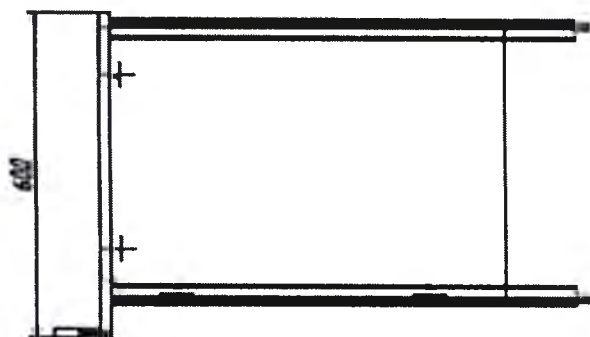
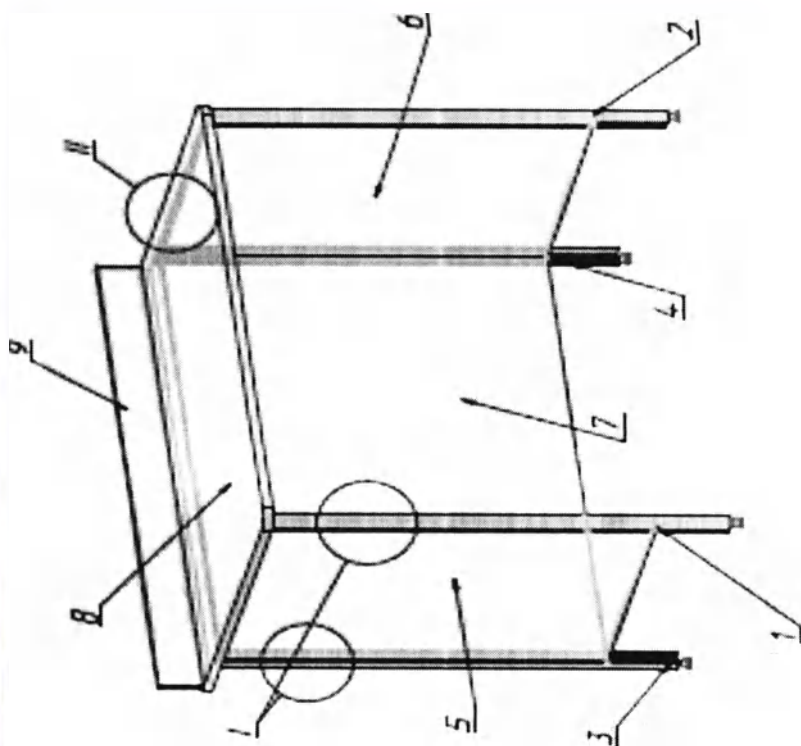


Рис.1. Габаритные размеры СМ/Т-1

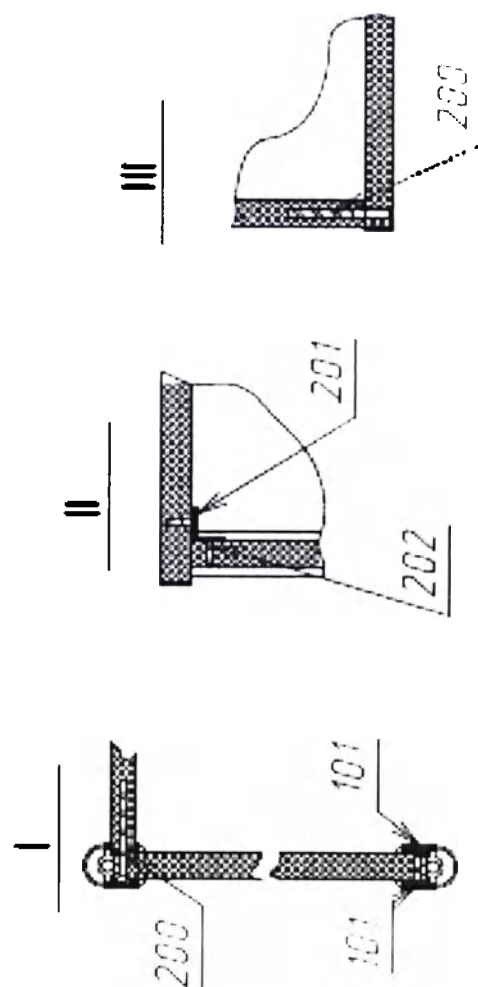
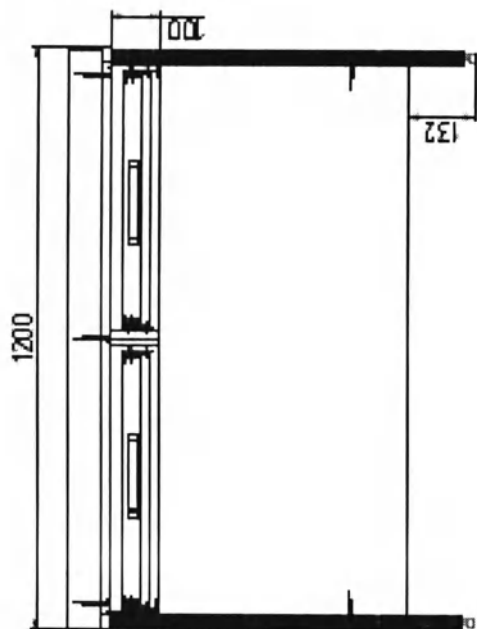
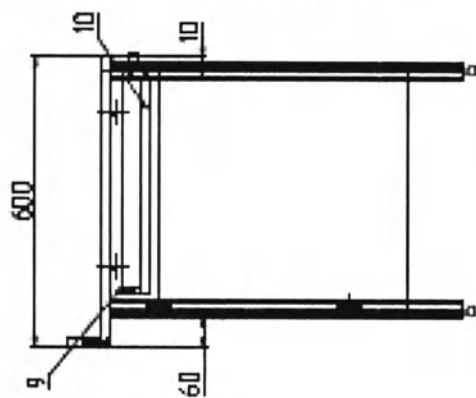
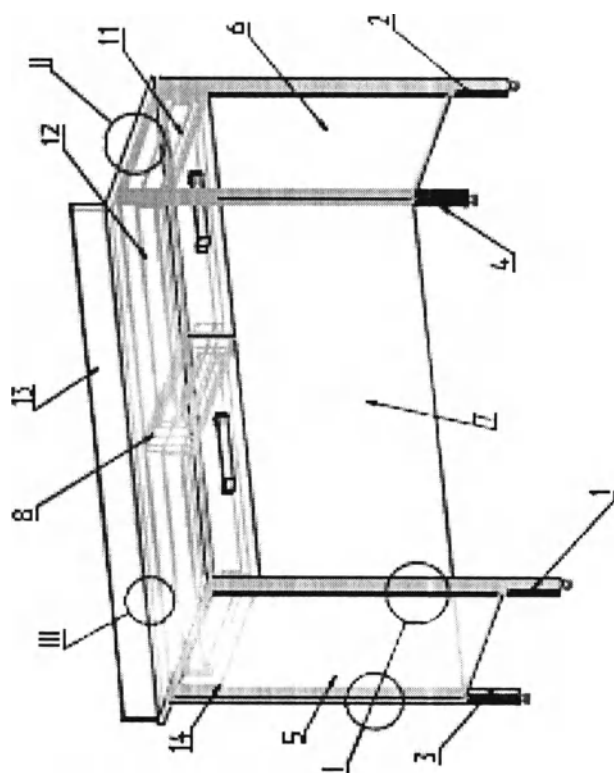


Рис.2. Габаритные размеры С.М.Т-3

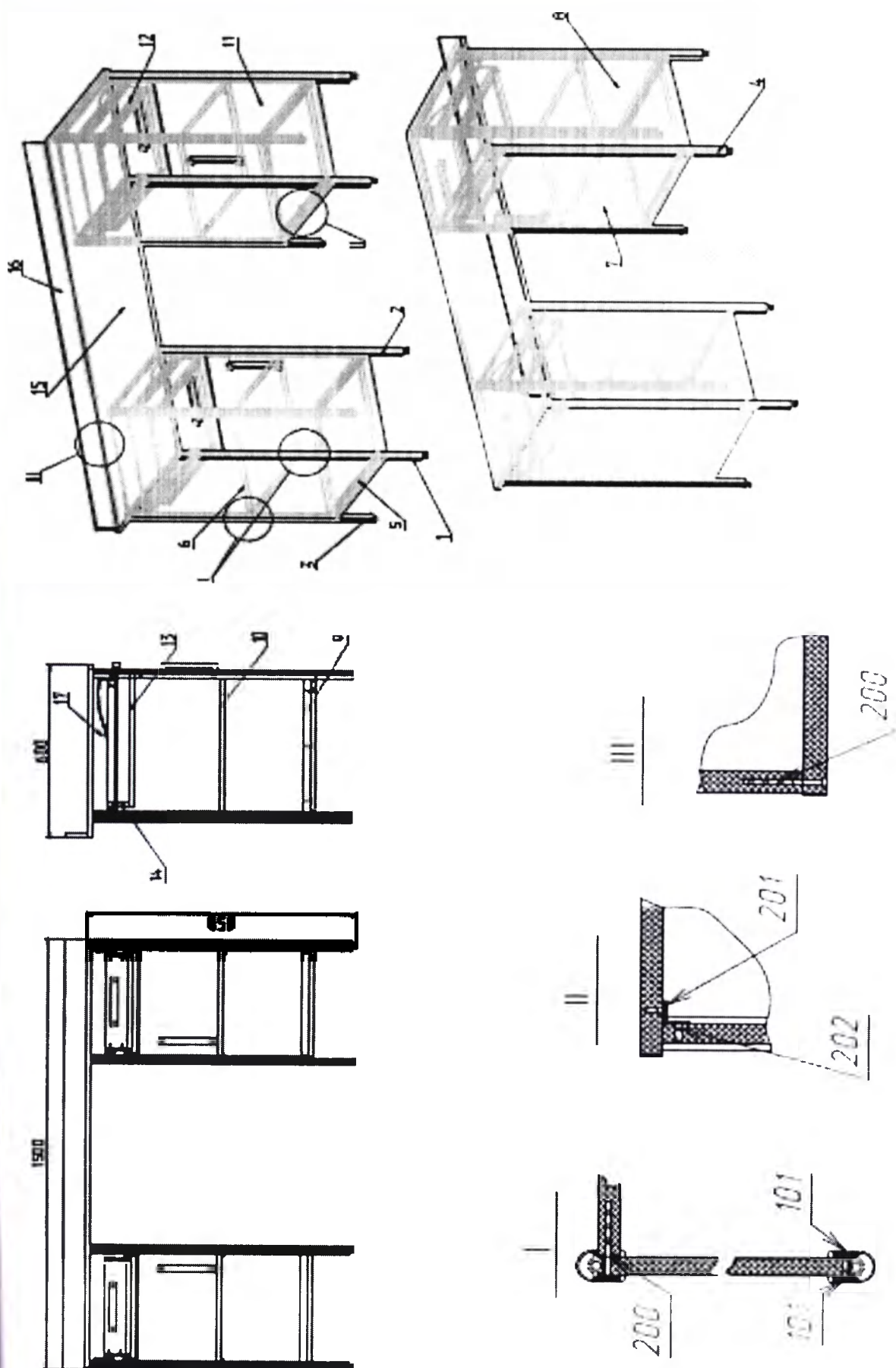


Рис.4. Габаритные размеры СМЛ-7

2. Тумбы:

СТМЛ-2 тумба с бортом со стороны задней стенки с одним отделением наружного выдвижного ящика и с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной дверине на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

СТМЛ-11 тумба с бортом со стороны задней стенки с двумя горизонтальными отделениями на двух распашных дверях на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ТМЛ-2 тумба с одним отделением полого ящика и с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной двери на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ТМЛ-3 тумба с одним отделением наружного выдвижного ящика и с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной двери на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ТМЛ-12 тумба с одним отделением полого ящика и с двумя горизонтальными отделениями на двух распашных дверях на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

Габаритные размеры СТМЛ-2 рис. 5, СТМЛ-11 рис.6. ТМЛ-2 рис. 7. ТМЛ-3 рис. 8. ТМЛ-12 рис. 9.

Функциональные размеры СТМЛ-2, СТМЛ-11, ТМЛ-2, ТМЛ-3, ТМЛ-12 таблица № 2.

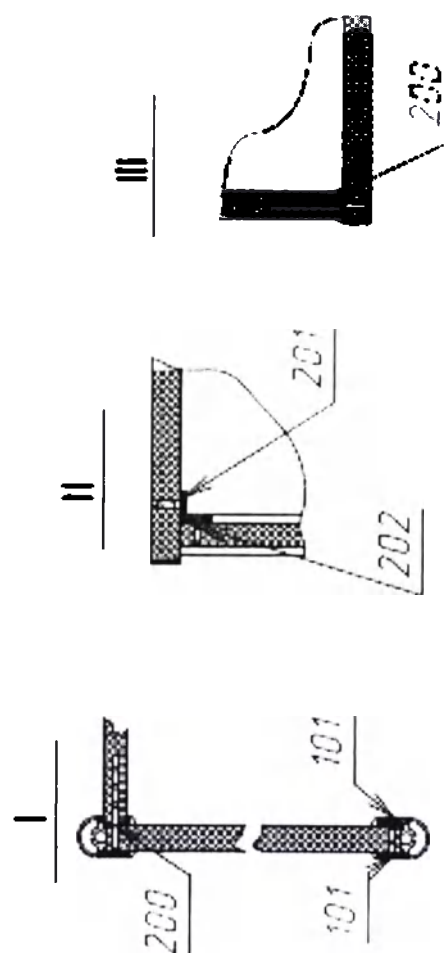
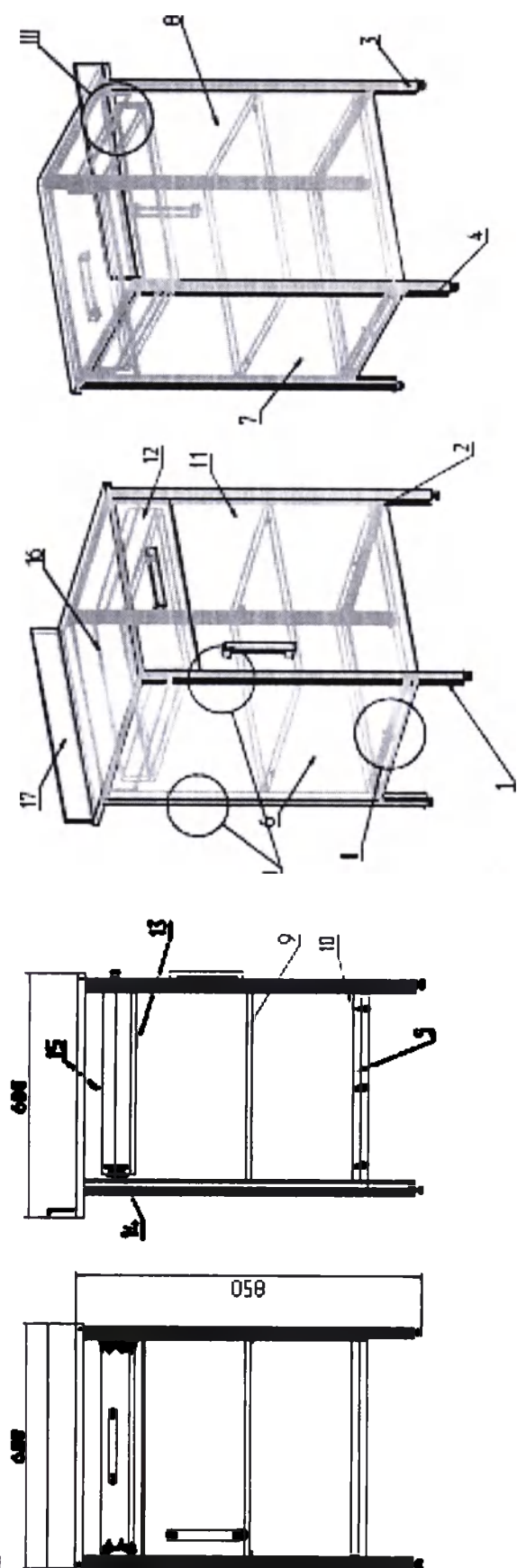


Рис. 5. Габаритные размеры СТМ-1-2

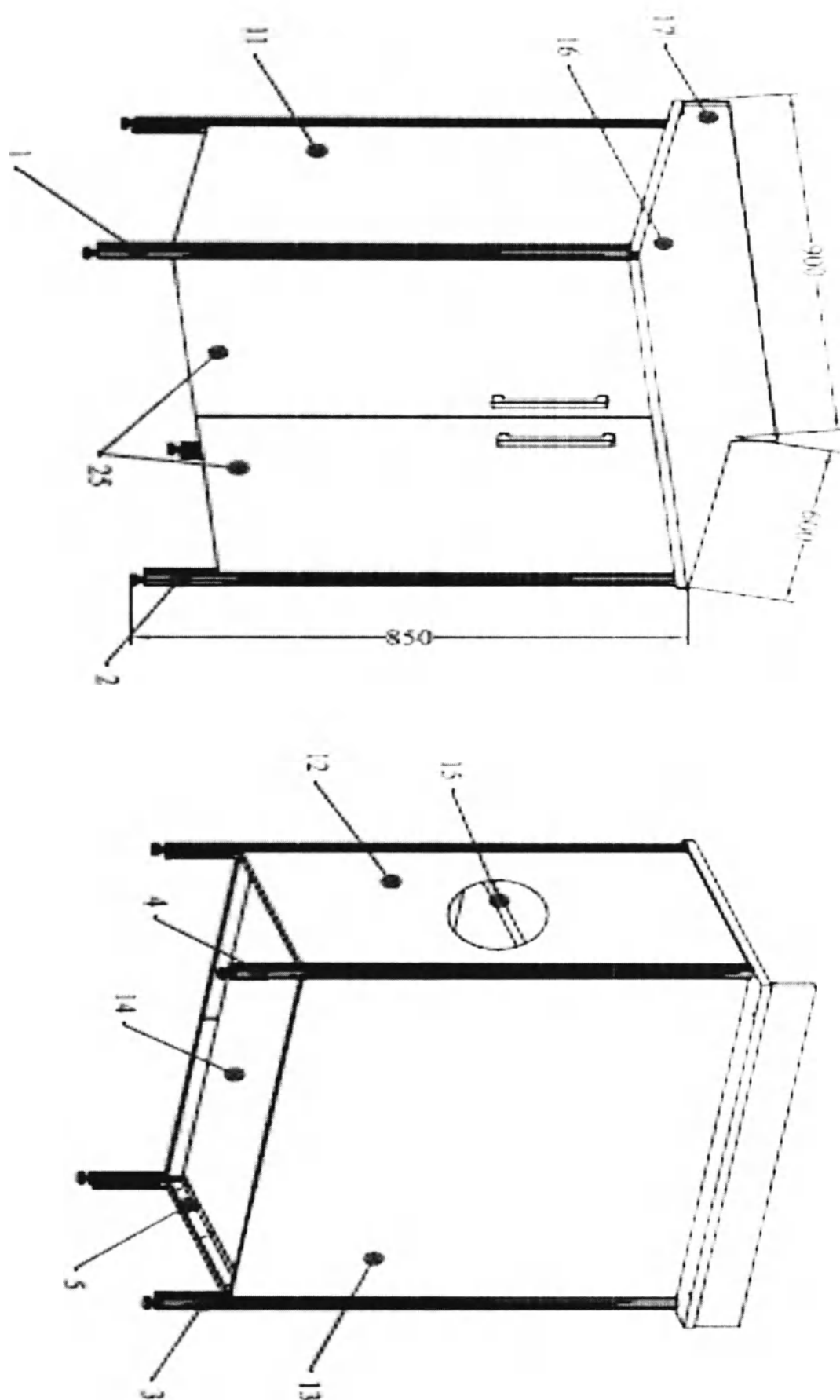


Рис. 6. Габаритные размеры СТМ-I-11

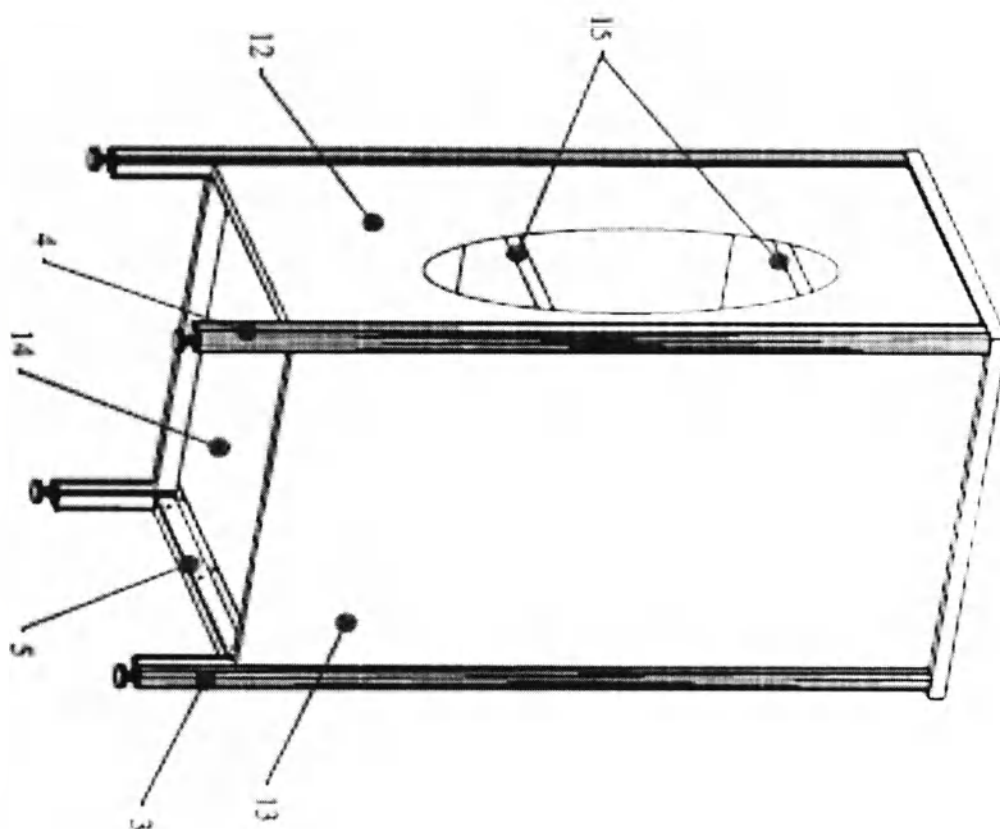
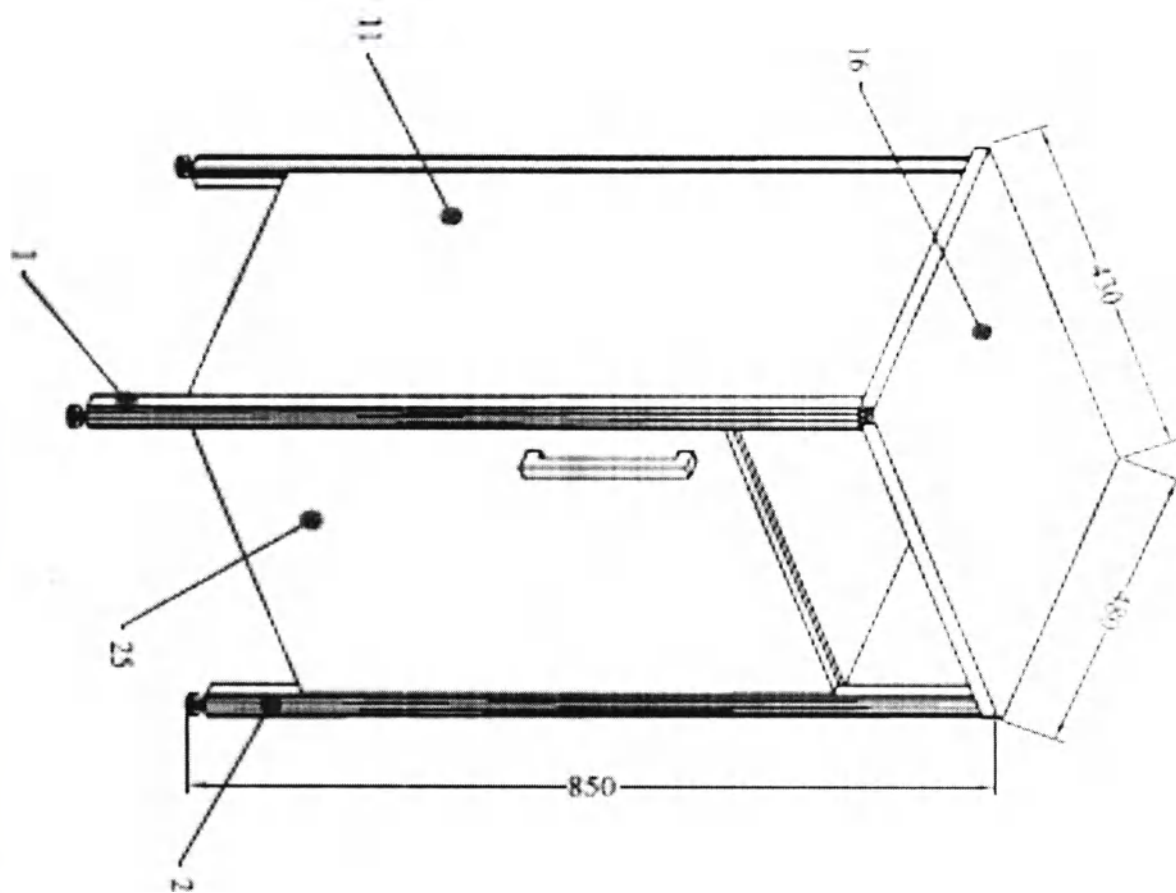


Рис. 7. Габаритные размеры ТМ.1-2

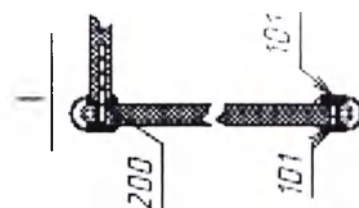
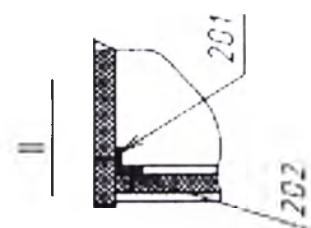
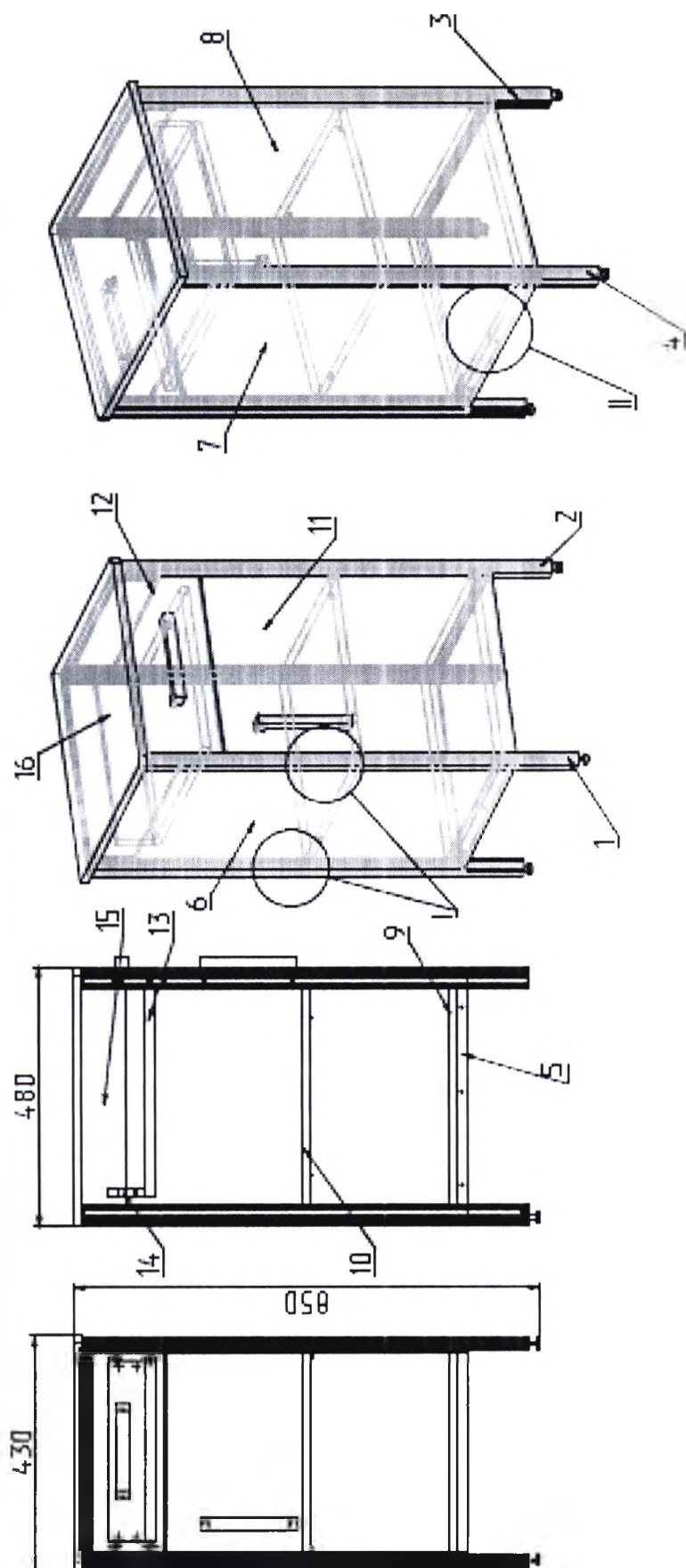


Рис.8. Габаритные размеры ТМ/Т-3

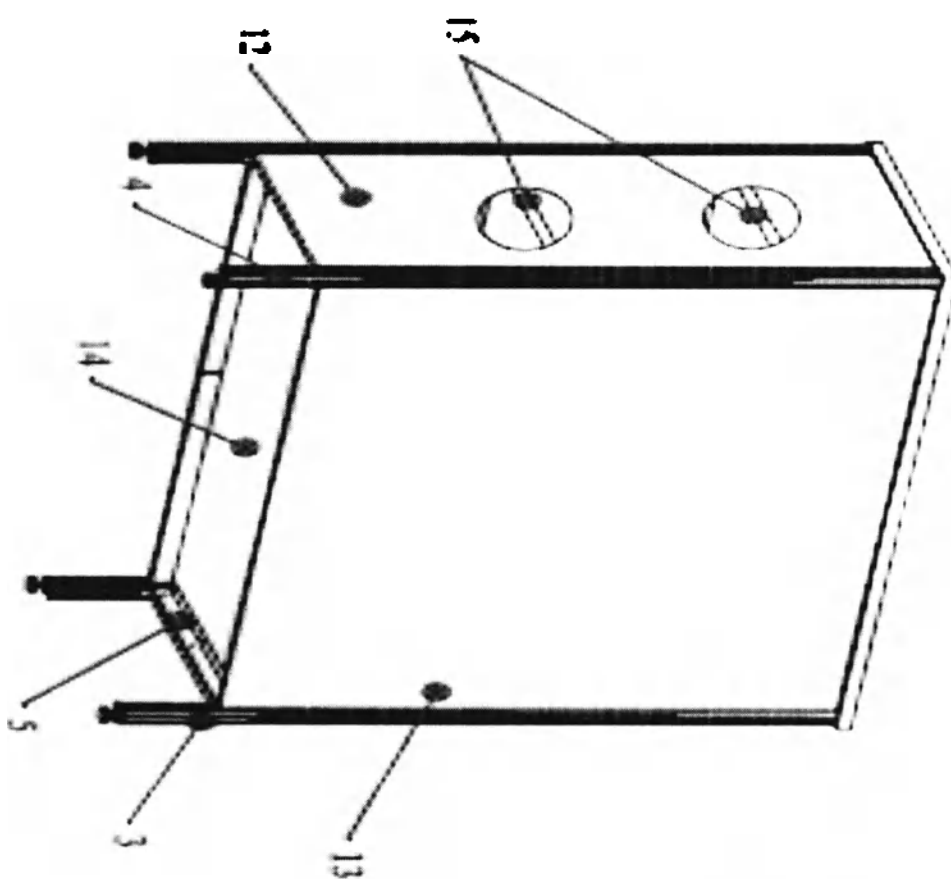
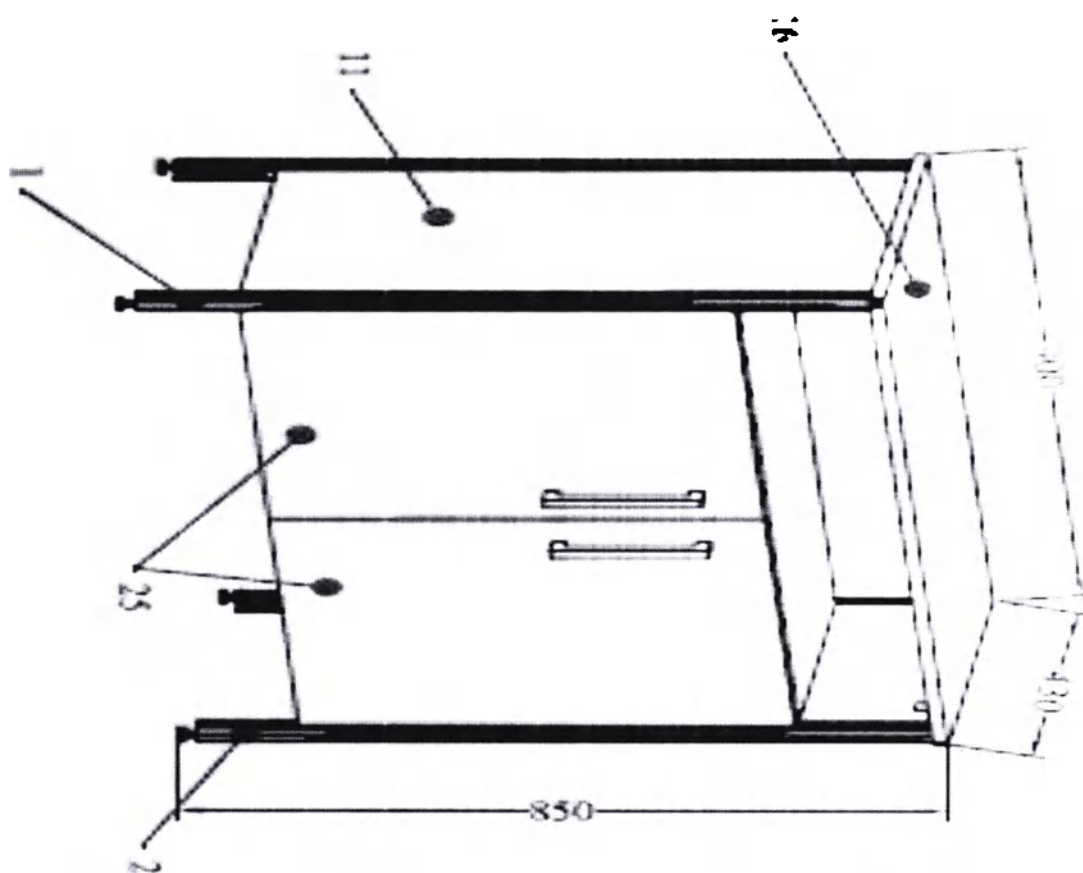


Рис. 9. Габаритные размеры ТМ.І-12

3) тумбы выкатные:

ТМП-1 тумба с одним отделением полого ящика и с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной дверина металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных колесными опорами.

ТМП-11 тумба с одним отделением наружного выдвижного ящика и с двумя горизонтальными отделениями на одной распашной дверина металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных колесными опорами.

Габаритные размеры ТМП-1 рис. 10, ТМП-11 рис. 11.

Функциональные размеры ТМП-1, ТМП-11 таблица № 2.

Технические характеристики колесных опор:

- диаметр колеса 50 мм с предельно допустимым отклонением ± 3 мм;
- толщина колеса 18 мм с предельно допустимым отклонением ± 2 мм;
- высота колесной опоры (от пола до изделия мебели) 70 мм с предельно допустимым отклонением ± 4 мм;
- крепление к изделию мебели посредством винта М8х30 (4 шт.);
- наличие тормозного устройства с функцией включение/выключение.

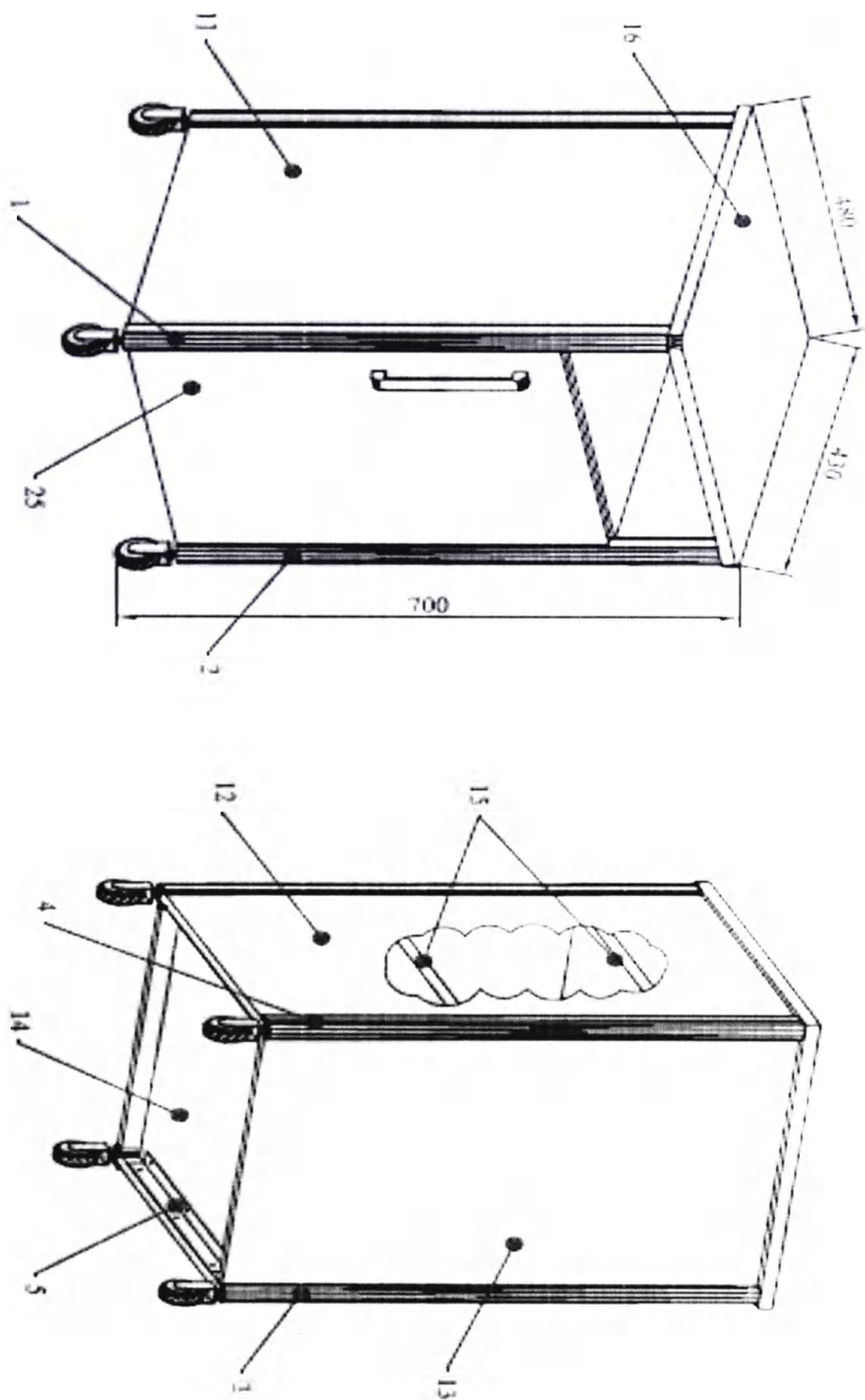


Рис. 10. Габаритные размеры ТМПИ-1

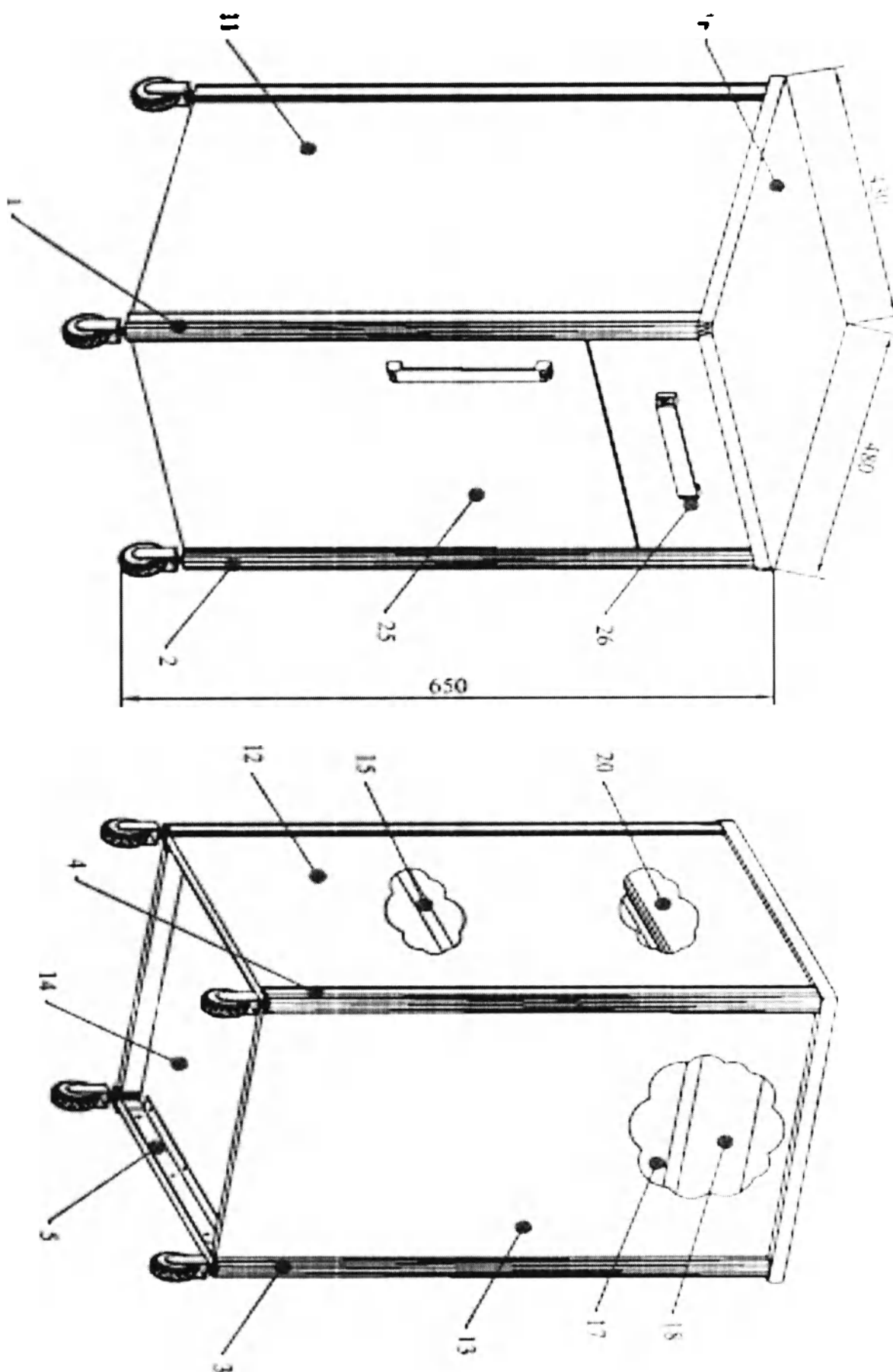


Рис. 11. Габаритные размеры ТМП-11

4) шкафы с распашными дверями:

ШМЛ-4 шкаф с тремя горизонтальными отделениями за одной распашной дверью и двумя горизонтальными отделениями за одной распашной дверью на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ШМЛ-6 шкаф с тремя горизонтальными отделениями за одной стеклянной распашной дверью и двумя горизонтальными отделениями за одной распашной дверью на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ШМЛ-12 шкаф с пятью горизонтальными отделениями за двумя распашными дверью на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

ШМЛ-16 шкаф с тремя горизонтальными отделениями за двумя стеклянными распашными дверями и с двумя горизонтальными отделениями за двумя распашными дверями на металлическом каркасе из четырех ножек цилиндрической формы, соединенных подножками.

Габаритные размеры ШМЛ-4 рис.12, ШМЛ-6 рис.13, ШМЛ-12 рис.14, ШМЛ-16 рис.15.

Функциональные размеры ШМЛ-4, ШМЛ-6, ШМЛ-12, ШМЛ-16 таблица № 3.

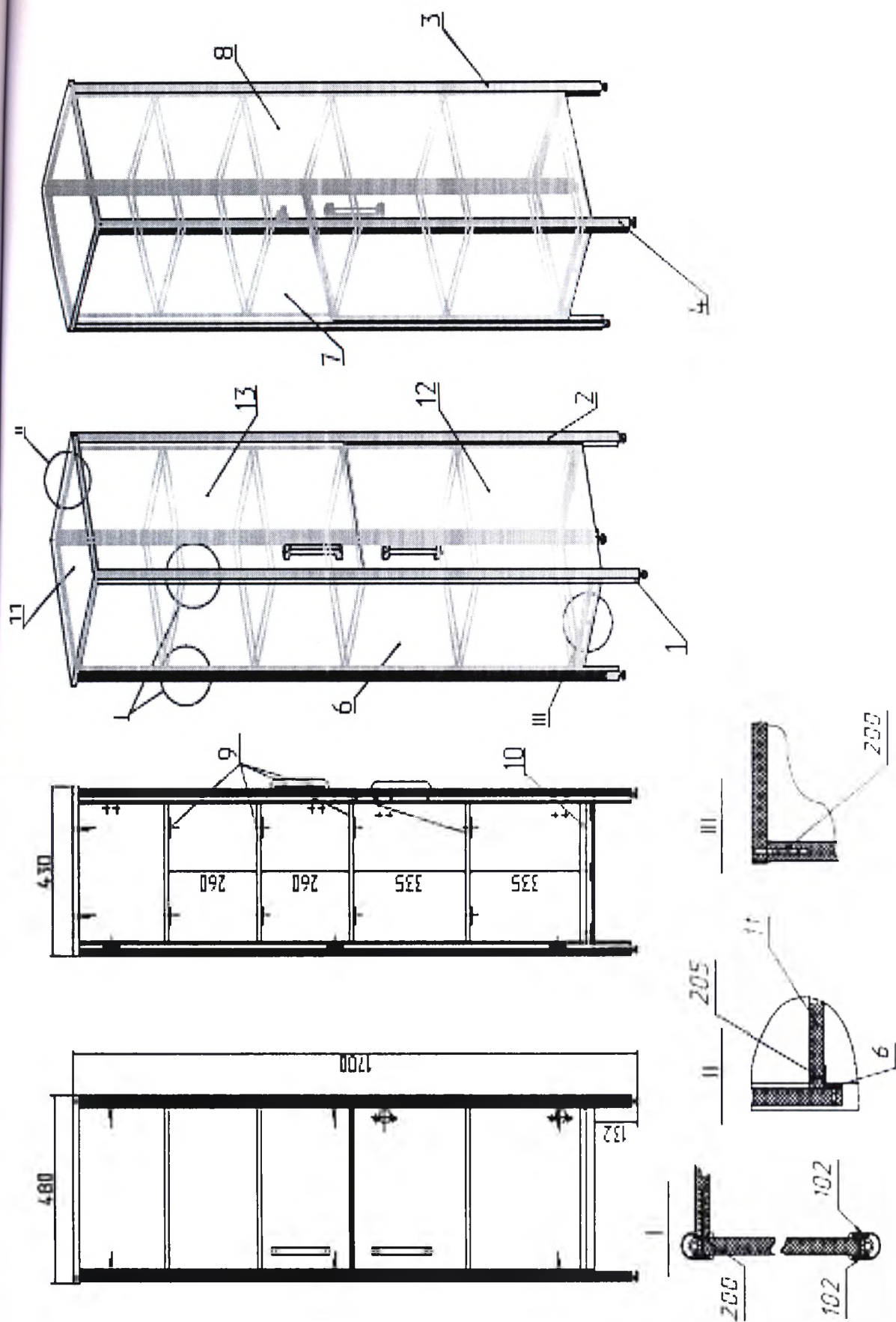


Рис. 12. Габаритные размеры ШМ. 1-4

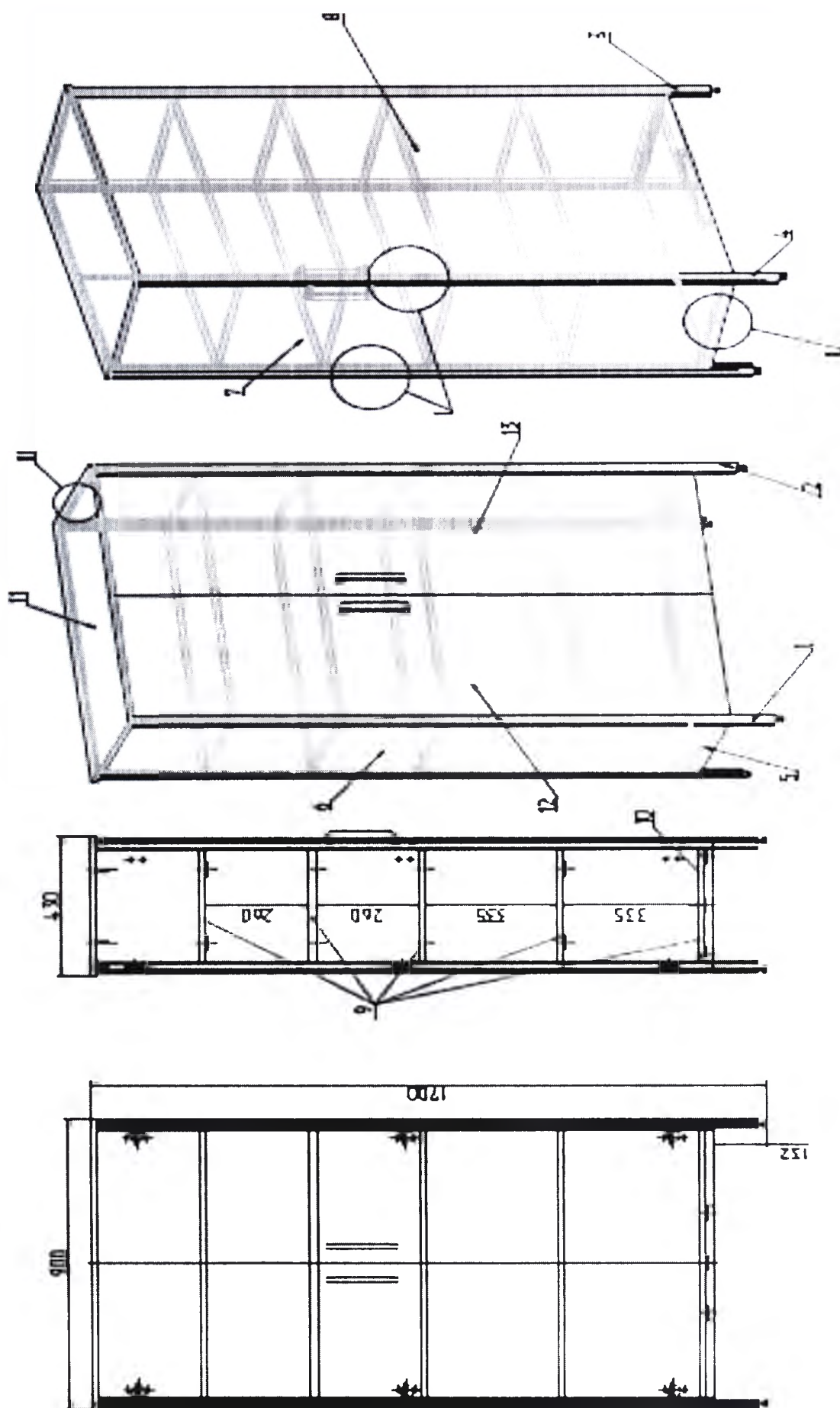


Рис.14. Габаритные размеры ШМЛ-12

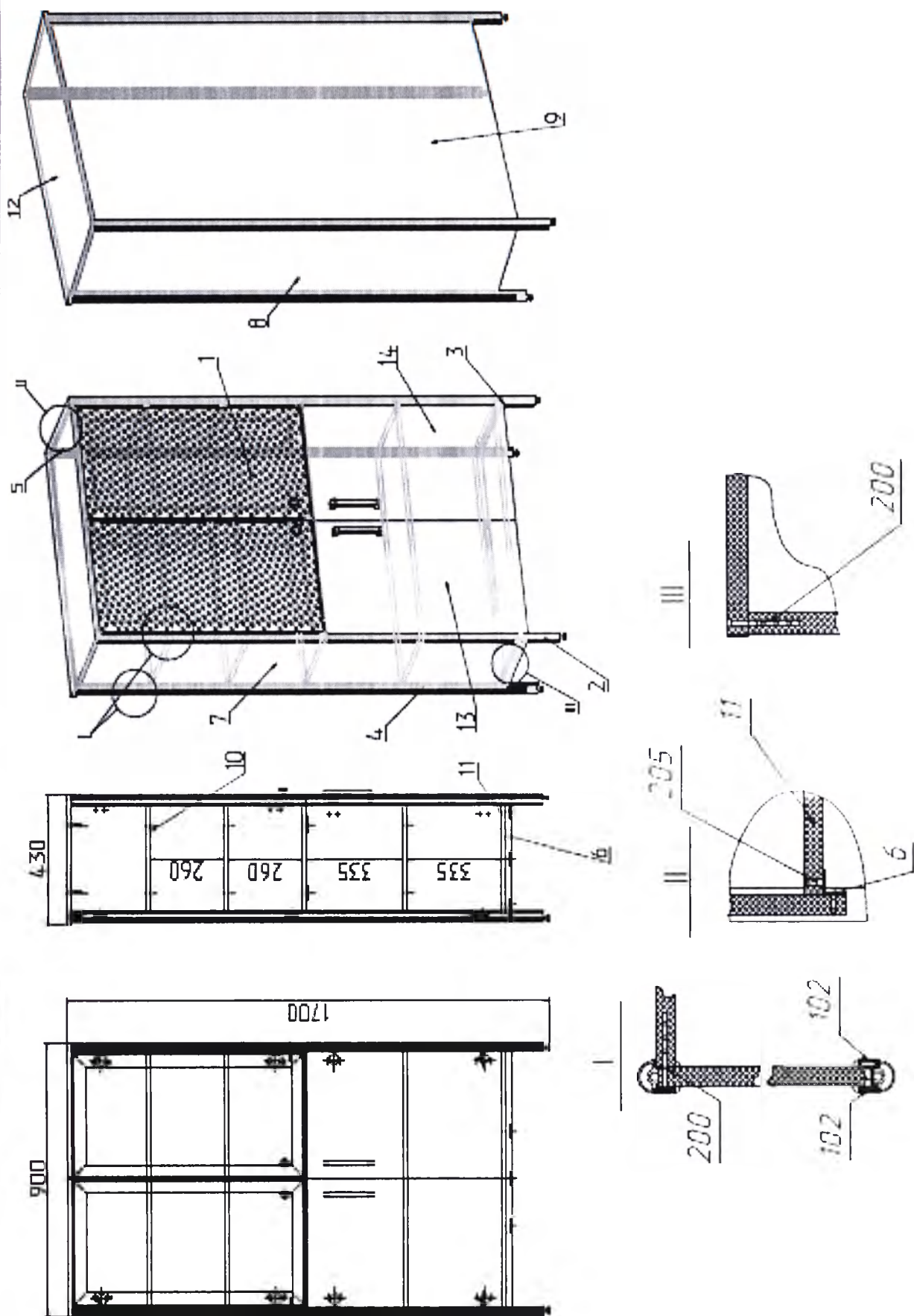


Рис.15. Габаритные размеры ШМЛ-16

5) шкаф для одежды:

ШМЛ-8 шкаф с тремя горизонтальными отделениями за одной распашной дверью в большем отделении невыедвигающаяся штанга для одежды на металлическом каркасе из четырех ножках цилиндрической формы, соединенных подножками.

Габаритные размеры ШМЛ-8 рис.16

Функциональные размеры ШМЛ-8 представлены в таблице № 3.

Масса мебели должна быть не более:

- стол СМЛ-1 не более 19 кг;
- стол СМЛ-3 не более 49 кг;
- стол СМЛ-5 не более 65 кг;
- стол СМЛ-7 не более 60 кг;
- тумба СТМЛ-2 не более 46 кг;
- тумба СТМЛ-11 не более 60 кг;
- тумба ТМЛ-2 не более 37 кг;
- тумба ТМЛ-3 не более 42 кг;
- тумба ТМЛ-12 не более 48 кг;
- тумба ТМП-1 не более 25 кг;
- тумба ТМП-11 не более 28 кг;
- шкаф ШМЛ-4 не более 58 кг;
- шкаф ШМЛ-6 не более 58 кг;
- шкаф ШМЛ-8 не более 54 кг;
- шкаф ШМЛ-12 не более 90 кг;
- шкаф ШМЛ-16 не более 83 кг.

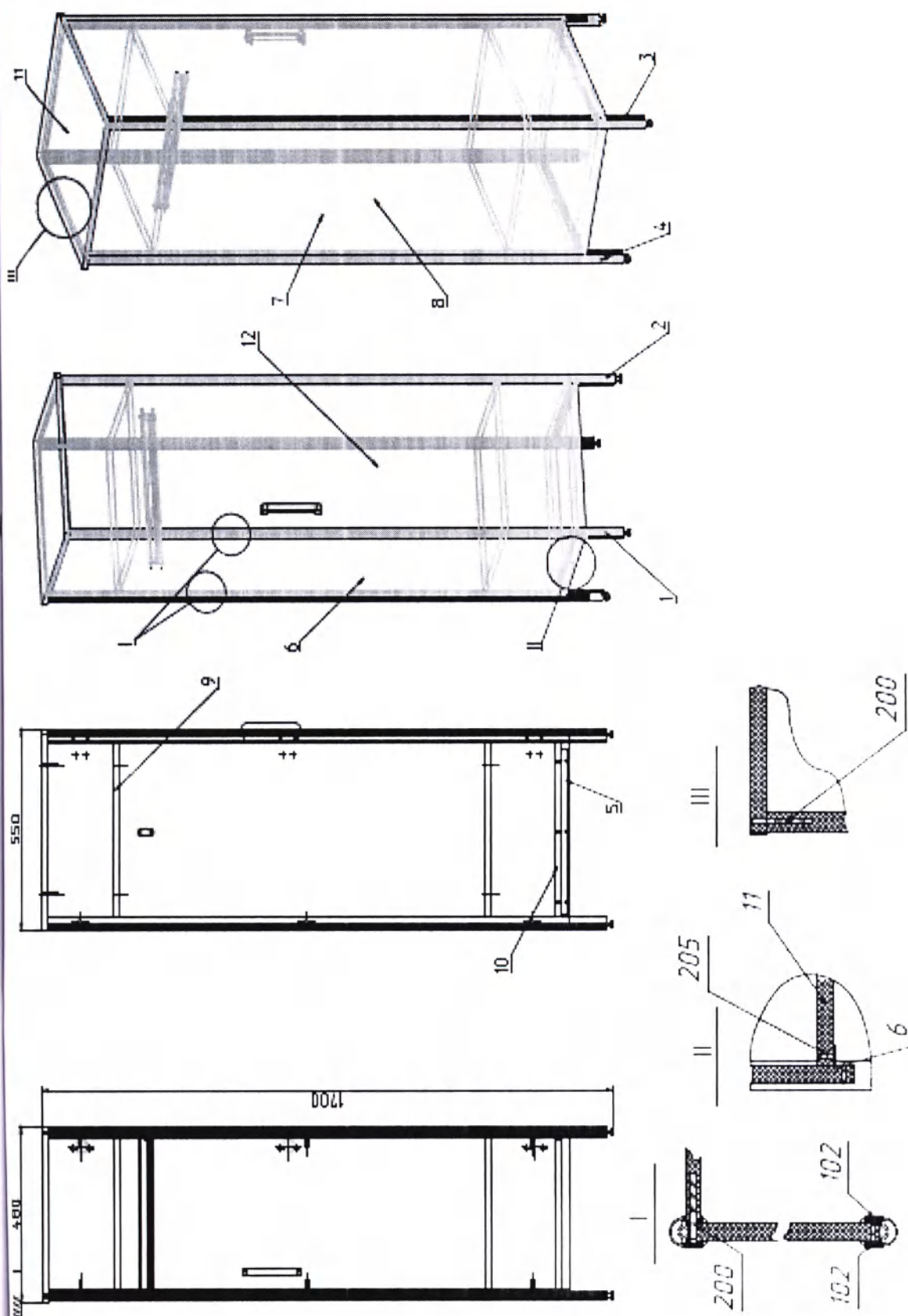
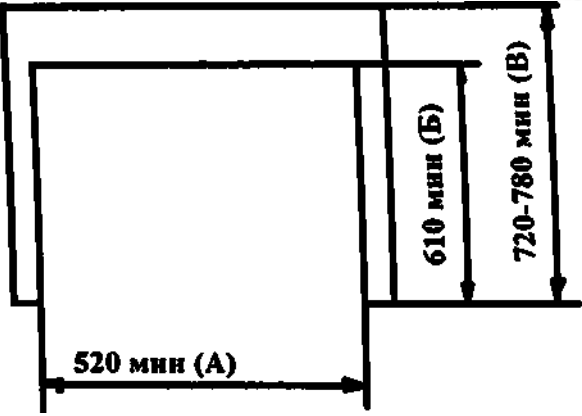
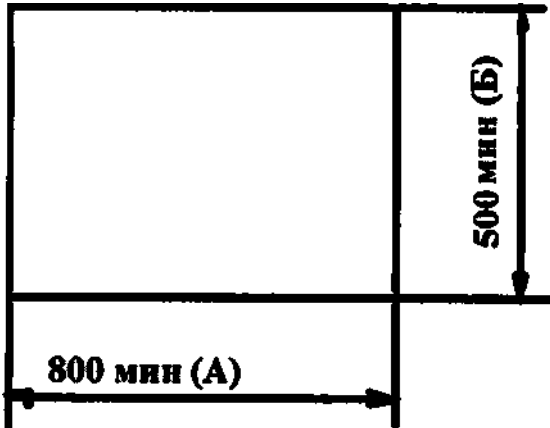


Рис. 16. Габаритные размеры ШМТ-8

Таблица № 1

Функциональные размеры столов

	Описание	СМЛ-1	СМЛ-3	СМЛ-5	СМЛ-7
	п.3 ГОСТ 13025.3 (в мм) 	A=840 B=732 B=750	A=1140 B=640 B=750	A=740 B=732 B=750	A=640 B=832 B=850
2	п.3.1 ГОСТ 13025.3 Расстояние между передней кромкой крышки стола и ограничивающими элементами и в глубине не должно быть не менее 400 мм	524	524	524	600
3	п.3.1 ГОСТ 13025.3 Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения работ с применением средств орг. техники должно быть не менее 650 мм (если применимо указать)	750	750	750	850
4	п.3.3 ГОСТ 13025.3 (в мм) Размеры столешницы 	A=900 B=600	A=1200 B=600	A=1200 B=600	A=1500 B=600

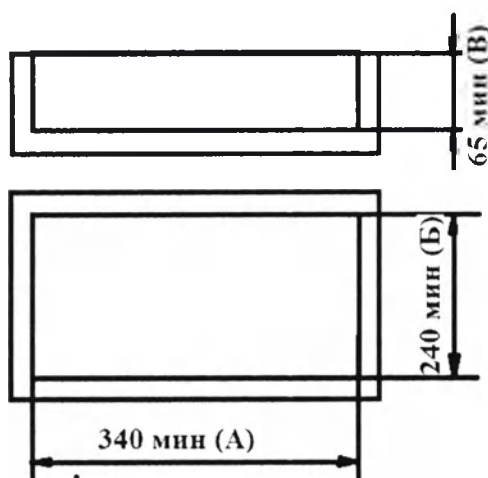
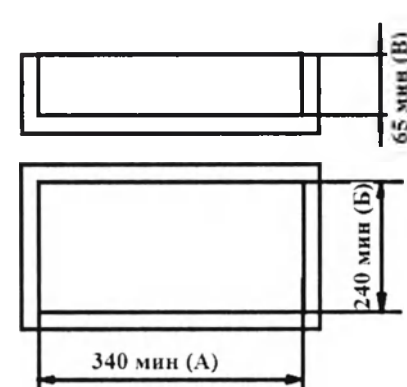
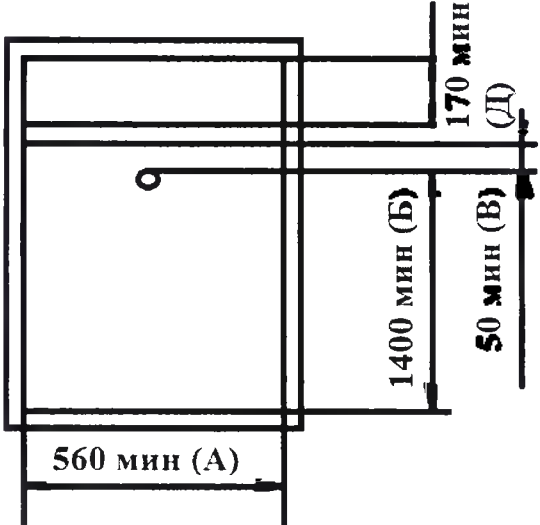
5	п.3.3 ГОСТ 13025.3 Внутренние размеры ящиков (в мм) 		A=516 B=430 B=40 A=516 B=430 B=40	A=330 B=430 B=70	A=330 B=430 B=70
6	Полезный объем каждого отделения в тумбочке стола, в м ³ (сверху - вниз)			0,03	0,03
				0,03	0,03

Таблица № 2

Функциональные размеры тумб

№ п/п	Описание	СТМЛ-2	СТМЛ-11	ТМЛ-2	ТМЛ-3	ТМЛ-12	ТМП-1	ТМП-11
1	Внутренний размер ящиков (в мм) 	A=500 B=430 B=70			A=330 B=380 B=70			A=330 B=380 B=70
2	Полезный объем каждого отделения в тумбочке, в м ³ (сверху - вниз)	0,06	0,13	0,02	0,04	0,05	0,02	0,04
				0,04		0,07	0,03	
		0,06	0,13	0,04	0,04	0,07	0,03	0,04

Функциональные размеры шкафов

Описание	ШМЛ-4	ШМЛ-6	ШМЛ-8	ШМЛ-12	ШМЛ-16
п.2 ГОСТ 13025.1 Размеры шкафа для одежды (в мм) 	-	-	A=475 B=1255 B=50 D=210		
Полезный объем каждого отделения в шкафа, в м ³ (сверху - вниз)	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08
	0,04	0,04		0,08	0,08
	0,04	0,04	0,25	0,08	0,08
	0,05	0,05	0,04	0,11	0,11
	0,05	0,05		0,11	0,11

1.3.Состав изделия.

Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- "Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 52078-2003" (СОПТ 1/1, матовое покрытие, одноцветное покрытие, поверхность шагрень, группа качества А, класс эмиссии формальдегида E1, размер плиты (2750x1830) в мм);
- "Декоративный бумажно-слоистый пластик с маркировкой "ALFAICA(I)" другое обозначение - HPL;
- "Кромка ПВХ" (толщина 2 мм матовое покрытие, одноцветное покрытие, поверхность шагрень);

- "Кромка ПВХ" (толщина 0,4 мм матовое покрытие, одноцветное покрытие, поверхность шагрень);

Ручка S-2242 160 мм, цинк алюминиевый сплав ZAMAK-3 покрытие хром.

Остальные составляющие мебели представлены:

В таблице 4 представлены составляющие СМЛ-1;

В таблице 5 представлены составляющие СМЛ-3;

В таблице 6 представлены составляющие СМЛ-5;

В таблице 7 представлены составляющие СМЛ-7;

В таблице 8 представлены составляющие СМЛ-2;

В таблице 9 представлены составляющие СМЛ-11;

В таблице 10 представлены составляющие ТМЛ-2;

В таблице 11 представлены составляющие ТМЛ-3;

В таблице 12 представлены составляющие ТМЛ-12;

В таблице 13 представлены составляющие ТМЛ-1;

В таблице 14 представлены составляющие ТМЛ-11;

В таблице 15 представлены составляющие ШМЛ-4;

В таблице 16 представлены составляющие ШМЛ-6;

В таблице 17 представлены составляющие ШМЛ-8;

В таблице 18 представлены составляющие ШМЛ-12;

В таблице 19 представлены составляющие ШМЛ-16.

Таблица № 4

Составляющие СМЛ-1

Поз.	Наименование	Кол.	Материалы	Размеры для исполнений, мм	
				Из-под пилы	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	1	PM1-01 см черт	712	
2	Стойка передняя правая	1	PM1-01 см черт	712	
3	Стойка задняя левая	1	PM1-01 см черт	712	
4	Стойка задняя правая	1	PM1-01 см черт	712	
5	Боковина левая	1	ЛДСП 16 мм	598 х 492	600 х 492

6	Боковина правая	1	ЛДСП 16 мм	598	x	492	600	x	492
7	Задняя стенка	1	ЛДСП 16 мм	598	x	845	600	x	845
8	Столешница	1	HPL 16 мм	900	x	600			
9	Борт	1	HPL 16 мм	896	x	70			
	Комплектующие								
100	Опора регул. М8х25 РМ	4							
101	Вставка РМ2-03	6		712					
102	Вставка РМ2-03	6		112					
103	Заглушка РМ2-01	4							
200	Евростяжка	7							
201	Уголок "Грандис"	5							
202	Саморез 3,5х16	22							
203	Кромка ПВХ 0.4х19	1,83							
204	Кромка ПВХ 2х19	1,83							

Таблица 5

Составляющие СМЛ-3

Поз.	Наименование	Кол.	Материалы	Размеры для исполнений, мм	
				Из-под плиты	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	1	РМ1-01 см черт	712	
2	Стойка передняя правая	1	РМ1-01 см черт	712	
3	Стойка задняя левая	1	РМ1-01 см черт	712	
4	Стойка задняя правая	1	РМ1-01 см черт	712	
5	Боковина левая	1	ЛДСП 16 мм	598 x 492	600,5 x 492
6	Боковина правая	1	ЛДСП 16 мм	598 x 492	600,5 x 492
7	Стенка задняя	1	ЛДСП 16 мм	598 x 1145	600,5 x 1145
8	Средняя планка	2	ЛДСП 16 мм	454 x 84	455 x 84
9	Задняя стенка ящика	4	ЛДСП 16 мм	516 x 38	517 x 39
10	Дно ящика	4	ЛДСП 16 мм	516 x 448	517 x 449
11	Фасад ящика	2	ЛДСП 16 мм	560 x 93	564 x 97
12	Столешница	1	HPL 16 мм	1200 x 600	

13	Борт	1	HPL 16 мм	1196	x	70	
14	Планки под ящики	2	ЛДСП 10 мм	454	x	84	455 x 84
	Комплектующие						
100	Опора винтовая М8х1.25	4					
101	Вставка РМ2-03	6		712			
102	Вставка РМ2-03	6		112			
103	Заглушка РМ2-01	4					
200	Евростяжка	7					
201	Уголок "Грандис"	10					
202	Саморез 3,5х16	78					
203	Саморез 4х20	8					
204	Кромка ПВХ 0.4х19	10.0					
205	Кромка ПВХ 2х19	4,8					
206	Метабокс 56х450	2,0					
207	Ручка	2,0					

Таблица № 6

Составляющие СМЛ-5

Поз.	Наименование	Кол.	Материалы	Размеры для исполнения, мм	
				Из-под пилы	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	2	РМ1-01 см черт	712	
2	Стойка передняя правая	1	РМ1-01 см черт	712	
3	Стойка задняя левая	1	РМ1-01 см черт	712	
4	Стойка задняя правая	1	РМ1-01 см черт	712	

5	Боковина левая	1	ЛДСП 16 мм	598	х	492	600	х	492
6	Боковина правая	1	ЛДСП 16 мм	598	х	492	600	х	492
7	Боковина средняя	1	ЛДСП 16 мм	598	х	479	600	х	479
8	Задняя стенка	1	ЛДСП 16 мм	598	х	1145	600	х	1145
9	Дно	1	ЛДСП 16 мм	381	х	452	382	х	455
10	Полка	1	ЛДСП 16 мм	381	х	452	382	х	455
11	Дверь	1	ЛДСП 16 мм	443	х	360	447	х	364
12	Фасад ящика	1	ЛДСП 16 мм	143	х	360	147	х	364
13	Дно ящика	1	ЛДСП 16 мм	330	х	447	331	х	448
14	Задняя стенка ящика	1	ЛДСП 16 мм	330	х	60	331	х	70
15	Столешница	1	НРЛ 16 мм	1200	х	600			
16	Борт	1	НРЛ 16 мм	1196	х	70			
17	Планки	2	ЛДСП 10мм	454	х	80	455	х	81
	Комплектующие								
100	Опора регул. М8х25 РМ	5							
101	Вставка РМ2-03	8		712					
102	Вставка РМ2-03	7		112					
103	Заглушка РМ2-01	5							
200	Евростяжка	7							
201	Уголок "Грандис"	7							
202	Саморез 3,5х16	61							
203	Кромка ПВХ 0.4х19	9,70							
204	Кромка ПВХ 2х19	6,10							
205	Петля вкладная	2,0							
206	Полкодержатель	4,0							
207	С 5-04	2							
208	Ручка	2							
209	Упор	1							
210	Метабокс 86х450	1							
211	Саморез 4х20	8							

Таблица № 7

Составляющие СМЛ-7

Поз.	Наименование	Кол.	Материалы	Размеры для исполнений, мм	
				Из-под плиты	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	2	PM1-01 см черт	812	
2	Стойка передняя правая	2	PM1-01 см черт	812	
3	Стойка задняя левая	2	PM1-01 см черт	812	
4	Стойка задняя правая	2	PM1-01 см черт	812	
5	Уголок 20x20	4		450	
6	Боковина левая	2	ЛДСП 16 мм	698 х 492	700 х 492
7	Боковина правая	2	ЛДСП 16 мм	698 х 492	700 х 492
8	Задняя стенка	2	ЛДСП 16 мм	698 х 379	700 х 379
9	Дно	2	ЛДСП 16 мм	381 х 452	382 х 455
10	Полка	2	ЛДСП 16 мм	381 х 452	382 х 455
11	Дверь	2	ЛДСП 16 мм	543 х 360	547 х 364
12	Фасад ящика	2	ЛДСП 16 мм	143 х 360	147 х 364
13	Дно ящика	2	ЛДСП 16 мм	330 х 447	331 х 448
14	Задняя стенка ящика	2	ЛДСП 16 мм	330 х 69	331 х 70
15	Столешница	1	HPL 16 мм	1500 х 600	
16	Борт	1	HPL 16 мм	1496 х 70	
17	Планки	4	ЛДСП 10мм	454 х 80	455 х 81
	Комплектующие				
100	Опора регул. M8x25 PM	8			
101	Вставка PM2-03	12		812	
102	Вставка PM2-03	12		112	
103	Заглушка PM2-01	8			
200	Евростяжка	11			
201	Уголок "Грандис"	9			
202	Саморез 3,5x16	61			
203	Кромка ПВХ 0.4x19	16,50			
204	Кромка ПВХ 2x19	9,80			
205	Петля вкладная	4,0			
206	Полкодержатель	8,0			
207	Ручка	4			
208	Упор	2			
210	Метабокс 86x450	2			
211	Саморез 4x20	16			

Составляющие СТМЛ-2

Поз.	Наименование	Кол.	Материалы	Размеры для исполнения, мм	
				Из-под пилы	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	1	PM1-01 см черт	812	
2	Стойка передняя правая	1	PM1-01 см черт	812	
3	Стойка задняя левая	1	PM1-01 см черт	812	
4	Стойка задняя правая	1	PM1-01 см черт	812	
5	Уголок 20x20	2		450	
6	Боковина левая	1	ЛДСП 16 мм	698 х 492	700 х 492
7	Боковина правая	1	ЛДСП 16 мм	698 х 492	700 х 492
8	Задняя стенка	1	ЛДСП 16 мм	698 х 549	700 х 549
9	Дно	1	ЛДСП 16 мм	551 х 452	552 х 455
10	Полка	1	ЛДСП 16 мм	551 х 452	552 х 455
11	Дверь	1	ЛДСП 16 мм	543 х 530	547 х 534
12	Фасад ящика	1	ЛДСП 16 мм	143 х 530	147 х 534
13	Дно ящика	1	ЛДСП 16 мм	500 х 448	501 х 449
14	Задняя стенка ящика	1	ЛДСП 16 мм	500 х 69	501 х 70
15	Планки	2	ЛДСП 10мм	454 х 80	455 х 81
16	Столешница	1	НРЛ 16мм	600 х 600	
	Комплектующие				
100	Опора регул. M8x25 PM	4			
101	Вставка PM2-03	6		812	
102	Вставка PM2-03	6		112	
103	Заглушка PM2-01	4			
200	Евростяжка	4			
201	Уголок "Грандис"	4			
202	Саморез 3,5x16	66			
203	Кромка ПВХ 0.4x19	7,91			
204	Кромка ПВХ 2x19	6,14			
205	Петля вкладная	2,0			

206	Полкодержатель	4,0			
207	Ручка	2			
208	Упор	1			
210	Метабокс 86x450	1			
211	Саморез 4x20	8			

Таблица № 9

Составляющие СТМЛ-11

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для изготовления	
				из под пилы	с ПБ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	812	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	812	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	812	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	812	
5	уголок	3	уголок 20x20	450	
11	боковина левая	1	лдсп 16	698 x 492	700 x 492
12	боковина правая	1	лдсп 16	698 x 492	700 x 492
13	задняя стенка	1	лдсп 16	698 x 849	700 x 849
14	дно	1	лдсп 16	851 x 453	852 x 455
15	полка	1	лдсп 16	851 x 453	852 x 455
16	крыша	1	HPL 16	896 x 596	900 x 600
17	борт	1	HPL 16	892 x 68	896 x 70
25	дверца	1	лдсп 16	693 x 411	697 x 415
	<u>Комплектующие</u>				
100	вставка PM2-03	6		812	
101	вставка PM2-03	6		112	
102	заглушка PM2-01	4			
103	опора регулируемая M8x25 PM	4			
200	евростяжка	6			
201	уголок "грандис"	6			
202	ручка меб	2			
203	петля вкладная	4			
204	упор дверцы	2			
205	полкодержатель меб	4			
206	саморез 3,5x16	42	30 в упаковку		
207	кромка пвх 2			9000	
208	кромка пвх 0,4			7000	
209	заглушка евростяжки	2			

Составляющие ТМЛ-2

Поз.	Наименование	Кол	Материал	Размеры для изготовления	
				из под пилы	из под фрезы
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	812	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	812	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	812	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	812	
5	уголок	2	уголок 20х20	350	
11	боковина левая	1	лдсп 16	698 х 438	700 х 438
12	боковина правая	1	лдсп 16	698 х 438	700 х 438
13	задняя стенка	1	лдсп 16	698 х 379	700 х 379
14	дно	1	лдсп 16	381 х 399	382 х 401
15	полка	1	лдсп 16	381 х 399	382 х 401
16	крыша	1	лдсп 16	426 х 476	430 х 480
25	дверца	1	лдсп 16	543 х 361	547 х 365
	<u>Комплектующие</u>				
100	вставка FM2-03	6		812	
101	вставка PM2-03	6		112	
102	заглушка PM2-01	4			
103	опора регулируемая M8x25 PM	4			
200	евростяжка	4			
201	уголок "грандис"	4			
202	ручка меб	1			
203	петля вкладная	2			
204	упор дверцы	1			
205	полкодержатель меб	8			
206	саморез 3,5х16	42	30 в упаковку		
207	кромка пвх 2			6700	
208	кромка пвх 0,4			7000	

Составляющие ТМЛ-3

Поз.	Наименование	Кол	Материалы	Размеры для исполнения, мм	
				Из-под пилы	С ПВХ
	Детали				
1	Стойка передняя левая	1	PM1-01 см черт	812	
2	Стойка передняя правая	1	PM1-01 см черт	812	
3	Стойка задняя левая	1	PM1-01 см черт	812	
4	Стойка задняя правая	1	PM1-01 см черт	812	
5	Уголок 20x20	2		350	
6	Боковина левая	1	ЛДСП 16 мм	698 х 438	700 х 438
7	Боковина правая	1	ЛДСП 16 мм	698 х 438	700 х 438
8	Задняя стенка	1	ЛДСП 16 мм	698 х 379	700 х 379
9	Дно	1	ЛДСП 16 мм	381 х 388	382 х 401
10	Полка	1	ЛДСП 16 мм	381 х 388	382 х 401
11	Дверь	1	ЛДСП 16 мм	543 х 360	547 х 364
12	Фасад ящика	1	ЛДСП 16 мм	143 х 360	147 х 364
13	Дно ящика	1	ЛДСП 16 мм	330 х 398	331 х 399
14	Задняя стенка ящика	1	ЛДСП 16 мм	330 х 69	331 х 70
15	Планки	2	ЛДСП 10мм	400 х 80	401 х 81
16	Столешница	1	HPL 16мм	430 х 480	
	Комплектующие				
100	Опора регул. M8x25 PM	4			
101	Вставка PM2-03	6		812	
102	Вставка PM2-03	6		112	
103	Заглушка PM2-01	4			
200	Евростяжка	4			
201	Уголок "Грандис"	4			
202	Саморез 3,5x16	66			
203	Кромка ПВХ 0.4x19	7,40			

204	Кромка ПВХ 2х19	6,00				
205	Петля вкладная	2,0				
206	Полкодержатель	4,0				
207	Ручка	2				
208	Упор	1				
210	Метабокс 86х400	1				
211	Саморез 4х20	8				

Таблица № 12

Составляющие ТМЛ-12

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры изделия, мм	
				из под пилы	из ПВХ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	812	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	812	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	812	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	812	
5	уголок	3	уголок 20-20	350	
11	боковина левая	1	лдсп 16	698 х 388	700 х 388
12	боковина правая	1	лдсп 16	698 х 388	700 х 388
13	задняя стенка	1	лдсп 16	698 х 849	700 х 849
14	дно	1	лдсп 16	851 х 349	852 х 351
15	полка	2	лдсп 16	851 х 349	852 х 351
16	крыша	1	лдсп 16	896 х 426	900 х 430
25	дверца	2	лдсп 16	543 х 411	547 х 415
	<u>Комплектующие</u>				
100	вставка PM2-03	6		812	
101	вставка PM2-03	6		112	
102	заглушка PM2-01	4			
103	опора регулируемая M8x25 PM	4			
200	евростяжка	4			
201	уголок "грандис"	6			
202	ручка меб	2			
203	петля вкладная	4			
204	упор дверцы	2			
205	полкодержатель меб	8			
206	саморез 3,5x16	42	30 в упаковку		
207	кромка пвх 2			9000	
208	кромка пвх 0,4			7000	

Составляющие ТМП-1

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнения, мм	
				из под пилы	с ПВХ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	612	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	612	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	612	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	612	
5	уголок	2	уголок 20х20	350	
11	боковина левая	1	лдсп 16	610 х 388	612 х 388
12	боковина правая	1	лдсп 16	610 х 388	612 х 388
13	задняя стенка	1	лдсп 16	610 х 429	612 х 429
14	дно	1	лдсп 16	431 х 348	432 х 351
15	полка	2	лдсп 16	431 х 348	432 х 351
16	крыша	1	лдсп 16	476 х 426	480 х 430
25	дверца	1	лдсп 16	455 х 411	459 х 415
	<u>Комплектующие</u>				
100	вставка PM2-03	6		612	
200	опора колёсная с тормозом	2			
201	опора колёсная	2			
203	евростяжка	4			
204	уголок "грандис"	4			
205	ручка меб	1			
206	петля вкладная	2			
207	упор дверцы	1			
208	полкодержатель меб	8			
209	саморез 3.5х16	42	30 в упаковку		
210	винт М8х30	4			
211	кромка ПВХ 2			6700	
212	кромка ПВХ 0,4			7000	

Составляющие ТМП-11

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнения, мм	
				из под пилы	с ПВ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	562	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	562	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	562	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	562	
5	уголок	2	уголок 20х20	350	
11	боковина левая	1	лдсп 16	560 х 438	562 х 438
12	боковина правая	1	лдсп 16	560 х 438	562 х 438
13	задняя стенка	1	лдсп 16	560 х 379	562 х 379
14	дно	1	лдсп 16	381 х 398	382 х 401
15	полка	1	лдсп 16	381 х 398	382 х 401
16	крыша	1	лдсп 16	426 х 476	430 х 480
17	дно ящика	1	лдсп 16	330 х 397	331 х 398
18	задняя стенка ящика	1	лдсп 16	330 х 70	331 х 71
20	планка	2	лдсп 10	149 х 399	150 х 400
25	дверца	1	лдсп 16	405 х 361	409 х 365
26	лицевая панель	1	лдсп 16	143 х 361	147 х 365
	<u>Комплектующие</u>				
100	вставка PM2-03	6		562	
200	опора колёсная с тормозом	2			
201	опора колесная	2			
203	евростяжка	4			
204	уголок "грандис"	4			
205	метабокс	1	86 х 400		
206	ручка меб	2			
207	петля вкладная	2			
208	упор дверцы	1			
209	полкодержатель меб	4			
210	саморез 3,5х16	42	30 в упаковке		
211	винт М8х30	4			
212	кромка пвх 2			6700	
213	кромка пвх 0,4			7000	

Составляющие ШМЛ-4

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнения, мм			
				из под пины		с ПВХ	
	<u>Детали</u>						
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	1664			
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	1664			
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	1664			
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	1664			
5	уголок	2	уголок 20x20	350			
6	боковина	1	лдсп 16 мм	1550	х 388	1552,5	х 388
7	боковина	1	лдсп 16 мм	1550	х 388	1552,5	х 388
8	задняя стенка	1	лдсп 16 мм	1550	х 429	1552,5	х 429
9	полка	4	лдсп 16 мм	431	х 348	432	х 350,5
10	дно	1	лдсп 16 мм	431	х 348	432	х 350,5
11	крыша	1	лдсп 16 мм	476	х 426	480	х 430
12	дверь	1	лдсп 16 мм	726	х 411	730	х 415
13	дверь	1	лдсп 16 мм	811	х 411	815	х 415
	<u>Комплектующие</u>						
100	опора рег M8x25 PM	4					
101	заглушка PM2-01	4					
102	вставка PM2-03	6		1664			
103	вставка PM2-03	6		112			
200	евростяжка	10					
201	петля вкладная	4					
202	ручка меб	2	м/ц-160				
203	полкодержатель меб	16					
204	упор дверцы	3					
205	саморез 3,5x16	48					
206	кромка пвх 0,4	5,67					
207	кромка пвх 2	10,0					
208	заглушка евростяжки	4					

Составляющие ШМЛ-6

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнения, мм	
				из под пилы	с ПВХ
	<u>Сборочные единицы</u>				
1	Дверь	1	F1-36+стекло	815 х 415	
	<u>Детали</u>				
2	стойка передняя левая	1	PM1-01	1664	
3	стойка передняя правая	1	PM1-01	1664	
4	стойка задняя левая	1	PM1-01	1664	
5	стойка задняя правая	1	PM1-01	1664	
6	уголок	2	уголок 20х20	350	
7	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
8	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
9	задняя стенка	1	лдсп 16 мм	1550 х 429	1552,5 х 849
10	полка	4	лдсп 16 мм	431 х 348	432 х 350,5
11	дно	1	лдсп 16 мм	431 х 348	432 х 350,5
12	крыша	1	лдсп 16 мм	476 х 426	480 х 430
13	дверь	1	лдсп 16 мм	726 х 411	730 х 415
14	Стекло	1	стекло 5 мм	810 х 410	
	<u>Комплектующие</u>				
100	опора рег M8x25 PM	4			
101	заглушка PM2-01	4			
102	вставка PM2-03	6		1664	
103	вставка PM2-03	6		112	
200	евростяжка	10			
201	петля вкладная	4			
202	ручка меб	1	м/ц-160		
203	полкодержатель меб	16			
204	упор дверцы	3			
205	саморез 3,5х16	48			
206	кромка пвх 0,4	5,67			
207	кромка пвх 2	7,5			
208	заглушка евростяжки	4			

209	угловой соединитель F3-03	4			
210	соединитель ДР2-02	4			
211	уплотнитель F2-03	2460мм			
212	ручка кнопка	1			
213	штулка С2-05	1			
212	винт М4х8	8			

Таблица № 17

Составляющие ШМЛ-8

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнений, мм	
				из под пилы	с ПВХ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	1664	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	1664	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	1664	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	1664	
5	уголок	2	уголок 20х20	350	
6	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 508	1552,5 х 508
7	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 508	1552,5 х 508
8	задняя стенка	1	лдсп 16 мм	1550 х 429	1552,5 х 429
9	полка	2	лдсп 16 мм	431 х 468	432 х 470,5
10	дно	1	лдсп 16 мм	431 х 468	432 х 470,5
11	крыша	1	лдсп 16 мм	476 х 546	480 х 550
12	дверь	1	лдсп 16 мм	1545 х 411	1549 х 415
	<u>Комплектующие</u>				
100	опора рег М8х25 РМ	4			
101	заглушка РМ2-01	4			
102	вставка РМ2-03	6		1664	
103	вставка РМ2-03	6		112	
100	евростяжка	10			

201	петля вкладная	3			
202	ручка меб	1	м/ц-160		
203	полкодержатель меб	8			
204	упор дверцы	2			
205	саморез 3,5x16	48			
206	кромка пвх 0,4	5,67			
207	кромка пвх 2	8,7			
208	заглушка евростяжки	4			
209	штанга	1 шт	426мм		
210	штангодержатель	2			

Таблица № 18

Составляющие ШМЛ-12

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнений, мм	
				из под пилы	с ПВХ
	<u>Детали</u>				
1	стойка передняя левая	1	PM1-01	1664	
2	стойка передняя правая	1	PM1-01	1664	
3	стойка задняя левая	1	PM1-01	1664	
4	стойка задняя правая	1	PM1-01	1664	
5	уголок	3	уголок 20x20	350	
6	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
7	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
8	задняя стенка	1	лдсп 16 мм	1550 х 849	1552,5 х 849
9	полка	4	лдсп 16 мм	851 х 348	852 х 350,5
10	дно	1	лдсп 16 мм	851 х 348	852 х 350,5
11	крыша	1	лдсп 16 мм	896 х 426	900 х 430
12	дверь	1	лдсп 16 мм	1545 х 411	1549 х 415
13	дверь	1	лдсп 16 мм	1545 х 411	1549 х 415
	<u>Комплектующие</u>				
100	опора рег M8x25 PM	4			
101	заглушка PM2-01	4			
102	вставка PM2-03	6		1664	
103	вставка PM2-03	6		112	
200	евростяжка	11			

201	петля вкладная	6			
202	ручка меб	2	м/ц-160		
203	полкодержатель меб	16			
204	упор дверцы	4			
205	саморез 3,5х16	62			
206	кромка пвх 0,4	7,8			
207	кромка пвх 2	16,4			
208	заглушка евростяжки	5			

Таблица № 19

Составляющие ШМЛ-16

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Размеры для исполнения, мм	
				из под плиты	с ПВХ
	<u>Сборочные единицы</u>				
1	Дверца	2	F1-36+стекло	815 х 415	
	<u>Детали</u>				
2	стойка передняя левая	1	PM1-01	1664	
3	стойка передняя правая	1	PM1-01	1664	
4	стойка задняя левая	1	PM1-01	1664	
5	стойка задняя правая	1	PM1-01	1664	
6	уголок	3	уголок 20х20	350	
7	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
8	боковина	1	лдсп 16 мм	1550 х 388	1552,5 х 388
9	задняя стенка	1	лдсп 16 мм	1550 х 849	1552,5 х 849
10	полка	4	лдсп 16 мм	851 х 348	852 х 350,5
11	дно	1	лдсп 16 мм	851 х 348	852 х 350,5
12	крыша	1	лдсп 16 мм	896 х 426	900 х 430
13	дверца	1	лдсп 16 мм	726 х 411	730 х 415
14	дверца	1	лдсп 16 мм	726 х 411	730 х 415
15	Стекло	2	стекло 5 мм	810 х 410	
	<u>Комплектующие</u>				
100	опора рег M8x25 PM	4			
101	заглушка PM2-01	4			
102	вставка PM2-03	6		1664	
103	вставка PM2-03	6		112	

200	евростяжка	11			
201	петля вкладная	8			
202	ручка меб	2	м/ц-160		
203	полкодержатель меб	16			
204	упор дверцы	6			
205	саморез 3,5x16	52			
206	кромка пвх 0,4	7,8			
207	кромка пвх 2	13,12			
208	заглушка евростяжки	5			
209	угловой соединитель F3-03	8			
210	соединитель ДР2-02	8			
211	уплотнитель F2-03	4920мм			
212	ручка кнопка	2			
213	втулка C2-05	2			
212	винт М4х8	16			

Металлические части защитных и защитно-декоративных покрытий для поверхностей мебельной фурнитуры изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1 по ГОСТ 15150.

Комплектность изделий мебели согласно конструкторской документации представлена в таблице № 20.

Таблица № 20

Комплектность изделий мебели согласно конструкторской документации

л/п	Наименование	Обозначение	Количество
	Стол СМЛ-1, в составе:	НМЛ 001.01.0000	1
	Боковина левая	НМЛ 001.01.0001	1
	Боковина правая	НМЛ 001.01.0002	1
	Столешница	НМЛ 001.01.0003	1
	Задняя стенка	НМЛ 001.01.0004	1
	Борт	НМЛ 001.01.0005	1
	Заглушка верт.проф.	НМЛ 001.01.0006	4
	Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.01.0007	4
	Уголок с пластиковым чехлом	НМЛ 001.01.0008	5
	Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.01.0009	6
	Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.01.0010	6
	Саморез 3,5х16	НМЛ 001.01.0011	22
	Эксплуатационная документация:		

Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Стол СМЛ-3, в составе:	НМЛ 001.02.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.02.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.02.0002	1
Столешница	НМЛ 001.02.0003	1
Задняя стенка	НМЛ 001.02.0004	1
Борт	НМЛ 001.02.0005	1
Фасад ящика	НМЛ 001.02.0006	2
Дно ящика	НМЛ 001.02.0007	2
Средняя планка	НМЛ 001.02.0008	1
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.02.0009	2
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.02.0010	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.02.0011	6
Уголок	НМЛ 001.02.0012	10
Ручка	НМЛ 001.02.0013	2
Опора винтовая М8х1.25	НМЛ 001.02.0014	4
Заглушка вертикального профиля	НМЛ 001.02.0015	4
Метабокс56х450	НМЛ 001.02.0016	2 компл
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.01.0017	78
Саморез 4х20	НМЛ 001.01.0018	8
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Стол СМЛ-5, в составе:	НМЛ 001.03.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.03.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.03.0002	1
Боковина средняя	НМЛ 001.03.0003	1
Дно	НМЛ 001.03.0004	1
Полка	НМЛ 001.03.0005	1
Столешница	НМЛ 001.03.0006	1
Борт	НМЛ 001.03.0007	1
Задняя стенка	НМЛ 001.03.0008	1
Дно ящика	НМЛ 001.03.0009	1
Дверь	НМЛ 001.03.0010	1
Фасад ящика	НМЛ 001.03.0011	1
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.03.0012	1
Уголок 20х20	НМЛ 001.03.0013	2
Заглушка вертикального профиля	НМЛ 001.03.0014	5
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.03.0015	5
Петля вкладная	НМЛ 001.03.0016	2
Ручка	НМЛ 001.03.0017	2
Уголок пластиковый	НМЛ 001.03.0018	7
Метабокс 86х450	НМЛ 001.03.0019	1 компл
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.03.0020	7
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.03.0021	7
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.03.0022	61
Саморез 4х20	НМЛ 001.03.0023	8
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Стол СМЛ-7, в составе:	НМЛ 001.04.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.04.0001	2
Боковина правая	НМЛ 001.04.0002	2
Полка	НМЛ 001.04.0003	2
Дверь	НМЛ 001.04.0004	2
Столешница	НМЛ 001.04.0005	1
Борт	НМЛ 001.04.0006	1
Дно	НМЛ 001.04.0007	2
Дно ящика	НМЛ 001.04.0008	2
Задняя стенка	НМЛ 001.04.0009	2
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.04.0010	2

Фасад ящика	НМЛ 001.04.0011	2
Метабокс 86x450	НМЛ 001.04.0012	2 компл
Уголок пластиковый	НМЛ 001.04.0013	7
Ручка	НМЛ 001.04.0013	2
Заглушка	НМЛ 001.04.0014	5
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.04.0015	5
Петля	НМЛ 001.04.0016	2
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.04.0017	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.04.0018	6
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.04.0019	61
Саморез 4х20	НМЛ 001.04.0020	16
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба СТМЛ-2, в составе:	НМЛ 001.05.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.05.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.05.0002	1
Полка	НМЛ 001.05.0003	1
Дверь	НМЛ 001.05.0004	1
Столешница	НМЛ 001.05.0005	1
Борт	НМЛ 001.05.0006	1
Дно	НМЛ 001.05.0007	1
Задняя стенка	НМЛ 001.05.0008	1
Дно ящика	НМЛ 001.05.0009	1
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.05.0010	1
Фасад ящика	НМЛ 001.05.0011	1
Метабокс 86x450	НМЛ 001.05.0012	1 компл
Уголок пластиковый	НМЛ 001.05.0013	4
Уголок 20х20	НМЛ 001.05.0014	2
Ручка	НМЛ 001.05.0015	2
Заглушка	НМЛ 001.05.0015	4
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.05.0016	4
Петля	НМЛ 001.05.0017	2
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.05.0018	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.05.0019	6
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.05.0020	66
Саморез 4х20	НМЛ 001.05.0021	8
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба СТМЛ-11, в составе:	НМЛ 001.06.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.06.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.06.0002	1
Крышка	НМЛ 001.06.0003	1
Дно	НМЛ 001.06.0004	1
Полка	НМЛ 001.06.0005	1
Борт	НМЛ 001.06.0006	1
Задняя стенка	НМЛ 001.06.0007	1
Дверь	НМЛ 001.06.0008	2
Вставка в профиль	НМЛ 001.06.0009	6
Вставка в профиль	НМЛ 001.06.0010	6
Уголок алюминиевый	НМЛ 001.06.0011	3
Уголок "Грандис"	НМЛ 001.06.0012	6
Петля	НМЛ 001.06.0013	4
Ручка	НМЛ 001.06.0014	2
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.06.0015	4
Заглушка	НМЛ 001.06.0016	4
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.06.0017	42
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба ТМЛ-2, в составе:	НМЛ 001.07.0000	1

Боковина левая	НМЛ 001.07.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.07.0002	1
Крышка	НМЛ 001.07.0003	1
Дно	НМЛ 001.07.0004	1
Полка	НМЛ 001.07.0005	1
Борт	НМЛ 001.07.0006	1
Задняя стенка	НМЛ 001.07.0007	1
Дверь	НМЛ 001.07.0008	1
Вставка в профиль	НМЛ 001.07.0009	6
Вставка в профиль	НМЛ 001.07.0010	6
Уголок алюминиевый	НМЛ 001.07.0011	2
Уголок "Грандис"	НМЛ 001.07.0012	4
Петля	НМЛ 001.07.0013	2
Ручка	НМЛ 001.07.0014	1
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.07.0015	4
Заглушка	НМЛ 001.07.0016	4
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.07.0017	42
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба ТМЛ-3, в составе:	НМЛ 001.08.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.08.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.08.0002	1
Полка	НМЛ 001.08.0003	1
Дверь	НМЛ 001.08.0004	1
Столешница	НМЛ 001.08.0005	1
Борт	НМЛ 001.08.0006	1
Дно	НМЛ 001.08.0007	1
Задняя стенка	НМЛ 001.08.0008	1
Дно ящика	НМЛ 001.08.0009	1
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.08.0010	1
Фасад ящика	НМЛ 001.08.0011	1
Метабокс 86х450	НМЛ 001.08.0012	1компл
Уголок пластиковый	НМЛ 001.08.0013	5
Уголок 20х20	НМЛ 001.08.0014	2
Ручка	НМЛ 001.08.0015	2
Заглушка	НМЛ 001.08.0015	5
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.08.0016	5
Петля	НМЛ 001.08.0017	2
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.08.0018	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.08.0019	6
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.08.0020	66
Саморез 4х20	НМЛ 001.08.0021	8
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба ТМЛ-12, в составе:	НМЛ 001.09.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.09.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.09.0002	1
Крышка	НМЛ 001.09.0003	1
Дно	НМЛ 001.09.0004	1
Полка	НМЛ 001.09.0005	2
Задняя стенка	НМЛ 001.09.0006	1
Дверь	НМЛ 001.09.0007	2
Вставка в профиль	НМЛ 001.09.0010	6
Вставка в профиль	НМЛ 001.09.0011	6
Уголок алюминиевый	НМЛ 001.09.0012	3
Уголок "Грандис"	НМЛ 001.09.0013	6
Петля	НМЛ 001.09.0014	4
Ручка	НМЛ 001.09.0015	2
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.09.0016	4

Заглушка	НМЛ 001.09.0017	4
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.09.0018	42
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба ТМП-1, в составе:	НМЛ 001.10.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.10.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.10.0002	1
Крышка	НМЛ 001.10.0003	1
Дно	НМЛ 001.10.0004	1
Полка	НМЛ 001.10.0005	2
Задняя стенка	НМЛ 001.10.0006	1
Дверь	НМЛ 001.10.0007	1
Вставка в профиль	НМЛ 001.10.0008	6
Уголок алюминиевый	НМЛ 001.10.0009	2
Уголок "Грандис"	НМЛ 001.10.0010	4
Петля	НМЛ 001.10.0011	2
Ручка	НМЛ 001.10.0012	1
Опора колесная	НМЛ 001.10.0013	4
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.10.0014	42
Винт М8х30	НМЛ 001.10.0015	4
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Тумба ТМП-11, в составе:	НМЛ 001.11.0000	1
Боковина левая	НМЛ 001.11.0001	1
Боковина правая	НМЛ 001.11.0002	1
Крышка	НМЛ 001.11.0003	1
Дно	НМЛ 001.11.0004	1
Полка	НМЛ 001.11.0005	1
Задняя стенка	НМЛ 001.11.0006	1
Дверь	НМЛ 001.11.0007	1
Лицевая панель	НМЛ 001.11.0008	1
Дно ящика	НМЛ 001.11.0009	1
Задняя стенка ящика	НМЛ 001.11.0010	1
Уголок алюминиевый	НМЛ 001.11.0011	2
Уголок "Грандис"	НМЛ 001.11.0012	4
Опора колесная	НМЛ 001.11.0013	4
Петля	НМЛ 001.11.0014	2
Ручка	НМЛ 001.11.0015	2
Метабокс 86x450	НМЛ 001.11.0016	1компл
Вставка в профиль	НМЛ 001.11.0017	6
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.11.0018	42
Винт М8х30	НМЛ 001.11.0019	4
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Шкаф ШМЛ-4, в составе:	НМЛ 001.12.0000	1
Боковина	НМЛ 001.12.0001	2
Задняя стенка	НМЛ 001.12.0002	1
Дверь	НМЛ 001.12.0003	1
Дно	НМЛ 001.12.0004	1
Полки	НМЛ 001.12.0005	4
Крыша	НМЛ 001.12.0006	1
Дверь	НМЛ 001.12.0007	1
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.12.0008	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.12.0009	6
Заглушка	НМЛ 001.12.0010	4
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.12.0011	4
Ручка	НМЛ 001.12.0012	2
Петля 4-х шарнирная	НМЛ 001.12.0013	4
Уголок 20x20	НМЛ 001.12.0014	2

Саморез 3,5x16	НМЛ 001.12.0015	48
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Шкаф ШМЛ-6, в составе:	НМЛ 001.13.0000	1
Боковина	НМЛ 001.13.0001	2
Задняя стенка	НМЛ 001.13.0002	1
Дверь рамочная	НМЛ 001.13.0003	1
Дно	НМЛ 001.13.0004	1
Полки	НМЛ 001.13.0005	4
Крыша	НМЛ 001.13.0006	1
Дверь	НМЛ 001.13.0007	1
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.13.0008	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.13.0009	6
Заглушка	НМЛ 001.13.0010	4
Опора регул. M8x25 PM	НМЛ 001.13.0011	4
Ручка	НМЛ 001.13.0012	1
Петля 4-х шарнирная	НМЛ 001.13.0013	4
Уголок 20x20	НМЛ 001.13.0014	2
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.13.0015	48
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Шкаф ШМЛ-8, в составе:	НМЛ 001.14.0000	1
Боковина	НМЛ 001.14.0001	2
Задняя стенка	НМЛ 001.14.0002	1
Дверь	НМЛ 001.14.0003	1
Дно	НМЛ 001.14.0004	1
Полки	НМЛ 001.14.0005	2
Крыша	НМЛ 001.14.0006	1
Штанга	НМЛ 001.14.0007	1
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.14.0008	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.14.0009	6
Заглушка	НМЛ 001.14.0010	4
Опора регул. M8x25 PM	НМЛ 001.14.0011	4
Ручка	НМЛ 001.14.0012	1
Петля 4-х шарнирная	НМЛ 001.14.0013	3
Уголок 20x20	НМЛ 001.14.0014	2
Штангодержатель	НМЛ 001.14.0015	2
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.14.0016	48
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Шкаф ШМЛ-12, в составе:	НМЛ 001.15.0000	1
Боковина	НМЛ 001.15.0001	2
Задняя стенка	НМЛ 001.15.0002	1
Дверь	НМЛ 001.15.0003	2
Дно	НМЛ 001.15.0004	1
Полки	НМЛ 001.15.0005	4
Крыша	НМЛ 001.15.0006	1
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.15.0007	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.15.0008	6
Заглушка	НМЛ 001.15.0009	4
Опора регул. M8x25 PM	НМЛ 001.15.0010	4
Ручка	НМЛ 001.15.0011	2
Петля 4-х шарнирная	НМЛ 001.15.0012	6
Уголок 20x20	НМЛ 001.15.0013	3
Саморез 3,5x16	НМЛ 001.15.0014	62
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1
Шкаф ШМЛ-16, в составе:	НМЛ 001.16.0000	1
Боковина	НМЛ 001.16.0001	2

Задняя стенка	НМЛ 001.16.0002	1
Дверь рамочная	НМЛ 001.16.0003	2
Дно	НМЛ 001.16.0004	1
Полки	НМЛ 001.16.0005	4
Крыша	НМЛ 001.16.0006	1
Дверь	НМЛ 001.16.0007	2
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.16.0008	6
Вставка в вертикальный профиль	НМЛ 001.16.0009	6
Заглушка	НМЛ 001.16.0010	4
Опора регул. М8х25 РМ	НМЛ 001.16.0011	4
Ручка	НМЛ 001.16.0012	2
Петля 4-х шарнирная	НМЛ 001.16.0013	8
Уголок 20х20	НМЛ 001.16.0014	3
Саморез 3,5х16	НМЛ 001.16.0015	52
Эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации	НМЛ 001.00.0000	1

1.4. Устройство и работа.

Мебель относится к корпусной мебели для хранения (мебель для хранения и размещения различных предметов).

Двери изделий имеют петли, что предотвращает их самопроизвольное открывание (все кроме столов СМЛ-1, СМЛ-3).

Изделия мебели установленные на колесные опоры (арт.ТМЛ-1, ТМЛ-11) :

- имеют свободный ход по поверхности пола при усилии при выключенном тормозном устройстве;

-стоят без движения на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний при включенном тормозном устройстве;

- имеют усилие фиксации тормоза (расфиксации) не более 50 Н.

Вся мебель доставляется в разобранном виде. Для начала работ изделия необходимо собрать согласно приложенной инструкции по сборке см. Приложение:

Приложение 1: СМЛ-1;

Приложение 2: СМЛ-3

Приложение 3: СМЛ-5

Приложение 4: СМЛ-7

Приложение 5: СТМЛ-2

Приложение 6: СТМЛ-11

Приложение 7: ТМЛ-2

Приложение 8: ТМЛ-3

Приложение 9:ТМЛ-12

Приложение 10: ТМП-1

Приложение 11: ТМП-11

Приложение 12: ШМЛ-4

Приложение 13: ШМЛ-6

Приложение 14: ШМЛ-8

Приложение 15: ШМЛ-12

Приложение 16: ШМЛ-16

Сборка и разборка изделий проводится без дополнительной подгонки.

Облицовка декоративными материалами для пластей фасадных и рабочих поверхностей единичного изделия или изделий набора, гарнитура и изделий, блокируемых по длине и высоте, должна быть подобрана по текстуре (рисунку) и цвету.

В пределах одного пласта или кромки лицевых поверхностей облицовка должна быть одной породы, одного цвета и вида среза.

1.5. Маркировка.

1.5.1. Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование изделия мебели;
- год изготовления изделия (или две последние цифры);
- наименование фирмы-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя;
- обозначение настоящих ТУ.

1.5.2. Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

1.6. Упаковка.

1.6.1. Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации:

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности:

Вредным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

1.6.2. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

1.6.3. При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

1.6.4. Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с гарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

1.6.5. Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

1.6.6. Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (зашитые) пакеты или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Съемную фурнитуру и комплектующие изделия по согласованию с потребителем допускается поставлять отдельно упакованной с этой же партией изделий мебели. Фурнитуры, набора с соответствующими указаниями в товаросопроводительной документации.

1.6.7. Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

1.6.8. Упаковывание, транспортирование и хранение стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

1.6.9. На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

Инструкция по уходу за мебелью может быть совмещена с инструкцией по сборке.

1.6.10. При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении по вагонными отправлениями допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

II. Показания к применению.

Мебель медицинская предназначена для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

Мебель для обстановки больниц, поликлиник и других медицинских учреждений.

III. Противопоказания к применению.

Мебель противопоказаний к применению не имеет.

IV. Использование по назначению.

4.1. Эксплуатационные ограничения:

- мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);
- беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного перационального физического воздействия;
- беречь от открытого огня;
- не использовать мебель по иному назначению;

4.2. Подготовка изделия к использованию:

1) вскрыть упаковку, достать мебель (вся мебель поставляется в разобранном виде) и составляющие для установки и эксплуатационные документы;

2) собрать мебель согласно инструкции по сборке (см. Приложение 1-16);

3) визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений;

4) установить мебель в необходимом месте;

5) провести уборку мебели с применением моющего средства.

4.3. Использование изделия.

Использовать мебель согласно своему функциональному назначению.

V. Техническое обслуживание.

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

VI. Эксплуатация, транспортирование и хранение

Изделия мебели при эксплуатации исправны при воздействии температуры от $+35^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$ (рабочее значение) и влажности 80% при температуре 25°C (верхнее значение) для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444

Изделия мебели в транспортной упаковке выдерживают воздействие температуры от $+50^{\circ}\text{C}$ до -50°C и влажности 100% при температуре 25°C (верхнее значение) воздуха в процессе транспортирования в условиях 5 по ГОСТ 15150.

6.1. Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

6.2. Гарантийные сроки хранения.

6.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

6.2.2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

6.2.3. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне рыночном распределении - со дня получения ее потребителем.

6.2.4. Средний срок службы не менее 5 лет.

VII. Транспортирование

7.1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

7.2. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

7.3. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

VIII. Утилизация.

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

IX. Контактные данные производителя.

Изготовитель: ООО «Элита-Проф»

Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промышленная зона

БСИ, ул.Профильная, д.84

Тел.: (8552) 77-80-90

E-mail: zam@elitaprof.com

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера страниц		Номер изменения
	заменённых	
	дополнительных	
	исключённых	
1, 2, 14, 54	Изменённых	
88	Всего страниц после внесения изменения	
	Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного документа)	
	Подпись лица, внесшего изменения	
Хабибуллин	Фамилия этого лица и дата внесения изменения	

Приложение 1 Инструкция по сборке СМЛ-1

СМЛ-1

1



Стол медицинский лабораторный
Инструкция по сборке



Внимание! При сборке не допускайте отклонения изображений от комплектации упаковки. Работы проводить на чистой и ровной поверхности



Инструменты:

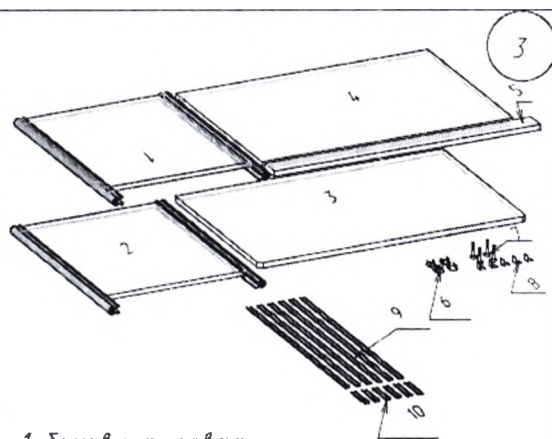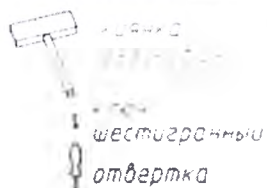


- 1-боковина левая
- 2-боковина правая
- 3-столешница
- 4-задняя стенка
- 5-борт
- 6-заглушка верт. проф.
- 7-опора регулируемая
- 8-уголок с пластиковым чехлом
- 9- вставка в вертикальный профиль
- 10- вставка в вертикальный профиль

1. Соединить заднюю стенку с боковинами.




5

2. Закрепить столешницу

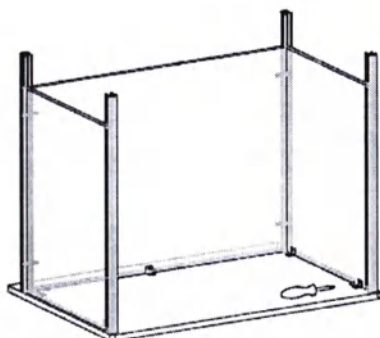


6

3. Установить вставки с заглушками и опоры.

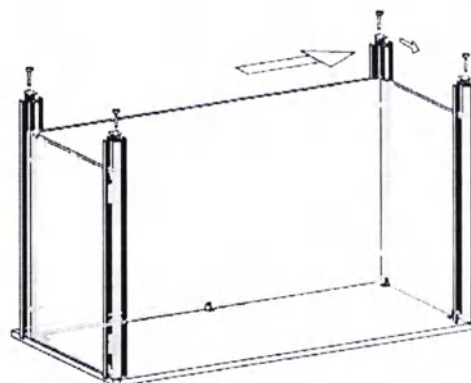

7

4. Закрепить борт

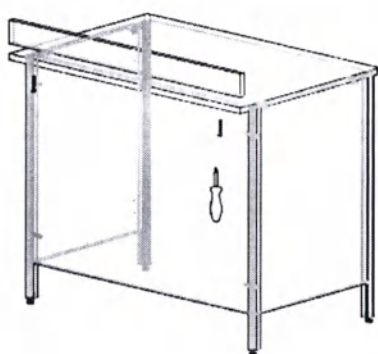

8

Изготовитель ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com

Инструкция по сборке СМЛ-3


СМЛ-3

Стол медицинский лабораторный
Инструкция по сборке



1


Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки. Работы проводить на чистой и ровной поверхности

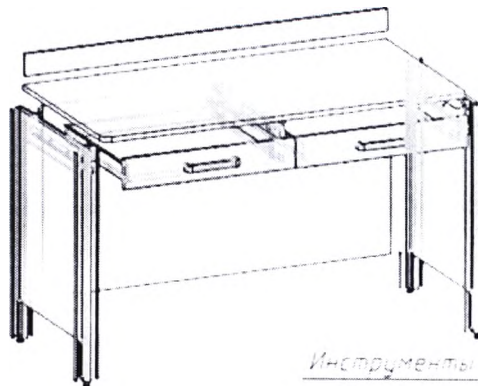

Инструменты

Кружок
Резиновая


2

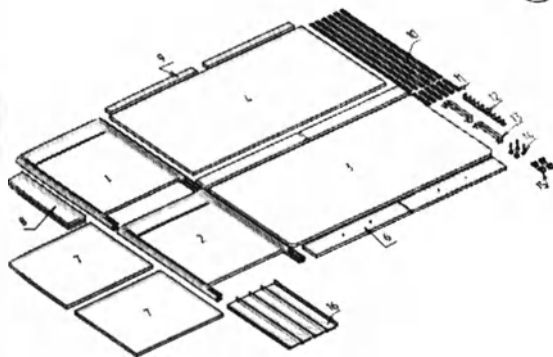

- 1-боковина левая
- 2-боковина правая
- 3-столешница
- 4-задняя стенка
- 5-борт
- 6-фасад ящика
- 7-дно ящика
- 8-средняя планка
- 9-задняя стенка ящика
- 10-вставка в вертикальный профиль
- 11-вставка в вертикальный профиль
- 12-уголок
- 13-ручка
- 14-опора регулируемая
- 15-заглушка вертикального профиля
- 16-метабокс

3


1. Соединить уголки и направляющие

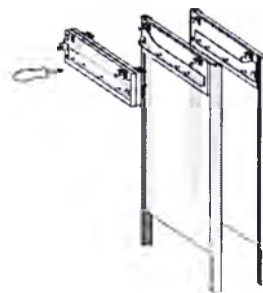

4


5

2. Соединить заднюю стенку с боковинами и средней планкой.

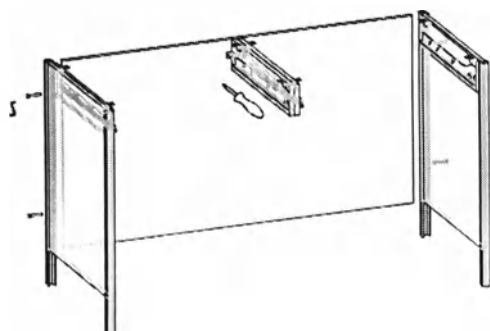

6

3. Закрепить столешницу, установить заглушки и опоры.

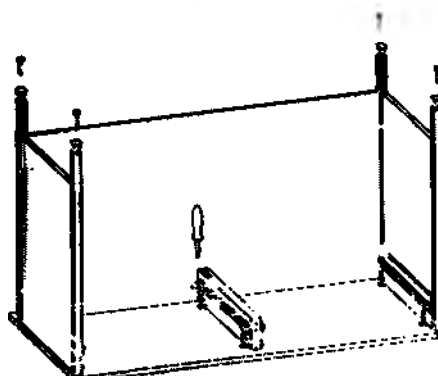


7

4. Закрепить борт. Установить вставки.




5. Собрать ящики.

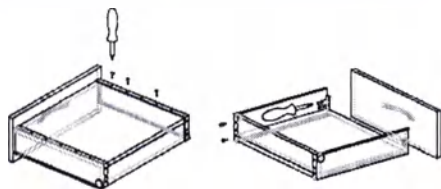

8



6. Установить ящики

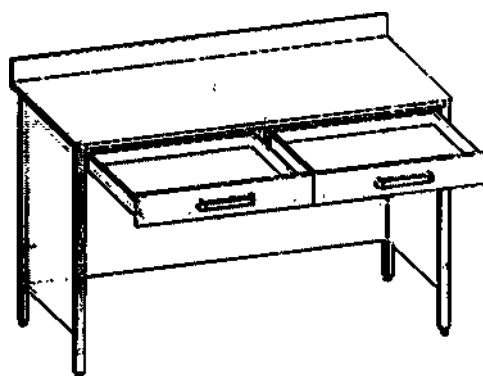

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@eulaprof.com


Приложение 3

Инструкция по сборке СМЛ-5

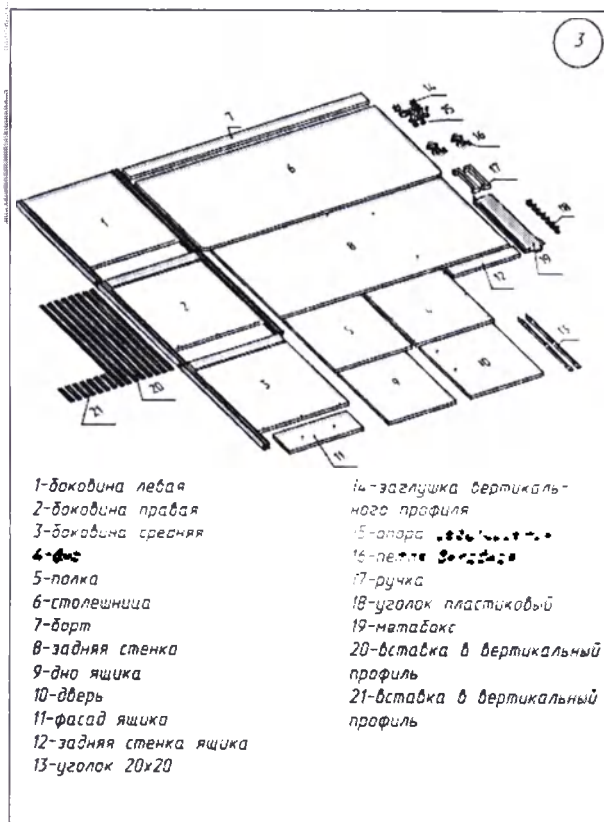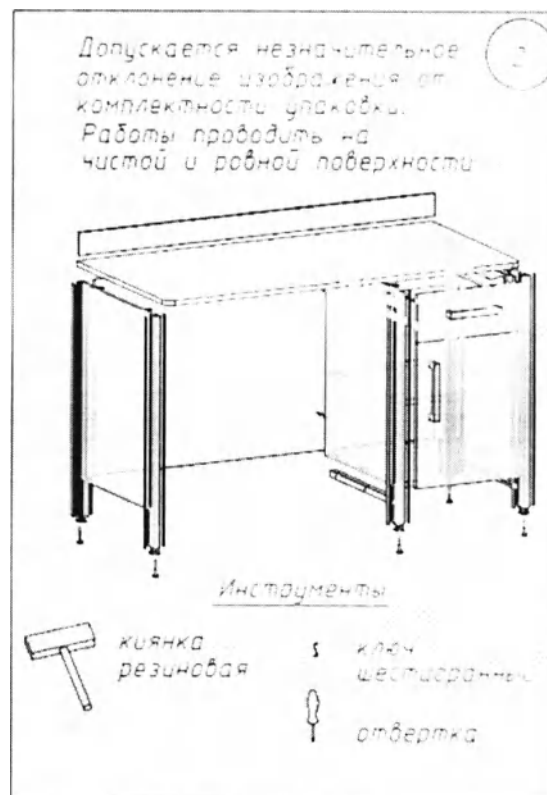


5

2. Соединить заднюю стенку с боковинами.

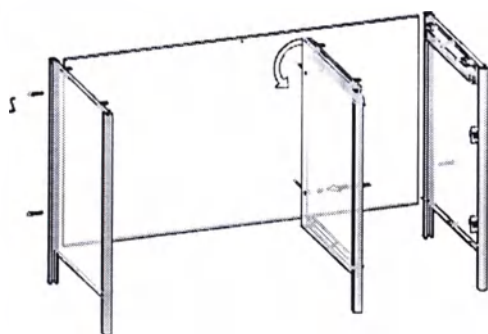


6

3. Закрепить столешницу
дно и установить полку.

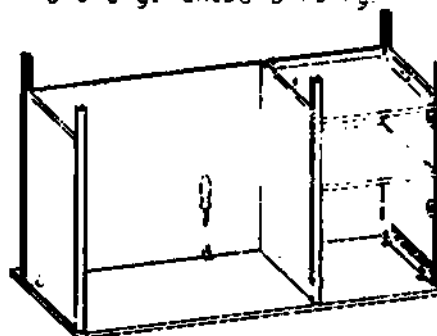


7

4. Установить вставки с
заглушками и регулируемые опоры.

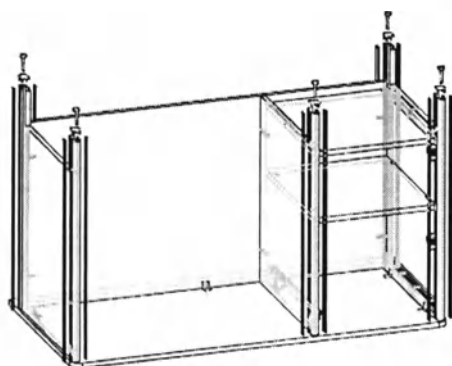


5. Собрать ящик.

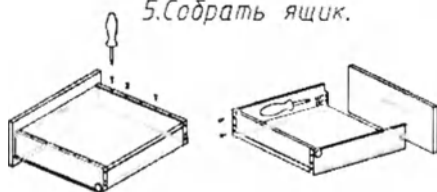

8

5. Закрепить дверь.
Надеть дверь и установить ручку.

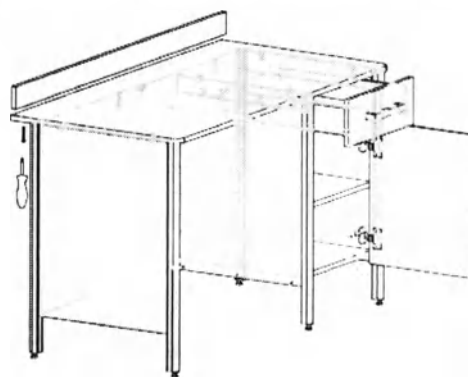




Исходные 205 914010100

8(8552) 77-80-90

E-mail: prod@elitaprof.com

Приложение 4

Инструкция по сборке СМЛ-7

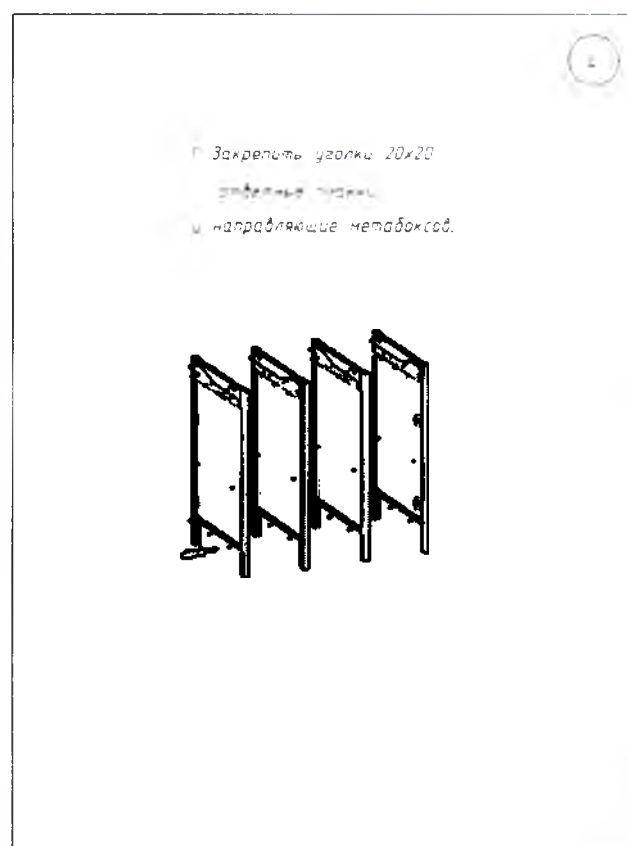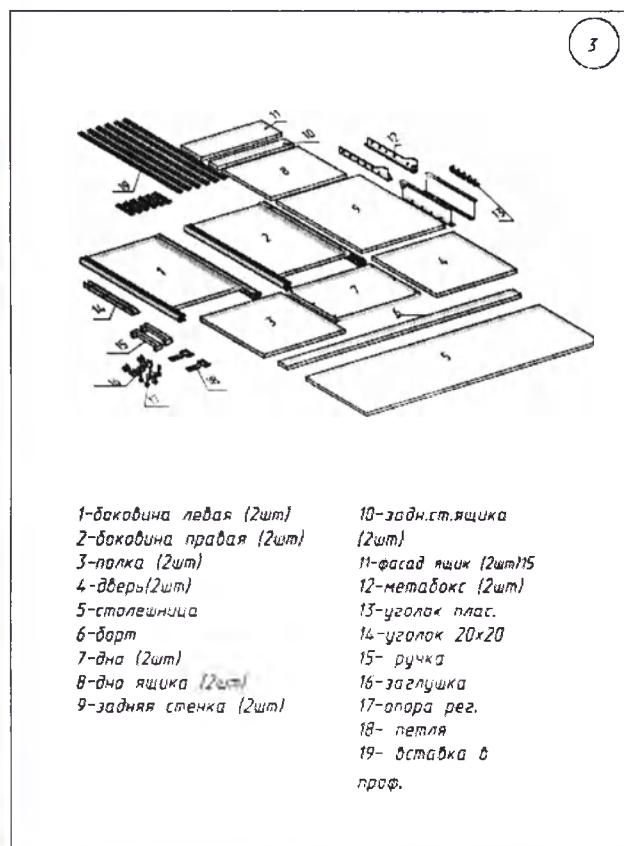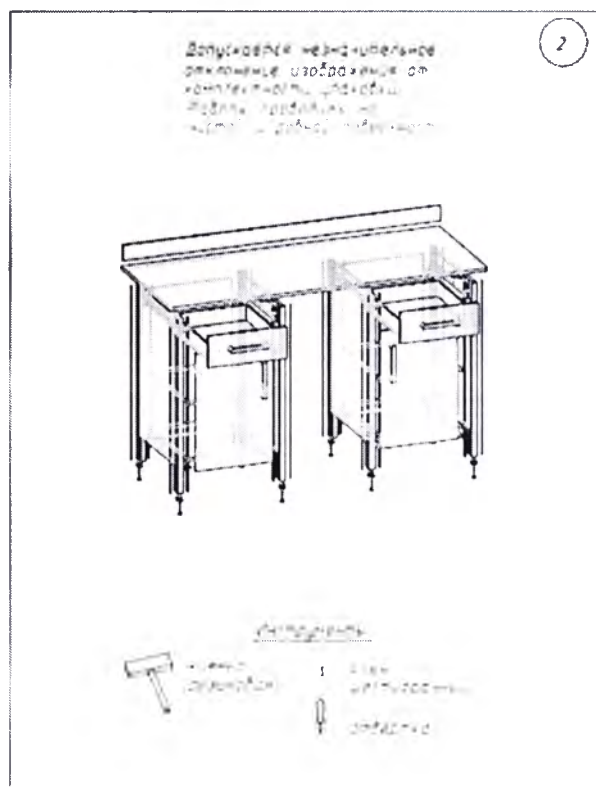


5

2. Соединить заднюю стенку
с боковинами.



6

3. Закрепить столешницу
дно и установить полку.

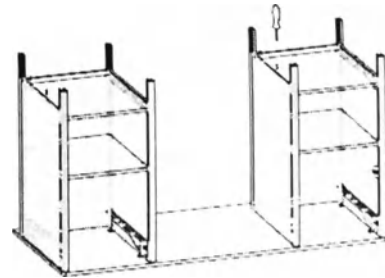


5 Собрать ящик




7

4. Установить вставки с
заглушками и регулирующие опоры.

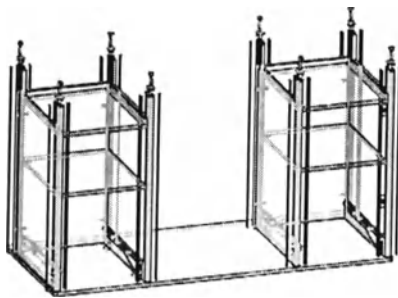



5. Закрепить борт.
Навесить двери и установить ручки

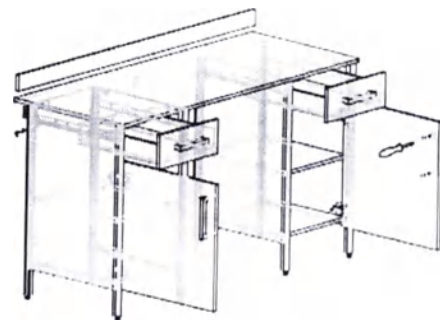

8185521
E-mail: prae enterprof.com


Приложение 5

Инструкция по сборке СТМЛ-2

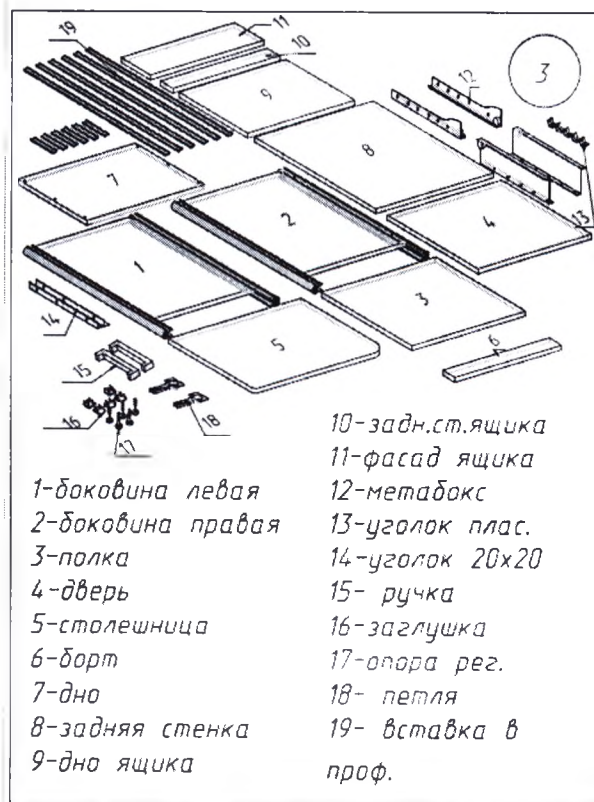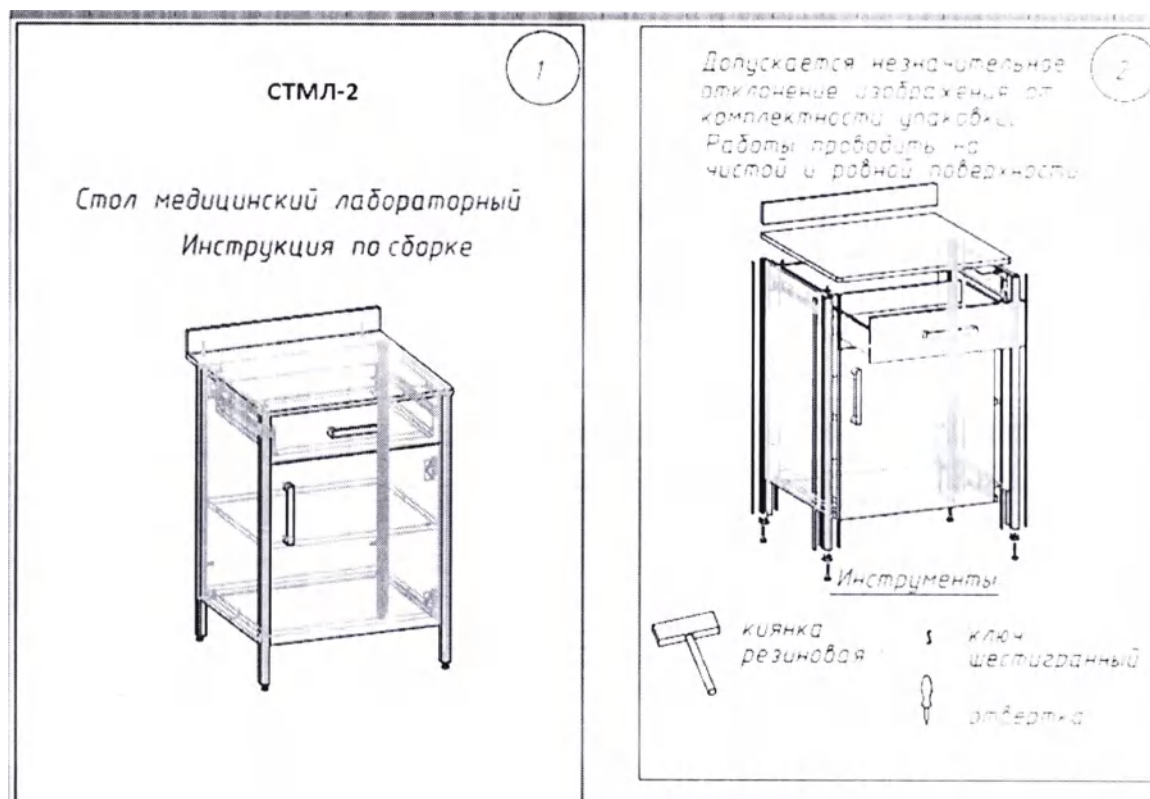


5

2. Соединить заднюю стенку с боковинами.

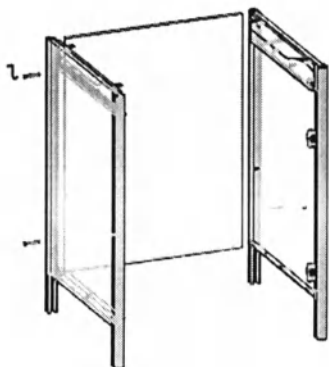


6

3. Закрепить столешницу дно и установить полку.

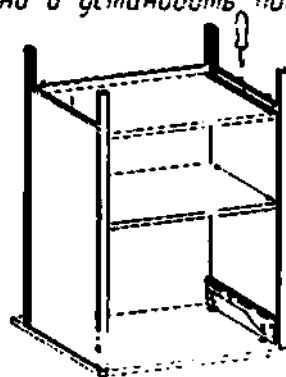


5. Собрать ящик.

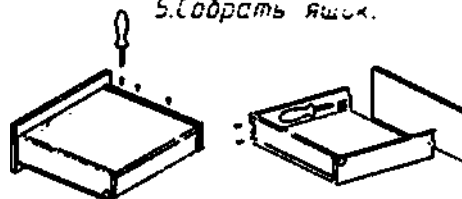


7

4. Установить вставки с заглушками и регулируемые опоры.

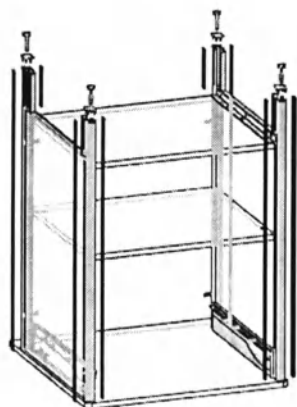

8




5. Закрепить борт. Повесить двери и установить ручки.

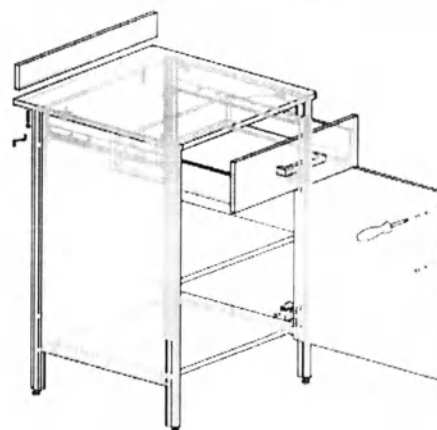

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com


Приложение 6

Инструкция по сборке СТМЛ-11

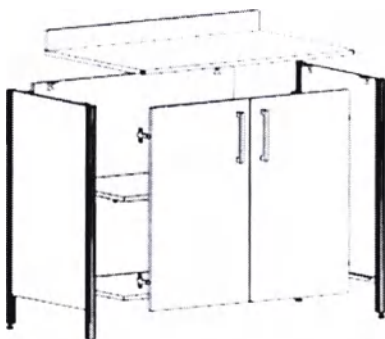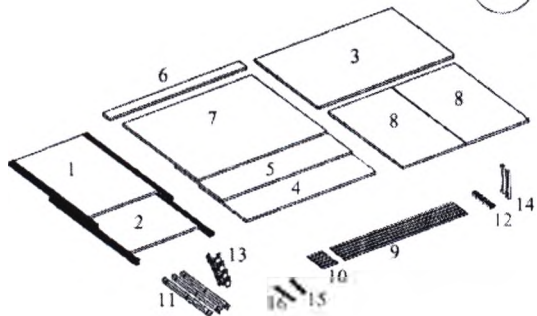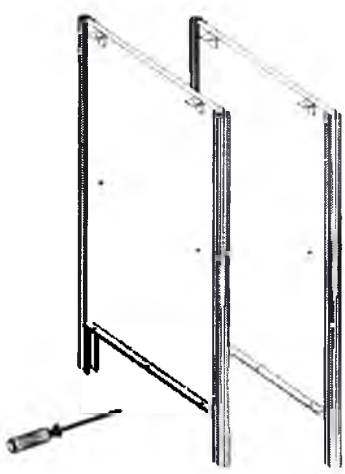
СТМЛ-11 1 Стол-тумба медицинский (лабораторный) Инструкция по сборке 	2 Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки. Работы проводить на чистой и ровной поверхности.  инструменты киянка резиновая шестигранный отвёртка																								
3  <table border="0"> <tr> <td>1-боковина левая</td> <td>13-петля вкладная</td> </tr> <tr> <td>2-боковина правая</td> <td>14-ручка</td> </tr> <tr> <td>3-крыша</td> <td>15-опора регулируемая</td> </tr> <tr> <td>4-дно</td> <td>16-заглушка профиля</td> </tr> <tr> <td>5-полка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6-борт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-задняя стенка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8-дверцы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9-вставка в профиль</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-вставка в профиль</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11-уголок алюминиевый</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12-уголок "грандис"</td> <td></td> </tr> </table>	1-боковина левая	13-петля вкладная	2-боковина правая	14-ручка	3-крыша	15-опора регулируемая	4-дно	16-заглушка профиля	5-полка		6-борт		7-задняя стенка		8-дверцы		9-вставка в профиль		10-вставка в профиль		11-уголок алюминиевый		12-уголок "грандис"		4 1. Соединить уголки с боковинами и забить полкодержатели. 
1-боковина левая	13-петля вкладная																								
2-боковина правая	14-ручка																								
3-крыша	15-опора регулируемая																								
4-дно	16-заглушка профиля																								
5-полка																									
6-борт																									
7-задняя стенка																									
8-дверцы																									
9-вставка в профиль																									
10-вставка в профиль																									
11-уголок алюминиевый																									
12-уголок "грандис"																									

5

2. Соединить уголки с задней стенкой.

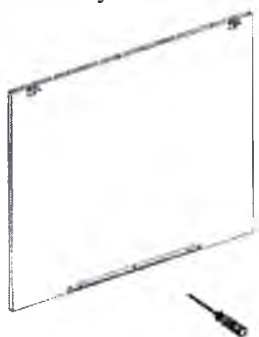


3. Соединить боковины с задней стенкой.

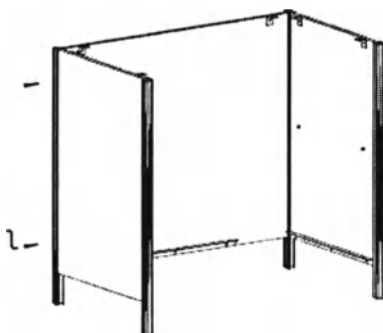


6

4. Закрепить столешницу и установить заглушки и опоры.

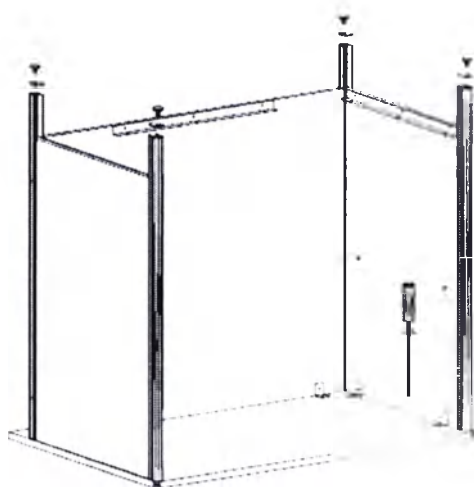


7

5. Закрепить дно и борт. Установить вставки.

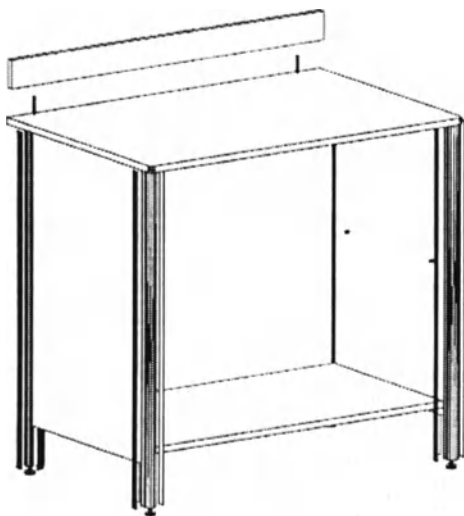

8

6. Вложить полку. Установить фасады

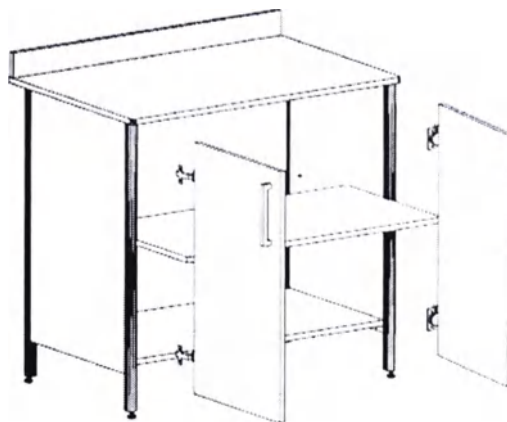

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@clitaprof.com


Приложение 7

Инструкция по сборке ТМЛ-2

ТМЛ-2


1

Тумба медицинская (лабораторная)
Инструкция по сборке

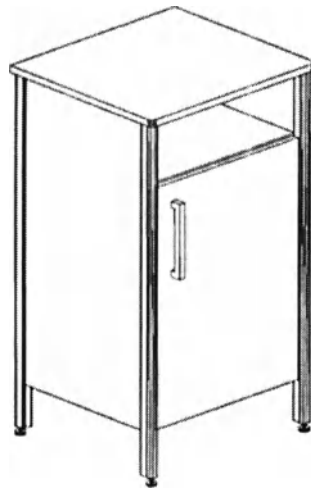

Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки.
Работы проводить на чистой и ровной поверхности.

2

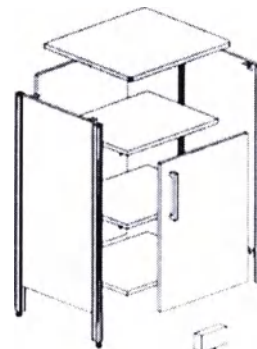


инструменты
киянка резиновая

шестигранник



отвертка

3

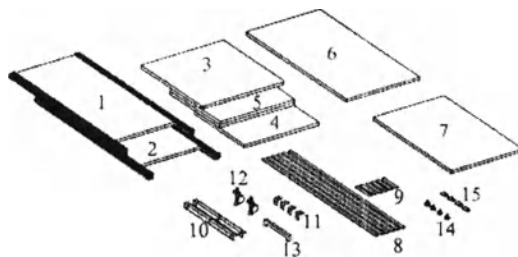

1-боковина левая

2-боковина правая

3-крыша

4-дно

5-полка

6-задняя стенка

7-дверца

8-вставка в профиль

9-вставка в профиль

10-уголок алюминий

11-уголок "грандис"

12-петля вкладная


13-ручка

14-опора регулируемая

15-заглушка профиля


4

1. Соединить уголки с боковинами и забить полкодержатели.

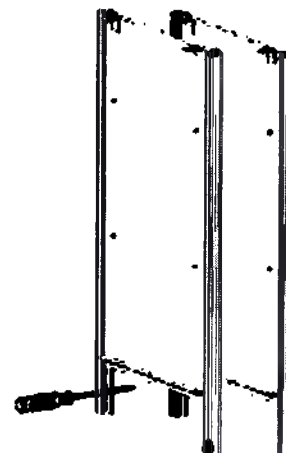


5

2. Соединить боковины с задней стенкой.

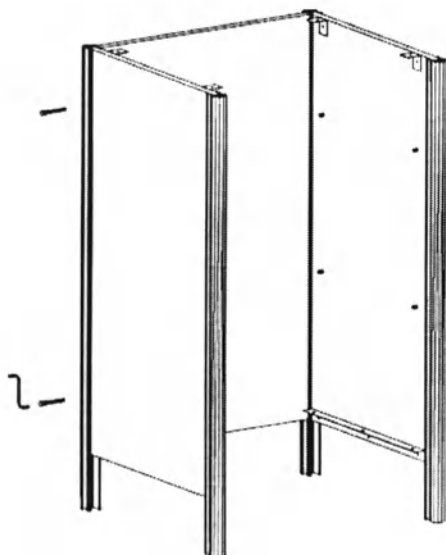


6

3. Закрепить столешницу и установить заглушки и опоры.

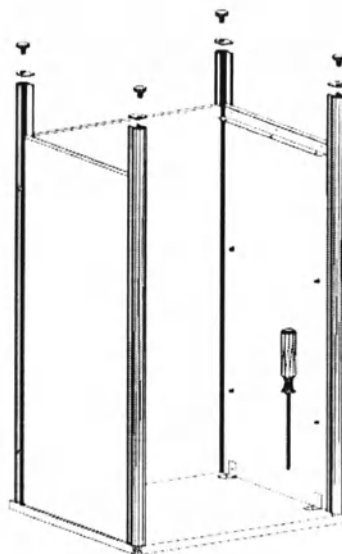


7

4. Закрепить дно . Установить вставки.

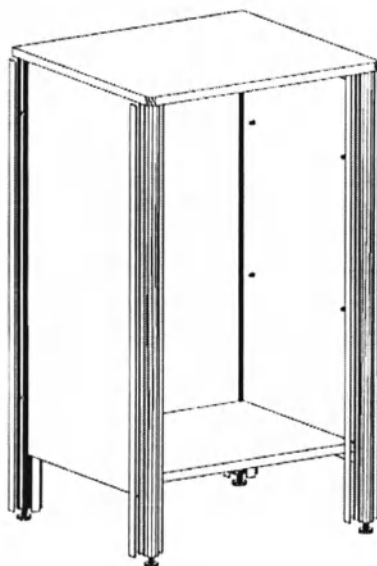

8

5. Вложить полки. Установить фасад.

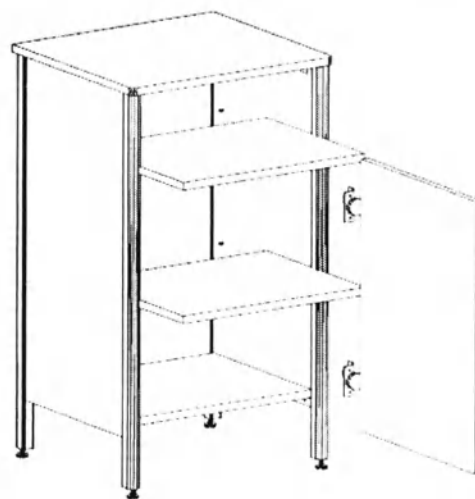


Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com


Инструкция по сборке ТМЛ-3

ТМЛ-3

Стол медицинский лабораторный
Инструкция по сборке

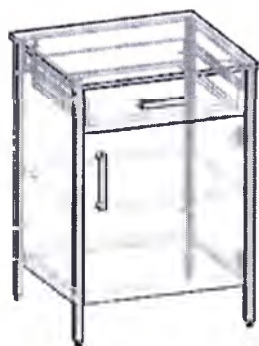

Допускается незначительное
отклонение изображения от
комплектности упаковки.
Работы проводить на
чистой и ровной поверхности.

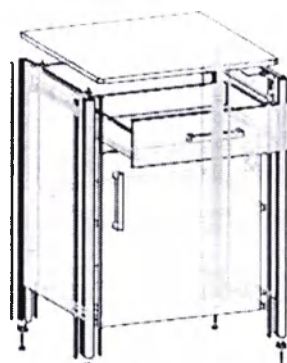

Инструменты




клянка
резиновая



шестигранник




отвертка

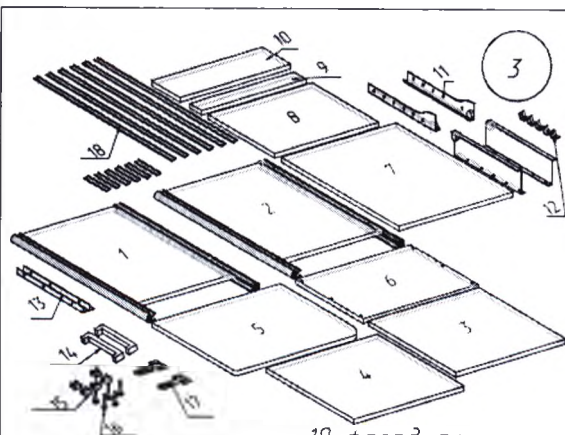

1-боковина левая
2-боковина правая
3-полка
4-дверь
5-столешница
6-дно
7-задняя стенка
8-дно ящика
9-задн.ст.ящика


10-фасад ящика
11-метабокс
12-уголок плас.
13-уголок 20x20
14-ручка
15-заглушка
16-опора рег.
17-петля
18-вставка в
проф.

1. Закрепить уголки 20x20
ответные планки
и направляющие метабокса.

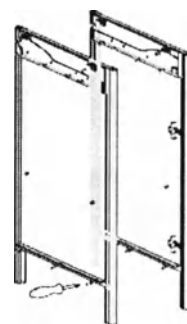


5

2. Соединить заднюю стенку с боковинами.

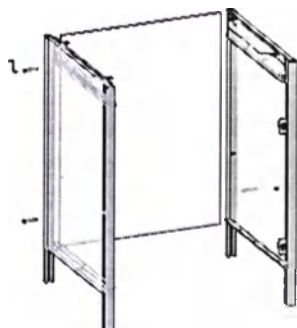

3. Закрепить столешницу дно и установить полку.

6

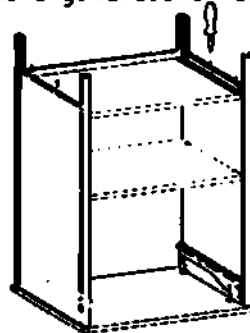

5. Собрать ящик




7

4. Установить вставки с заглушками и регулируемые опоры.



5. Навесить двери и установить ручки.

8

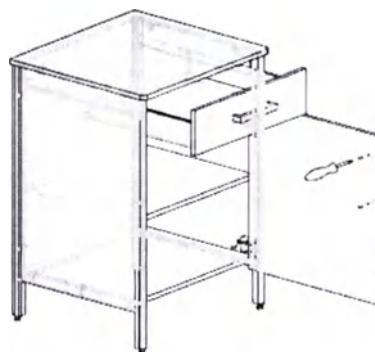


Изготовитель ООО «Евро-Проф»



8165121 77-81-90

E-mail: prod@europrof.com

Приложение 9


Инструкция по сборке ТМЛ-12

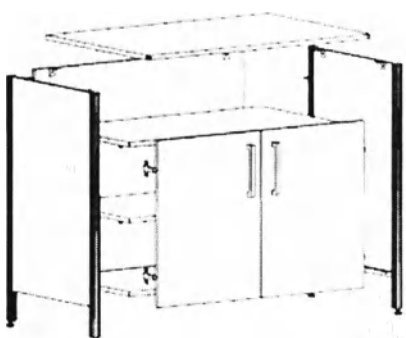ТМЛ-12 Тумба медицинская (лабораторная) Инструкция по сборке 	1 Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки. Работы проводить на чистой и ровной поверхности.   <u>инструменты</u> киянка резиновая шестигранник отвёртка
--	--

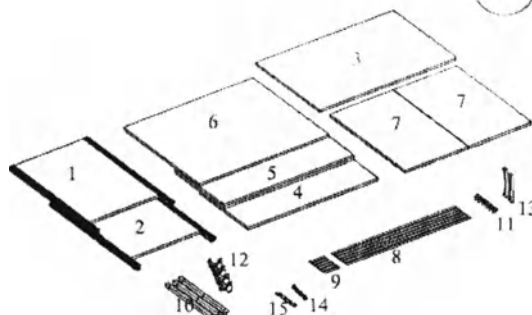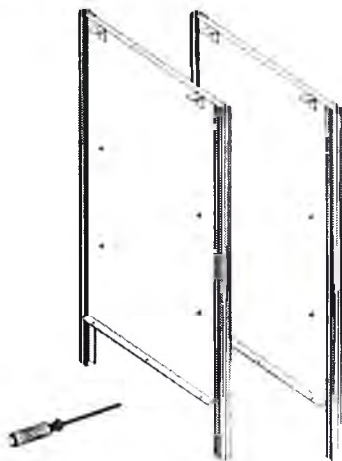
3  1-боковина левая 2-боковина правая 3-крыша 4-дно 5-полка 6-задняя стенка 7-дверцы 8-вставка в профиль 9-вставка в профиль 10-уголок алюминий 11-уголок "гранлис" 12-петля вкладная 13-ручка 14-опора регулируемая 15-заглушка профиля	4 1. Соединить уголки с боковинами и забить полкодержатели. 
---	--

5

2. Соединить уголки с задней стенкой.

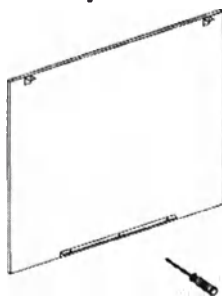


3. Соединить боковины с задней стенкой.

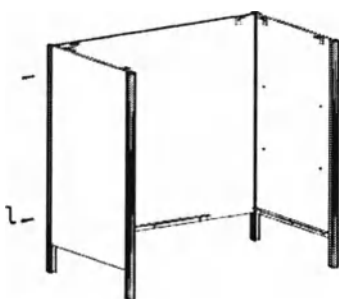


6

4. Закрепить столешницу и установить заглушки и опоры.

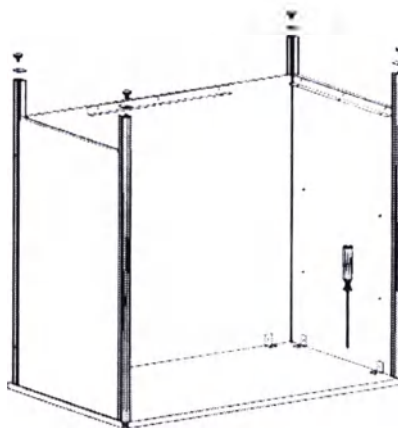


7

5. Закрепить дно . Установить вставки.

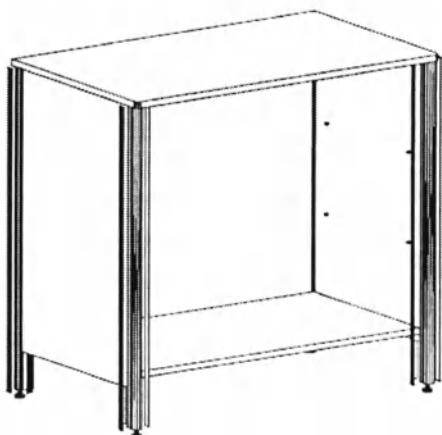

8

6. Вложить полки. Установить фасады.

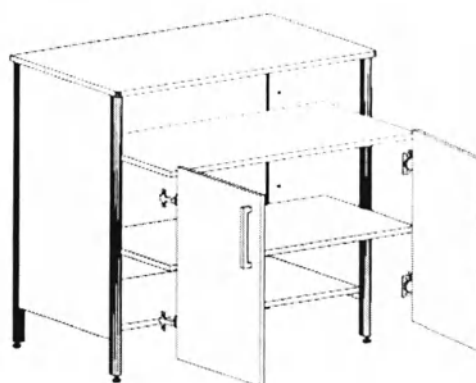


Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com

Приложение 10

Инструкция по сборке ТМП-1

ТМП-1

Тумба медицинская прикроватная
Инструкция по сборке

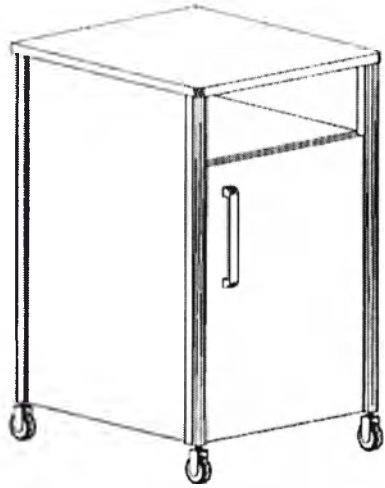

1


Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки.
Работы проводить на чистой и ровной поверхности.

2



инструменты
киянка резиновая
шестигранник
отвёртка


3

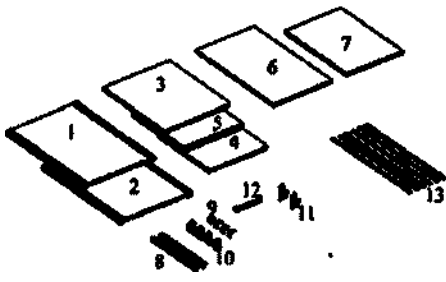

1-боковина левая	11-петля вкладная
2-боковина правая	12-ручка
3-крыша	13-вставка в профиль
4-дно	
5-полка	
6-задняя стенка	
7-дверца	
8-уголок алюминий	
9-уголок "грандис"	
10-опора колёсная	


4

1. Соединить уголки с боковинами и забить полкодержатели.

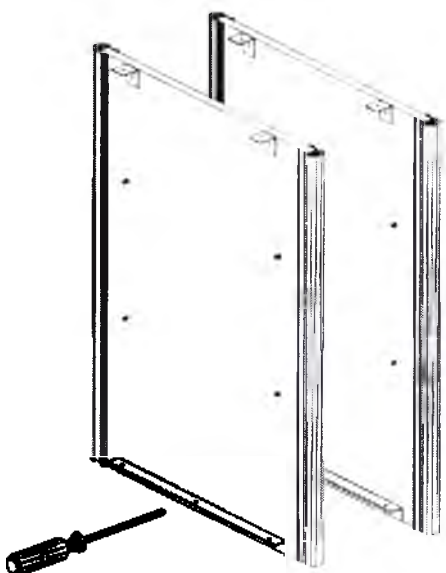


5

2. Соединить боковины с задней стенкой.

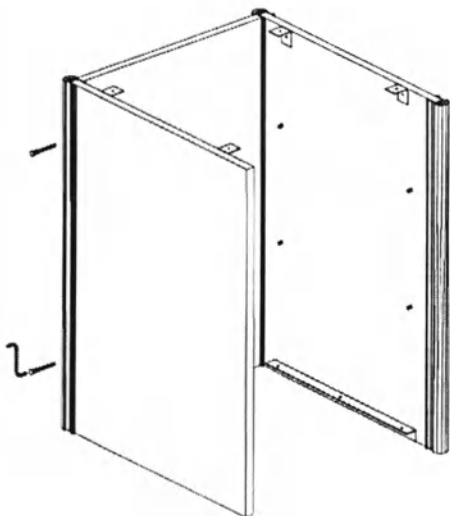


6

3. Закрепить столешницу и установить колёсные опоры.

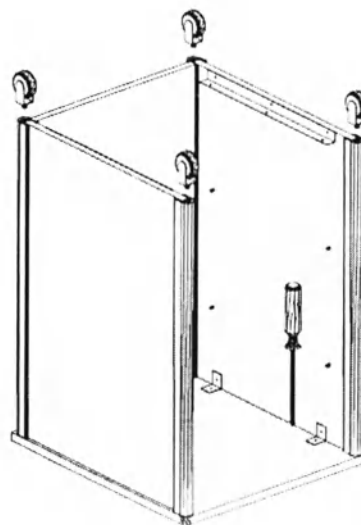

7

4. Закрепить дно . Установить вставки.

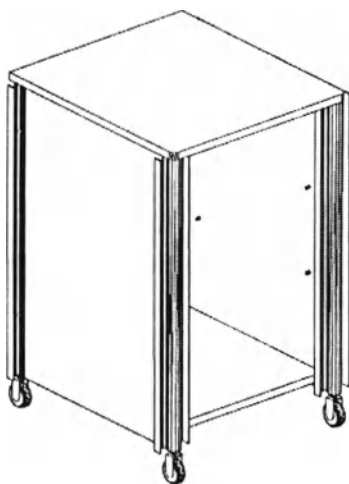

8




5. Вложить полки. Установить фасад.



Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com


Приложение 11

Инструкция по сборке ТМП-11

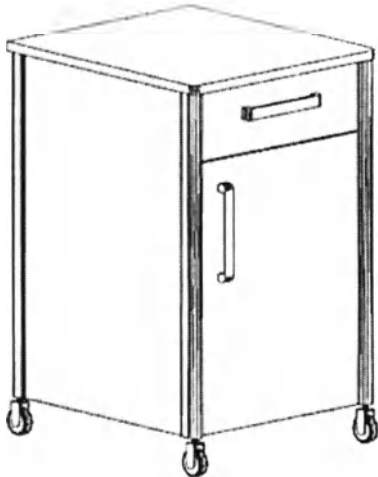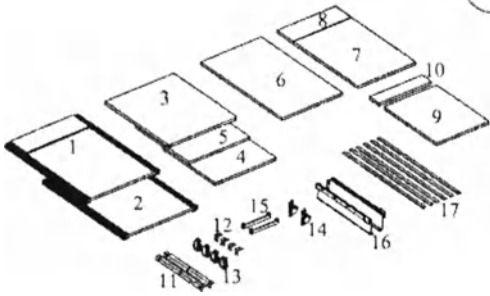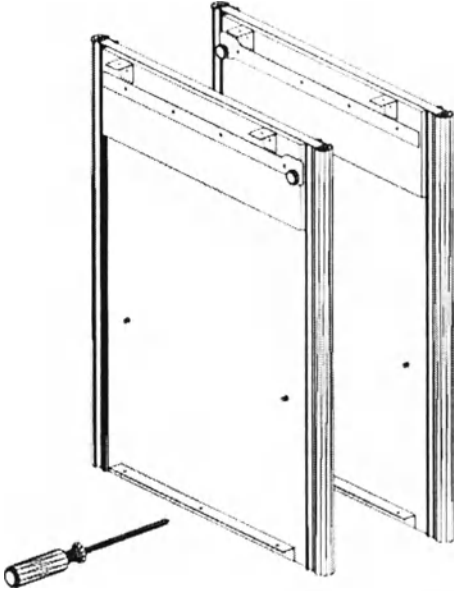ТМП-11 Тумба медицинская подкатная Инструкция по сборке 	1 Допускается незначительное отклонение изображения от комплектности упаковки. Работы проводить на чистой и ровной поверхности. 2  инструменты киянка резиновая шестигранный отвертка																										
3  <table border="0"> <tr> <td>1-боковина левая</td> <td>14-петля вкладная</td> </tr> <tr> <td>2-боковина правая</td> <td>15-ручка</td> </tr> <tr> <td>3-крыша</td> <td>16-мегабокс</td> </tr> <tr> <td>4-дно</td> <td>17-вставка в профиль</td> </tr> <tr> <td>5-полка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6-задняя стенка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-дверца</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8-лицевая панель</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9-дно ящика</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-задняя стенка ящика</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11-уголок алюминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12-уголок "грандис"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13-опора колёсная</td> <td></td> </tr> </table>	1-боковина левая	14-петля вкладная	2-боковина правая	15-ручка	3-крыша	16-мегабокс	4-дно	17-вставка в профиль	5-полка		6-задняя стенка		7-дверца		8-лицевая панель		9-дно ящика		10-задняя стенка ящика		11-уголок алюминий		12-уголок "грандис"		13-опора колёсная		4 1. Соединить уголки и направляющие с боковинами и забить полкодержатели. 
1-боковина левая	14-петля вкладная																										
2-боковина правая	15-ручка																										
3-крыша	16-мегабокс																										
4-дно	17-вставка в профиль																										
5-полка																											
6-задняя стенка																											
7-дверца																											
8-лицевая панель																											
9-дно ящика																											
10-задняя стенка ящика																											
11-уголок алюминий																											
12-уголок "грандис"																											
13-опора колёсная																											


5

2. Соединить боковины с задней стенкой.

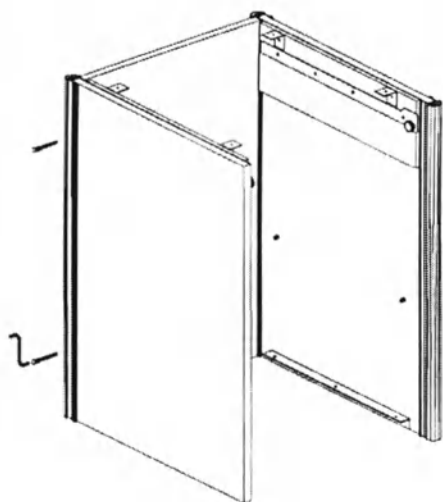


6

3. Закрепить столешницу и установить колёсные опоры.

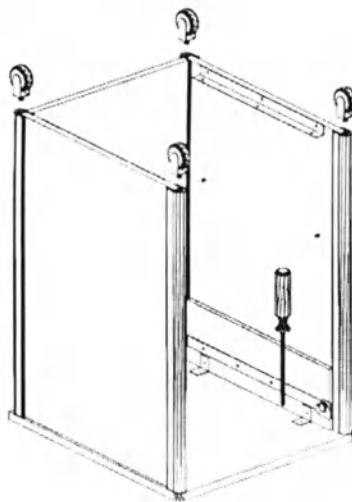

7

4. Закрепить дно . Установить вставки.

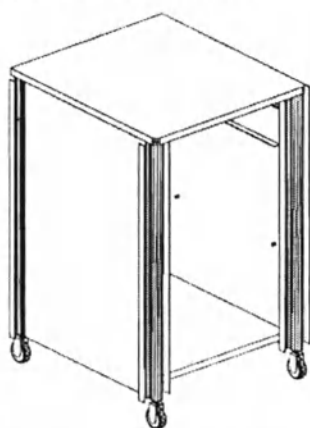


5. Собрать ящик.



8




6. Вложить полку. Вставить ящик. Установить фасад.

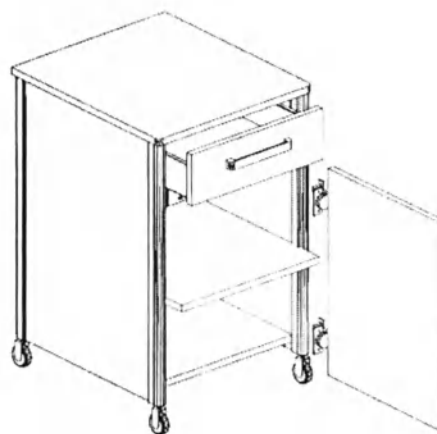

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@elitaprof.com


Приложение 12

Инструкция по сборке ШМЛ-4

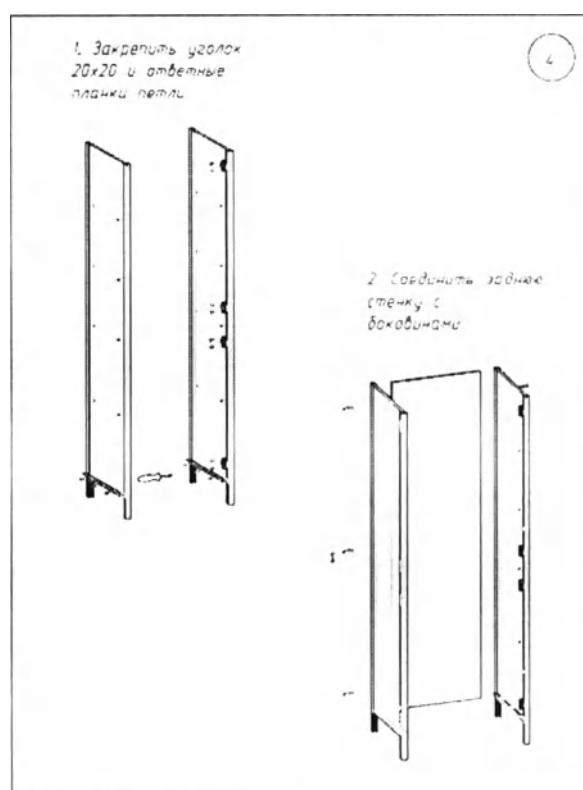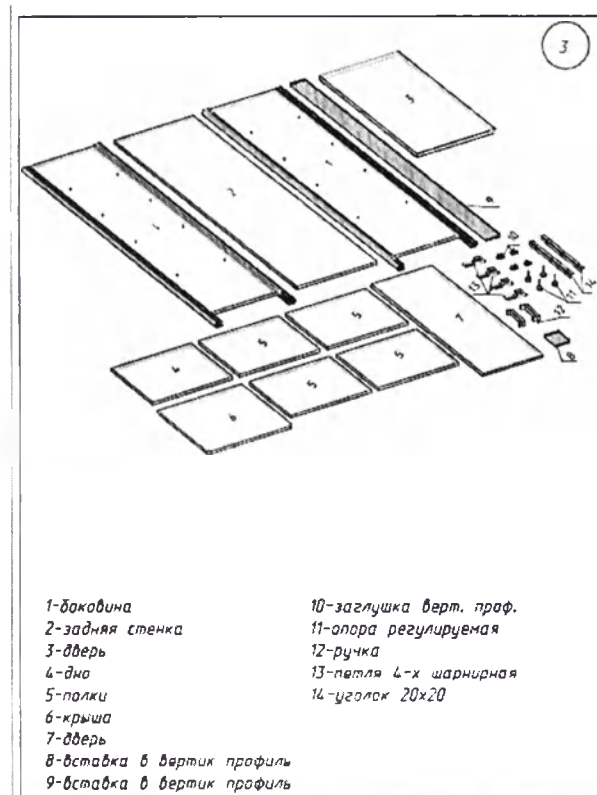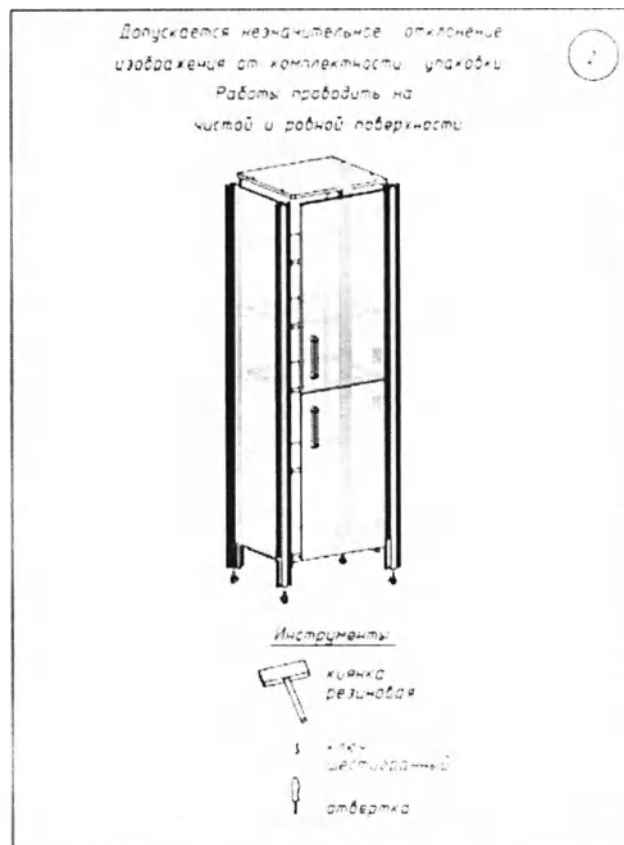

3. Соединить дно с боковинами.
Установить заглушки и опоры.

5

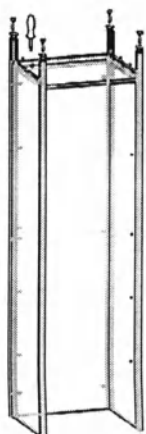


4. Закрепить крышу.




5. Установить полки.
Закрепить дверки.

6

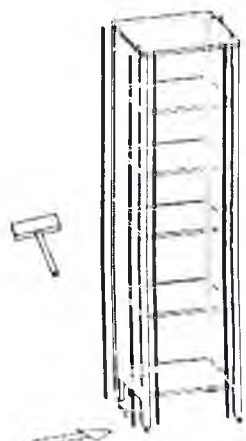

6. Повесить двери.
Закрепить ручки

7



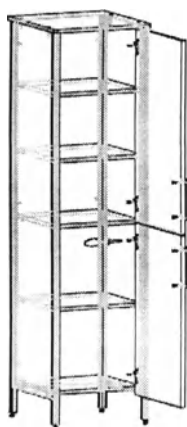


8

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: proa@elitaprof.com


Приложение 13

Инструкция по сборке ШМЛ-6

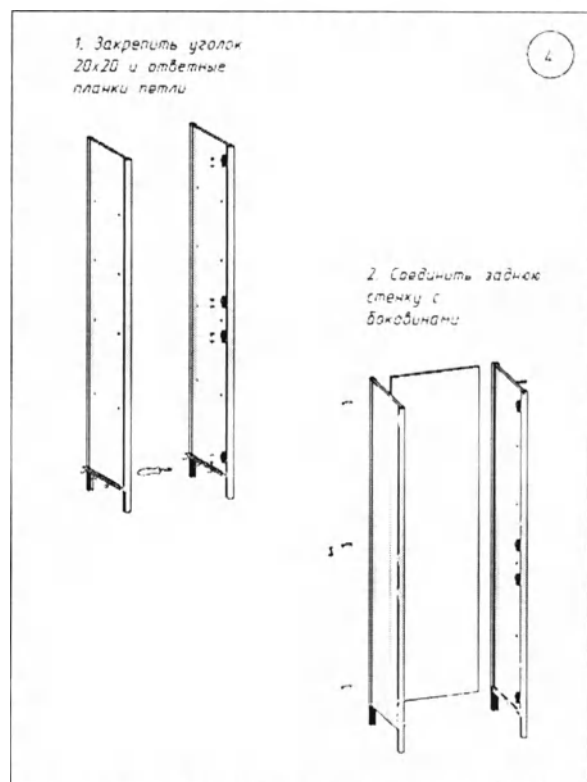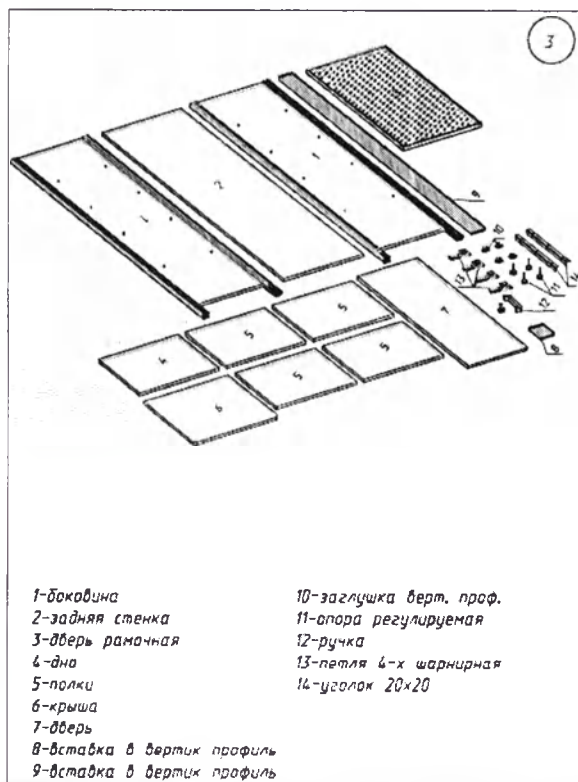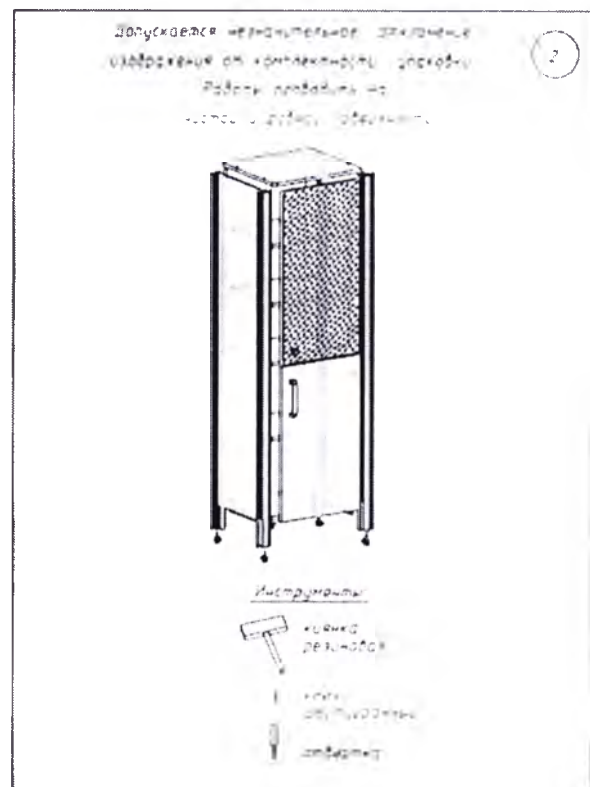


3. Соединить дно с боковинами.
Установить заглушки и опоры.

5

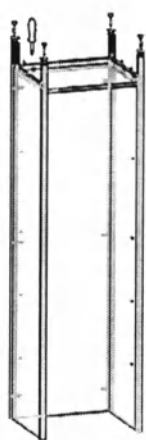


4. Закрепить крышу.

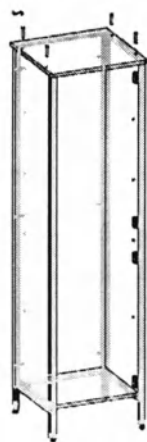


5. Установить полки.
Закрепить вставки.

6

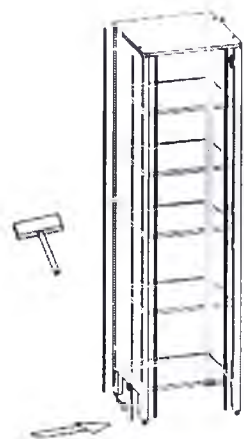

6. Повесить двери.
Закрепить ручки

7



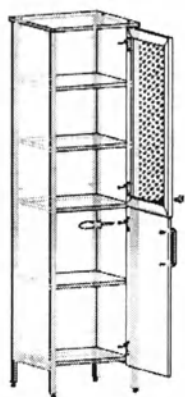


8

изготовитель ООО
8(8552) 77-80-90
E-mail: prod@eistraprof.com

Приложение 14

Инструкция по сборке ШМЛ-8

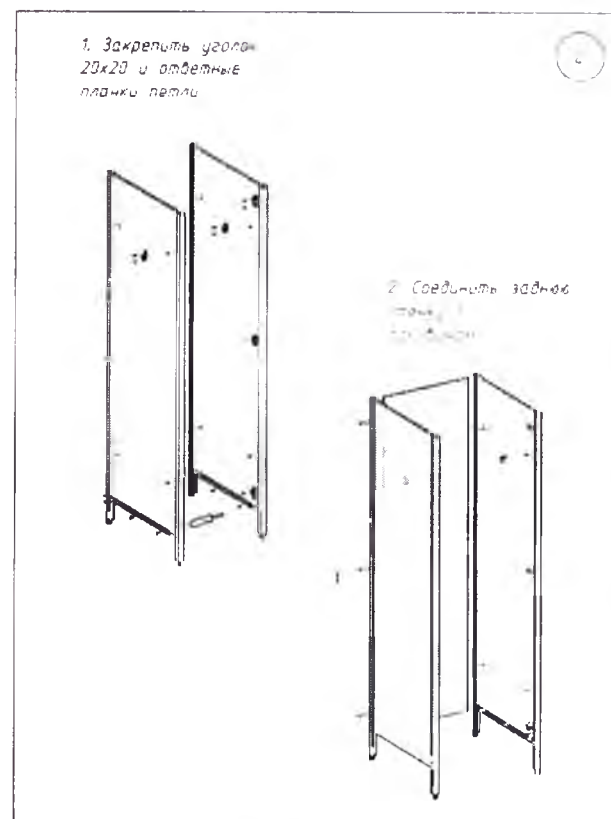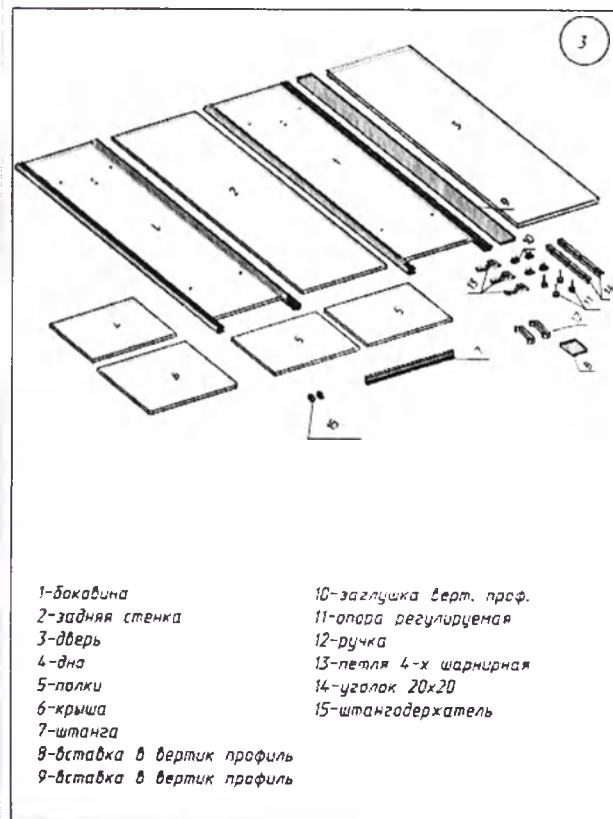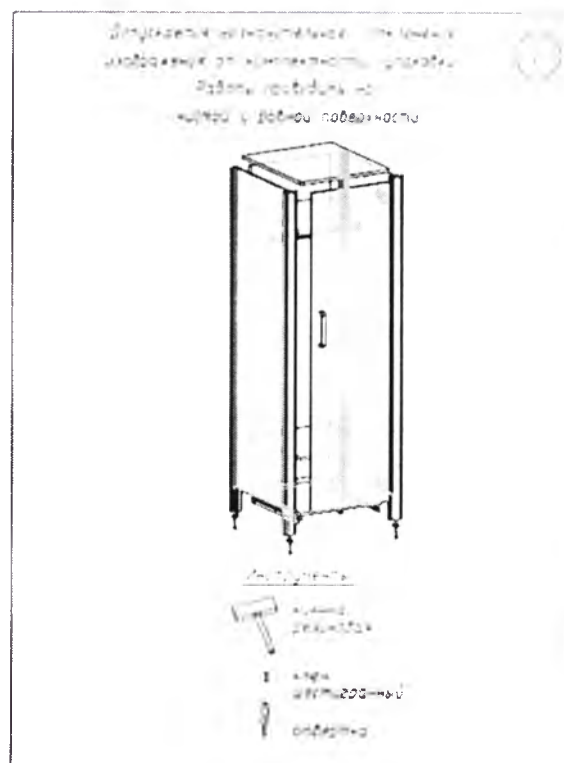

3. Соединить дно с боковинами.
Установить ~~вешалку~~ и опоры.

5




4. Закрепить крышу.



5. Установить полки и штангу.
Закрепить вставки.

6

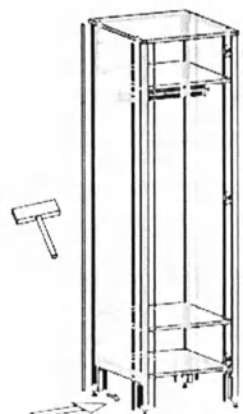

6. Навесить двери.
Закрепить ручки




7



Изготовитель ООО "Элита-Проф"
г. Пермь, ул. ...
E-mail: info@elita-prof.com


Приложение 15

Инструкция по сборке ШМЛ-12

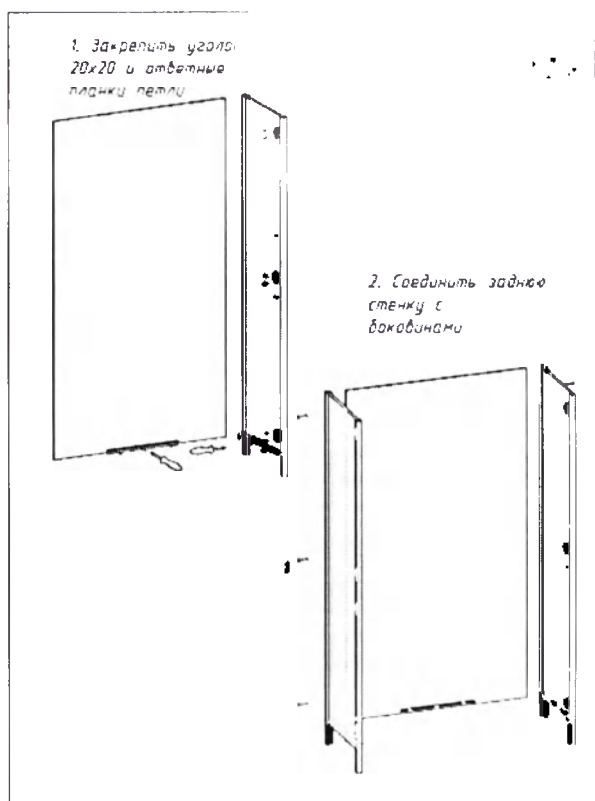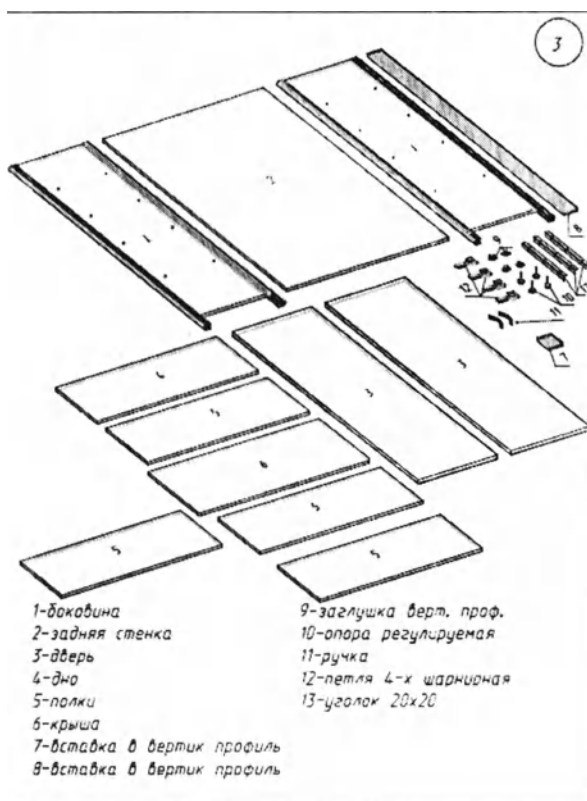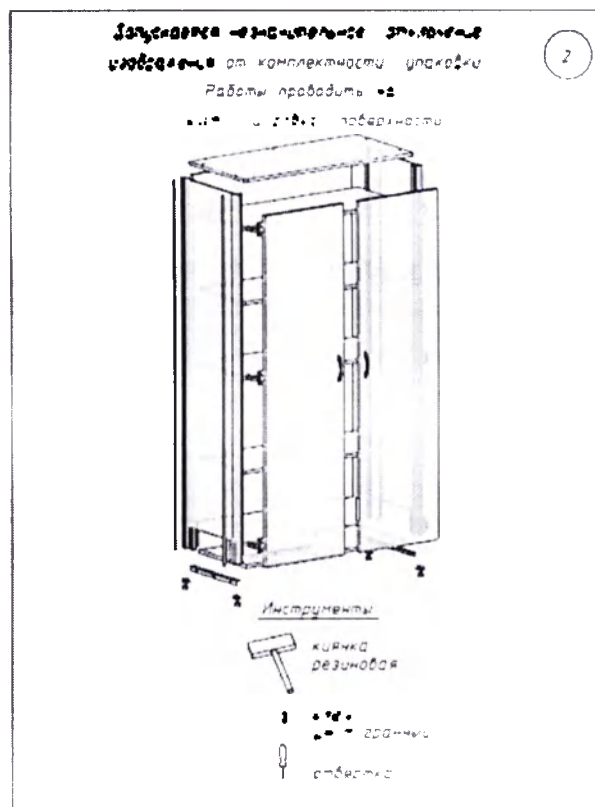


3. Соединить дно с боковинами.
Установить заглушки и опоры.

5

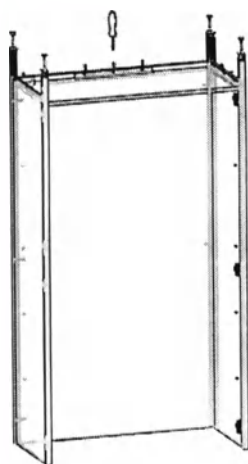


4. Закрепить крышу.

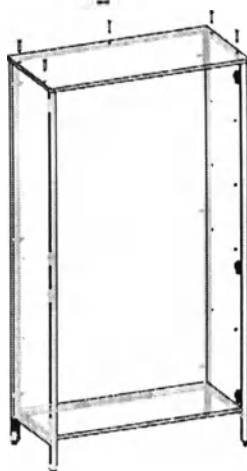


5. Установить полки.
Закрепить вставки.

6

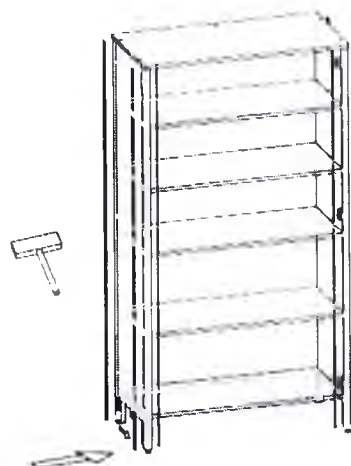

6. Повесить двери.
Закрепить ручки.

7

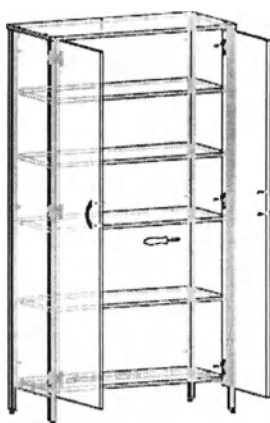

Изготовитель: ООО "Элита-Проф"
8185521 77-80-90
E-mail: prod @elita-prof.com


8

Приложение 16

Инструкция по сборке ШМЛ-16


ШМЛ-16

Шифр
технического лабораторного
Инструкция по сборке



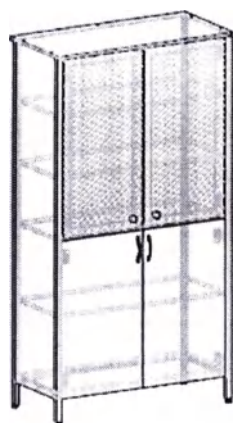


1


Изображения на рисунках, относящиеся к
изображениям в комплекте — упаковки
Работать следует на
чистой, ровной поверхности.

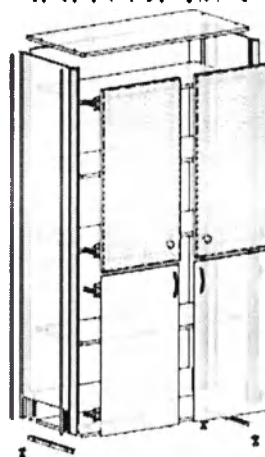

Инструменты

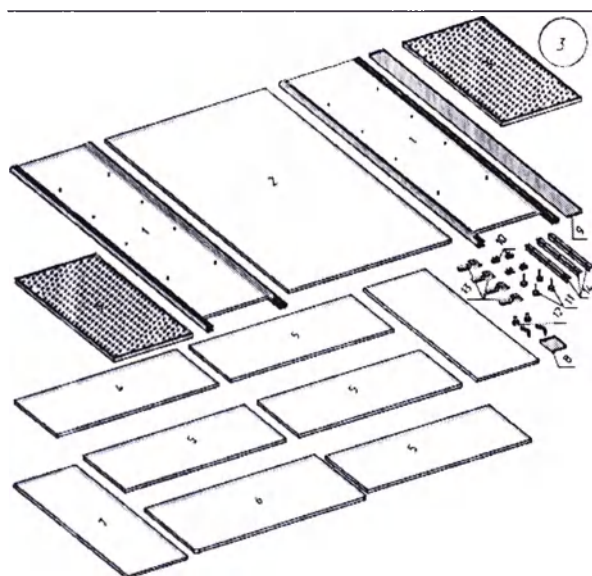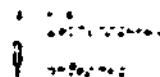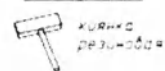


- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1-доска | 10-заглушка верт. проф. |
| 2-задняя стенка | 11-опора регулируемая |
| 3-дверь рамочная | 12-ручка |
| 4-дно | 13-петля 4-х шарнирная |
| 5-полки | 14-уголок 20x20 |
| 6-крыша | |
| 7-дверь | |
| 8-вставка в вертик. профиль | |
| 9-вставка в вертик. профиль | |

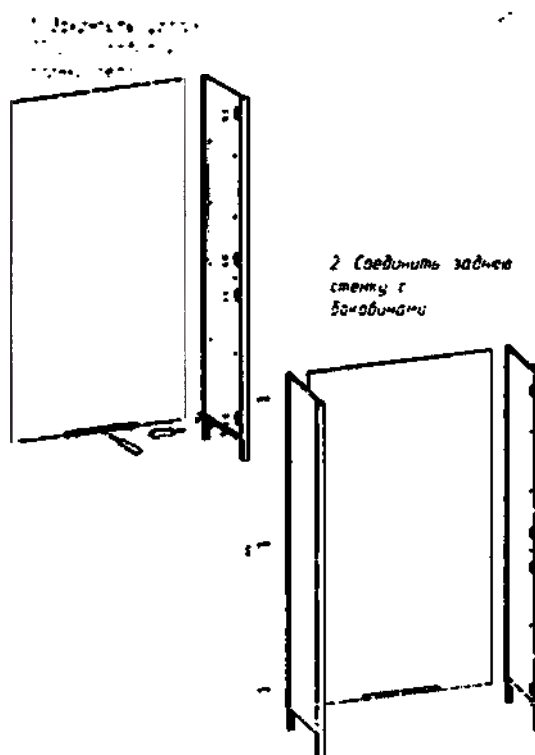

2 Соединить заднюю
стенку с
балками

3. Соединить дно с боковинами.
Установить заглушки и опоры.


5

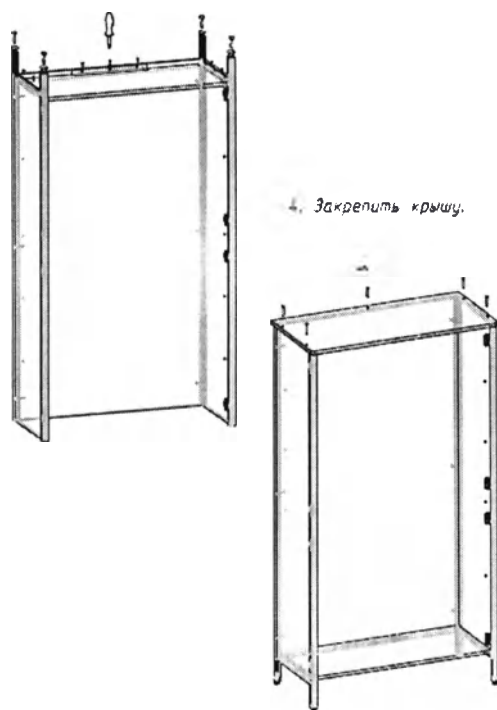

4. Закрепить крышу.


5. Установить полки.
Закрепить вставки.

6

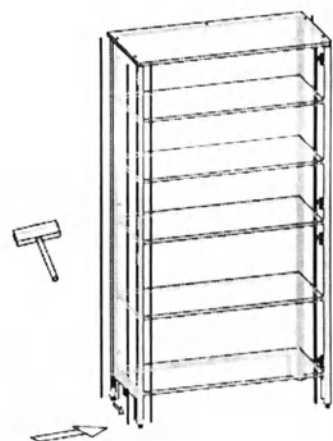

6. Надвесить двери.
Закрепить ручки

7

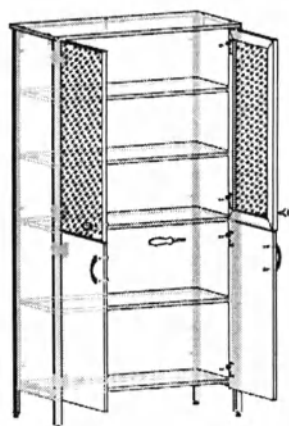

Изготовитель ООО "Элита-Проф"
8(8552) 77-80-90
E-mail: proa@elita-prof.com

8

Прошито и пронумеровано

105 листов

Начальник научного отдела ГБОУ ВПО

ТГМУ Минздрава России

Майоров Р.В.

 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU