

Приказом Росздравнадзора

От _____ 20 ____ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов



2016 г.

Руководство по эксплуатации

**Стол для проведения патологоанатомического вскрытия
«Tanartis» по ТУ 9452-017-89079081-2015
с принадлежностями**

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» по ТУ 9452-017-89079081-2015 с принадлежностями предназначен для патологоанатомических исследований трупов, материалов и тканей человека в отделениях и бюро лечебно-профилактических учреждений и в моргах (далее по тексту – стол).


Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» по ТУ 9452-017-89079081-2015, с принадлежностями

Варианты исполнения:

1. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element


Принадлежности

1. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт;
2. Столик для органов, не более 1 шт;
3. Столик для инструментов, не более 1 шт;
4. Комплект упоров для тела, не более 3 шт;
5. Подголовник, не более 1 шт;
6. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт;
7. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.

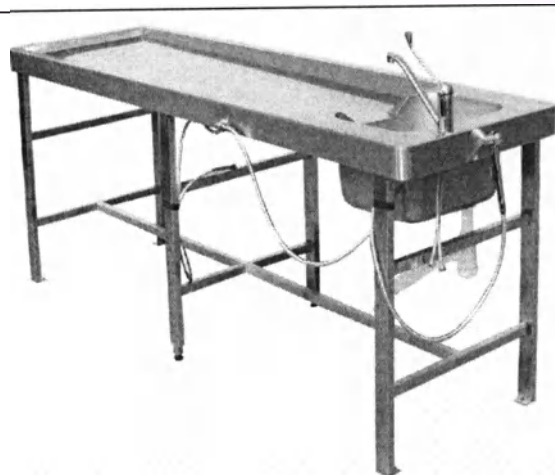


2. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element Plus

1. Принадлежности
2. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт;
3. Столик для органов, не более 1 шт;
4. Столик для инструментов, не более 1 шт;
5. Комплект упоров для тела, не более 3 шт;
6. Подголовник, не более 1 шт;
7. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт;
8. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.

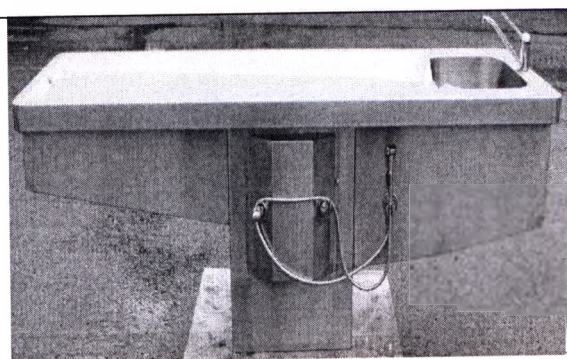


3. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Luxe

1. Принадлежности
2. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт;
3. Столик для органов, не более 1 шт;
4. Столик для инструментов, не более 1 шт;
5. Комплект упоров для тела, не более 3 шт;
6. Подголовник, не более 1 шт;
7. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт;
8. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.

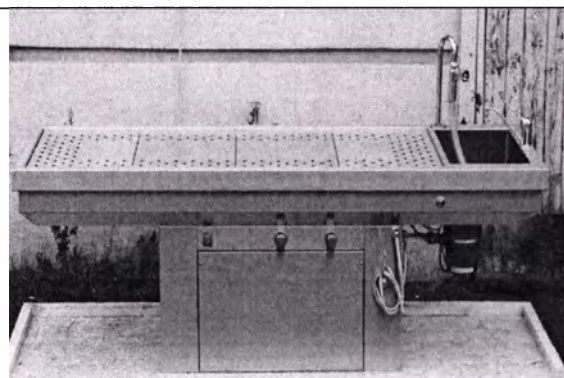

4. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Luxe Plus


1. Принадлежности
2. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт;
3. Столик для органов, не более 1 шт;
4. Столик для инструментов, не более 1 шт;
5. Комплект упоров для тела, не более 3 шт;
6. Подголовник, не более 1 шт;
7. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт;
8. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.

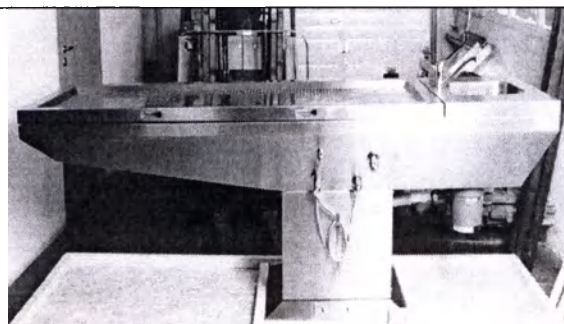

5. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime

1. Принадлежности
2. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт;
3. Столик для органов, не более 1 шт;
4. Столик для инструментов, не более 1 шт;
5. Комплект упоров для тела, не более 3 шт;
6. Подголовник, не более 1 шт;

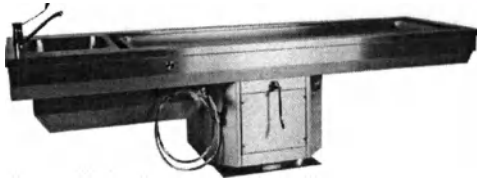

7. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт; 8. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.	
6. Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime Plus 1. Принадлежности 2. Столик для органов со съемной полкой для инструментов, не более 1 шт; 3. Столик для органов, не более 1 шт; 4. Столик для инструментов, не более 1 шт; 5. Комплект упоров для тела, не более 3 шт; 6. Подголовник, не более 1 шт; 7. Система измельчения органических отходов, не более 1 шт; 8. Руководство по эксплуатации, не более 1 шт.	

*Все столы поставляются в уже собранном виде.

*Комплект поставки формируется по согласованию с заказчиком.

Показания: патологоанатомические исследования трупов, материалов и тканей человека.

Противопоказания: известные противопоказания при применении изделий в соответствии с руководством по эксплуатации, а также исходя из практики применения изделий данного типа отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element

Размеры, мм (+/-5 мм)	2500x760x855
Масса стола (+/- 5 кг)	75
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 40 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг)	200 кг

Рабочая поверхность

Рабочая поверхность представлена в виде единой монолитной столешницы	
Габариты, мм (+/- 5 мм)	2000x760
Высота бортика, мм (+/-5 мм)	40 мм
Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг)	60 кг
Допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг (+/-1 кг)	200 кг

В состав рабочей поверхности входят:

Раковина	1 шт
Габариты раковины, мм (+/- 5 мм)	500x400x230
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	60 кг
Смеситель с локтевым управлением для ХВ и ГВ	1 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	длиной 2 м
	1 шт

Основание

Основание стола представлено опорами, объединенными перемычками

Количество опор	6 шт
Допустимая нагрузка на каждую опору (+/-0,5 кг)	100 кг
Количество поперечных перемычек	6 шт
Количество продольных перемычек	1 шт
Центральные опоры оснащены винтовыми опорами, используемыми для придания столу большей устойчивости	
Количество винтовых опор	2 шт
Максимальная нагрузка на винтовую опору (+/-0,5 кг)	50 кг
Электрическая розетка (220В-1 фаза-50Гц)	1 шт

Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304, толщина стали 1,5 мм

Описание

Четыре ножки, соединенные штангой для придания дополнительной устойчивости.

Стол отличается простой конструкцией и удобными размерами. Изделие имеет вогнутый наклонный профиль из нержавеющей стали. С дополнительными принадлежностями образует удобный стол для проведения вскрытия. Стол поставляется в собранном виде. В комплект входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системам канализации и водоснабжения.

В комплект стола входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системе электропитания.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element Plus

Размеры, мм (+/-5 мм)	2500x760x900
Масса стола (+/- 5 кг)	130
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 40 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг):	200

Рабочая поверхность

Рабочая поверхность представлена в виде единой монолитной столешницы	
Габариты, мм (+/- 5 мм)	2000x760
Высота бортика, мм (+/-5 мм)	40 мм
Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг)	60 кг
Допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг (+/-1 кг)	200 кг

В состав рабочей поверхности входят:

Раковина	1 шт
Габариты раковины, мм (+/- 5 мм)	500x400x230
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	60 кг
Смеситель с локтевым управлением для ХВ и ГВ	1 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	длинной 2 м
	1 шт

Основание

Основание стола представлено одной опорой, скрывающей подключение всех коммуникаций

Количество опор	1 шт
Габариты опоры, мм (+/-5 мм)	600x600x520
Допустимая нагрузка на опору (+/-0,5 кг)	200 кг
Смеситель общего водоснабжения стола	1 шт
Смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге	1 шт
Электрическая розетка (220В-1фаза-50Гц)	1 шт
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304, толщина стали 1,5 мм	

Описание

Стол отличается простой конструкцией и удобными размерами. Изделие имеет вогнутый наклонный профиль из нержавеющей стали. Все электрические части закрыты металлическими кожухами в основании стола. С дополнительными принадлежностями образует удобный стол для проведения вскрытия. Стол поставляется в собранном виде. В комплект входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системам канализации и водоснабжения.

В комплект стола входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системе электропитания.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Luxe

Размеры, мм (+/-5 мм)	2600x850x850
Масса стола (+/- 5 кг)	205
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 50 мм
Подключение к системе вентиляции Ø	200 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг)	250 кг

Рабочая поверхность

Рабочая поверхность представлена в виде единой монолитной столешницы

Габариты, мм (+/- 5 мм)	2000x850
Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг)	100 кг
Допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг (+/-1 кг)	200 кг

В состав рабочей поверхности входят:

Техническая ниша, расположенная под рабочей поверхностью, скрывающая сливное отверстие для воды и вентиляционный канал нисходящей системы вентиляции	1 шт
Габариты технической ниши, мм (+/- 5 мм)	2000x750x200
Допустимая нагрузка (+/- 5 кг)	300 кг
Съемные перфорированные панели	4 шт
Габариты панелей (ДхШ), мм (+/- 5 мм)	500x745
Допустимая нагрузка на панели (+/- 1 кг)	60 кг

Раковина	1 шт
Габариты раковины (ДхШхВ), мм (+/- 5 мм)	600x400x200
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	70 кг
Смеситель для ХВ и ГВ– 1 шт	
Основание	
Габариты, мм (+/- 5 мм)	1200x600x500
Допустимая нагрузка на опору (+/-0,5 кг)	200 кг
Опора поставляется в собранном виде. В состав опоры входит:	
Смеситель общего водоснабжения стола	1 шт
Смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге	1 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	1 шт
	длина 2 м
Электрическая розетка	1 шт
	220В-1фаза-50Гц
Дверь для доступа к системе вентиляции станции и внутренним коммуникациям	1шт
Габариты двери, мм (+/- 10 мм)	350x900
Допустимая нагрузка на двери, (+/-1 кг)	15 кг
Воздуховод гофрированный	1 шт
Длина воздуховода, мм (+/- 10 мм)	1000
Диаметр воздуховода, мм (+/- 5мм)	203
Максимальное рабочее давление, Па (+/- 5 Па)	2500
Максимальная скорость воздуха, м/с (+/- 1 м/с)	30
Рабочая температура в диапазоне, гр. Ц (+/- 2Гр.Ц)	от -30 до 140

Описание

Нисходящая система вытяжки. Стол оснащается встроенной раковиной, смесителем ХВ и ГВ, душем на гибком шланге. Система вентиляции стола присоединяется к центральной системе вентиляции на месте сборки со съемной перфорированной крышкой. Имеется:

- вывод для подключения холодной и горячей воды, а также для смывных вод,
- моечно-дренажная установка, включающая перекрывной кран,
- сливная ванна с 2 дренажными трубками и съемным резидуальным контейнером,
- тумблерный кран-смеситель с автономным душевым шлангом
- розетка в основании

Функционирование тумблерного крана-смесителя:

- Когда тумблерная рукоятка находится с правой стороны, кран-смеситель выключен.
- Когда тумблерная рукоятка находится с левой стороны, кран-смеситель включен.
- Чем дальше Вы повернете рукоятку влево, тем сильнее будет нагрев воды.

Функционирование душевого шланга (блокируемого):

- Если петля поднята вверх (рукоятка зафиксирована), душ открыт.
- Если петля опущена вниз (рукоятка ослаблена), душ будет перекрыт даже при открытом тумблерном кране-смесителе.

Внимание!

Существует опасность обваривания при повороте рукоятки тумблерного крана-смесителя влево.

Функционирование моечно-дренажной установки:

- Установка может быть приведена в действие, когда перекрывной кран открыт.

Внимание!

Моечно-дренажная установка работает только с холодной водой.

Дренажные трубки для смывных вод в вытяжном резервуаре должны быть открыты.

Нельзя снимать крышку с вытяжного колпака, иначе вода достигнет вытяжной системы.

Розетка в основании:

- Доступ к розетке осуществляется при поднятии навесной крышки.
- Подсоединяйте оборудование только с напряжением электропитания 220 В.

Внимание!

Доступ к смотровому окну в центральной колонне секционного стола разрешен только специалисту.

Стол поставляется в собранном виде. В комплект входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системам канализации и водоснабжения.

В комплект стола входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системе электропитания.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель

Luxe Plus

Размеры, мм (+/- 5 мм)	2800x800 минимальная высота 900 максимальная высота 1100
Масса стола (+/- 5 кг)	330
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 50 мм
Подключение к системе вентиляции Ø	200 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг)	250 кг

Актуатор системы регулировки высоты рабочей поверхности

Максимальное осевое усилие в режиме давления 6000Н

Максимальное осевое усилие в режиме тяги 4000Н

Максимальная скорость 32мм/с

Максимальная длина штока 250мм

Рабочая поверхность

Рабочая поверхность оснащена системой регулировки высоты

Габариты, мм (+/- 5 мм) 2400x800

Минимальная высота рабочей поверхности, мм (+/- 5 мм) 900

Максимальная высота рабочей поверхности, мм (+/- 5) 1100

Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг) 100 кг

Допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг (+/- 1 кг) 200 кг

Рабочая поверхность поставляется в собранном виде. В состав входит:

Техническая ниша, расположенная под откидной 1 шт перфорированной панелью, скрывающая сливное отверстие для воды и вентиляционный канал нисходящей системы вентиляции

Габариты технической ниши, мм (+/- 5 мм) 2100x790x100

Допустимая нагрузка (+/- 5 кг) 200 кг

Откидная перфорированная панель 14 шт

Габариты панели, мм (+/- 5 мм) 2195x800x55

Допустимая нагрузка на панели (+/- 1 кг) 250 кг

Вентиляционный канал малый 1 шт

Габариты, мм (+/- 5 мм)	220x120 1 шт
Вентиляционный канал большой Габариты, мм (+/- 5 мм)	220x220
Раковина	1 шт
Габариты раковины, мм (+/- 5 мм)	400x400x250
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	70 кг
Смеситель для ХВ и ГВ	1 шт
Основание	
Габариты, мм (+/- 5 мм)	600x500x550
Допустимая нагрузка на опору (+/-0,5 кг)	300 кг
Опора поставляется в собранном виде. В состав опоры входит:	
Смеситель подающий воду на водяную рампу	2 шт
Смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге	2 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	длинной 2 м – 2 шт
Электрическая розетка	2 шт 220В-1фаза-50Гц
Кнопки регулировки высоты рабочей поверхности стола	4 шт
Дверь для доступа к системе вентиляции станции и внутренним коммуникациям	1шт
Габариты двери, мм (+/- 10 мм)	425x440
Допустимая нагрузка на дверь, кг (+/- 1 кг)	15 кг
Воздуховод гофрированный	1 шт
Длина воздуховода, мм (+/- 10 мм)	1000
Диаметр воздуховода, мм (+/- 5мм)	203
Максимальное рабочее давление, Па (+/- 5 Па)	2500
Максимальная скорость воздуха, м/с (+/- 1 м/с)	30
Рабочая температура в диапазоне, гр. Ц (+/- 2Гр.Ц)	от -30 до 140
Актuator системы регулировки высоты рабочей поверхности	1 шт
Характеристики актуатора:	
Максимальное осевое усилие в режиме давления:	6000Н
Максимальное осевое усилие в режиме тяги	4000Н
Максимальная скорость	32мм/с
Максимальная длина штока	250мм

Описание

С вытяжкой и механизмом регулирования высоты рабочей поверхности. Стол оснащается встроенной раковиной, смесителем, душем на гибком шланге.

Патологоанатомический стол с системой вентиляции и возможностью регулировки высоты. Все поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 304. Высота стола регулируется в пределах от 900 мм до 1100 мм.

Поверхность стола не имеет острых краев и выступающих деталей, все швы отполированы и не выделяются.

На одном конце стола размещается раковина. Стол имеет центральную опору, обеспечивающую абсолютную устойчивость во всех положениях.

Установка проста, дополнительная опорная плита не требуется.

Стол поставляется в собранном виде. В комплект входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системам канализации и водоснабжения.

В комплект стола входят все необходимые комплектующие, для подключения стола к системе электропитания.

Стол для проведения патолого-анатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime

Размеры, мм (+/- 5 мм)	2600x850x850
Масса стола (+/- 5 кг)	305
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 50 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг)	250 кг

Рабочая поверхность

Рабочая поверхность представлена в виде единой монолитной столешницы

Габариты, мм (+/- 5 мм)	2200x850
Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг)	90 кг
Допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг (+/- 1 кг)	200 кг

Рабочая поверхность поставляется в собранном виде. В состав рабочей поверхности входят:

Раковина	1 шт
Габариты раковины, мм (+/- 5 мм)	400x500x200
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	70 кг
Смеситель для ХВ и ГВ	1 шт

Основание

Основание стола цилиндрической формы.

Габариты, мм (+/- 5 мм)	650x650
Допустимая нагрузка на опору (+/- 0,5 кг)	300 кг

Опора поставляется в собранном виде. В состав опоры входит:

Смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге	1 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	длина 2 м 1 шт
Электрическая розетка	2 шт 220В-1фаза-50Гц
Дверь для доступа к системе вентиляции станции и внутренним коммуникациям	1шт
Габариты двери, мм (+/- 10 мм)	425x440
Допустимая нагрузка на дверь, кг (+/- 0,1 кг)	15 кг

Описание

Стол оснащается встроенной раковиной, смесителем ХВ, ГВ, душем на гибком шланге.

Конструкция и исполнение данной модели ставит ее в один ряд с лучшими патологоанатомическими столами, предлагаемыми на рынке.

Стол предназначен для мытья и подготовки тел к мелким и средним по значению операциям вскрытия.

Помимо эстетичного вида закругленные края обеспечивают удобство работы врача.

Рама и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали марки 304

Раковина, расположенная в начале рабочего места, имеет сливное отверстие и пробку.

Краны: душ с гибким шлангом длиной 2м, переключение между холодной и горячей во-

дой локтем.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime Plus

Размеры, мм (+/- 5 мм)	2600x850 минимальная высота 900 максимальная высота 1100
Масса стола (+/- 5 кг)	305
Электроснабжение	220В – 1 фаза – 50Гц
Мощность, с учетом подключения дополнительного оборудования	2640 ВА
Подключение к системе водоснабжения Ø	ХВ, ГВ, диаметр труб ½ дюйма
Подключение к системе канализации Ø	диаметр трубы – 50 мм
Показатель уровня шума при работе устройства (дБ)	0 – 70
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали аisi 304	
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 10 кг)	250 кг
Актуатор системы регулировки высоты рабочей поверхности	
Максимальное осевое усилие в режиме давления	6000Н
Максимальное осевое усилие в режиме тяги	4000Н
Максимальная скорость	32мм/с
Максимальная длина штока	250мм

Рабочая поверхность

2200x850

Габариты, мм (+/- 5 мм)

Рабочая поверхность оснащена системой регулировки высоты:

Минимальная высота рабочей поверхности, 900

мм (+/- 5 мм):

Максимальная высота рабочей поверхности, 1100

мм (+/- 5)

Масса рабочей поверхности, кг (+/- 5 кг) 90 кг

Рабочая поверхность поставляется в собранном виде. В состав входит:

Раковина	1 шт
Габариты раковины, мм (+/- 5 мм)	400x500x200
Допустимая нагрузка на раковину (+/- 5 кг)	70 кг
Смеситель для ХВ и ГВ	1 шт

Основание

Опора цилиндрической формы

Габариты, мм (+/- 5 мм) 650x650

Допустимая нагрузка на опору (+/- 0,5 кг) 300 кг

Опора поставляется в собранном виде. В состав опоры входит:

Смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге	1 шт
Душевая насадкой на гибком шланге	1 шт длина 2 м
Электрическая розетка	2 шт 220В-1фаза-50Гц
Кнопки регулировки высоты рабочей поверхности стола	4 шт
Дверь для доступа к системе вентиляции станции и внутренним коммуникациям	1шт
Габариты двери, мм (+/- 10 мм)	425x440
Допустимая нагрузка на дверь, кг (+/-0,1 кг)	15 кг
Актуатор системы регулировки высоты рабочей поверхности	1 шт
Характеристики актуатора	
Максимальное осевое усилие в режиме давления	6000Н
Максимальное осевое усилие в режиме тяги	4000Н
Максимальная скорость	32мм/с
Максимальная длина штока	250мм

Описание

Оснащается встроенной раковиной, смесителем ХВ, ГВ, душем на гибком шланге.

Автономная вентиляция – система, устанавливаемая в центральной опоре. Состоит из блока вытяжки и воздушного фильтра из активированного угля. Такое решение незаменимо там, где нет централизованной системы вентиляции или подключение к ней невозможно технически (например, первый этаж без подвала). Активация производится пневматической системой управления, кнопки активации расположены на обеих сторонах стола.

Рабочая поверхность выполнена в виде единой перфорированной подъемной панели. Впускные отверстия системы вентиляции на нижней поверхности закрыты защитными кожухами, предотвращающими попадание воды.

Стол оборудован многоточечной системой непрерывного ополаскивания. По периметру нижней поверхности проходит распределительный водовод, вода подается равномерно по всей плоскости стола из 14 форсунок, что обеспечивает постоянный сплошной обмыв всей нижней панели. Вода удаляется в канализацию с помощью трех сливных отверстий.

Раковина стола – независимая. Стол оборудован смесителем для горячей и холодной воды с локтевым управлением и гидроаспиратором – полностью механической системой для откачивания жидкости. Гидроаспиратор может быть использован при проведении бальзамирования. Душ со шлангом длиной 2 м, на боковой поверхности стола установлены два крючка, а также фиксаторы для шланга.

В основании стола имеются откидные дверцы, позволяющие проводить смену угольного фильтра и обеспечивающие доступ к системе вентиляции и точкам подключения.

Система дренажа и очистки

Система ополаскивания проходит по всему периметру панели, на которой размещается тело, выполнена из нержавеющей стали, обеспечивает постоянную очистку стола.

Нижняя поверхность стола снимается для доступа к опоре стола.

Регулировка высоты стола

Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электрической подъемной колонны; стабилизация достигается за счет подшипникового механизма, который обеспечивает плавное перемещение стола вверх и вниз без остановок и вибрации.

Опора стола является раздвижной, поверхность легко очищается и обеспечивает доступ к

внутренним системам.

Принадлежности к патологоанатомическим столам

Подголовник

Габариты подголовника, мм (+/-5 мм) 810x100x125 мм
Масса подголовника (+/- 0,5 кг) 3,1 кг
Все элементы изготовлены из нержавеющей стали aisi 304

Допустимая нагрузка на изделие (+/- 1 кг) 100 кг
Предназначается для размещения под головой тела, для более удобной работы врача.

Стол для органов со съемной полкой для инструментов

Габариты стола, мм (+/-5 мм) 740x550x250
Масса столика (+/- 1 кг) 9 кг
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 1 кг) 50 кг

Столик для органов

Габариты стола, мм (+/-5 мм) 550x740x350
Масса столика (+/- 1 кг) 9 кг
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 1 кг) 50 кг

Столик для инструментов

Габариты стола, мм (+/-5 мм) 750x590x890
Масса столика (+/- 1 кг) 12 кг
Допустимая нагрузка на изделие (+/- 1 кг) 50 кг

Столики устанавливаются на рабочую поверхность стола в зависимости от удобства работы врача.
Все элементы стола изготовлены из нержавеющей стали aisi 304

Комплект упоров для тела

Габариты (+/-5 мм) 810x100x35
Масса одного упора (+/- 0,5 кг) 2,1 кг
Допустимая нагрузка на 1 упор (+/-1кг) 100 кг
Количество упоров в комплекте - 3

Система измельчения органических отходов

Габариты системы (ДхШхВ), мм (+/-5 мм): 200x200x375
Мощность измельчителя, 0,7 л.с. (+/-0,1 л.с)
0,51 кВт (0,07 кВт)
Электроснабжение 220В – 1 фаза – 50Гц
Масса 15 кг (+/- 0,3 кг)
Производительность системы измельчения 1000 мл/мин.
органических отходов

Входные и выходные соединения столов всех моделей:

Сливное отверстие
Электрический кабель
Крепления для анкерных болтов в основании стола
Вентиляционный канал (для моделей Luxe/ Luxe Plus)

Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С,
относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Степень защиты столов IP 21.

Максимально допустимое давление при использовании столов: не более 5 Бар.
Максимально допустимый расход воды: не ограничен.

Допустимый температурный диапазон воды при эксплуатации столов: не более 70°C.

Комплект для подключения к системе электропитания (встроенный в стол):

клеммная коробка для разводки
блок управления подъемными колонами

Идентификация рабочих органов:

	управление подъемным механизмом вверх —  вниз — 
 ~220 В – 50Гц Суммарный ток потребляемый дополнительным оборудованием не должен превышать 8А	обозначение электросети

УСТАНОВКА

Все столы монтируются сервисной службой. Столы устанавливаются на ровную поверхность, после чего осуществляется подключение к системам холодной, горячей воды, системе слива и вентиляции. Все подключения осуществляются посредством гибких соединений.




Требования к установке:

- Необходимо подключение к источнику питания: 220В-50Гц-1 фаза+земля;
- Выключатель или автоматический выключатель должен быть включен в монтаж электропроводки здания;
- Необходимо наличие автоматического выключателя (16А);
- Рекомендации по установке выключателя или автоматического выключателя вблизи оборудования: автоматический выключатель встроен в стол, так же рекомендуется наличие выключателя, установленного в том же помещении, в котором осуществляется эксплуатация оборудования. К выключателю должен быть обеспечен доступ для персонала.
- Подключение вентиляции требуется для двух моделей столов: Luxe, Luxe Plus. Подключение вентиляции в опоре стола, в соответствии со схемой подключения. Диаметр отверстия – 250 мм.
- Помещение, в котором эксплуатируется оборудование, должно быть обеспечено приточно-отточной вентиляцией, в соответствии с СНиП 41-01-2003.
- Требования по специальному обеспечению – отсутствуют.
- **ВНИМАНИЕ!** Система измельчения органических отходов - поставляется в заранее установленном виде. Вмешательство персонала - противопоказано. Любые манипуляции по замере и обслуживанию системы органических отходов, должны осуществляться техническим персоналом учреждения либо сервисной службой производителя.

Установка Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» на примере модели Luxe Plus

п/п	Требования
1	Задвижка для перекрытия холодной воды ½ дюйма
2	Задвижка для перекрытия горячей воды ½ дюйма
3	Сливное отверстие 50 мм
4	Электрический кабель 220В-1фаза-50Гц
5	Подключение системы вентиляции 200мм
A	отметки для крепления стола к полу. Анкерный болт: толщина болта – 8 мм, длина – 100 мм

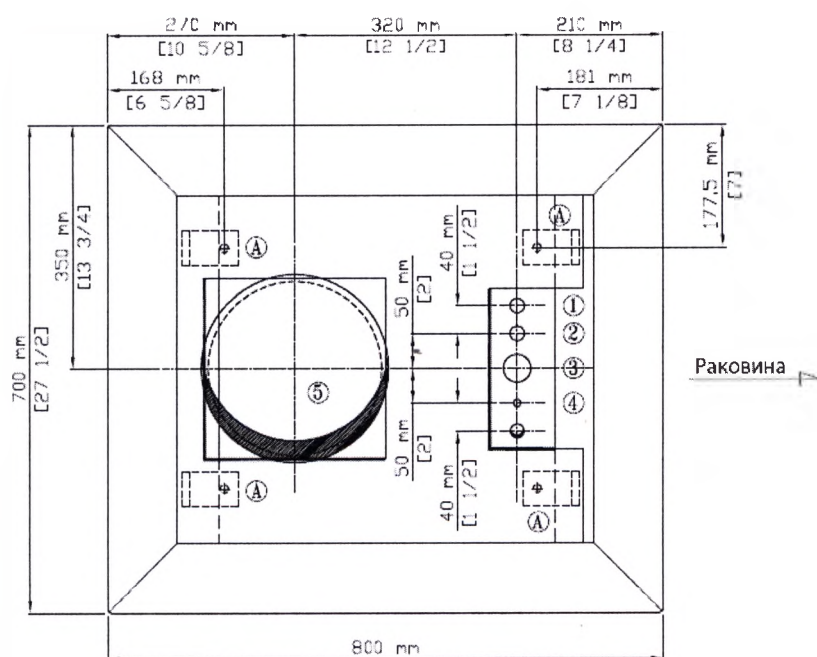

Условные обозначения:

A – место крепления к полу (отверстие под анкерный болт)

1 – Холодная вода

2 – Горячая вода

3 – Слив

4 – Электрический кабель

5 – Вентиляционный канал

- Стол поставляется в собранном виде.
- После снятия упаковки, стол монтируется на заранее подготовленное место (в соответствии со схемой). Все выводы коммуникаций, производятся на высоту, не более 15 см, не менее 7 см, над уровнем пола. Пол, в месте монтажа должен быть ровным, уклоны должны отсутствовать. После размещения стола в месте установки и дальнейшей эксплуатации, необходимо закрепить стол, при помощи анкерных болтов (8X100 мм).
- После закрепления стола, производится подключение стола к коммуникационной системе помещения (все гибкие соединения, поставляются уже установленными на стол и не требуют дополнительной подготовки со стороны инженера). Гибкие соединения: душевой шланг – длина 2 м, смеситель подающий ХВ на душевую насадку на гибком шланге – 1 м, кабель питания – 1м.
- В последнюю очередь, производится монтаж к системе вентиляции, путем соединения гофрированной трубы стола с вентиляционным фланцем системы вентиляции, выведенным из пола, в месте монтажа, в соответствии со схемой.

- После контрольной проверки надежности всех соединений, стол готов к эксплуатации.

Принадлежности (Столики, подголовники, проч.) просты в эксплуатации и не требуют подробного описания монтажа, так как отсутствуют сложные элементы креплений. Столики для органов и инструментов, размещаются на рабочей поверхности стола, в удобном месте для персонала. Столик ставится на ножки между бортиками. При установке столика, необходимо убедиться в перекосе конструкции. Подголовник, упоры для тел - имеют П-образную конструкцию основания. Внутренняя часть основания, устанавливается на рабочей поверхности, размещаясь между бортиками рабочей поверхности. Данный тип крепления, обеспечивает устойчивое положение оборудования и позволяет активно его эксплуатировать. Система измельчения органических отходов - поставляется в заранее установленном виде. Вмешательство персонала - противопоказано. Любые манипуляции по замере и обслуживанию системы органических отходов, должны осуществляться техническим персоналом учреждения либо сервисной службой производителя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для правильной работы со столом его располагают на площади не менее 15 кв. м на один стол. Труп укладывают на секционный стол головой к окну. 6-позиционный подголовник помещают под затылок трупа – при вскрытии головы, под лопатки – при вскрытии шеи, грудной клетки и живота, под поясницу – при исследовании таза, под переднюю поверхность грудной клетки – при вскрытии позвоночного канала. В зависимости от удобства работы врача устанавливают столик для органов со съемной полкой для инструментов/столик для органов/столик для инструментов. Вскрытие производят при дневном свете, т.к. электрическое освещение изменяет естественные оттенки цвета тканей и органов. При проведении вскрытия извлеченные органы укладывают на установленный столик. Врач перед вскрытием обязан надеть закрытый халат, поверх халата – клеенчатый фартук, на голову – колпак, на ноги – резиновую обувь без швов. Рукава халата обязательно засучивают выше локтя, далее осматривают целостность резиновых перчаток. После этого в резиновые перчатки засыпают тальк, затем перчатки надеваются на руки. Это сохраняет свободу движений и предотвращает возможность загрязнения.

При использовании нарукавников рукава халата не засучивают, а завязывают у лучезапястного сустава. Перчатки натягивают либо поверх халата, либо поверх нарукавников.

Ножки у столов, которые ими оборудованы, должны быть отрегулированы таким образом, чтобы передние ножки были несколько короче, чем задние, для возможности стекания жидкости при проведении вскрытия. В случае если в столе нет отверстий для стекания жидкости, устанавливается сосуд, в который добавляют хлорную известь, и жидкость стекает в сосуд. В столах, в рабочей поверхности которых предусмотрены отверстия или щели для стекания жидкости, жидкость отводится непосредственно в канализационную систему. Поверхность стола, предусмотренная производителем, гладкая, что позволяет предохранять кожу трупа от повреждений.

После проведения вскрытия стол обрабатывают водным раствором, содержащим 3%-ую перекись водорода, и 0,5%-ым раствором моющего средства типа «Лотос» (РФ). Обработка одежды врача, если она не одноразовая, производится в соответствии с рекомендациями производителя данной одежды (общие данные: после вскрытия одежду и обувь тщательно моют или стерилизуют).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и осмотр должны производиться только квалифицированным специалистом компании-производителя. По всем вопросам текущего ремонта обращаться в компанию производителя. Ежедневно специалист, работающий со столами, должен проводить осмотр наружных деталей столов, а именно кранов, шлангов и электрооборудования для обеспечения безопасности работы с оборудованием. В случае обнаружения неисправностей в электрооборудовании, таких как оголенные электропровода, необходимо отключить стол от сети питания и вызвать сервисного инженера от компании-производителя. В случае обнаружения подтекания из шланга, крана или мойки необходимо перекрыть доступ воды и вызвать сервисного инженера от компании-производителя. Вышеуказанные меры необходимо предпринять во избежание поражения электрическим током. Также ежедневно необходимо проводить визуальный осмотр ножек стола (при наличии), рабочей поверхности стола во избежание ситуации, когда ненадежно зафиксированные ножки или деформированная рабочая часть стола могут привести к скатыванию труп и нанесению трупу дополнительных повреждений, что может создать сложность постановки причины смерти.

ЧИСТКА

Платформу стола и опорную тарелку, включающие в себя систему очистки, чистят по мере необходимости водным раствором, содержащим 3%-ую перекись водорода, и 0,5%-ым раствором моющего средства типа «Лотос» (РФ).

Съёмные перфорированные пластины нуждаются в тщательной чистке также водным раствором, содержащим 3%-ую перекись водорода, и 0,5%-ым раствором моющего средства типа «Лотос» (РФ).

Все поверхности из нержавеющей стали и латуни можно чистить с помощью специального спрея для нержавеющей стали в соответствии с прилагаемыми к спрею советами по чистке изделий из стали или водным раствором, содержащим 3%-ую перекись водорода, и 0,5%-ым раствором моющего средства типа «Лотос» (РФ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ СТОЛОВ

- | | |
|-----------------------|--|
| – верхняя поверхность | нержавеющая сталь марки 304 / толщина 1,5 мм |
| – нижняя поверхность | нержавеющая сталь марки 304 / толщина 1,5 мм |
| – поверхность опоры | нержавеющая сталь марки 304 / толщина 1,5 мм |
| – водоотвод | труба из нержавеющей стали марки 304 |
| – краны | нержавеющей стали марки 304. Краны со сменными, износостойкими, устойчивыми к действию кальция керамическими картриджами. Оборудованы износостойкими, устойчивыми к действию кальция фильтрами и аэраторами. |
| – комплектующие | нержавеющая сталь марки 304 / толщина 1,0 мм |
| – ручной душ | Обеспечивает защиту от загрязнения источника водоснабжения посредством разъединительной системы, которая мгновенно прекращает работу воздухозабора. |
| – электрический блок | <ul style="list-style-type: none">• максимальное осевое усилие в режиме давления: 6000Н• максимальное осевое усилие в режиме тяги: |

	4000Н
	• максимальная скорость: 32мм/с • максимальная длина штока: 250мм– материал: сталь марки 304
Производительность вентиляционной системы	1300 м3/час
Диаметр воздухоотвода	внешний диаметр – 203 мм длина воздуховода, мм - 1000 максимальное рабочее давление, Па - 2500 максимальная скорость воздуха, м/с - 30 рабочая температура в диапазоне, гр. от -30 до + 140

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Element Plus

Монтаж данного стола осуществляется в подготовленном помещении. Пол в месте монтажа должен быть ровным во избежание перекоса стола. Тем не менее пол в помещении должен иметь уклон в направлении трапа, который устанавливается (как правило) по центру помещения. Подобные меры предпринимаются для облегчения санитарной обработки помещения для проведения вскрытия.

Данный стол подключается к системе водоснабжения (ХВ, ГВ) и системе слива. Холодная и горячая вода подключаются посредством труб диаметром ½ дюйма, которые выводятся в полу согласно рекомендациям производителя, и гибких соединительных шлангов, идущих в комплекте при приобретении стола. Данное соединение является достаточно надежным, но при истечении срока эксплуатации или при случайной поставке некачественных шлангов возможна течь, которая устраняется заменой вышедших из строя комплектующих. Сливная система также подключается посредством гибкого гофрированного соединения, которое в случае неисправности подлежит замене. Возможная неисправность – засор сливной системы, который устраняется при помощи заливки в систему специальных растворов либо разборкой сифона и ручной чисткой.

Слив жидкости с рабочей поверхности осуществляется через раковину, благодаря уклону рабочей поверхности в направлении раковины.

Стол целиком изготовлен из нержавеющей стали марки 304. Данный тип стали восприимчив к воздействию кислот и хлорсодержащих моющих растворов. Ввиду этого данный тип средств не рекомендован к использованию, так как после обработки стола этими средствами возможно появление пятен ржавчины.

Возможные неисправности:

- Течь в месте соединения

Необходимо проверить герметичность соединения, в случае отсутствия результата при попытке устранения течи, необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Течь не в месте соединения

Необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Не работают электроприборы (механизм регулировки рабочей поверхности, система измельчения органических отходов, эл. розетка).
- Необходимо обратиться в сервисный центр производителя.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Luxe

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Luxe Plus

Монтаж данного стола осуществляется в подготовленном помещении. Пол в месте монтажа должен быть ровным во избежание перекоса стола. Тем не менее пол в помещении должен иметь уклон в направлении трапа, который устанавливается (как правило) по центру помещения. Подобные меры предпринимаются для облегчения санитарной обработки помещения для проведения вскрытия.

Данный стол подключается к системе водоснабжения (ХВ, ГВ), системе слива и системе вентиляции. Холодная и горячая вода подключаются посредством труб диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма, которые выводятся в полу согласно рекомендациям производителя, и гибких соединительных шлангов, идущих в комплекте при приобретении стола. Данное соединение является достаточно надежным, но при истечении срока эксплуатации или при случайной поставке некачественных шлангов возможна течь, которая устраняется заменой вышедших из строя комплектующих. Сливная система также подключается посредством гибкого гофрированного соединения, которое в случае неисправности подлежит замене. Слив жидкости с рабочей поверхности осуществляется через раковину, благодаря уклону рабочей поверхности, в направлении раковины. Возможная неисправность – засор сливной системы, который устраняется при помощи заливки в систему специальных растворов либо разборкой сифона и ручной чисткой.

Стол подключается к пассивной системе вентиляции, другими словами, вентиляция стола осуществляется благодаря собственной вентиляции здания и работает без помощи специальных моторов. Таким образом, возможность поломки данной системы исключена.

Стол оснащен механизмом регулирования рабочей поверхности в диапазоне 200 мм.

Данное действие производится при помощи электрического мотора, который приводит в действие подъемную штангу. В производстве стола данной модели используются надежные комплектующие с большим запасом прочности. При поломке подъемного механизма требуется оценка причины поломки. В случае если механизм подлежит ремонту, он демонтируется и ремонтируется сервисной службой компании. Если ремонт механизма невозможен, производится замена неисправных комплектующих.

Стол целиком изготовлен из нержавеющей стали марки 304. Данный тип стали восприимчив к воздействию кислот и хлорсодержащих моющих растворов. Ввиду этого данный тип средств не рекомендован к использованию, так как после обработки стола этими средствами возможно появление пятен ржавчины.

Возможные неисправности:

- Течь в месте соединения

Необходимо проверить герметичность соединения, в случае отсутствия результата при попытке устранения течи, необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Течь не в месте соединения

Необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Не работают электроприборы (механизм регулировки рабочей поверхности, система измельчения органических отходов, эл. розетка).

Необходимо обратиться в сервисный центр производителя.

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime

Стол для проведения патологоанатомического вскрытия «Tanartis» модель Prime Plus

Монтаж данного стола осуществляется в подготовленном помещении. Пол в месте монтажа должен быть ровным во избежание перекоса стола. Тем не менее пол в помещении, должен иметь уклон в направлении трапа, который устанавливается (как

правило) по центру помещения. Подобные меры предпринимаются для облегчения санитарной обработки помещения для проведения вскрытия.

Данный стол подключается к системе водоснабжения (ХВ, ГВ), системе слива и системе вентиляции. Холодная и горячая вода подключаются посредством труб диаметром ½ дюйма, которые выводятся в полу согласно рекомендациям производителя, и гибких соединительных шлангов, идущих в комплекте при приобретении стола. Данное соединение является достаточно надежным, но при истечении срока эксплуатации или при случайной поставке некачественных шлангов возможна течь, которая устраняется заменой вышедших из строя комплектующих. Сливная система также подключается посредством гибкого гофрированного соединения, которое в случае неисправности подлежит замене.

Слив жидкости с рабочей поверхности осуществляется через раковину, благодаря уклону рабочей поверхности в направлении раковины. Возможная неисправность – засор сливной системы, который устраняется при помощи заливки в систему специальных растворов либо разборкой сифона и ручной чисткой.

Стол подключается к пассивной системе вентиляции, другими словами, вентиляция стола осуществляется благодаря собственной вентиляции здания и работает без помощи специальных моторов. Таким образом, возможность поломки данной системы исключена.

Стол целиком изготовлен из нержавеющей стали марки 304. Данный тип стали восприимчив к воздействию кислот и хлорсодержащих моющих растворов. Ввиду этого данный тип средств не рекомендован к использованию, так как после обработки стола этими средствами возможно появление пятен ржавчины.

Возможные неисправности:

- Течь в месте соединения

Необходимо проверить герметичность соединения, в случае отсутствия результата при попытке устранения течи, необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Течь не в месте соединения

Необходимо перекрыть подачу жидкости и обратиться в сервисный центр производителя

- Не работают электроприборы (механизм регулировки рабочей поверхности, система измельчения органических отходов, эл. розетка).

Необходимо обратиться в сервисный центр производителя.

Принадлежности к столам для патологоанатомического вскрытия серии «Tanartis»

Столик для органов со съемной полкой для инструментов, Столик для органов, Столик для инструментов

Стол не имеет механизмов и деталей, подверженных износу или поломкам.

Материал изготовления – нержавеющая сталь марки 304, толщина 1 мм. Данный тип стали восприимчив к воздействию кислот и хлорсодержащих моющих растворов. Ввиду этого данный тип средств не рекомендован к использованию, так как после обработки стола этими средствами возможно появление пятен ржавчины.

Подголовник

Подголовник не имеют механизмов и деталей, подверженных износу или поломкам.

Материал изготовления – нержавеющая сталь марки 304, толщина 1 мм

Система измельчения органических отходов

Материал изготовления – нержавеющая сталь марки 304, толщина 1 мм

Напряжение питания: 220-240 В.;

Мощность измельчителя — 0.70 л.с.;

Автоматическая защита диспозера от перегрузки;

Двухуровневая система измельчения из нержавеющей стали;

Тип загрузки отходов — непрерывная загрузка;

Перемалывающая камера: объем — 1,005 л;

Авто-Реверс: позволяет двигателю при каждом включении вращаться в противоположном направлении, за счет чего достигается равномерный износ элементов системы, а также уменьшается вероятность заклинивания;

Встроенный пневмовыключатель. Кнопка пневматического управления диспозером (пневмокнопка) входит в комплект поставки;

Фильтрующая сетка и пробка из нержавеющей стали вход в комплект поставки;

Ключ для самостоятельного устранения заклинивания; измельчающего диска с креплением к корпусу прибора (сервисный ключ);

Установочный крепеж включен в комплект поставки измельчителя.



Засоры устраняются путем разбора сливной системы в предполагаемом месте засора и устранения причины засора.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В случае если требуется запасная часть, свяжитесь со своим поставщиком или производителем, указав модель стола или принадлежности, серийный номер и год производства, и представив краткое описание части. Мы с радостью предоставим Вам ее быстро и надлежащим образом.

Утилизация по окончании срока годности



Когда стол или принадлежность больше не пригодны к использованию, помните о защите окружающей среды и возможности переработки. Очистите изделие, продезинфицируйте и отделите металлические детали. Утилизировать изделия необходимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии 12 месяцев с момента покупки.

Средний срок службы изделия – 15 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие инструментов требованиям технических условий при соблюдении правил применения, транспортирования и хранения. При обнаружении неисправности инструментов, возникшей в течение гарантийного срока, приведшей к нарушению их характеристик, данные изделия заменяются предприятием-изготовителем безвозмездно.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «ЭргоПродакшн», Россия, юридический адрес/фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литер Н, тел 8-495-787-40-46, e-mail: info@biovitrum.ru

Устранение неполадок



- **Поврежденным прибором НЕЛЬЗЯ пользоваться!**



В случае неисправности

Отключите прибор, отключите кабель электропитания и позвоните производителю / в отдел обслуживания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание захвата одежды, ранения рук и ушибов тела проявлять осторожность при работе с движущимися частями и механизмами стола.
2. Во избежание ожогов осуществлять контроль температуры воды и рабочих жидкостей при работе с оборудованием.
3. Во избежание поражения электрическим током не использовать электроприборы в условиях повышенной влажности.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

Транспортирование оборудования и принадлежностей осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждение друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку оборудования и принадлежностей производят в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При изготовлении столов отходы, представляющие опасность для человека и окружающей среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки возвращаются в начало технологического цикла.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (просypeй) производственных материалов;
- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Столы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания её срока.

Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют согласно «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730, ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.5.1315, СанПиН 2.1.5.980.

Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами № 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов» и № 3209-85 «Предельное количество накопления промышленных отходов на территории предприятия (организации)».

Металлические детали и элементы подлежат сдаче во вторичное сырьё.

Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

Утилизация медицинских отходов – согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", медицинские отходы класса Б.

МАРКИРОВКА

Маркировка столов осуществляется на ярлыках (этикетках).

Маркировка должна содержать следующие необходимые сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и его товарный знак;
- наименование и обозначение столов по настоящим техническим условиям;
- дату изготовления;
- гарантии изготовителя;
- параметры электропитания;
- клеймо (штамп) ОТК о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о сертификации (при ее осуществлении), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

На столы, входящие в единый набор, должен быть нанесен условный знак или номер, указывающий на принадлежность к данному набору.

Сведения наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

Место нанесения маркировки должно соответствовать указанному в конструкторской документации. Не допускается нанесение маркировки на поверхность деталей, которые могут быть заменены.

Изделия, предназначенные для сборки, должны сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. На каждую деталь должны быть нанесены номера, соответствующие указанным в схеме и компоновочном документе.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474, с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Беречь от влаги».

Схема электрическая принципиальная должна быть вынесена на корпус стола согласно ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 30324.0 в легко доступном для обзора месте.

УПАКОВКА

Упаковка столов обеспечивает их сохранность от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары могут применяться ящики деревянные по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Отдельные элементы столов, выполненные из не коррозионно-стойких материалов, законсервированы по ГОСТ 9.014.

При отгрузке столов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Для защиты столов от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Утилизация медицинских отходов – согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", медицинские отходы класса Б.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На изделие дается гарантия сроком на 12 месяцев со дня приобретения, гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода. Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за изделием или несоблюдения инструкции. В случае возникновения неисправности при соблюдении требований по эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации производитель производит текущий ремонт либо замену изделия. Техническое обслуживание изделия должен производить специалист. По всем вопросам технического обслуживания и гарантии обращаться к уполномоченному представителю производителя: ООО «Танартис», юридический адрес/фактический адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литер Н, тел 8-495-787-40-46, e-mail: egor.maystrenko@tanartis.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Категория изделия _____

Производитель _____

Модель _____

Серийный номер/артикул _____

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Срок гарантии – 12 месяцев.

По вопросам гарантии обращаться к уполномоченному представителю производителя:
ООО «Танартис», юридический адрес/фактический адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литер Н, тел 8-495-787-40-46, e-mail: egor.maystrenko@tanartis.ru

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.

Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

Штамп
продавца

ОТМЕТКА ГАРАНТИЙНОГО ЦЕНТРА

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 25 ЛИСТОВ
« 01 » 04 2016 год
Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»
Аносов Р. В.

