

Инструкция по применению

**Аппарат по уходу за носовой полостью
и дыхательными путями**

COCLEAN

Гарантийные условия

На основной корпус аппарата распространяется гарантия изготовителя сроком на 1 год начиная с даты продажи.

На аккумуляторные батареи гарантийный срок – 6 месяцев.

Элементы насадок спрея и аспиратора меняются только, если обнаружены производственные дефекты.

В течение гарантийного срока основной корпус аппарата или/и его внутренние составляющие элементы подлежат бесплатному ремонту либо замене, только при наличии данного паспорта с заполненным по всем правилам гарантийным талоном.

- Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным или небрежным использованием аппарата, неправильным подключением к источнику питания, износом в процессе эксплуатации и т.п.
- Гарантийные обязательства теряют свою силу в случае, если изделие подвергалось ремонту не авторизованной ремонтной мастерской.
- Гарантийный талон должен сопровождаться чеком с указанием даты продажи изделия.
- Покупатель должен обратить внимание на то, чтобы гарантийный талон был заполнен при покупке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель № (нужное выделить)		Coclean Original, Coclean Deluxe, New Coclean
Серийный №		
Срок гарантии		1 (один) год с даты продажи
Дата выпуска/Дата продажи		
Покупатель	Назв.фирмы / Ф.И.О.	
	Адрес	
Продавец	Назв.фирмы / Магазин	
	Адрес	
	Менеджер-продавец	

Данное изделие изготовлено и поставлено для продажи в соответствии со всеми требованиями к качеству продукции.

Качество изделия гарантировано производителем.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в прибор, а также в спецификацию для улучшения качества работы.

Срок использования прибора 7 лет.

Изготовитель: Welbu Tech Co., LTD

г.Инчон, Нам-гу, Юан –дон, 17-1,320, Юан Эксибишн Индастриал 310, Корея.

Аппарат по уходу за носовой полостью и дыхательными путями


COCLEAN

Модели:

Coclean Original Coclean Deluxe

дискомфортных

New Coclean

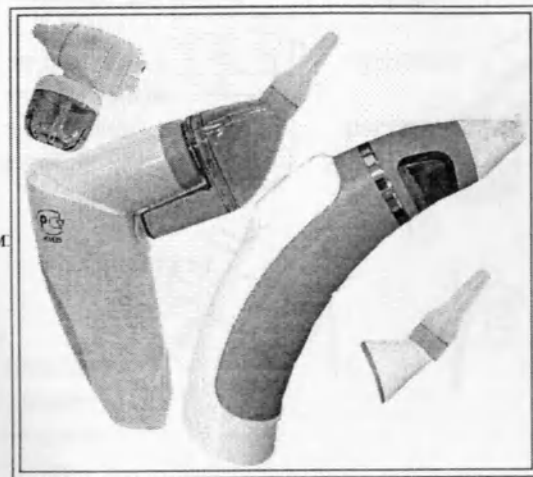

Описание сферы применения аппарата

Является вспомогательным устройством, применяемым для профилактики

ощущений в носовой полости..

го помощью соляной створ путем спыления наносится на глубинные части носовой полости. Раствор находится в ультра корпускулярном состоянии (частицы 0,68

что позволяет очищать носовую полость, не причиняя человеку особого дискомфорта. Данный аппарат разработан с целью высокоэффективного ежедневного применения, восстановления процессов естественного очищения носовой полости.

Рекомендации по безопасному применению аппарата

- запрещено погружать аппарат в воду или иную жидкость (велика вероятность удара током), а так же применять его вблизи взрывчатых, горючих веществ;
- аппарат следует хранить в специальном, недоступном для детей месте;
- применять аппарат строго после консультации с врачом - специалистом;
- запрещается использовать аппарат COCLEAN для отсасывания или распыления в положении пациента лежа, не прилагать различных усилий.
- запрещается разбирать аппарат самостоятельно, использовать не по назначению
- не следует применять аппарат больным, страдающим хроническими заболеваниями, использовать соляной раствор, приготовленный в домашних условиях, использовать не оригинальные запасные части.

Аппарат COCLEAN в режиме спрея:

1. Отключите электропитание от аппарата перед тем как отсоединить резервуар для жидкости, предназначенной к распылению спреем, от основного корпуса аппарата.
2. Максимальная емкость резервуара для жидкости в насадке спрея рассчитана на не более чем 5 мл. жидкости.

*При проверке безопасной работы индикатор мигает.

*При нарушениях в работе, питание отключается (включается через 5 сек.)

Аппарат COCLEAN в режиме аспиратора:

1. Отключите аппарат, когда накопительная трубка аспиратора наполнится содержимым свыше 5 мл. Трубку аспиратора следует очистить от содержимого, после чего работу можно возобновить. Если не очистить емкость накопительной трубки аспиратора, эффективность процедуры резко упадет.
2. При отключении аппарата, следует целиком перекрыть подачу электропитания к нему. После чего можно отсоединить трубку с емкостью от основного корпуса.
3. После очистки емкости трубки аспиратора можно вновь подключать к аппарату.
4. Пользоваться аспиратором со снятой емкостью накопителя трубки запрещено.
5. Запрещено применять аппарат для аспирации воды напрямую.

А. Основной корпус




Coclean Original

Coclean Deluxe



New Coclean (основной корпус)

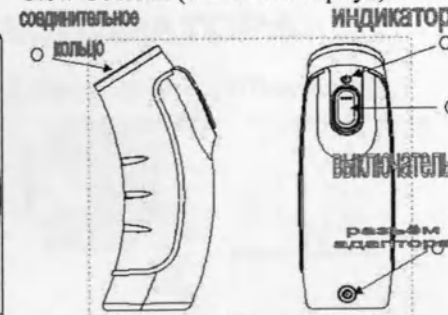


В. Спрей (насадка)




С. Аспиратор



Кожух для хранения аппарата

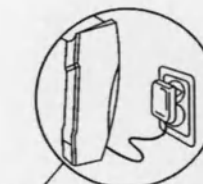

Подсоединение к источнику электропитания

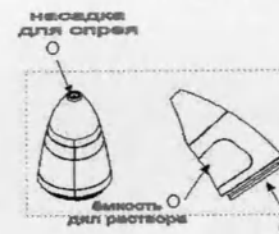

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПРЕЕМ

- ① Откройте резервуар и для спрея присоедините (по стрелке) прибору
- ② Заполните резервуар соляным раствором
- ③ Закройте резервуар



Соедините наклоне насадку головы, спрея с аккуратно основным корпусом поместите (при щелчке, штрихи на насадке и корпусе должны совпасть)

Нажмите наконечник в носовую полость

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АСПИРАТОРОМ

- ① Аспирационный блок. Присоедините совместив наконечник маркировки аспиратора (довести к накопительной блок
- ② Присоедините аспирационный к корпусу аппарата.
- ③
- ④
- ⑤

Нажмите кнопку «Power»

Поместите наконечник аспиратора в носовую полость

Закончив процедуру, нажмите «Power»

ЧИСТКА БЛОКА СПРЕЯ

- ① Отсоедините наконечник от основания
- ② Откройте ёмкость спрея, повернув её по стрелке
- ③ Удалите остатки солевого раствора
- ④ Тщательно промойте ёмкость и все части насадки.

ЧИСТКА БЛОКА АСПИРАТОРА

- ① Отсоедините наконечник
- ② Удалите жидкость
- ③ Прокипятите части насадки
- ④ Высушите части насадки



АПОТАЧНИЦА ЛУКАС АУТОБУС



Завед