

ПАСПОРТ (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)



**Стол для физиотерапевтических процедур с
электроприводом «МД-СМК»**

ООО «СТИЛЬМЕД»

1 Назначение:

Стол для физиотерапевтических процедур с электроприводом «МД-СМК» в составе по ТУ 9452-001-17040305-2015, с принадлежностями (далее стол, изделие) предназначен для различных видов дополнительной терапии: массажа, акупунктуры, ароматерапии, рефлексотерапии, кинезотерапии и др. Стол при помощи электропривода, питаемого от сети переменного тока, регулируется по высоте для более удобной работы медицинского персонала во время проведения процедур в медицинских центрах, клиниках, госпиталях, лечебно-физкультурных диспансерах.

Стол комплектуется принадлежностями - валиками для проведения массажа и других процедур.

2 Устройство и технические характеристики:

2.1 Каркас стола выполнен из тонкостенных стальных труб прямоугольного и квадратного сечения 40x20x1.5 мм. ; 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм , окрашен порошковой краской RAL 9016 MP LULF по ГОСТ 9.401.

2.2 Мягкие элементы стола изготовлены из:

-пенополиуретана эластичного «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

- фанера 8 мм ФСФ по ГОСТ 3916.1;

-искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

2.3 Изменение высоты осуществляется плавно за счет электропривода Med-i-Drive 6/5-24, питаемого от сети переменного тока 220 В с помощью пульта управления ручного HS-1 или ножного FC2/1 (Комплектуется по желанию заказчика).

2.4 Валики для проведения массажа и других процедур изготовлены из пенополиуретана эластичного «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009 и обтянуты искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Технические характеристики:

Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	200
Уровень звуковой мощности, дБА	не более 50 дБА
Габариты в стационарном положении:	
Длина не более, мм	2200
Ширина не более, мм	1200
высота изменяется электроприводом, в пределах, мм	Min 520-650; max 820-950
вес изделия, не более, кг	100
объем изделия, не более, м ³	1,6
Блок управления 24/1М характеристики:	
Напряжение питания, В	220±10%
Выходное напряжение, В	24 постоянного тока
Номинальная мощность, ВА	50
Класс защиты	IP54
Режим работы повторно-кратковременный, мин	2 работы /18 перерыв
Частота питающей сети, Гц	50 ±1
Предохранители	плавкий предохранитель F 4A 250 В
Электропривод 6/5-24 характеристики:	
Напряжение питания, В	24 В постоянного тока (от Блока питания)

Нагрузка, не более, Н	6000
Ход штока, не более, мм	200
Режим работы повторно-кратковременный, мин	2 мин работы, 18 мин перерыв
Принадлежности:	
Валик А (рис.1)	
длина, в пределах, мм	550
диаметр, в пределах, мм	120
Валик В (рис.2)	
длина, в пределах, мм	550
диаметр, в пределах, мм	200
Валик С (рис.3)	
длина, в пределах, мм	550
диаметр, в пределах, мм	100
Валик D (рис.4)	
толщина, в пределах, мм	85
наружный диаметр, в пределах, мм	300
Валик Е (рис.5)	
длина, в пределах, мм	от 200 до 1000
ширина, в пределах, мм	от 150 до 1000
высота, в пределах, мм	от 50 до 200
Пульт управления ручной	
Напряжение питания, В	HS-1 24В постоянного тока (от блока питания)
Класс защиты	IP54
Потребление энергии, Вт	0.3
Вес изделия, кг	0.3
Размеры изделия д*ш*в, мм	170*60*25
Условия эксплуатации	0-40 градусов Цельсия
Относительная влажность	30-90%
Длина шнура	Не более 3м
Материал корпуса	АБС-пластик 1030-30.
Усилие для приведения в действие кнопок управления	Не более 5 Н
Температура поверхности пульта	Не выше +40 градусов Цельсия
Пульт управления ножной	
Напряжение питания, В	FC2/1 24В постоянного тока (от блока питания)
Класс защиты	IP54
Потребление энергии, Вт	0.3
Вес изделия, кг	0.4
Размеры изделия ш*в*г, мм	220x110x40
Условия эксплуатации	0-40 градусов Цельсия
Относительная влажность	30-90%
Длина шнура	Не более 3м
Материал корпуса	АБС-пластик 1030-30.
Усилие для проведения в действие педали	Не более 20 Н
Температура поверхности пульта	Не выше +40 градусов Цельсия
Конструктивные геометрические параметры	
Изменение высоты стола электроприводом, в пределах мм	Мин 520-650; max 820-950
Каркас стола	- трубы квадратные и

	прямоугольные -40*20*1,5 мм; 20*20*1,5 мм.; 15*15*1,5 мм; -труба нержавеющая профильная 40*20*1,5 мм.; 20*20*1,5 мм.; 15*15*1,5 мм -фанера ФСФ 8 мм по ГОСТ 3916
Температура поверхности стола	Не превышает температуры окружающей среды

Рис.1 Валик А



Рис.2 Валик В



Рис.3 Валик С



Рис.4 Валик D


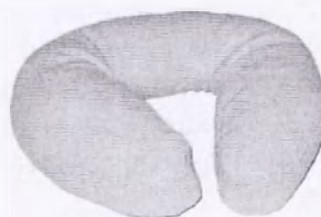


Рис.5 Валик Е

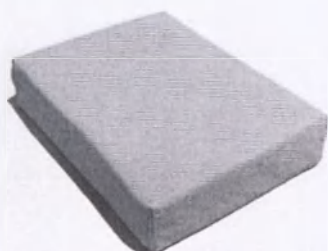

3 Комплект поставки:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - стол | – 1 шт; |
| - регулируемые опоры (ножки) | – 7 шт; |
| - электропривод | – 1 шт; |
| - блок управления на 220 В | – 1 шт; |
| - пульт управления | – 1 шт* |

*(комплектуется по желанию заказчика: пульт ручного управления HS-1 или пульт ножного управления FC2/1);

- | | |
|--|---------|
| - паспорт (инструкция по эксплуатации) | – 1 шт; |
| - упаковка | – 1 шт. |

Принадлежности (по дополнительной заявке заказчика):

- | | |
|------------|---------|
| 1. Валик А | – 1 шт; |
| 2. Валик В | – 1 шт; |
| 3. Валик С | – 1 шт; |
| 4. Валик D | – 1 шт; |
| 5. Валик E | – 1 шт. |

4 Подготовка к работе

4.1. Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать стол при комнатной температуре не менее 2 часов, если стол хранился или транспортировался при отрицательной температуре;

- установить стол на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части стола, выкручивая их, выставить стол в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

4.2. Перед подключением необходимо проверить состояние кабеля соединения. Стол должен находиться рядом с розеткой переменного тока 220 В.

5 Инструкция по эксплуатации


5.1 Регулировка высоты стола осуществляется плавно за счет электропривода Med-i-Drive 6/5-24 с помощью пульта управления ручного HS-1 или ножного FC2/1 (комплектуется по желанию заказчика), имеющего две кнопки или две педали соответственно.

Регулировка высоты стола производится, с находящимся на нем пациентом, для удобства работы медицинского персонала во время проведения процедур, производимых в положении «стоя».

Для того чтобы отрегулировать высоту стола необходимо на пульте управления нажать левую кнопку (или педаль соответственно) и удерживать ее, после чего стол начнет движение вверх. При достижении необходимой высоты кнопку (или педаль соответственно) следует отпустить. Для опускания стола необходимо нажать и удерживать в нажатом положении правую кнопку пульта (или педаль соответственно).

Высоту стола можно зафиксировать в любом положении из диапазона изменения высоты (min 520-650 мм, max 820-950 мм).

Принципиальная схема (рисунок) работы стола в сборе с электроприводом, пультом и блоком управления.

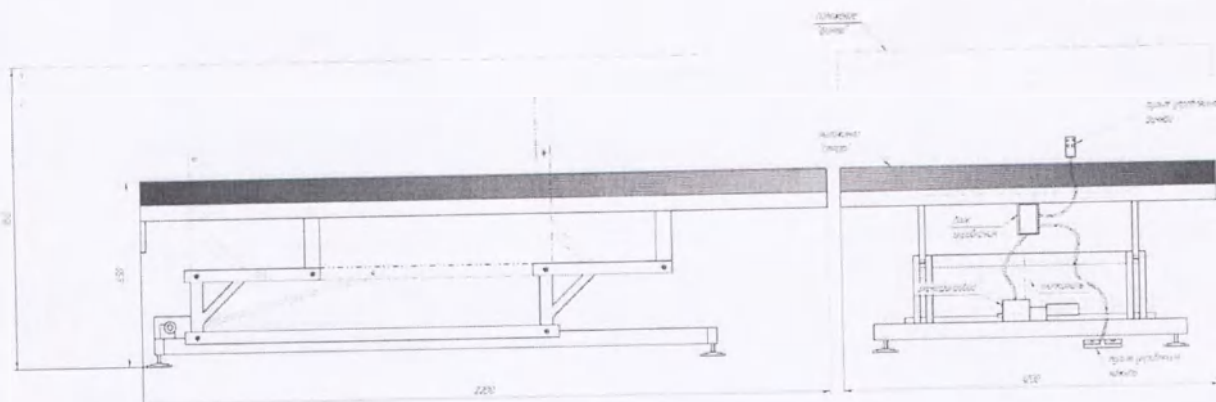

6 Меры предосторожности при работе со столом

- 6.1 Перед использованием стола необходимо убедиться в его устойчивости.
- 6.2 При подключении стола к сети розетка должна иметь заземление.
- 6.3 Не использовать стол, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- 6.4 Перед чисткой и дезинфекцией стол необходимо отключить от сети.
- 6.5 Если стол не используется, его необходимо отключать от сети.
- 6.6 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7 Дезинфекция стола

7.1 Дезинфекцию стола проводить 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1%-ным раствором хлорамина, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью при обязательном отключении стола от сети.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты оцениваются как незначительные.

10 Техническое обслуживание

10.1 Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11 Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Стол хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C

до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить стол любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Стол эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

12 Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу «Стола массажного с электропитанием МД-СМК» заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования. Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт столов осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.ru; www.meddizain.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

14. Маркировка изделия.

На каждом столе должен быть прикреплен бумажный ярлык, на котором содержится:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- дата изготовления;
- серийный номер;
- порядок применения (указываются в инструкции по эксплуатации);
- гарантии изготовителя (указываются в инструкции по эксплуатации);
- условия хранения и транспортировки;
- штамп ОТК (отдел технического контроля);
- обозначение знака соответствия для сертифицированной продукции;
- обозначение настоящих технических условий;
- напряжение питания «В» - «Вольт»;
- частота питающей сети «Гц» - «Герц»;
- номинальная мощность «ВА» - «Вольт-Ампер»;

- класс защиты «II» - Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта;

- символ типа безопасности класса защиты II «»;

- символ, указывающий тип рабочей части (B) «» - изделие, обеспечивающее определенную степень защиты от поражения электрическим током, в частности в отношении: допустимого тока утечки, надежности соединений защитного заземления (при его наличии).

- маркировка продукции знаком обязательной сертификации в рамках




Таможенного Союза ;

- маркировка продукции знаком обязательной сертификации в рамках



национальной системы ГОСТ Р -

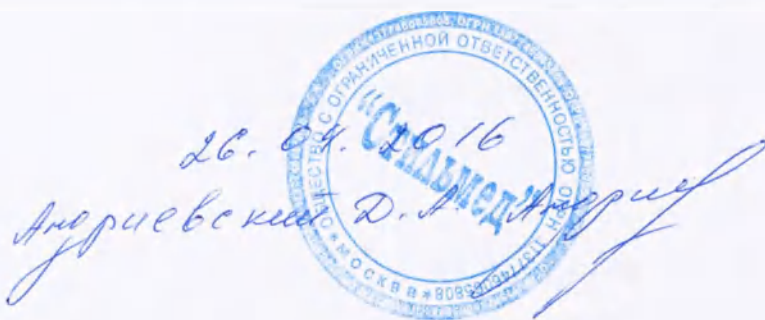

Дата выпуска ____/____/20

г.

Дата продажи ____/____/20

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 8 листов
Подпись Владимир

