

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Глис-Бируинца»

Котельникова Е.Н.



«01» июля 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению **«Кровать медицинская многофункциональная с электрическим управлением серии BLD (с двумя, тремя, четырьмя, пятью секциями), с принадлежностями»**

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ КРОВАТИ
2. ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ
4. ГАРАНТИЯ
5. ПРОЧЕЕ

♦ **Обозначение модели кровати**

1 Наименование модели

BL—Аббревиатура

D---- Электрическая медицинская кровать

2 Основная спецификация

Модель		BLD5
Параметр		
Углы наклона	Спинная секция	0°~ 70°
	Ножная секция	0°~ 35°
Размер(mm) Длина×Ширина×высота		2090×960×450~700
Диапазон регулировки высоты ложа		≥250
Угол наклона ложа вперед		12°
Угол наклона назад		12°
Напряжение (V)		~230V
Мощность (VA)		210
Вес (Kg)		140

♦ **Конструкция кровати**

- 1) Отсоединяемые торцевые ABSпанели
- 2) Рама металлическая с покрытием
- 3) Четыре колеса с центральной блокировкой
- 4) Четыре панели боковых ограждений на газовых пружинах


5) Стальное ложе с плавными соединениями

6) Управляется четырьмя моторами


♦ Инструкция по использованию:

1 Торцевые ABS панели являются отсоединяемыми, чтобы зафиксировать панель необходимо:

Шаг 1: Открыть

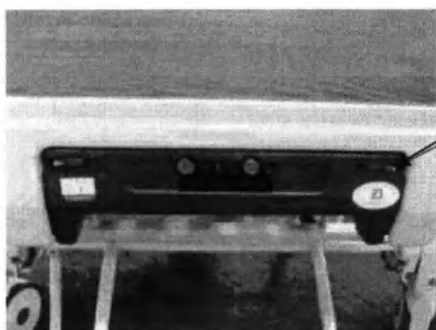


Шаг 2: Закрыть

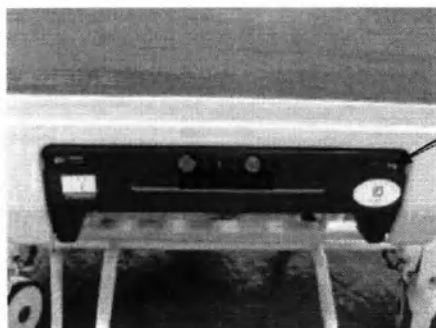

2 Боковые ограждения



Потяните фиксатор снизу и боковое ограждение можно опустить.

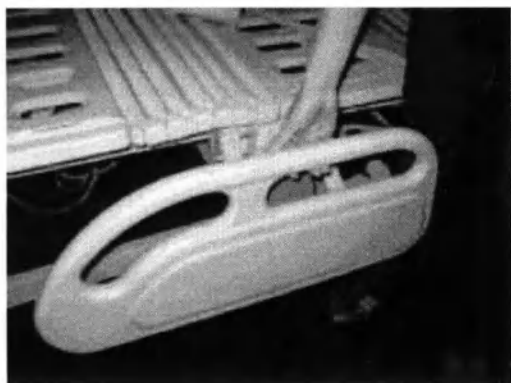


Потяните за боковое ограждение вверх, чтобы его поднять

3 Система центральной блокировки колес

Примечание: Кровать оснащена колесами с центральной блокировкой. Для фиксации колес необходимо опустить педаль. Для разблокировки - поднять.



4 Панель управления

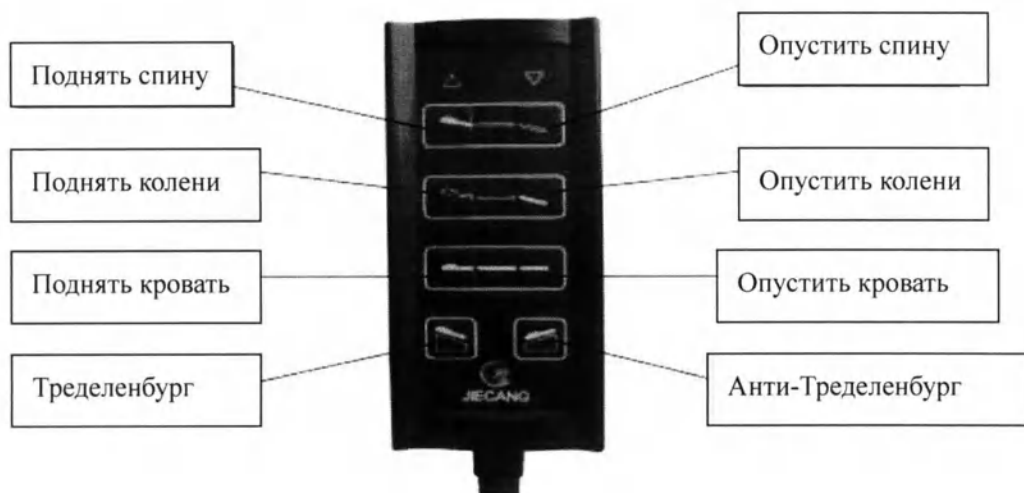

♦ Условия эксплуатации.

- 1) Температура: $+5^{\circ} \sim +40^{\circ}$
- 2) относительная влажность: 30% $\sim$ 80%
- 3) Атмосферное давление: 860hpa~1060hpa
(645mmHg~795mmHg)
- 4) Питание: однофазное $\sim 230V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$

♦ Электрическая регулировка

- a) Перед использованием необходимо проверить напряжение питания: однофазное 230V, 50Hz A.C.
- b) Убедитесь, что вилка в розетке и включите кровать.
- c) Электрическая регулировка кровати

Используйте пульт управления для регулировки кровати.

Для использования пульта управления ознакомьтесь с данной инструкцией.

Нажатие пальца на кнопку будет сопровождаться соответствующей регулировкой кровати. При отпускании кнопки — движение механизма немедленно приостановится.

♦ Внимание

- a. Не касайтесь кабеля влажными руками
- b. При подсоединении к розетке убедитесь, что вилка хорошо зафиксирована.
- c. Электрические механизмы кровати установлены на заводе. Во время эксплуатации пользователь не может менять их по своему

усмотрению, т.к. это может привести к неправильному функционированию или несчастному случаю. В случае поломки электрической части. Необходимо вызвать сертифицированного инженера.

- d. Используйте пульт управления осторожно, нажимайте одновременно только одну клавишу. Одновременное нажатие двух и более клавиш может привести к поломке электрических элементов.
- e. Следите за чистотой пульта управления, нажимайте на кнопки плавно и без существенного усилия пальцем, нажатие на кнопки ногтем или твердым предметом может привести к их повреждению.
- f. Особенно следует следить за тем, чтобы не повредить провод питания и провод пульта управления.
- g. При изменении позиции пациента (в т.ч. им самим) необходимо обязательно получить одобрение врача или медсестры, что это не повредит пациенту.
- h. При управлении кроватью убедитесь, что пациент на достаточном расстоянии от ее углов, чтобы ничего не защемить и не травмировать пациента.
- i. При использовании центральной блокировки колес после остановки кровати обязательно убедитесь, что колеса хорошо заблокированы.

ж. Не перемещайте кровать по очень скользкому или очень неровному полу, внимательно следите за скоростью перемещения кровати.

з. Если вы не используете кровать, отсоедините ее от сети.

♦ Гарантия

1 год

♦ Прочее

Утилизация кроватей должна производиться в соответствии с требованиями в вашей стране. Не загрязняйте окружающую среду.

еральный директор
О «Гипс-Бируинца»



Котельникова Е.Н.

