



НОСИЛКИ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАГРУЗКИ MLF999-C


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

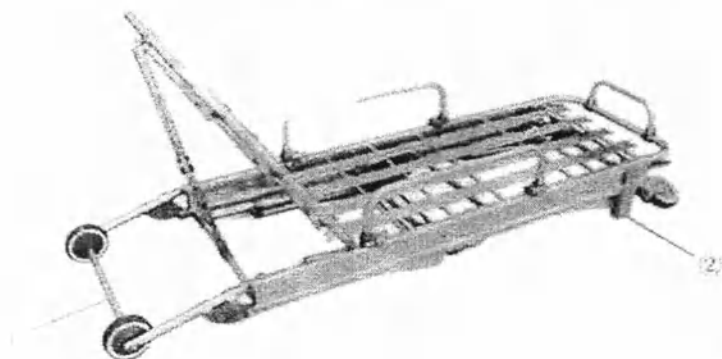

После открытия ящика
прикрепите часть (1) и часть (2) с
помощью винтов M8 к полу
машины
пол машины

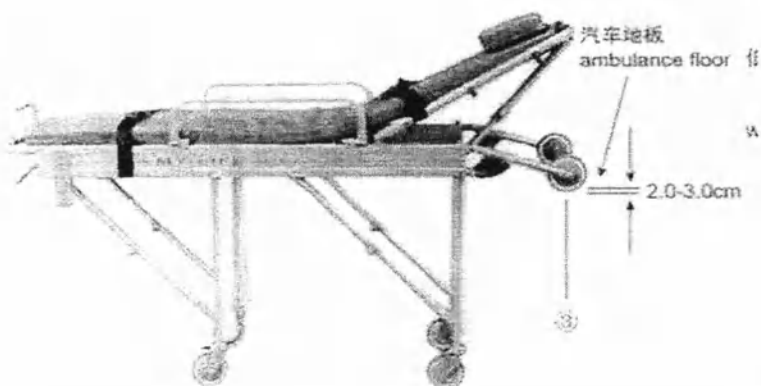

Отрегулируйте положение части
(3) (низ передних колес) так, чтобы она находилась на расстоянии 2 -3 см ниже пола
машины. После того, как передние колеса носилок (3) вошли в машину, достаточно
крепко ухватить левой рукой часть (5) и подтолкнуть носилки вперед. Теперь в
машину входят задние колеса. В заключение зафиксируйте часть (7) на части (2).

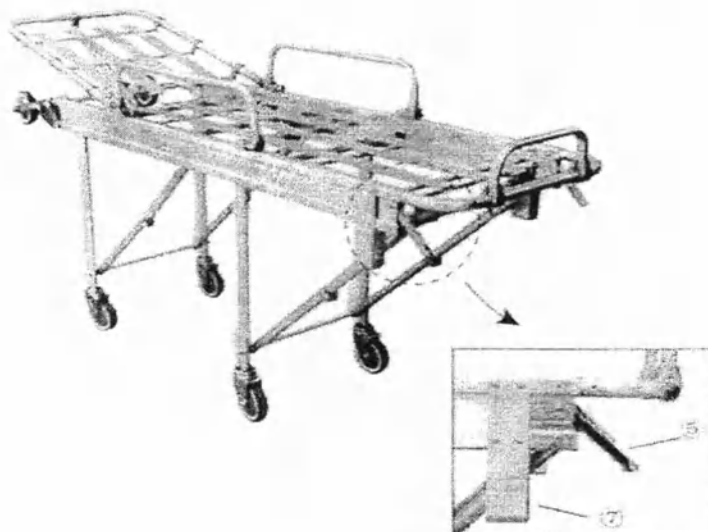

НОСИЛКИ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАГРУЗКИ MLF999-C1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трансформируемые носилки-каталка из алюминиевого сплава MLF999-C1 представляют собой multifunctional носилки-каталку новой конструкции, которые могут использоваться для оказания экстренной помощи. Появление данных носилок создало прекрасные условия для развития в сфере экстренной помощи и ухода за больными. Изделие MLF999-C1 обладает следующими тремя важными преимуществами:

1. Гибкая конструкция, облегчающая подъем в машину скорой помощи и спуск из машины;
2. Трансформируемое положение, позволяет приспособить носилки к потребностям сложной обстановки при оказании экстренной помощи и уходе за пациентами;
3. Простота управления позволяет пользователю эффективно повысить производительность труда.


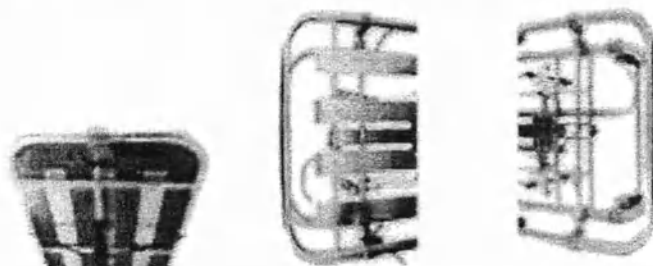


Рис. Задний рычаг управления

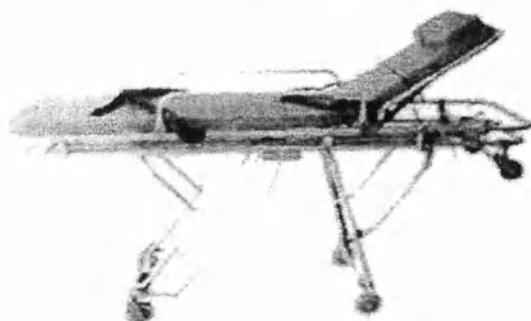


Конструкция трансформируемых носилок-каталки из алюминиевого сплава MLF999-C1 отличается простотой в управлении: Регулировка изменяемых положений носилок осуществляется с помощью двух рычагов управления, установленных в передней и задней частях рамы носилок, а операции подъема и спуска носилок в машину скорой помощи - с помощью рычага, расположенного в задней части носилок. Угол

наклона спинки носилок можно изменять с помощью рычага, расположенного сверху на раме спинки с внутренней стороны. Конкретный порядок операций следующий:

Подъем в машину:

Порядок операций:

Носилки установлены в максимально высокое горизонтальное положение - опора роликов находится на поверхности пола салона машины - возьмитесь за задний рычаг управления - приподняв носилки-каталку, вкатите их внутрь салона - после того, как передняя и задняя опоры сложатся, носилки входят в салон и фиксируются - отпустите рычаг.

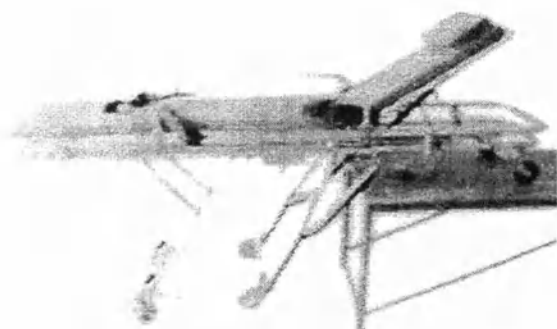

Способ крепления внутри салона

Подведите переднюю ось роликов к переднему фиксатору, поднимите дугообразную защелку заднего фиксатора, продвиньте защелку вперед и зацепите за задний фиксатор. При спуске носилок из машины нажмите кнопку с правой стороны заднего фиксатора, вытяните и сложите дугообразную защелку. (Последовательность операций показана на Рис. 1-2-3)

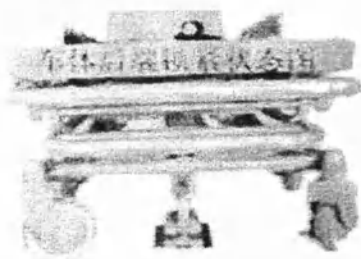


Рис. Задняя часть в зафиксированном положении внутри салона



Рис. Носилки в зафиксированном положении


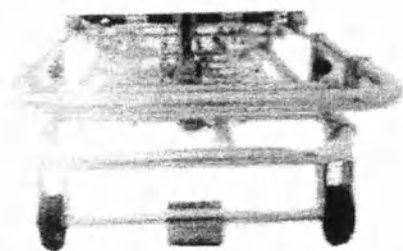



Рис. Передняя часть в зафиксированном положении



операция 1

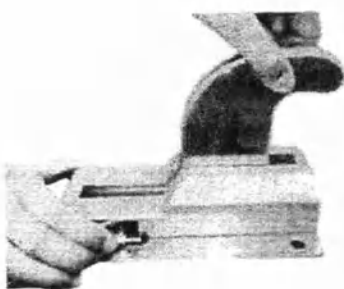

операция 2

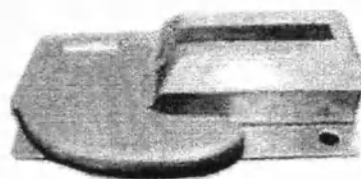


операция 3

Спуск из машины: Последовательность операций:

Возьмитесь за задний рычаг управления - выкатите носилки-каталку наружу - передняя и задняя опоры полностью раскрываются в воздухе - дождавшись пока передняя и задние опоры полностью восстановят свою высоту, коснитесь колесами земли - выкатите ролики из салона - освободите рычаг

ВНИМАНИЕ: С целью обеспечения безопасности следует дождаться момента, когда передняя стойка каталки полностью раскроется в воздухе (угол раскрытия должен составлять более 90 градусов), только затем можно касаться колесами земли и выкатывать ролики из салона. В противном случае во время касания земли резкий наклон носилок может привести к травмированию пациента.

Способ регулирования высоты носилок-каталки: возьмитесь за рычаги в передней и задней части носилок - одновременно нажимайте рычаги в передней и задней части - высота носилок будет увеличиваться или уменьшаться - одновременно отпустите рычаги - ухватившись за раму, слегка покачайте ее в вертикальном направлении и дождитесь момента, когда фиксирующая пружина войдет в установочную прорезь, это будет означать, что регулировка высоты носилок выполнена.

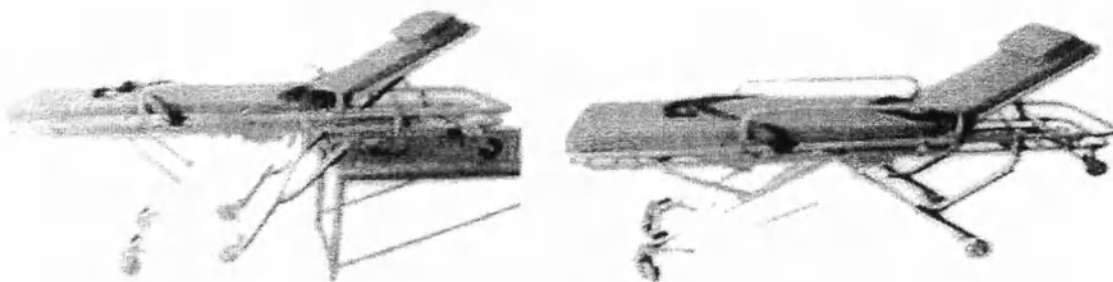


Способ регулировки наклона носилок-каталки вперед или назад:


Наклон вперед (положение – «ноги выше головы») – для этого нажимайте только один передний рычаг, высота передней части каталки уменьшится, при этом она будет наклонена вперед, освободите рычаг, удерживая раму, добейтесь того, чтобы фиксирующая пружина вошла в установочную прорезь, это будет означать, что регулировка наклона носилок вперед выполнена.

Наклон назад (положение - голова выше ног) – для этого нажимайте только один задний рычаг наклон назад можно регулировать аналогично описанному выше.

Кроме того, одновременно действуя задним и передним рычагами, можно придать носилкам желаемый наклон.

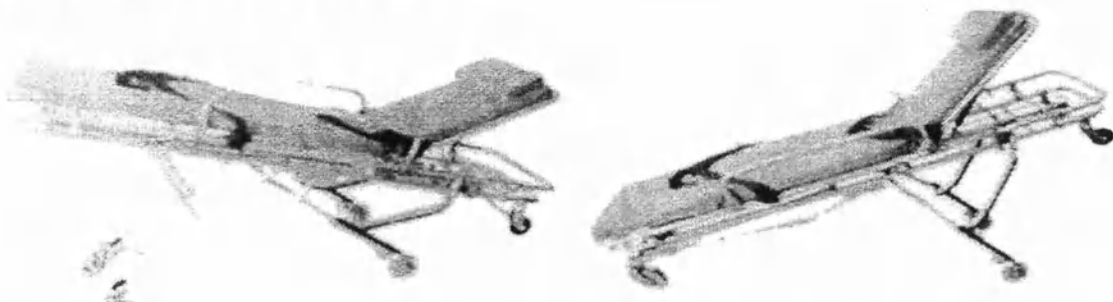

Способ регулировки угла наклона спинки: Возьмитесь за раму спинки, нажмите рычаг управления в верхней части рамки спинки, после установки желаемого угла наклона, отпустите рычаг.

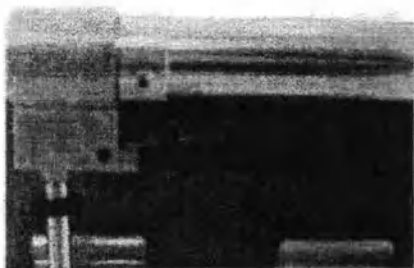

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НОСИЛКИ MLF999-A2
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ В КРЕСЛО-КАТАЛКУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

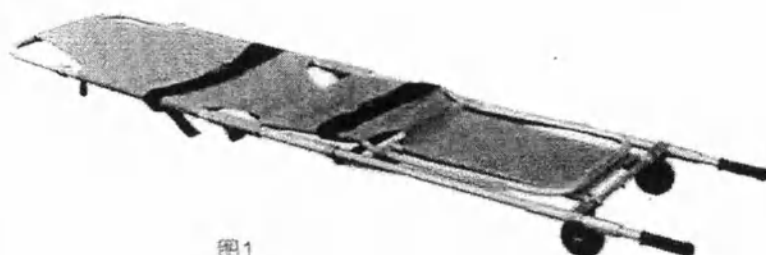


图1

Рис. 1 Положение «носилки»

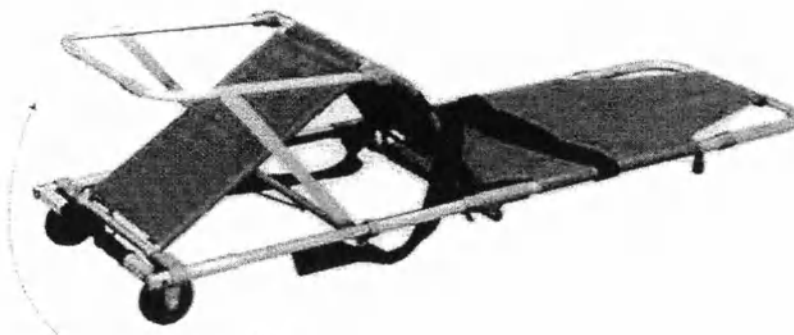


图2

Рис. 2 Потяните вверх в направлении, указанном стрелкой, при этом происходит трансформация в положение «кресло-каталка»

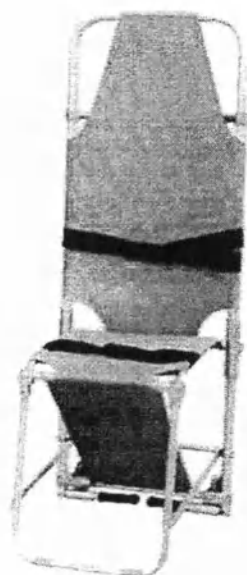


图3

Рис. 3 Положение «кресло-каталка»

**НОСИЛКИ MLF999-Е КОВШОВОГО ТИПА (РАЗДВИЖНЫЕ)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

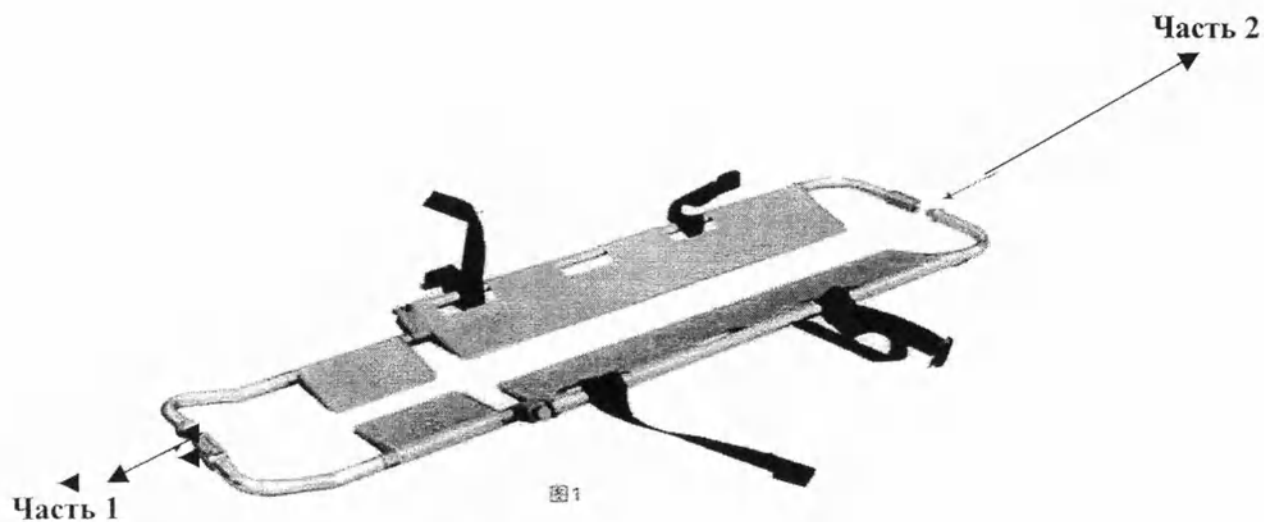


Рис. 1

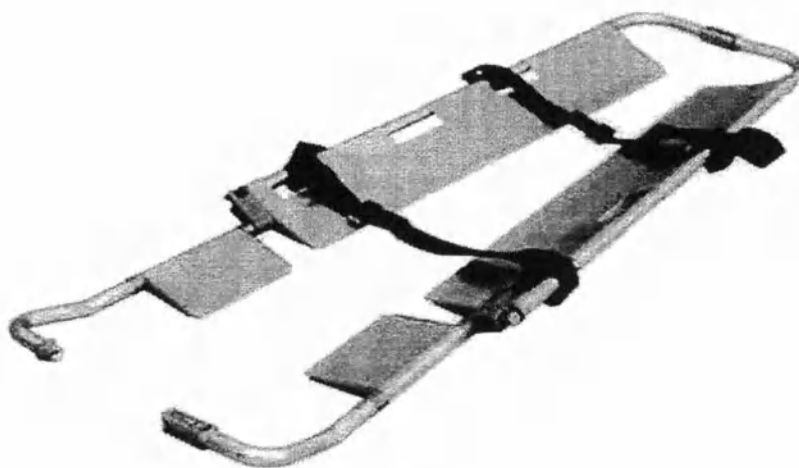


Рис.2

Инструкция по эксплуатации:

Во время использования носилок достаточно нажать на Часть 1 и Часть 2, чтобы разъединить носилки и привести их в положение, показанное на Рис. 2.