

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель



А.Г. Агамалян»

« 26 » апреля 2016 г.

Руководство по эксплуатации

МАТРАС ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

МАРКИ STRONG mattress production

ПО ТУ 9396-004-0090018990-2015

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Агамалян Арнольд Грачинович, ИП Агамалян А.Г.

Юридический адрес: 352290, Краснодарский край,
Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 191.

Фактический адрес: ст. Отрадная, ул. Базарная, 84

Производитель:

ООО «Стронг»

Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Р-н Отраденский Станица Отрадная, ул. Базарная д.84.

Фактический адрес: 352290, Краснодарский край, Р-н Отраденский Станица Отрадная, ул. Базарная, 84

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Матрас ортопедический марки STRONG mattress production по ТУ 9396-004-0090018990-2015 (далее по тексту – матрас), предназначен для обеспечения физиологически наиболее правильного положения тела человека, способствует профилактике искривлений позвоночника и остеохондроза, снятию напряжения и усталости мышц, профилактике пролежней и отеков у иммобильных больных, улучшению общего кровотока. (далее по тексту – матрас).

Матрас пригоден для использования в домашних условиях, в детских и дошкольных учреждениях, а также в лечебных, реабилитационных, профилактических медицинских учреждениях, санаториях, пансионатах, домах отдыха.

1.1. Комплект поставки/модель:

В зависимости от конструктивного исполнения матрас ортопедический марки STRONG mattress production по ТУ 9396-004-0090018990-2015 изготавливается различных серий и модификаций (исполнений), предусмотренных конструкторской документацией и техническими условиями.

МАТРАС ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАРКИ STRONG mattress production по ТУ 9396-004-0090018990-2015:

Серия матраса: CLASSIC

Модификации матраса: JACARD, STANDART, STANDART PLUS, MEDIUM, BIO, BIO LATEX, JACARD TFK, STANDART TFK, MEDIUM TFK, BIO TFK, BIO LATEX TFK.

Серия матраса: COMFORT

Модификации матраса: BIO, BIO PLUS, BIO LATEX, OPTIMA COCOS, VANDA BIO, VANDA BIO PLUS, VANDA BIO LATEX, VANDA LATEX, VANDA OPTIMA COCOS.

Серия матраса: SEASON

Модификации матраса: MEDIUM, LATEX, MEDIUM TFK, COCOS TFK, LATEX TFK.

Серия матраса: DREAM

Модификации матраса: EFFECT ZONE, REST ZONE, LUXURY ZONE, SOFT ZONE, MEMORY ZONE, EFFECT MULTI, REST MULTI, LUXURY MULTI, SOFT MULTI, MEMORY MULTI.

Серия матраса: GRAND

Модификации матраса: BIO TFK, BIO LATEX TFK, TONUS TFK, SOFT TFK, MEMORY ZONE, BIO MULTI, BIO LATEX MULTI, TONUS MULTI, SOFT MULTI, MEMORY MULTI.

Серия матраса: IMPERIAL

Модификации матраса: REST, HARD, RELAX, STATUS, MEMORY, MEMORY ZONE, SIMPLE, LATEX.

Серия матраса: ANTIK

Модификации матраса: OLIMP, DEMETRA, SAMSON, CRONOS.

Серия матраса: DUET

Модификации матраса: DUET, DUET 2.

Серия матраса: BABY

Модификации матраса: BABY, LATEX, COCOS, SOFT, COMFORT, SOFT MEMORY, LATEX MEMORY.

Серия матраса: COMPACT

Серия матраса: TRANSFORM STANDART

Серия матраса: BALANCE

Модификации матраса: MASSAGE, PROGRESS, FORTUNA, EXPERT, STATUS, RAYTON.

Серия матраса: RELAX

Модификации матраса: DREAM, PULSE.

Серия матраса: PREMIUM

Модификации матраса: STYLE, ELEGANT, PRESTIGE, ELITE, ANATOMIK.

Руководство по эксплуатации

Комплект поставки согласовывается с заказчиком индивидуально.*

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По классификации ГОСТ Р 51609 при использовании в медицинских целях как ортопедические изделия матрас относится к классу 1.

При этом по своему назначению матрас может быть условно отнесен к изделиям класса «Г» по ГОСТ Р 50444/ГОСТ 20790, отказ которых не вызывает нарушений основных функций и не вызывает никаких последствий для человека.

По ГОСТ Р 51079 матрас может быть условно отнесен к аппаратам ортопедическим для реабилитации позвоночника (код 06 03).

Матрас должен устанавливаться на жесткое основание кроватей, выполненное с элементами для фиксации матраса в обычном их положении.

Матрас по их сериям и модификациям должен изготавливаться различных цветовых решений, определяемых образцом-эталон и условиями заказа.

Масса матрасов размеров 800 х 2000 мм и 1600 х 2000 мм (кроме серии BABY) соответствует значениям, указанным в таблице 1. Масса матраса серии BABY указана в таблице 2. Допустимое отклонение массы не более 3%.

Таблица 1

Масса матраса (кроме серии BABY)

Серия, модификация матраса	Масса матраса 800х2000 мм, кг	Масса матраса 1600х2000 мм, кг
CLASSIC JACARD	11	21
CLASSIC STANDART	13,2	22,6
CLASSIC STANDART PLUS	15	25,4
CLASSIC MEDIUM	16,5	28,2
CLASSIC BIO	15,6	26,4
CLASSIC BIO LATEX	16,4	41,2
CLASSIC JACARD TFK	17	29,4
CLASSIC STANDART TFK	17,6	30,6
CLASSIC MEDIUM TFK	17,9	34,6
CLASSIC BIO TFK	19,4	35,4
CLASSIC BIO LATEX TFK	19,2	36,4

COMFORT BIO	15,2	28,2
COMFORT BIO PLUS	16,8	32,4
COMFORT BIO LATEX	21,1	38,2
COMFORT OPTIMA COCOS	25,9	49,4
COMFORT VANDA BIO	18,4	35,6
COMFORT VANDA BIO PLUS	19,9	38,6
COMFORT VANDA BIO LATEX	17,4	43,2
COMFORT VANDA LATEX	21,5	41,8
COMFORT VANDA OPTIMA COCOS	23,5	44,6
SEASON MEDIUM	18,1	35
SEASON LATEX	21,6	44,4
SEASON MEDIUM TFK	21,1	41
SEASON COCOS TFK	22,2	43,2
SEASON LATEX TFK	22,2	43,2
DREAM EFFECT ZONE	22,1	43
DREAM REST ZONE	17,5	43,4
DREAM LUXURY ZONE	17,3	43
DREAM SOFT ZONE	17,9	44,2
DREAM MEMORY ZONE	22,1	43,7
DREAM EFFECT MULTI	24,5	47,8
DREAM REST MULTI	19,9	48,2
DREAM LUXURY MULTI	19,7	47,8
DREAM SOFT MULTI	20,3	49
DREAM MEMORY MULTI	24,5	48,5
GRAND BIO LATEX TFK	22,3	43,4
GRAND BIO TFK	21,3	42,5
GRAND TONUS TFK	22,3	43,4
GRAND SOFT TFK	22,3	43,4
GRAND MEMORY ZONE	21,2	42
GRAND BIO MULTI	20,3	39,4
GRAND BIO LATEX MULTI	19,9	48,2
GRAND TONUS MULTI	15,4	39,2
GRAND , SOFT MULTI	19,9	47,8
GRAND MEMORY MULTI	23,6	45,8
IMPERIAL REST	19	46,6
IMPERIAL HARD	29,5	47,6
IMPERIAL RELAX	18,9	46,4
IMPERIAL STATUS	24	46,6
IMPERIAL MEMORY	12,9	24,5
IMPERIAL MEMORY ZONE	12,9	24,5
IMPERIAL SIMPLE	10,1	19
IMPERIAL LATEX	15,7	30,2

ANTIK OLIMP	27,6	54,4
ANTIK DEMETRA	25,4	50,6
ANTIK SAMSON	26,5	52,5
ANTIK CRONOS	26	51,5
DUET DUET	24,1	45
DUET DUET 2	25,5	48
COMPACT	8,7	17,4
TRANSFORM STANDART	3,8	
BALANCE MASSAGE	19	38,6
BALANCE PROGRESS	17,1	35
BALANCE FORTUNA	15,2	28
BALANCE EXPERT	15,2	28
BALANCE STATUS	17,4	35,6
BALANCE RAYTON	16,8	34,4
RELAX DREAM	15,5	23,4
RELAX PULSE	16,6	32,6
PREMIUM STYLE	19,8	40,4
PREMIUM ELEGANT	17,1	35
PREMIUM PRESTIGE	21,3	43,4
PREMIUM ELITE	20,6	42
PREMIUM ANATOMIK	23,8	48,5

Таблица 2

Масса матраса серии BABY

Модификация	Масса, кг
BABY	5,2
LATEX	4,2
BABY COCOS	4,2
BABY SOFT	4,7
BABY COMFORT	4,7
BABY SOFT MEMORY	4,4
BABY LATEX MEMORY	6,3

Высота матрасов – от 19 см до 26 см, с наполнителем ППУ – 15 см, серии BABY – 6–8 см, серии PREMIUM – от 21 см до 35 см.

Допустимые отклонения размеров матраса не должны превышать ± 10 мм.

Допустимое отклонение массы не более 3%.

Внешний облицовочный материал матраса покрывает всю его поверхность.

Возможно применение различного облицовочного материала на внешней (лицевой) и внутренней видимой поверхности матраса в соответствии с утвержденными образцами-эталоном.

Матрас изготавливается из материалов, пригодных для эксплуатации в жилых и аналогичных им помещениях.

Номинальное значение температуры окружающей среды при эксплуатации – от +5 °С до +45 °С, относительная влажность при температуре + 25 °С – до 75%.

Долговечность пружинных мягких элементов, циклы – не менее 20 000.

Мягкие элементы матраса на основе пружинных блоков при эксплуатации не создают шум в виде скрипа и щелчков.

Усадка матраса односторонней мягкости – не более 20 мм, двухсторонней мягкости – не более 30 мм. Неравномерность усадки матраса не превышает 15 мм.

Наполнитель матраса распределен равномерно по всей внутренней поверхности в соответствии с типом матраса.

Средний срок службы матраса – не менее 10 лет.

Матрас устойчив к дезинфекционной обработке (термообработка при помощи парогенератора).

Изготовление матраса осуществляется средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания осуществляются в порядке, установленном рабочими чертежами и техническими условиями.

Основные характеристики и материалы, применяемые при изготовлении матраса, приведены в таблице 3 по сериям и модификациям.

Таблица 3

**Основные характеристики и материалы, применяемые
при изготовлении матраса, по сериям и модификациям**

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
CLASSIC	JACARD	90	90	200	Мягкий комфорт	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL; пенополиуретан; спанбонд; система усиления поддержки периметра матраса
	STANDART	95	95	190	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL; пенополиуретан; войлок; система усиления поддержки периметра матраса
	STANDART PLUS	100	100	190	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; пенополиуретан; войлок; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
CLASSIC	MEDIUM	100	100	190	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; спанбонд; би-кокос; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO	100	100	190	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами (рамками) жесткости; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO LATEX	110	110	210	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами (рамками) жесткости; спанбонд; латексированная кокосовая койра; латекс; система усиления поддержки периметра матраса
	JACARD TFK	90	90	200	Мягкий комфорт	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; пенополиуретан; система усиления поддержки периметра матраса
	STANDART TFK	95	95	190	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; пенополиуретан; система усиления поддержки периметра матраса
	MEDIUM TFK	100	100	190	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; би-кокос; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO TFK	100	100	190	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
CLASSIC	BIO LATEX TFK	110	110	210	Средняя жесткость	Хлопковый трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
COMFORT	BIO	100	100	200	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO PLUS	105	105	210	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; войлок; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO LATEX	115	115	230	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
COMFORT	OPTIMA COCOS	120	120	240	Жесткий ортопедик	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	VANDA BIO	100	100	200	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	VANDA BIO PLUS	105	105	210	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	VANDA BIO LATEX	115	115	230	Средняя жесткость	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	VANDA LATEX	100	100	210	Мягкий комфорт	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; латекс; система усиления поддержки периметра матраса
	VANDA OPTIMA COCOS	120	120	240	Жесткий ортопедик	Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
SEASON	MEDIUM	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	190	1 ст., 2 ст.: средняя жесткость	1 ст.: шерсть мериноса; 2 ст.: Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; войлок; латексированная кокосовая койра; би-кокос; система усиления поддержки периметра матраса
	LATEX	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	230	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: жесткий ортопедик	1 ст.: шерсть мериноса; 2 ст.: Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL с двумя рамами жесткости; войлок; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	MEDIUM TFK	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	190	1 ст., 2 ст.: средняя жесткость	1 ст.: Шерсть мериноса; 2 ст.: Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; би-кокос; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	COCOS TFK	1 ст.: 120; 2 ст.: 120	1 ст.: 120; 2 ст.: 120	240	1 ст., 2 ст.: жесткий ортопедик	1 ст.: Шерсть мериноса; 2 ст.: Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
SEASON	LATEX TFK	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	230	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: жесткий ортопедик	1 ст.: Шерсть мериноса; 2 ст.: Жаккард с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
DREAM	EFFECT ZONE	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	230	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	REST ZONE	115	115	280	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; спанбонд; латексированная кокосовая койра; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса
	LUXURY ZONE	115	115	230	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
DREAM	SOFT ZONE	115	115	280	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; спанбонд; би-кокос; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса
	MEMORY ZONE	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	250	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; войлок; латекс с эффектом памяти Memory Foam; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса
	EFFECT MULTI	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	240	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; латексированная кокосовая койра; латекс; система усиления поддержки периметра матраса
	REST MULTI	115	115	280	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; латексированная кокосовая койра; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
DREAM	LUXURY MULTI	115	115	230	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; латексированная кокосовая койра; латекс; система усиления поддержки периметра матраса
	SOFT MULTI	115	115	280	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; би-кокос; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса
	MEMORY MULTI	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	250	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; войлок; латекс с эффектом памяти Memory Foam; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
GRAND	BIO TFK	110	110	230	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; холлофайбер; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO LATEX TFK	115	115	230	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	TONUS TFK	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	240	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; би-кокос; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	SOFT TFK	115	115	280	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; би-кокос; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
GRAND	MEMORY ZONE	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	250	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; войлок; латекс с эффектом памяти Memory Foam; высокоэластичная пена с массажным эффектом; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO MULTI	110	110	230	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; холлофайбер; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	BIO LATEX MULTI	115	115	230	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	TONUS MULTI	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	1 ст.: 115; 2 ст.: 120	240	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; латекс; би-кокос; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
GRAND	SOFT MULTI	115	115	280	Средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; спанбонд; высокоэластичная пена с массажным эффектом; би-кокос; система усиления поддержки периметра матраса
	MEMORY MULTI	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	250	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: средняя жесткость	Хлопок с объемной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING MULTI; войлок; высокоэластичная пена с массажным эффектом; латекс с эффектом памяти Memory Foam; система усиления поддержки периметра матраса
IMPERIAL	REST	115	115	270	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; высокоэластичная пена с массажным эффектом; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	HARD	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	1 ст.: 110; 2 ст.: 110	190	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; би-кокос; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	RELAX	110	110	210	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
IMPERIAL	STATUS	1 ст.: 110; 2 ст.: 115	1 ст.: 110; 2 ст.: 115	190	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: жесткий ортопедик	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	MEMORY	110	110	220	Мягкий комфорт	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING; войлок; латекс; латекс с эффектом памяти Memory Foam; система усиления поддержки периметра матраса
	MEMORY ZONE	110	110	220	Мягкий комфорт	Трикотаж с рельефной стежкой	Пружинный блок POCKET SPRING ZONE; войлок; латекс; латекс с эффектом памяти Memory Foam; система усиления поддержки периметра матраса
	SIMPLE	100	100	150	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Моноблок
	LATEX	100	100	150	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Латекс моноблок

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
ANTIК	OLIMP	140	140	220	Жесткий ортопедик	Жаккард хлопковый или трикотаж в глубокой рельефной стежке	Конский волос; латекс; кокосовая койра
	DEMETRA	120	120	220	Жесткий ортопедик	Жаккард хлопковый или трикотаж в глубокой рельефной стежке	Латекс; латексированная кокосовая койра
	SAMSON	120	120	210	Жесткий ортопедик	Жаккард хлопковый или трикотаж в глубокой рельефной стежке	Конский волос; латекс; латексированная кокосовая койра
	CRONOS	120	120	220	Жесткий ортопедик	Жаккард хлопковый или трикотаж в глубокой рельефной стежке	Холлофайбер; войлок; кокосовая койра
DUET	DUET	1 ст.: 105; 2 ст.: 120	1 ст.: 105; 2 ст.: 120	230	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: жесткий ортопедик	Трикотаж в глубокой рельефной стежке	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса
	DUET 2	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	1 ст.: 100; 2 ст.: 120	230	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: средняя жесткость	Трикотаж в глубокой рельефной стежке	Пружинный блок POCKET SPRING; спанбонд; латекс; латексированная кокосовая койра; система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
BABY	BABY	15	15	80	Средняя жесткость	Хлопок с рельефной стежкой	Пружинный блок BONNEL, войлок
	LATEX	1 ст.: 15; 2 ст.: 15	1 ст.: 15; 2 ст.: 15	70	1 ст.: мягкий комфорт; 2 ст.: жесткий ортопедик	1 ст.: Шерсть мериноса; 2 ст.: Хлопок с рельефной стежкой	Кокосовая койра, латекс
	COCOS	15	15	70	Жесткий ортопедик	Хлопок с рельефной стежкой	Кокосовая койра
	SOFT	1 ст.: 15; 2 ст.: 15	1 ст.: 15; 2 ст.: 15	60	1 ст.: средняя жесткость; 2 ст.: жесткий ортопедик	Хлопок с глубокой рельефной стежкой	1 ст.: холлофайбер; 2 ст.: кокосовая койра
	COMFORT	15	15	70	Мягкий комфорт	Хлопок с глубокой рельефной стежкой	Холлофайбер
	SOFT MEMORY	15	15	80	Средняя жесткость	Трикотаж с рельефной стежкой	Латекс с эффектом памяти Memory Foam, би-кокос
	LATEX MEMORY	15	15	80	Мягкий комфорт	Трикотаж с рельефной стежкой	Латекс с эффектом памяти Memory Foam, латекс

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
COMPACT	-	100	100	160	Средняя жесткость	Жаккард в рельефной стежке	Моноблок (пенополиуретана высокой плотности)
TRANSFORM STANDART	-	90	90	80	Средняя жесткость	Хлопковый жаккард в рельефной стежке; ткань стойкая к истиранию (хлопок)	Моноблок (пенополиуретана высокой плотности)
BALANCE	MASSAGE	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	220-230	1 ст.: мягкий комфорт, 2 ст.: средняя жесткость	Трикотаж в объемной стежке	Латекс. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок POCKET SPRING. Высокоэластичная пена с массажным эффектом. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки
	PROGRESS	100	100	190-200	Мягкий комфорт	Трикотаж в объемной стежке	Высокоэластичная пена с эффектом памяти «Memory Foam». Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок Pocket Spring ZONE. Мягкий слой из латекса. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки
	FORTUNA	100	100	180-190	Средняя жесткость	Трикотаж в объемной стежке	Высокоэластичная пена. Латексированная кокосовая койра. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок «Bonnel» с рамками жесткости. Войлок для защиты слоев. Высокоэластичная пена. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
BALANCE	EXPERT	1 ст.: 90; 2 ст.: 100	1 ст.: 90; 2 ст.: 100	180-190	1 ст.: жесткий ортопедик, 2 ст.: средняя жесткость	Трикотаж в объемной стежке	Латексированная кокосовая койра. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок «Pocket Spring». Спанбонд для защиты слоев. Высокоэластичная пена. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки
	STATUS	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	1 ст.: 100; 2 ст.: 100	190-200	1 ст.: жесткий ортопедик, 2 ст.: мягкий комфорт	Трикотаж в объемной стежке	Латексированная кокосовая койра. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок «Pocket Spring ZONE». Спанбонд для защиты слоев. Мягкий слой из латекса. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки
	RAYTON	1 ст.: 110; 2 ст.: 100	1 ст.: 110; 2 ст.: 100	180-190	1 ст.: средняя жесткость, 2 ст.: мягкий комфорт	Трикотаж в объемной стежке	Мягкий слой из латекса. Латексированная кокосовая койра. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок «Pocket Spring Multi» с рамками жесткости. Система усиления поддержки периметра матраса. Декоративные ручки
RELAX	DREAM	95	95	180-190	Средняя жесткость	Хлопковый жаккард в глубокой рельефной стежке	Войлок. Пружинный блок «Bonnell»

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
RELAX	PULSE	90	90	180	Мягкий комфорт	Хлопковый жаккард в глубокой рельефной стежке	Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок «Pocket Springs TFK» с рамками жёсткости
PREMIUM	STYLE	110	110	240-250	Мягкий комфорт	Трикотаж	Верхняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Мягкий слой из латекса. Пружинный блок "Pocket Spring ZONE". Износостойчивый материал из термоскрепленного войлока. Нижняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Система усиления поддержки периметра матраса
	ELEGANT	110	110	220-230	Средняя жесткость	Трикотаж	Верхняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Слой латексированного кокоса. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок "Pocket Spring ZONE". Спанбонд для защиты слоев. Нижняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Система усиления поддержки периметра матраса

Продолжение таблицы 3

Серия матраса	Модификация матраса	Максимальная нагрузка, кг	Максимальная распределенная нагрузка (на 1 спальное место), кг	Высота матраса, мм	Показатель жесткости	Тип применяемой ткани	Применяемые наполнители
PREMIUM	PRESTIGE	120	120	260-270	Средняя жесткость	Трикотаж	Верхняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Мягкий слой из латекса. Слой латексированного кокоса. Спанбонд для защиты слоев. Пружинный блок "Pocket Spring ZONE". Нижняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Система усиления поддержки периметра матраса
	ELITE	120	120	270-280	Мягкий комфорт	Трикотаж	Верхняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Мягкий слой из латекса. Износостойчивый материал из термоскрепленного войлока. Пружинный блок "Pocket Spring ZONE". Нижняя система комфортности (Холлофайбер, пенополиуретан, спанбонд). Система усиления поддержки периметра матраса
	ANATOMIK	140	120	330	Мягкий комфорт	Трикотаж	Латекс с эффектом памяти Memory Foam. Комфортный слой из латекса. Высокоэластичная пена. Износостойчивый материал из термоскрепленного войлока. Система независимых пружин «Senssoft» с рамкой жёсткости. Система усиления поддержки периметра матраса

Используемые материалы:

Пружинные блоки:

- BONNEL: марка стали 70KK, диаметр проволоки – 2,2, диаметр витка – 85-90
- POCKET SPRING: марка стали 70BK, диаметр проволоки – 1,8, диаметр витка – 5,3
- POCKET SPRING MULTI: марка стали 70KK, диаметр проволоки – 1,4, диаметр витка – 4,5
- POCKET SPRING ZONE: марка стали 70BK, диаметр проволоки – 1,6-1,8, диаметр витка – 6,3
- POCKET SPRING TFK: марка стали 70KK, диаметр проволоки – 2,0, диаметр витка – 6,3-6,5
- Система независимых пружин SESSOFT: марка стали 70BK, диаметр проволоки – 1,6, диаметр витка – 4,7.

Би-кокос по ТУ 8394-001-49938568-2012 (производитель: ООО Компания «Нафта-Хим»)

Холлофайбер по ТУ 8397-001-72922610-05 (производитель – ООО "Термопол")

Конский волос по ГОСТ 12859-67

Шерсть мериноса по ГОСТ 26383-84

Пенополиуретан – система пенополиуретановая Полипрен-215 (производство НПО "Полипрен", Самарская область, п. Новосемейкино).

Спанбонд – производство ОХК "Щекиноазот", Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский

Войлок – полотно Термовойлок (производство ООО «Технотекс», Пензенская область, Кузнецкий район, п. Верхозим)

Материал системы усиления поддержки периметра матраса – пенополиуретан высокой плотности.

Латекс с эффектом памяти Memory Foam марки CE 4016

Латексированная кокосовая койра по ТУ 2514-001-72116406-2009

Высокоэластичная пена с массажным эффектом по ТУ 2254-001-55-15-44-05-2001

Система усиления поддержки периметра матраса – система пенополиуретановая Полипрен-215 (производство НПО "Полипрен", Самарская область, п. Новосемейкино).

Жаккард с рельефной стежкой – производство ООО «Новые Ткани» (Москва), артикулы 258KL-10(19-1325), 258KL-10(020), 258KL-10(085), HY-10 jet.

Хлопковый трикотаж – производство ООО «Новые Ткани» (Москва), артикул 49055/К

Трикотаж – производство ООО «Новые Ткани» (Москва), артикул 57713

Хлопковый жаккард – производство ООО «Новые Ткани» (Москва), артикул 49988

Хлопок – производство ООО «Новые Ткани» (Москва), артикул 57549

Декоративные ручки – из верхней ткани

Значения показателей жесткости:

Показатель жесткости	Деформация под нагрузкой 70 даН, мм	Податливость ,мм/даН
Мягкий комфорт	от 95 до 115	От 1,7 до 2,3
Средняя жесткость	от 70 до 90	От 1,3 до 1,6
Жесткий ортопедик	от 50 до 65	От 0,5 до 1,2

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Показания к применению:

- Профилактика искривления позвоночника (для детей и взрослых).
- Профилактика появления болей на разных участках спины.
- Перенапряжение суставов, позвоночника, мышц.
- Онемение мышц по ночам.
- Терапия при наличии осевых изменений позвоночника.
- Реабилитация после полученных травм.
- Терапия при остеохондрозе, сколиозе.
- Нарушение нормальной циркуляции крови в мышцах.

Общие противопоказания: возможны аллергические реакции на материалы, из которых состоит матрас.

Побочные эффекты: не выявлены.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ МАТРАСА

Матрас следует эксплуатировать в сухом, проветриваемом помещении. Запрещается размещать матрас рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня.

После снятия упаковки перед эксплуатацией матраса необходимо проветрить, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха снизится, и он полностью исчезнет через 14 дней.

В течение первых 3-х месяцев эксплуатации матрас необходимо переворачивать один раз в две недели. Это важно для правильного восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.

В дальнейшем переворачивать матрас один раз в месяц, за исключением односторонних матрасов. Все переворачивания осуществляются чередованием поворотов голова/ноги с поворотом на другую сторону.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАТРАСА

Матрас используется на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ортопедической решетке, рейки которой выгнуты вверх (ширина реек не менее 5 см и расстояние между ними не более 8.5 см). Для матраса шириной более 140 см рекомендуется использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой. Не рекомендуется использование матраса на кровати, размер спального места которой меньше размера матраса. Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1 Условия эксплуатации

Матрас должен быть устойчив при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Номинальное значение температуры окружающей среды при эксплуатации - от плюс 10°C до плюс 35 °C, относительная влажность при температуре плюс 25 °C – до 80 %. Следует беречь матрас от попадания жидкостей и химикатов; возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Допустима химическая чистка или стирка матрасов. Матрас сушится на воздухе без применения утюга.

Матрас не предназначен к воздействию сильных вертикальных нагрузок, таких как прыгание, сидение или хождение. Такие нагрузки могут значительно сократить срок службы матраса.

Многие матрасы оснащены ручками. Ручки выполняют декоративную функцию и не предназначены для переноса и переворачивания двуспальных матрасов.

Необходимо периодически проветривать матрас, но не допускать воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур. Матрас должен находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Достаточно снять постельное белье и открыть окно или балкон. Проветривать 2–3 часа, желательно с обеих сторон – это необходимо делать при смене белья для улучшения процесса испарения влаги.

6.2 Маркировка

Маркировка готовой продукции осуществляется на ярлыках (этикетках); место нанесения маркировки устанавливается в конструкторской документации.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение матраса по техническим условиям;
- дату изготовления продукции (месяц, год);
- правила утилизации согласно СанПиН 2.1.7.728;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- сведения о проведенной сертификации (при ее осуществлении) и знак по ГОСТ Р 50460;
- номер технических условий.

Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.

Данные наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

6.3 Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность матраса от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве потребительской упаковки используются полиэтиленовая плёнка и мешки (пакеты).

В качестве транспортной тары применяются деревянные ящики и ящики из гофрированного картона.

Могут использоваться другие упаковочные средства, в том числе производимые на предприятии-изготовителе матраса, обладающие необходимой прочностью и обеспечивающие сохранность матраса при транспортировании и хранении.

Общая масса тары указывается при маркировке.

6.4 Транспортировка

Транспортирование матраса осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Матрас при транспортировании должен быть устойчив к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности не более 98%.

Перевозка и хранение матраса должны производиться с соблюдением условий, исключающих возможность повреждения его конструкции (в горизонтальном положении на ровной, жесткой поверхности). Матрас с блоком независимых пружин перевозится только в горизонтальном положении. Запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрас. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку матраса производят в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств.

6.5 Хранение и срок годности

Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности не более 98% по категории УЗ.

Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

6.6 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации матраса – 18 месяцев.

Расчетный срок эксплуатации – не менее 10 лет.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Гарантия вступает в действие при следующих условиях:

- При сохранении вшитой в торец матраса этикетки, содержащей индивидуальный штрих-код матраса.
- Если матрас не имеет механических повреждений, загрязнений, следов самостоятельного ремонта.

Гарантия не распространяется на дефекты, относящиеся к естественному износу материалов, и на дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики.

Ремонт матраса не влечет за собой изменение сроков гарантии.

Гарантия прекращает свое действие в случае, если матрас разбирается или ремонтируется третьими лицами (за расходы на ремонт матраса, осуществленный третьими лицами, производитель ответственности не несет).

Гарантия не распространяется на деформацию поверхности матраса менее 30 мм, поскольку подобные изменения считаются физиологически обусловленными, таким образом, набивка распределяется под действием веса тела.

Во всех случаях производитель оставляет за собой право перед выполнением ремонта или замены матраса осуществлять его проверку уполномоченными лицами компании с целью установления фактического характера изъянов и/или дефектов.

В том случае если в ходе проверки обнаруживается, что матрас использовался не по назначению или при его эксплуатации не соблюдались правила по использованию и уходу за матрасом, гарантия теряет силу, а клиент оплачивает расходы изготовителя на организацию проверки матраса уполномоченными лицами.

Матрас, подлежащее ремонту, должно быть обернуто в специальный защитный материал с целью предотвращения его от повреждений во время перевозки.

Гарантийный срок при розничной продаже матраса через торговую сеть исчисляется со дня их продажи, при вне рыночном распределении – со дня их получения потребителем.

6.7 Сведения об утилизации

7.7 Утилизация матрасов – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу А), как отходов эпидемиологически безопасных, приближенных к твердым бытовым отходам.

По вопросам утилизации обращаться: Индивидуальный предприниматель Агамалян Арнольд Грачикович, ИП Агамалян А.Г. Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 191. Фактический адрес: ст. Отрадная, ул. Базарная, 84. Тел. 8-86144-3-30-17. E-mail: info@matras-strong.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____
Производитель _____
Модель _____
Серийный номер/артикул _____
Дата продажи _____
Организация продавец _____
Подпись продавца _____
Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Штамп
продавца

Срок гарантийного использования – 18 месяцев.
Срок гарантийного хранения – 18 месяцев со дня приобретения.

По вопросам гарантии обращаться: Индивидуальный предприниматель Агамалян Арнольд Грачикович, ИП Агамалян А.Г. Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 191. Фактический адрес: ст. Отрадная, ул. Базарная, 84. Тел. 8-86144-3-30-17. E-mail: info@matras-strong.ru.

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.
При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.
Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.
Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

Отметка гарантийного центра

Дата	Описание	Гарантийный центр

Прошито и пронумеровано

29

