

Managing Director

(Генеральный директор)

"Valentine International Ltd."

(Валентайн Интернейшнл Лтд)

Подпись/ Johnny Ciu /(Джонни Циу)

«8» сентября 2015г.

Руководство по эксплуатации

Кресла-коляски механические Barry с принадлежностями

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретя кресла-коляски механические Barry.

Каждая кресла-коляска механическая Barry тестируется производителем на безопасность и функциональность, и покидает завод в наилучшем состоянии.

В данном Руководстве содержится информация о функциях, необходимых для ежедневного применения кресла-колясок механических Barry. Таким образом, Вам следует регулярно обращаться к данному Руководству по эксплуатации, как к практическому справочнику, постоянно находящемуся под рукой.

Valentine International Ltd."

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Кресла-коляски механические Barry приводятся в движение вручную и служат исключительно для передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата самостоятельно или с помощью сопровождающего его лица. Пользоваться кресла-колясками механические Barry без посторонней помощи разрешается только тем лицам, которые физически и умственно в состоянии правильно ее эксплуатировать (приводить в движение, управлять, тормозить). Кресла-коляски механические Barry должны применяться только на ровной поверхности, на проходимой местности и в помещениях. Кресла-коляски механические Barry должны соответствовать вашему состоянию здоровья.

2.1. Назначение изделия


Кресла-коляски механические Barry предназначены для перемещения взрослых людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

2.2. Состав изделия

1. Кресла – коляска

Кресла-коляска поставляется в собранном виде.

Кресла-коляска состоит из различных деталей. На схеме отмечены лишь ее основные элементы.

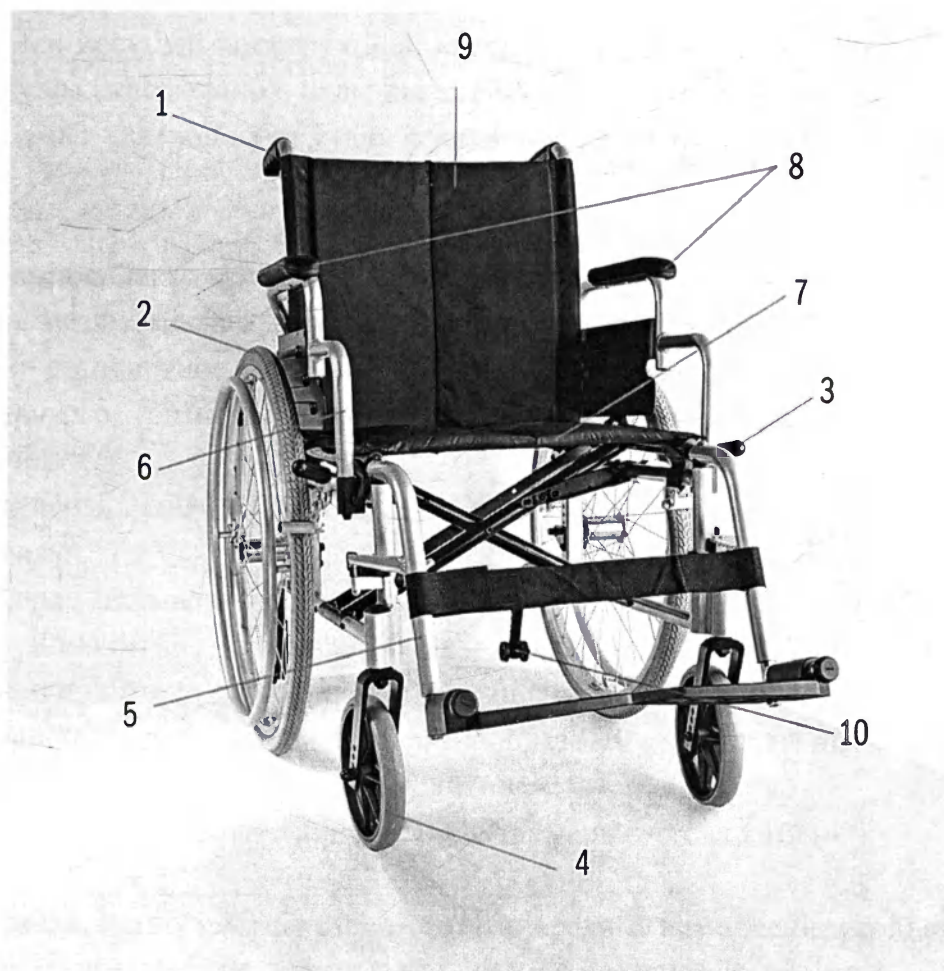

- 1-Ручки для толкания
- 2-Заднее колесо (ведущее колесо)
- 3-Тормоз
- 4-Переднее колесо (поворотное колесо)
- 5-Подножки

- 6 – Рама
- 7 – Сиденье
- 8 – Подлокотники
- 9 – Спинка
- 10 – Антипрокидыватели

• **Ручки для толкания** служат для перемещения кресла-коляски с человеком. Ручки для толкания оснащены анатомической насадкой из противоскользящего материала - полипропилена (марка:1500J) для удобства сопровождающего лица. Ручки для толкания не регулируются по высоте.

• **Заднее колесо (ведущее колесо)** состоит из колеса, оси и обручей. Задние колеса обеспечивают стабильность коляски и позволяют приводить ее в движение при помощи обручей.

Материал задних колес: полиуретан (марка: РМС-790).

• **Тормоз** используется для фиксации стоящей коляски. Тормоз применяют при длительных остановках кресла-коляски. Тормоз оснащен анатомической насадкой из противоскользящего материала - полипропилена (марка:1500J).

• **Переднее колесо (поворотное колесо)** состоит из колеса и вилки. Передние колеса обеспечивают контакт передней части коляски с полом и направляют движение коляски посредством изменения положения вилки.

Материал передних колес: полиуретан (марка: РМС-790).

• **Подножки** состоят из регулируемой стойки и ножной панели, поддерживающей ноги.

Материал подножек: полипропилен (марка: 1500J).

• **Рама** является несущей конструкцией кресла-коляски, состоящая из боковых элементов рамы и системы складывания, включая элементы сидения и спинки.

Материал рамы: углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием из хрома (марка: Q 235 С).

• **Сиденье**

Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств. На кресла-коляске установлено стандартное сиденье, при желании клиента есть возможность установки сиденья другого размера (сиденья с различными размерами представлены в принадлежностях).

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

• **Подлокотники**

Кресла-коляски оснащены подлокотниками несъемного типа это обеспечивает всему устройству монолитность, долгий срок эксплуатации и устойчивость. Подлокотники имеют ступенчатый вид, что отличает повышенной маневренностью и дает возможность пользователю без труда подъезжать к разнообразным предметам интерьера.

Запрещено поднимать коляску за подлокотники!

Материал обивка подлокотника: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

• **Спинка**

Спинка съемная, легко моется, инертна термически и химически, стойкая к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

На кресла-коляске установлена стандартная спинка, при желании клиента есть возможность установки спинки универсальной (представлена в принадлежностях) с регулируемой шириной.

Материал спинки: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).


• Антипрокидыватели

Антипрокидыватель съемный с роликами и регулировкой по высоте для инвалидных колясок. Обеспечивает коляске дополнительную устойчивость и повышает безопасность передвижения в кресле.

2. Руководство по эксплуатации (на бумажном носителе, на русском языке).

Принадлежности:

■ Сиденье 34 см (арт. 001)

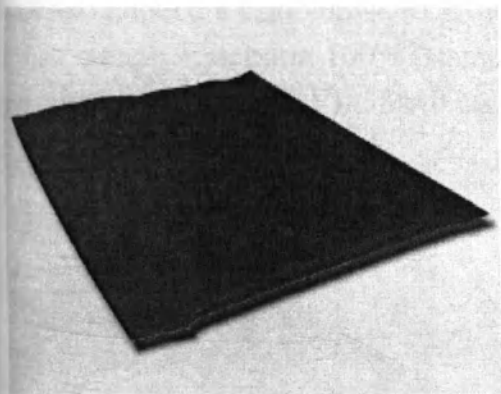


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 34 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденья 34 см (ШхГ): 34х40 см.; Вес: 0,47 кг.

2. Сиденье 36 см (арт. 001)

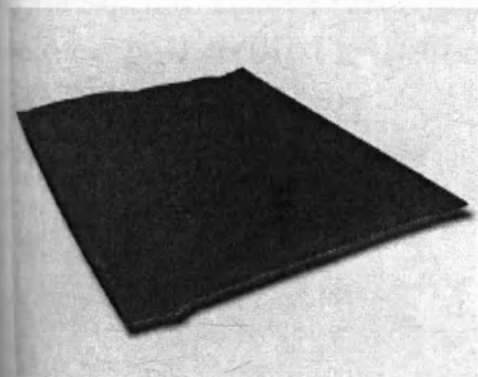


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 36 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденья 36 см (ШхГ): 36х40 см.; Вес: 0,47 кг.

3. Сиденье 38 см (арт. 001)

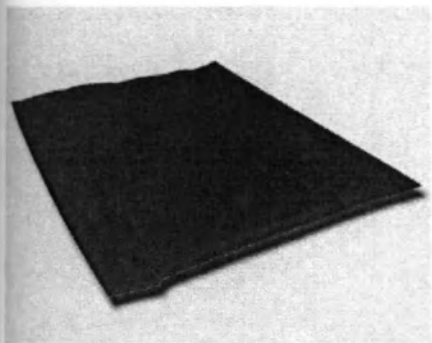


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 38 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденья 38 см (ШхГ): 38х40 см.; Вес: 0,47 кг.

4. Сиденье 41 см (арт. 001)

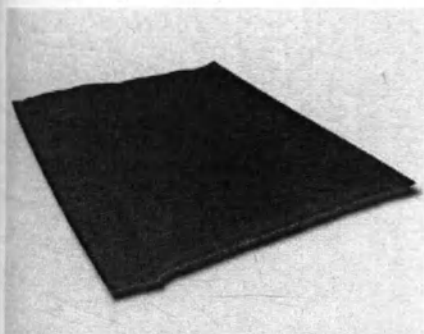


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 41 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 41 см (ШхГ): 41х40 см.; Вес: 0,47 кг.

5. Сиденье 43 см (арт. 001)

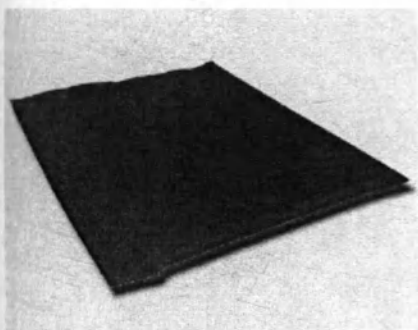


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 43 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 43 см (ШхГ): 43х40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 46 см (арт. 001)

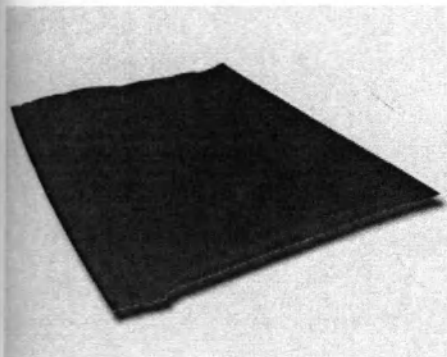


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 46 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 46 см (ШхГ): 46x40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 48 см (арт. 001)

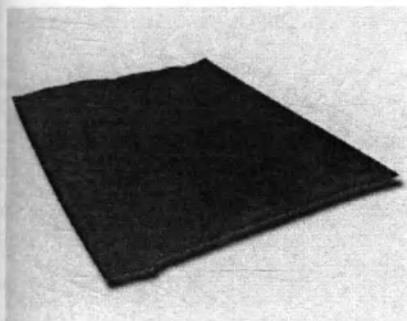


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 48 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 48 см (ШхГ): 48x40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 51 см (арт. 001)

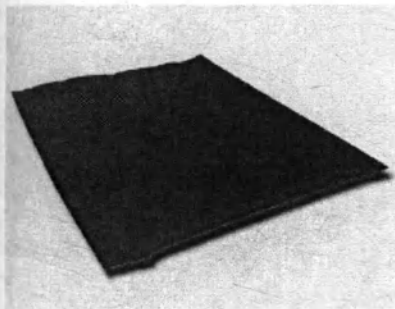


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 51 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 51 см (ШхГ): 51x40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 53 см (арт. 001)

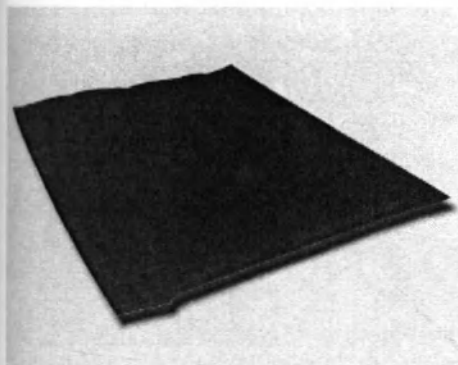


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию
мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 53 см взамен
сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 53 см (ШхГ): 53х40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 56 см (арт. 001)

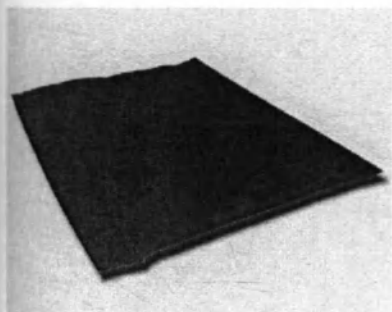


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию
мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 56 см взамен
сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 56 см (ШхГ): 56х40 см.; Вес: 0,47 кг.

Сиденье 58 см (арт. 001)

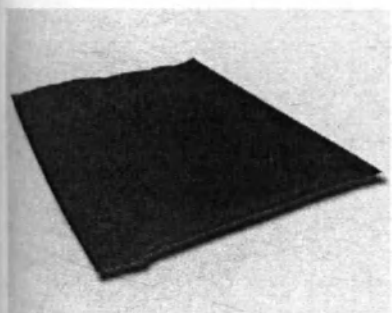


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию
мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 58 см взамен
сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 58 см (ШхГ): 58х40 см.; Вес: 0,47 кг.

12. Сиденье 61 см (арт. 001)

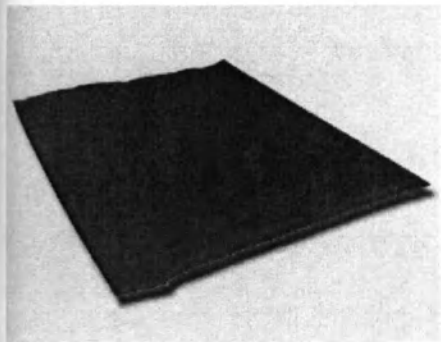


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 61 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D)

Размер сиденья 61 см (ШхГ): 61х40 см.; Вес: 0,47 кг.

13. Сиденье 63 см (арт. 001)

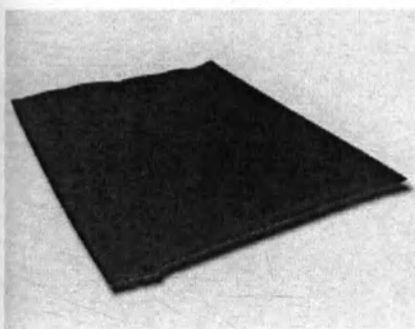


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 63 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденья 63 см (ШхГ): 63х40 см.; Вес: 0,47 кг.

14. Сиденье 66 см (арт. 001)

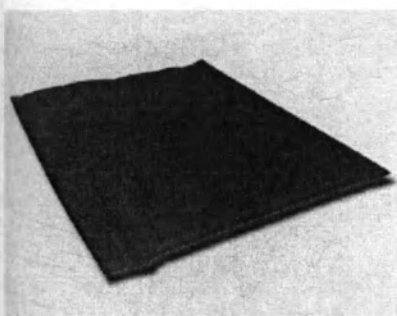


Сиденье съемное, легко моется, инертно термически и химически, стойкое к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 66 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденья 66 см (ШхГ): 66х40 см.; Вес: 0,47 кг.

15. Сиденье 68 см (арт. 001)

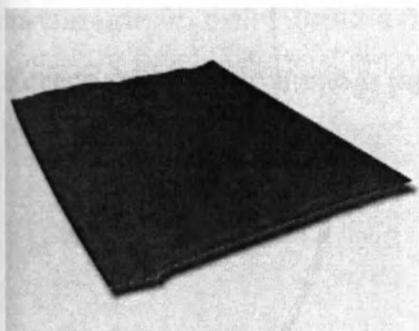


Сиденье съемное, легко моется, инертна термически и химически, стойкая к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 68 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденье 68 см (ШхГ): 68х40 см.; Вес: 0,47 кг.

16. Сиденье 70 см (арт. 001)

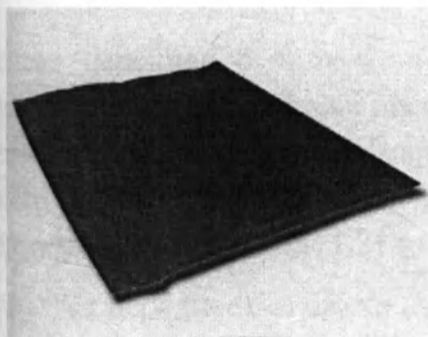


Обтяжка сиденья съемная, легко моется, инертна термически и химически, стойкая к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств.

При желании клиента есть возможность установки сиденья с шириной 70 см взамен сиденья входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал сиденья: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Размер сиденье 70 см (ШхГ): 70х40 см.; Вес: 0,47 кг.

17. Спинка (арт. 002)

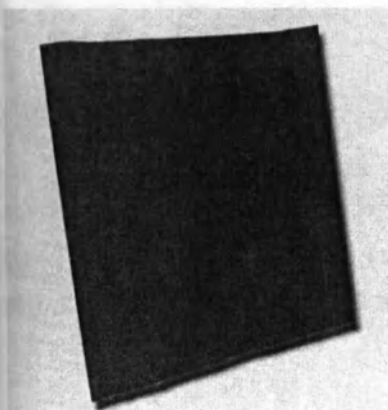


Спинка съемная, легко моется, инертна термически и химически, стойкая к воздействию мочи, крови, мазям, маслам, жирам и всех дезинфицирующих средств. Спинка является универсальной, т.к. при заменах ширины сиденья ее можно с помощью крепления-липучек прикрепить под тот размер, который необходим.

Материал спинки: нейлон 100% (марка: Oxford 1680D).

Высота спинки: 46 см.; Ширина спинки (min-max): 34-70 см; Вес: 0,51 кг.

1. Колесо переднее с вилкой (арт. 015)

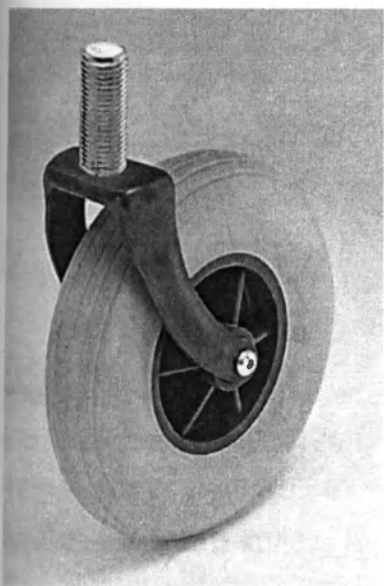

Колесо переднее с вилкой обеспечивает контакт передней части коляски с полом и управляет движением коляски посредством изменения положения вилки.

Материал колеса: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр колеса: 20 см.; Диаметр диска: 10 см.; Высота колеса переднего с вилкой: 37 см.; Вес колеса переднего с вилкой: 1,21 кг.

2. Колесо переднее без вилки (арт. 016)



Колесо переднее без вилки является запасной частью к кресла-коляски.

Материал колеса: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр колеса переднего без вилки: 20 см.; Диаметр диска: 10 см.; Вес: 0,8 кг.

Колесо переднее без вилки (арт. 016U)



Колесо переднее без вилки является запасной частью к кресла-коляски.

Материал колеса: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр колеса переднего без вилки: 20 см.; Диаметр диска: 15 см.; Вес: 0,6 кг.

Вилка переднего колеса (арт. 020)




Вилка переднего колеса является запасной частью к кресла-коляски.

Материал вилки переднего колеса: углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием из хромированного никеля (марки: Q 235 C).

Высота вилки переднего колеса: 17 см.; Вес: 0,41 кг.

2. Колесо магнум (арт. 025M)

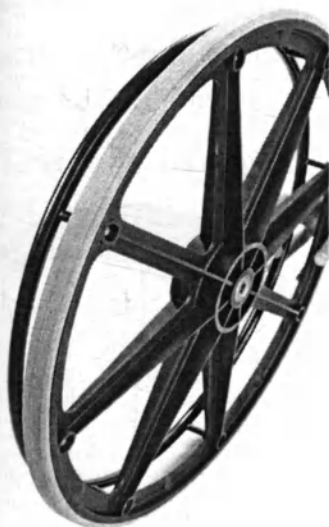

Колесо магнум с втулкой под быстросъёмную ось оборудовано спицами и обручем для быстрого привода. Оснащается резиновыми покрышками без камеры (цельнолитая шина).

При желании клиента есть возможность установки колеса магнум взамен колеса входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал колеса магнум:

Спицы: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Втулка: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обод: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обруч: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Шина: полиуретан (марка PMC-790).

Диаметр колеса магнум: 60 см.; Диаметр диска: 54 см.; Вес: 3 кг.

3. Колесо надувное (арт. 025SP)



Колесо надувное с втулкой под быстросъёмную ось оборудовано спицами и обручем для быстрого привода. Оснащается резиновыми покрышками с камерой (пневматические).

При желании клиента есть возможность установки колеса надувного взамен колеса входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал колеса надувного:

Спицы: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Втулка: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обод: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обруч: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Шина: полиуретан (марка PMC-790).

Диаметр колеса надувного: 60 см.; Диаметр диска: 54 см.; Вес: 3 кг.

4. Колесо литое (арт. 025S)



Колесо литое с втулкой под быстросъёмную ось оборудовано спицами и обручем для ручного привода. Оснащается резиновыми покрышками без камеры (цельнолитая шина).

При желании клиента есть возможность установки колеса литого взамен колеса входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал колеса литого:

Спицы: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Втулка: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обод: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Ободочный слой: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Покрышка: полиуретан (марка PMC-790).

Диаметр колеса литого: 60 см.; Диаметр диска: 54 см.; Вес: 3 кг.

Колесо литое с протектором (арт. 025SU)



Колесо литое с протектором с втулкой под быстросъёмную ось оборудовано спицами и обручем для ручного привода. Оснащается резиновыми покрышками без камеры (цельнолитая шина).

При желании клиента есть возможность установки колеса литого с протектором взамен колеса входящего в стандартную комплектацию кресла-коляски.

Материал колеса литого с протектором:

Спицы: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Втулка: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Обод: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Ободочный слой: углеродистая сталь (марки: ML45) с антикоррозийным покрытием из хрома.

Покрышка: полиуретан (марка PMC-790).

Диаметр колеса литого с протектором: 60 см.; Диаметр диска: 54 см.; Вес: 3 кг.

Транзитное колесо (арт. 027)




Транзитное колесо позволяет проезжать в более узкие проемы при снятых задних колёсах.

Материал транзитного колеса: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр транзитного колеса: 8 см.; Вес: 0,24 кг.

Шина литая (арт. 029)

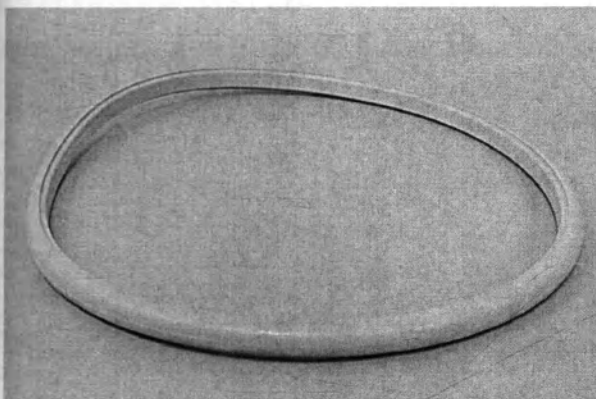

Шина литая является запасной частью к кресла-коляски.

Материал шины литой: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр шины литой: 61 см.; Вес: 1 кг.

Шина пневматическая (арт. 032)



Шина пневматическая является запасной частью к кресла-коляски.

Материал шины пневматической: полиуретан (марка РМС-790).

Диаметр шины пневматической: 61 см.; Вес: 1 кг.

3. Камера для шин (арт. 033)



Камера для шин является запасной частью к кресла-коляски.

Материал камеры для шин: бутил с добавлением каучука

Диаметр камеры для шин: 60,5 см.; Вес: 0,2 кг.

4. Подножка левая (арт. 047L)



Подножка левая состоит из регулируемой стойки и ножной панели, поддерживающей ногу.

Подножка левая является запасной частью к кресла-коляски.

Материал подножки левой: полипропилен (1500J).

Высота подножки левой: 17 см.; Вес: 0,6 кг.

11. Подножка правая (арт. 047R)



Подножка левая состоит из регулируемой стойки и ножной панели, поддерживающей ногу.

Подножка правая является запасной частью к кресла-коляски.

Материал подножки правой: полипропилен (1500J).

Высота подножки левой: 17 см.; Вес: 0,6 кг.

12. Подголовник (арт. 050)



Подголовник, как средство безопасности, предназначается для защиты шеи и головы.

Подголовник имеет U-образную форму. Вместе с подголовником в комплект входят с детали для крепления. Крепится на рукоятки для перемещения коляски сопровождающим лицом.

Материал:

Исполнитель: пенополиуретан (марка: EL 4060).

Внешняя оболочка: нейлон 100% (Oxford 840D).

Размер подголовника (ВхШхГ): 16x20x11 см.; Вес: 2,2 кг.

13. Нагрудный ремень фиксатор (арт. 051)



Нагрудный ремень фиксатор с прочным пластиковым замком из полипропилена и регулировкой натяжения, крепится непосредственно к раме коляски и обеспечивает дополнительную безопасность пользователю кресла. Ремень выполнен из капрона 100%.
Длина нагрудного ремня фиксатора (min - max): 85-180 см.; Ширина нагрудного ремня фиксатора): 10 см.; Вес: 0,12 кг.

А. Подушка на сиденье (арт. 052)




Подушка на сиденье обеспечивает оптимальное распределение давления по всей площади сиденья. Конструкция подушки включает в себя наполнитель и чехол. Наполнитель подушки изготовлен из качественного вязкоупругого, обладающего высокой экологичностью и гипоаллергенностью поролонового наполнителя (пенополиуретан HR 3535). Такой материал является «дышащим» - содержит мелкие поры - отверстия, которые пропускают воздух (эффект проветривания), не впитывает запахи. В результате этого срок службы подушки существенно увеличивается, поскольку внутри нее не накапливается влага и не заводятся паразиты, которые провоцируют процессы гниения.

Чехол выполнен из высококачественного материала – полиэстер 60%/ полиуретан 40%. Он служит для защиты от загрязнения, а также обеспечивает защиту от бактерий, вирусов и грибков. Он обладает устойчивостью к крови, моче, мази, маслам, жирам и всем дезинфицирующим средствам. Чехол легко подвергается дезинфекции. Молния по периметру надежно фиксирует его.

Размер подушки на сиденье (ШхГхВ): 43х38х5 см.; Вес: 1,8 кг.

В. Насос (арт. 060)

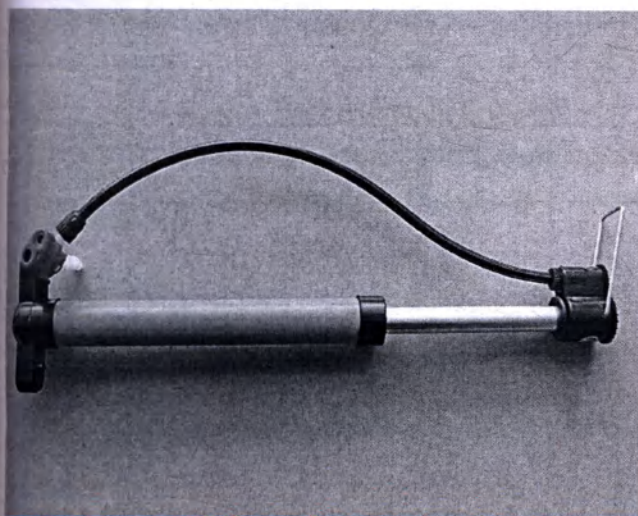

Ручной насос с Т-образной ручкой, длинный резиновый шланг 105см, корпус выполнен из алюминия (6063).

3. Техническое описание

Кресла-коляски механические Barry с принадлежностями производятся и выпускаются в нескольких вариантах, согласно техническим характеристикам, приведенных в таблицах 1-7.

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 1

Характеристики	Barry R1	Barry R2	Barry R3	Barry R4 (арт. 4318A0604S)
Возраст	18	20	18	17
Складной	да	да	да	да
Размеры (ШхДхВ), см	68 x 100 x 90 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 81 x 90 (в сложенном состоянии)	68 x 110 x 87 (в разложенном состоянии с подножками) 30 x 90 x 87 (в сложенном состоянии)	66 x 106 x 87 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 85 x 87 (в сложенном состоянии)	64 x 100 x 85 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 80 x 85 (в сложенном состоянии)
Внутренние размеры сиденья, см	46x40	46x40	46x40	43x40
Наклон сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
Регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
Высота от пола до сиденья, см	50	51	51	48
Складная спинка	Складная 0°-90°	Складная 0°-90°	Складная 0°-90°	Складная 0°-90°
Высота спинки, см	46	46	46	44
Пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упором под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упором для голени	Съемные, регулируемые по высоте с упором под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упором для голени
Подножек, см	34-49	38-48	34-49	33-43
Подлокотники	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные
Высота подлокотников, см	27	20-27	27	24
Тип колес	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором
Радиус заднего колеса, см	60	60	60	60
Радиус диска заднего колеса, см	54	54	54	54
Тип передних колес	Литые	Литые	Литые	Литые
Радиус переднего колеса, см	20	20	20	20
Радиус диска переднего колеса, см	15	15	10	10
Материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Нейлон
Максимальная нагрузка, кг	115	120	115	110
Максимальная ширина сиденья, см	100	100	100	100
Максимальный радиус поворота, см	65	65	65	65
Время складывания (состояние складывания), Н	52	52	52	52
Время закрепления спинки, Н	47	47	47	47
Время складывания подножки, Н	35	35	35	35

расстояние между поверхностью и сиденья, см	0,2	0,2	0,2	0,2
сила на рукоятке тормоза, Н	48	48	48	48
сила на ручках спинки, Н	70	70	70	70
сила на ободу колеса, Н	35	35	35	35
сила перемещения кресла с номинальной силой на сиденье, Н	43	43	43	43
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 2

характеристики	Barry R4 C (арт. 4318A0304SP/SS)	Barry R5	Barry R6
вес, кг	17	18	19
сборка	да	да	да
размеры (ШхДхВ), см	64 x 100 x 85 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 80 x 85 (в сложенном состоянии, без подножек)	68 x 107 x 89 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 87 x 89 (в сложенном состоянии, без подножек)	69 x 109 x 90 (в разложенном состоянии с подножками) 30 x 90 x 90 (в сложенном состоянии без подножек)
внутренние размеры сиденья, см	43x40	46x40	46x40
наклон сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
высота от пола до сиденья, см	48	50	50
состояние сиденья	Складная	Складная	Складная
наклон спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°
высота спинки, см	44	46	46
подножки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени	Съемные, регулируемые по высоте с упором под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени
высота подножек, см	33-43	38-48	34-49
подлокотники	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные
длина подлокотников, см	24	20-27	26
материал колес	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором
радиус заднего колеса, см	60	60	60
радиус диска заднего колеса, см	54	54	54
материал передних колес	Литые	Литые	Литые
радиус переднего колеса, см	20	20	20
радиус диска переднего колеса, см	15	10	10
материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон
максимальная нагрузка, кг	110	115	115
максимальная ширина сиденья, см	100	100	100
максимальный радиус поворота, см	65	65	65
сила складывания (раздвигания), Н	52	52	52

для закрепления спинки, Н	47	47	47
для регулирования длины подножки, Н	35	35	35
максимальный зазор между поверхностью и колесом, см	0,2	0,2	0,2
для на рукоятке ручного тормоза, Н	48	48	48
для к ручкам спинки, Н	70	70	70
для к ободу колеса, Н	35	35	35
для перемещения кресла-коляски с номинальной нагрузкой на сиденье, Н	43	43	43
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 3

Модель/ характеристики	Barry R7	Barry R8	Barry A1	Barry A2
Масса, кг	21	19	18	18
Складная	да	да	да	да
Размеры (ШхДхВ), см	68 x 110 x 89 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 86 x 89 (в сложенном состоянии, без подножек)	66 x 100 x 87 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 80 x 87 (в сложенном состоянии, без подножек)	65 x 104 x 86 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 82 x 86 (в сложенном состоянии, без подножек)	65 x 107 x 89 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 85 x 89 (в сложенном состоянии, без подножек)
Внутренние размеры (ШхГ), см	46x40	46x40	46x40	46x40
Наклон сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
Регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
Высота от пола до сиденья, см	50	50	51	51
Спинка	Складная	Складная	Складная	Складная
Наклон спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°	0°-90°
Ширина спинки, см	46	46	46	46
Подножки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени	Съемные, регулируемые по высоте	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени
Высота подножек, см	43-50	38-48	38-48	38-48
Подлокотники	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные
Высота подлокотников, см	20-27	27	22-28	27
Колеса задних колес	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Пневматические с протектором	Пневматические с протектором	Пневматические с протектором
Диаметр заднего колеса, см	60	60	60	60
Диаметр диска заднего колеса, см	54	54	54	54
Колеса передних колес	Литые	Литые	Литые	Литые
Диаметр переднего колеса, см	20	20	20	20
Диаметр диска переднего колеса, см	10	10	10	15

материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Нейлон
максимальная нагрузка, кг	120	115	115	115
максимальная ширина	100	100	100	100
максимальная высота, см				
максимальный радиус	65	65	65	65
максимальная высота, см				
максимальная сила складывания	52	52	52	52
(складывания), Н				
максимальная сила закрепления	47	47	47	47
(закрепления), Н				
максимальная сила регулирования	35	35	35	35
высоты и угла наклона				
спинки, Н				
максимальный зазор	0,2	0,2	0,2	0,2
между поверхностью и				
телом, см				
максимальная сила на рукоятке	48	48	48	48
ручного тормоза, Н				
максимальная сила к ручкам спинки, Н	70	70	70	70
максимальная сила к ободу колеса, Н	35	35	35	35
максимальная сила перемещения	43	43	43	43
коляски с				
максимальной нагрузкой на				
оси, Н				
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 4

технические характеристики	Barry A3	Barry A4	Barry A5	Barry A6
возраст	19	18	18	17
использование	да	да	да	да
размеры (ШхДхВ), см	68 x 107 x 92 (в разложенном состоянии с подножками) 30 x 86 x 92 (в сложенном состоянии, без подножек)	67 x 107 x 87 (в разложенном состоянии с подножками) 29 x 86 x 87 (в сложенном состоянии, без подножек)	66 x 105 x 88 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 82 x 88 (в сложенном состоянии, без подножек)	65 x 100 x 84 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 82 x 84 (в сложенном состоянии, без подножек)
размеры (ШхГ), см	46x40	46x40	46x40	46x40
наклона сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
высота от пола до сиденья,	51	51	51	49
тип	Складная	Складная	Складная	Складная
наклона спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°	0°-90°
высота спинки, см	46	46	46	46
регулируемые	Съемные, регулируемые по высоте, с упорами для голени	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени	Съемные, регулируемые по высоте с упорами под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами под пятки
регулируемые		43-50	43-50	36-46
регулируемые	Съемные	Съемные	Съемные	Съемные

длина подлокотников, см	27	25	25	23
материал обивки задних колес	Литые	Литые	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором
диаметр задних колес, см	60	60	60	60
диаметр диска задних колес, см	54	54	54	54
материал обивки передних колес	Литые	Литые	Литые	Литые
диаметр передних колес, см	20	20	20	20
диаметр диска переднего колеса, см	10	10	15	10
материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Нейлон
максимальная нагрузка, кг	115	115	115	115
максимальная ширина сиденья, см	100	100	100	100
максимальный радиус поворота, см	65	65	65	65
высота складывания (высота складывания), Н	52	52	52	52
высота закрепления спинки, Н	47	47	47	47
высота регулирования высоты и угла наклона спинки, Н	35	35	35	35
минимальный зазор между сиденьем и колесом, см	0,2	0,2	0,2	0,2
расстояние от сиденья до рукоятки ручного тормоза, Н	48	48	48	48
расстояние от сиденья до ручкам спинки, Н	70	70	70	70
расстояние от сиденья до обода колеса, Н	35	35	35	35
высота перемещения сиденья-коляски с максимальной нагрузкой на сиденье, Н	43	43	43	43
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 5

Характеристики	Barry A7 (арт. 7018A0603SP)	Barry A7 T (арт. 7018A0603SP/T)	Barry A7 U (арт. 7018A0603SU/T)	Barry A7 M (арт. 7018A0603PU/M)
Возраст	15	19	18,7	15
Сиденье складное	да	да	да	да
Размеры (ШхДхВ), см	64 x 110 x 93 (в разложенном состоянии с подножками) 27 x 90 x 93 (в сложенном состоянии, без подножек)	68 x 105 x 88 (в разложенном состоянии с подножками) 33 x 86 x 88 (в сложенном состоянии, без подножек)	68 x 110 x 93 (в разложенном состоянии с подножками) 31 x 91 x 93 (в сложенном состоянии, без подножек)	64 x 101 x 97 (в разложенном состоянии с подножками) 30 x 80 x 97 (в сложенном состоянии, без подножек)
Внутренние размеры (ШхГ), см.	46x40	46x40	43x40	43x40
Наклон сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
Регулировка спинки	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется

от пола до см	50	50	50	49
	Складная	Складная	Складная	Складная
на спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°	0°-90°
спинки, см	46	41	46	43
спинки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами под пятки	Съемные, регулируемые по высоте с упорами под пятки и для голен	Съемные, регулируемые по высоте и с упорами под пятки
подножек, см	33-46	33-39	33-43	38-48
подлокотники	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные	Съемные Откидные
подлокотников,	27	22-32	22-32	23
задних колес	Пневматические с протектором	Пневматические с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором
задних колес,	60	60	60	60
диск задних	54	54	54	54
диск, см				
передних колес	Литые	Литые	Литые	Литые
переднего	20	20	20	20
диск, см				
диск	15	10	15	15
переднего колеса, см				
материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Нейлон
максимальная нагрузка,	110	115	115	110
максимальная ширина	100	100	100	100
руля, см				
максимальный радиус	65	65	65	65
руля, см				
для складывания (складывания), Н	52	52	52	52
для закрепления	47	47	47	47
руля, Н				
для регулирования руля и угла наклона спинки, Н	35	35	35	35
максимальный зазор между поверхностью и рулем, см	0,2	0,2	0,2	0,2
руля на рукоятке ручного тормоза, Н	48	48	48	48
руля к ручкам	70	70	70	70
руля, Н				
руля к ободу колеса,	35	35	35	35
руля перемещения руля-коляски с максимальной нагрузкой руля, Н	43	43	43	43
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица

Характеристики	Barry A7 J (арт. 7018A0603PU/J)	Barry A8 (арт. 8018A0603SP)	Barry A8 T (арт. 8018A0603SP/)
Возраст	19	15	18
Складная	да	да	да
Размеры (ШхДхВ), см	63 x 110 x 93 (в разложенном состоянии с подножками) 35 x 90 x 93 (в сложенном состоянии, без подножек)	65 x 110 x 93 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 90 x 93 (в сложенном состоянии, без подножек)	64 x 104 x 85 (в разложенном состоянии с подножками) 28 x 82 x 85 (в сложенном состоянии, без подножек)
Внутренние размеры сиденья (ШхГ),	43x40	46x40	46x40
Наклон сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
Регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
Высота от пола до сиденья, см	49	50	49
Спинка	Складная	Складная	Складная
Наклон спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°
Высота спинки, см	43	46	43
Пятки	Съемные, регулируемые по высоте, с упорами под пятки	Съемные, регулируемые по высоте	Съемные, регулируемые по высоте с упорами для голени
Высота подножек, см	33-43	34-49	37-47
Подлокотники	Съемные, Откидные	Съемные, Откидные	Съемные, Откидные
Высота подлокотников, см	23-29	25	25
Тип колес	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Пневматические с протектором	Пневматические с протектором
Диаметр задних колес, см	60	60	60
Диаметр диска задних колес, см	54	54	54
Передних колес	Литые	Литые	Литые
Диаметр переднего колеса, см	20	20	20
Диаметр диска переднего колеса, см	15	15	10
Материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон
Максимальная нагрузка, кг	115	110	115
Максимальная ширина разворота, см	100	100	100
Максимальный радиус поворота, см	65	65	65
Вес складывания	52	52	52
Вес складывания), Н	52	52	52
Вес закрепления спинки, Н	47	47	47
Вес регулирования длины и угла наклона подножки, Н	35	35	35
Максимальный зазор между сиденьем и колесом, см	0,2	0,2	0,2
Вес на рукоятке стояночного тормоза, Н	48	48	48
Вес к ручкам спинки, Н	70	70	70
Вес к ободу колеса, Н	35	35	35
Вес перемещения кресла-коляски максимальной нагрузкой на сиденье,	43	43	43

Детская группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых
----------------	--------------	--------------	--------------

Технические характеристики кресла-колясок механических Barry

Таблица 7

Наименование характеристики	Barry A8 M (арт. 8018A0603PU/M)	Barry A8 J (арт. 8018A0603PU/J)	Barry A8 U
Возраст	16	18	20
Складная	да	да	да
Размеры (ШхДхВ), см	65 х 107 х 99 (в разложенном состоянии с подножками) 35 х 88 х 99 (в сложенном состоянии, без подножек)	66 х 108 х 91 (в разложенном состоянии с подножками) 33 х 89 х 91 (в сложенном состоянии, без подножек)	70 х 113 х 92 (в разложенном состоянии с подножками) 34 х 92 х 92 (в сложенном состоянии, без подножек)
Внутренние размеры сиденья (ШхД), см	43х40	46х40	46х40
Регулировка наклона сиденья	Не регулируемый	Не регулируемый	Не регулируемый
Регулировка высоты сиденья	Не регулируется	Не регулируется	Не регулируется
Высота от пола до сиденья, см	49	51	51
Состояние спинки	Складная	Складная	Складная
Регулировка наклона спинки	0°-90°	0°-90°	0°-90°
Высота спинки, см	43	46	46
Подножки	Съемные, регулируемые по высоте, с упорами для пятки	Съемные, регулируемые по высоте, с упорами для пятки	Съемные, регулируемые по высоте, с упорами для пятки
Высота подножек, см	36-46	42-52	44-54
Подлокотники	Съемные, Откидные	Съемные, Откидные	Съемные, Откидные
Высота подлокотников, см	20-26	20-26	20-26
Тип задних колес	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Цельнолитые, полиуретановые с протектором	Пневматические с протектором
Диаметр задних колес, см	60	60	60
Диаметр диска задних колес, см	54	54	54
Тип передних колес	Литые	Литые	Литые
Диаметр переднего колеса, см	20	20	20
Диаметр диска переднего колеса, см	15	10	10
Материал обивки	Нейлон	Нейлон	Нейлон
Максимальная нагрузка, кг	110	115	120
Максимальная ширина талии, см	100	100	100
Максимальный радиус поворота, см	65	65	65
Высота складывания (в сложенном состоянии), Н	52	52	52
Высота крепления спинки, Н	47	47	47
Высота регулировки длины наклона подножки, Н	35	35	35
Максимальный зазор между сиденьем и колесом, см	0,2	0,2	0,2
Высота на рукоятке ручного тормоза, Н	48	48	48
Высота к ручкам спинки, Н	70	70	70

расстояние к ободу колеса, Н	35	35	35
расстояние перемещения кресла-коляски с номинальной нагрузкой на сиденье, Н	43	43	43
целевая группа	Для Взрослых	Для Взрослых	Для Взрослых

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Кресла-коляски механические Barry предназначены для перемещения взрослых людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

3.1. Показания

- Паралич нижних конечностей
- Манингомиелит
- Прогрессирующая мышечная дистрофия
- Детский церебральный паралич
- Множественный склероз
- Гемиплегия центральной части тела
- Посттравматические повреждения мозга
- Деформации конечностей средней тяжести
- Дисмелия
- Фокомелия
- Выраженный остеогенез
- Судороги, незначительные повреждения суставов
- Полиартрозы
- Полиартриты, болезнь Бехтерева

3.2. Противопоказания

- Расстройства психических функций с выраженным снижением критики, интеллекта, частыми эпилептиформными припадками, выраженными нарушениями ориентации; а также выраженные нарушения функций органа зрения.
- Наркологическая зависимость, алкоголизм
- По показанию врача

3.3. Возможные побочные действия

Побочных действий при применении кресла-колясок механических Barry не существует.

3.4. Подготовка изделия к использованию

Кресла-коляски механические Barry с принадлежностями по своей конструкции являются довольно сложными технологическими устройствами, от правильного использования которых зависит не только физическое состояние, но и безопасность больного в целом. Поэтому надо ознакомиться с руководством по эксплуатации и тщательно соблюдать даже самые элементарные правила техники безопасности.

3.5. Использование изделия

- Аккуратно распакуйте и извлеките кресла-коляску механическую Barry из упаковки. При необходимости упаковка может быть повторно использована для последующего хранения и транспортировки.
- После распаковки внимательно проверьте целостность кресла-коляски механической Barry.

3.1. Раскладывание коляски

Возьмитесь одной рукой за подлокотник и элемент сиденья на одной стороне коляски и слегка наклоните коляску к себе (так чтобы колеса на противоположной стороне оторвались от пола).



Нажмите на обивку сиденья, пока элемент, поддерживающий сидение, не разложится на всю длину. Сиденье должно быть полностью расправлено.

Поставьте коляску на оба стояночных тормоза

3.2. Приведение коляски в движение

Передвижение кресла-колясок механических Barry осуществляется самостоятельно за счет движения обручами, установленными на колесах или с помощью сопровождающего лица.

Стояночный тормоз используется для фиксации стоящей коляски. Стояночный тормоз располагается с двух сторон. Применяются при длительных остановках коляски.

3.4. Складывание коляски

Возьмитесь за два края сиденья (передний и задний) и потяните их вверх.

Во избежание повреждения обивки складным механизмом складывайте коляску, потягивая сидение вверх.



3.7. Условия применения

Кресла-коляски механические Barry пригодны только для использования на твердых и ровных поверхностях.

Кресла-коляски механические Barry пригодны для многократного применения. При использовании другим пациентом кресла-коляску механическую Barry необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

В процессе эксплуатации должны выдерживаться следующие параметры:

Температура: от + 10°C до + 35°C

Относительная влажность: 60 - 85 %

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа

3.8 Меры безопасности

- Не пытайтесь дотянуться до какого-либо предмета, если Вам для этого необходимо передвинуться на сидении вперед.
- Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями.
- Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади Вас: это может привести к опрокидыванию коляски.
- Всегда устанавливайте одновременно оба стояночных тормоза.
- Стояночные тормоза используются только после остановки коляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски или в качестве опоры при пересадке.
- Не рекомендуется преодолевать лестничные пролеты и высокие препятствия без посторонней помощи.
- При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению движения.
- Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, держась за съемные части.
- При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать коляску за ручки.
- Не оставлять коляску на наклонных поверхностях.
- При посадке или высадке в/из кресла-коляски механические Barry следует поставить задние (приводные) колеса на стояночные тормоза.
- При начале движения избегайте резких движений и толчков. Это может привести к опрокидыванию.
- Не используйте коляску, не накачав шины до давления 304кПа-405кПа
- Не накачивайте шины слишком сильно. Она может лопнуть и нанести травмы.
- Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Чтобы максимально продлить срок службы кресла-колясок механических Barry, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Очистите сидение, спинку и металлические элементы влажной мягкой салфеткой. При этом может использоваться мягкое чистящее средство. При необходимости сидение и спинку можно стирать при 40⁰С с обычным или жидким чистящим средством.
- Тщательно вытирайте досуха коляску после каждой поездки в дождь.
- При загрязнении коляски, по возможности, немедленно сотрите влажную грязь и тщательно досуха вытрите коляску.
- При уходе за кресла-колясками механическими Barry не рекомендуется использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток.
- Нагрудный ремень фиксатор можно мыть средствами, не содержащими щелочей и др. сильных растворителей.
- Оси колес необходимо вытирать чистой салфеткой и смазывать небольшим количеством масла.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кресла-коляски механические Barry с принадлежностями спроектированы и сконструированы для применения в течение длительного времени. Срок их службы при соблюдении правил эксплуатации 5 лет в зависимости от условий и частоты применения.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кресла-коляски механической Barry для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кресла-коляски механической Barry через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением.

Регулярные проверки:

- 1) Убедитесь, что коляска легко складывается и раскладывается. Удостоверьтесь в том, что коляска движется по прямой линии (без сопротивления или отклонения в сторону).
- 2) Убедитесь, что снятые стояночные тормоза не касаются шин. Удостоверьтесь в надлежащей работе стояночных тормозов. Убедитесь, что соединения не изношены и что зазор между тормозом и шиной правильно отрегулирован.
- 3) Проверьте систему складывания на наличие изношенных или деформированных деталей.
- 4) Убедитесь, что все винты надежно затянуты.
- 5) Убедитесь, что обивка сидения и спинки находятся в хорошем состоянии.
- 6) Убедитесь в том, что колеса стоят параллельно раме.
- 7) Убедитесь, что обручи не имеют неровностей.
- 8) Убедитесь, что спицы не деформированы, не ослаблены и не сломаны.
- 9) Убедитесь, что все винтовые соединения затянуты
- 10) Проверьте износ шины

Рекомендуется не реже одного раза в год проводить полную проверку кресла-коляски в центр техобслуживания.

6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Техническое обслуживание и ремонт кресла-колясок механических Barry, включая плановый ремонт, производится на территории РФ уполномоченным дистрибьютором производителя - ООО «СИМС-2» по адресу: 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, тел: (495) 792-31-90 (многоканальный), e-mail: info@sims2.ru.

7. ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

Упакованные кресла-коляски механические Barry должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях:

Температура: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность: 60-80%

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа

Срок хранения кресла-колясок механических Barry: 5 лет

Кресла-коляски механические рассчитаны на 5 лет безотказной службы при условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому изделию.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресла-коляски механические Barry можно транспортировать любыми видами транспорта, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Температура: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность: 60-80%

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа

9. УПАКОВКА

Кресла-коляски механические Barry поставляются в коробке из картона размеры, которой зависят от размера кресла-коляски.

10. МАРКИРОВКА

Пример маркировки

Кресло – коляска механическая Barry A7 T
арт. 7018A0603SP/T
Производитель: Valentine International Ltd
Адрес производства: 8th Floor, No 149,
Sec. 2, Ta Tung Road, 221 Hsichih District,
New Taipei City,
Тайвань (Китайская Республика)
Серийный номер: 15030810005
Дата производства: 03/15



Power Wheelchair Barry A7 T (art. 7018A0603SP/T)
Valentine International Ltd
8th Floor, №149, Sec. 2, Ta Tung Road,
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan, R.O.C. (Republic of China)
SPN: 15030810005
Date: 03/15



Информация на индивидуальной упаковке:

Название изделия
Артикул
Наименование производителя
Адрес предприятия изготовителя
Страна производитель
Серийный номер
Дата производства
Маркировка CE

Маркировка на других вариантах исполнения аналогична.

11. ПОРЯДОК И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

По истечении срока службы или порче кресла-колясок механических Barry, исключающей возможность ремонта, пользователь должен утилизировать, после проведения дезинфекции, выведенное из эксплуатации оборудование, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 и ст. 23 Федерального закона "Об обращении медицинских изделий".

В случае утилизации кресла-колясок механических Barry, тканые, пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 12 месяцев со дня продажи кресла-колясок механических Barry и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования

В период гарантийного срока при обнаружении заводских дефектов пользователь может обратиться к уполномоченному дистрибьютору производителя в РФ - ООО «СИМС-2» по адресу: 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, тел: (495) 792-31-90 (многоканальный), e-mail: info@sims2.ru.

14. РЕКЛАМАЦИЯ

При обнаружении брака или несоответствия изделия претензии принимаются уполномоченным дистрибьютором производителя в РФ - ООО «СИМС-2» по адресу: 125363,

ьный директор
айн Интернейшнл Лтд.»

Подпись / Джонни Циу /



еводчик Галионцев Дмитрий Владимирович

род Москва

дьмого декабря две тысячи пятнадцатого года.


Чайлин Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы
кого Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной
дчиком Галионцевым Дмитрием Владимировичем в моем присутствии. Личность его
влена.

Зарегистрировано в реестре за № 12-16. 23.504.

Взыскано по тарифу - 100 рублей 00 копеек.



Врио нотариуса

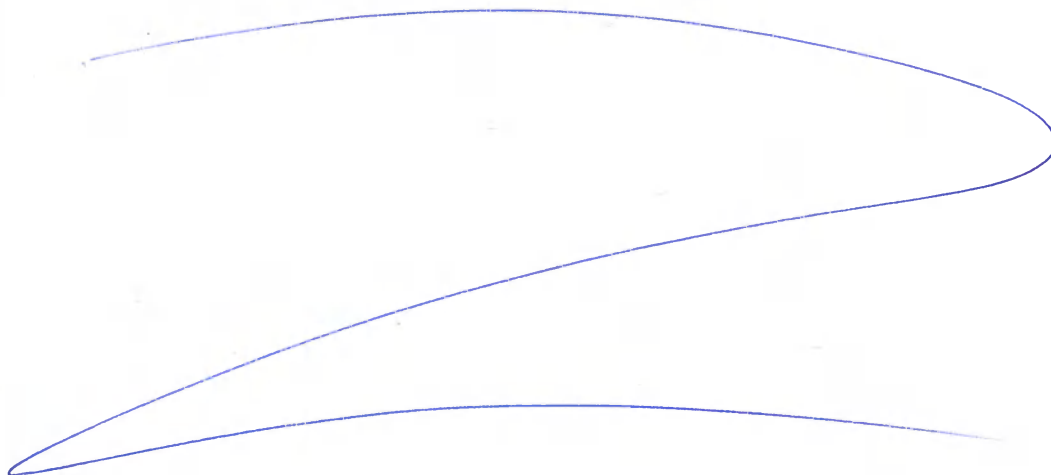

Город Москва.

Десятого декабря две тысячи пятнадцатого года

Я, Чернова Екатерина Ивановна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 2-4754

Взыскано по тарифу: 3900 рублей

Нотариус:

Печать

Подпись



Всего прошито и пронумеровано

63 листов

Нотариус