

Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Повязка раневая гидроколлоидная стерильная
производства компании «Хельм Медикал ГмбХ» (Helm Medical GmbH), Германия.

[Область применения]:

Повязка раневая гидроколлоидная стерильная, производства компании «Хельм Медикал ГмбХ» (Helm Medical GmbH), Германия, предназначена для фиксации, герметизации, изоляции поверхностных ран от внешних возбудителей болезни и загрязнения.

Гидроколлоидный абсорбент впитывает экссудаты из раны и превращает их в гель. Это препятствует скоплению жидкости в ране, но способствует образованию влажной среды, благоприятной для заживления ран, а также безболезненному удалению пластыря при необходимости.

[Показания к применению]:

Влажные раны с низкой или средней степенью экссудации, например, неглубокие ожоговые раны и пролежни I и II степени.

[Инструкция по применению]:

- Промыть рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором. Рана и прилегающий участок кожи должны быть сухими.
- Приготовить повязку – удалить защитное покрытие с повязки. В загнутом состоянии это покрытие помогает наложить повязку на рану таким образом, чтобы не касаться при этом поверхности повязки, предназначенной для контакта с раной.
- Наложить повязку непосредственно на поверхность раны, при необходимости использовать стерильные инструменты (щипчики).
- Чтобы адаптировать размеры повязки к размерам раны, её можно предварительно обрезать с помощью стерильных ножниц.
- Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки.
- Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и от того, как развивается процесс заживления.

[Противопоказания]:

Не используйте для сильно кровоточащих ран.

[Меры предосторожности и хранения]:

- При наличии клинических признаков, указывающих на наличие местной инфекции, настоятельно рекомендуется предварительно провести курс лечения.
- Повязка предназначена для однократного применения.
- Не использовать при наличии чувствительности к любому компоненту/материалу повязки.
- Не использовать при повреждении упаковки.
- Повязки стерилизованы гамма-излучением. Не подлежат повторной стерилизации.

- Повязки следует хранить в горизонтальном положении в сухом прохладном темном месте при температуре от -10°C до +40 °C.
- Срок хранения: 3 года.

[Производитель]:

«Хельм Медикал ГмбХ», Германия,

Helm Medical GmbH, Nordkanalstrasse, 28, D-20097, Hamburg, Germany

Телефон: (+49) 040-2375-0, факс (+49) 040-2375-1845, e-mail: info@helmag.com

Генеральный директор

ООО «МЕДЭКС – Консалт»



«27» декабря 2012 г.
Нам Т.В.

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью 2 листов
Ген. директор ООО «МЕДЭКС-Консалт»
Нам Т.В.

