

**Инструкция по применению
изделия медицинского назначения:**

Пластырь гидроколлоидный мозольный стерильный
производства компании «Хельм Медикал ГмбХ» (Helm Medical GmbH), Германия.

[Область применения]:

Пластырь гидроколлоидный мозольный стерильный, производства компании «Хельм Медикал ГмбХ» (Helm Medical GmbH), Германия, предназначен для фиксации, герметизации, изоляции волдырей и мозолей от внешних возбудителей болезни и загрязнения. Показания к применению: влажные раны с низкой или средней степенью экссудации, например волдыри и мозоли.

[Особенности]:

- дышащий
- водонепроницаемый
- гелеобразующий
- гибкий и эластичный
- уменьшает боль и помогает восстановлению
- гидроколлоидный абсорбент эффективно защищает небольшие повреждения и ускоряет процесс их заживления
- обладает амортизирующим эффектом


[Инструкция по применению]:

Способ применения 1:



- Перед нанесением пластыря, кожа должна быть чистая и сухая.
- Выньте пластырь из упаковки.
- Аккуратно снимите белую защитную бумагу на обратной стороне пластыря.
- Положите клейкой стороной пластыря без морщин на пораженный участок.
- Снимите прозрачную пленку в указанном стрелкой направлении и приклейте пластырь до конца.
- Чтобы удалить пластырь, поднимите один угол и осторожно снимите пластырь.

Способ применения 2:

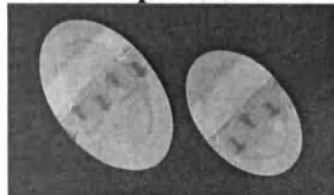

- Перед нанесением пластыря, кожа должна быть чистая и сухая.
- Выньте пластырь из упаковки.
- Аккуратно снимите белую защитную бумагу на обратной стороне пластыря.
- Положите клейкой стороной пластыря без морщин на пораженный участок.
- Снимите прозрачную пленку в указанном стрелкой направлении и приклейте пластырь до конца.
- Чтобы удалить пластырь, поднимите один угол и осторожно снимите пластырь.

[Противопоказания]:

Не используйте для сильно кровоточащих ран.

[Предупреждения]:

1. Пластырь необходимо заменить, если он поменял цвет, или если пластырь изношен, или в если рана сильно кровоточит.
2. Пластырь не должен находиться в контакте с любым из агрессивных газов.
3. Не использовать повторно.
4. Не стерилизовать повторно.

[Производитель]:

«Хельм Медикал ГмбХ», Германия,

Helm Medical GmbH, Nordkanalstrasse, 28, D-20097, Hamburg, Germany

Телефон: (+49) 040-2375-0, факс (+49) 040-2375-1845, e-mail: info@helmag.com

[Условия хранения]:



Генеральный директор
ООО «МЕДЭКС – Консалт»



«27» декабря 2012 г.
Нам Т.В.