

Инструкция по применению «Презервативов латексных» фирмы «Хельм Фармасьютикалз ГмбХ»

Презервативы латексные предназначены для предохранения от беременности, СПИДа и венерических заболеваний, передающихся половым путем.

Правила использования :

1. Не надевайте презерватив до наступления эрекции. Всегда надевайте презерватив до начала полового акта.
2. Перед надеванием сожмите пальцами сосок презерватива и выпустите из него воздух. Избегайте повреждения презерватива.
3. Надетый презерватив расправьте по всей длине, оставляя сосок свободным.
4. После полового акта следите за тем, чтобы сперма не вытекла из презерватива. Для этого придерживайте презерватив пальцами.
5. Заверните презерватив в салфетку или бумагу и поместите в емкость для отходов. Не бросайте презерватив в унитаз !

Лицам, имеющим аллергию на латекс, следует проконсультироваться с врачом.

Презервативы являются единственным эффективным средством защиты против заражения СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем.



Helm Pharmaceuticals GmbH
Nordkanalstr. 28, 2000 Hamburg 1
Telefon: Sammel-Nr. 23 75-0