

- Если потребуются подобные материалы, их нужно смочить водой или соляным раствором, чтобы придать им огнестойкость. Одежду в процедурном кабинете хранить не разрешается.

- Необходимо знать ближайшее местонахождение средств пожаротушения и принципы их работы.

- Если это возможно, всегда следует отключать лазерную систему после проведения процедуры и убирать ключ. Это позволит предотвратить случайное срабатывание светового излучателя.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ PALOMAR

Система Palomar располагает защитными устройствами, помогающими предупреждать ее несанкционированное или непреднамеренное включение. Весь персонал, который проводит процедуры или ассистирует при эксплуатации данного прибора, должен быть хорошо ознакомлен с этими устройствами.

ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Экстренное отключение аппарата осуществляется нажатием большой красной кнопкой на левой панели базового блока, которая немедленно блокирует систему. Персоналу следует четко знать ее местоположение.

- После экстренного отключения работу системы можно восстановить, повернув кнопку по часовой стрелке.

