

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОК РЕКТАЛЬНЫХ

1. ОПИСАНИЕ

Ректальные трубки предназначены для облегчения отхождения газов у больных с нарушением перистальтики кишечника, для введения в прямую кишку лекарственных веществ и проведения лечебных процедур.

Трубки газоотводные, для глубоких клизм и для новорожденных имеют центральное отверстие №21-39 и для новорожденных имеют еще и боковое отверстие.

2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Ректальные трубки должны изготавливаться следующих типов и номеров по шкале Шарьера:

- газоотводные №№ 15, 18, 21, 27, 30, 33, 36 и 39.
- для глубоких клизм №№ 14, 17, 20, 23, 26.
- для новорожденных №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трубки ректальные одного типоразмера упаковывают в картонные коробки по:

- 50 штук газоотводных
- по 100 штук для глубоких клизм
- по 50 штук для новорожденных
- руководство по эксплуатации - 1 экз. на трубку.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Трубки дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде ГОСТ 6709 в течение 30 мин., затем проводят предстерилизационную очистку в моющем растворе содержащем: 0,5% раствор перекиси водорода и 0,5% раствор моющего средства (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Ай на, Маричка, Прогресс) при температуре 50°C в течение 15 мин. После проведения предстерилиза

ТУ 9398-006-05769082-2007

Лист 16

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ционной очистки трубки стерилизуют в 6% растворе перекиси водорода при полном погружении изделия в раствор и выдержке в нем в течение (360±5) мин при температуре не менее 18°C.

5. ХРАНЕНИЕ

Трубки должны храниться по группе 1Л ГОСТ 15150, но при температуре не выше 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Трубки в процессе хранения и эксплуатации не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, бактерицидных ламп, смазочных масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Соответствуют ТУ 9398-006-05769082-2007

Дата изготовления

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изготовитель гарантирует качество трубок при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок годности трубок - 3 года с момента изготовления, эксплуатации - 6 месяцев.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением инструкции по подготовке к эксплуатации и по хранению зондов по адресу:

302011 г. Орел Новосильское шоссе, 14 ОАО «О Альфапластик» Орловский завод
резиновых изделий

ТУ 9398-006-05769082-2007

Лист 17

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible][illegible]

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОК РЕКТАЛЬНЫХ

1. ОПИСАНИЕ

Ректальные трубки предназначены для облегчения отхождения газов у больных с нарушением перистальтики кишечника, для введения в прямую кишку лекарственных веществ и проведения лечебных процедур.

Трубки газоотводные, для глубоких клизм и для новорожденных имеют центральное отверстие №21-39 и для новорожденных имеют еще и боковое отверстие.

2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Ректальные трубки должны изготавливаться следующих типов и номеров


по шкале Шарьера:

- газоотводные №№ 15, 18, 21, 27, 30, 33, 36 и 39.
- для глубоких клизм №№ 14, 17, 20, 23, 26.
- для новорожденных №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трубки ректальные одного типоразмера упаковывают в картонные коробки по:

- 50 штук газоотводных
- по 100 штук для глубоких клизм
- по 50 штук для новорожденных
- руководство по эксплуатации - 1 экз. на трубку.

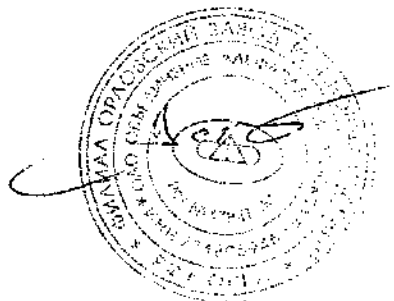

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Трубки дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде ГОСТ 6709 в течение 30 мин., затем проводят предстерилизационную очистку в моющем растворе содержащем: 0,5% раствор перекиси водорода и 0,5% раствор моющего средства (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маргика, Прогресс) при температуре 50°C в течение 15 мин. После проведения предстерилизационной очистки трубки стерилизуют в 6% растворе перекиси водорода при полном погружении изделия в раствор и выдержке в нем в течение (360 ± 5) мин при температуре не менее 18°C.

5. ХРАНЕНИЕ

Трубки должны храниться по группе 1Л ГОСТ 15150, но при температуре не выше 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Трубки в процессе хранения и эксплуатации не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, бактерицидных ламп, смазочных масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Соответствуют ТУ 9398-006-05769082-2007

Дата изготовления

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изготовитель гарантирует качество трубок при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок годности трубок - 3 года с момента изготовления,

эксплуатации - 6 месяцев.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением инструкции по подготовке к эксплуатации и по хранению зондов по адресу:

302011 г. Орел Новосильское шоссе, 14 ООО «О Альфапластик»

Орловский завод резиновых изделий