

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»

О.И. Шабров

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Пластырь-спрей LUXPLAST
производства FARMAC-ZABBAN S.p.A., Италия»
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Назначение

Пластырь-спрей LUXPLAST – защитное средство при неглубоких ранах, порезах, царапинах, ссадинах, трещинах и потертостях, которое оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, является воздухопроницаемым, гипоаллергенным и водонепроницаемым (не пропускает воду, грязь и бактерии) и тем самым, способствует быстрому заживлению.

Применение пластырь-спрея LUXPLAST:

- помощь при неглубоких ранах, порезах, ссадинах, царапинах, трещинах и потертостях;
- применим для наиболее подвижных и труднодоступных мест (между пальцами), где обычный пластырь невозможно применить (трудно зафиксировать);
- применим как в домашних условиях, так и в лечебных учреждениях;
- может применяться боулерами, для защиты подушечек пальцев рук от потертостей.

2. Основные технические характеристики

Пластырь-спрей LUXPLAST представляет собой легколетучую жидкость в аэрозольном металлическом баллончике, которая после распыления и испарения растворителя образует прозрачную эластичную пленку, способную защитить неглубокие раны, порезы, царапины, ссадины, трещины и потертости от внешних воздействий. Только для наружного применения.

Основные характеристики пластыря-спрея LUXPLAST:

- объем – 40 мл;
- цвет – бесцветный (образуется прозрачная незаметная пленка);
- запах – характерный;
- время образование пленки – не более 30 сек.;
- время действия – 24 часа;
- баллончик находится под давлением;
- точка горения (закрытый баллончик) – 104°C (пропан);
- давление при +20°C – 3,5±0,5 бар;
- давление при +50°C – 6,5±0,5 бар;
- растворимость в воде – нерастворим;
- растворимость в органических растворителях – дисперсия;
- воздухопроницаемый – позволяет коже дышать;
- водонепроницаемый – не пропускает воду, грязь и бактерии;
- только для наружного применения.

Основные характеристики пластыря-спрея LUXPLAST не меняются в течение всего срока годности.

Пластырь-спрей LUXPLAST производится при соблюдении всех норм безопасности с использованием прогрессивных технологий.

3. Противопоказания к применению

Противопоказания: не использовать пластырь-спрей LUXPLAST на инфицированных, кровоточащих или гноящихся ранах, а также ожогах. Не рекомендуется использовать детям младше 18 месяцев.

Применение детьми старше 5 лет и людьми с ограниченными возможностями только под контролем взрослых.

При использовании пластыря-спрея LUXPLAST необходимо помнить следующее: избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу; избегать вдыхания; при попадании внутрь, срочно обратиться к врачу; не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов (легко воспламеняется); не протыкать и не сжигать баллон даже после использования; не разбирать и не давать детям.

4. Подготовка к работе

Перед применением пластыря-спрея LUXPLAST необходимо промыть, продезинфицировать и высушить рану.

5. Порядок работы изделия

Для того чтобы пластырь-спрей LUXPLAST принял форму эластичной пленки, необходимо встряхнуть баллончик, нажать на клапан и распылить по всей области повреждения с расстояния 5 см, чтобы образовалось равномерное глянцевое покрытие. Для более надежной защиты можно нанести пластырь-спрей LUXPLAST повторно. Через 30 секунд он превратится в тонкую прозрачную пленку. Сразу после применения, пластырь-спрей LUXPLAST может вызвать небольшое жжение. Рекомендуется наносить пластырь-спрей LUXPLAST ежедневно (1 раз в сутки) до полного заживления ранки. Перед снятием защитной эластичной пленки необходимо вымыть руки с мылом, аккуратно снять ее и выбросить в емкость для отходов.

6. Правила хранения и использования

Пластырь-спрей LUXPLAST очень простое и удобное в использовании изделие медицинского назначения.

Пластырь-спрей LUXPLAST следует хранить хорошо проветриваемом помещении, в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников высокой температуры, пламени и источников возгорания. Избегать скопления электростатических зарядов. Хранить при температуре не выше 50°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности пластыря-спрея LUXPLAST - 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

31.03.2010

Поступ. в банк плат.

31.03.2010

Списано со сч. плат.

0401080

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1598

31.03.2010

Дата

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Три тысячи рублей

ИНН 7724204210

КПП 772401001

ООО "БОЛЕАР МЕДИКА"

Сумма

3000=

Сч. N

40702810738270103585

Платательщик

Сбербанк России ОАО, г. Москва

БИК

044525225

Сч. N

30101810400000000225

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ Г.МОСКВА 705

БИК

044583001

Сч. N

Банк получателя

ИНН 7710537160

КПП 0

УФК по г.Москве (Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития)

Сч. N

40101810800000010041

Вид. оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

6

Код

Рез. поле

Получатель

06010807200011000110

45286585000

0

МС.03.2010

0

31.03.2010

ГП

Госпошлина за регистрацию изделия медицинского назначения: пластырь-спрей LUXPLAST

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

МП

Сбербанк России ОАО
Центральный офис отделение № 7976/0804
БИК 044525225
Афонина С.В.