

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»
И. Шабров
2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Пластырь медицинский PROTAV производства
Foshan Aqua Gel Biotech Co., Ltd., Китай»
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Назначение

Пластырь медицинский PROTAB представляет собой наружное средство, предназначенное для уменьшения тяги к никотину у курильщиков.

Пластырь выполнен из нетканого материала, на одну сторону которого нанесен специальный гидрогель с активными компонентами. Пластырь абсолютно незаметен под одеждой, не мешает в ритме повседневной жизни.

Пластырь медицинский PROTAB применяют при легких формах никотиновой зависимости.

2. Основные технические характеристики

Пластырь медицинский PROTAB выполнен из нетканого материала, на одну сторону которого, нанесен специальный гидрогель, содержащий активные компоненты, которые проникают через кожу и оказывают мягкий эффект замещения никотина растительным экстрактом.

В состав гидрогеля входят следующие компоненты:

- вода – 61,85%
- глицерин – 23%
- соникотинель – 10%
- полиакриловая кислота – 5%
- экстракт Melissa лекарственной -- 0,05%
- коричное масло -- 0,05%
- тангеритин -- 0,05%

Только для наружного применения.

Основные характеристики пластыря медицинского PROTAB:

- размер 5х7,5 см;
- цвет – белый;
- запах – характерный;
- время действия – 12-16 часов;
- воздухопроницаемый – позволяет коже дышать;

Основные характеристики пластыря медицинского PROTAB не меняются в течение всего срока годности.

Пластырь медицинский PROTAB производится при соблюдении всех норм безопасности с использованием прогрессивных технологий. Пластырь нельзя применять на слизистых оболочках и вблизи глаз, а также на очень чувствительной коже.

Пластырь медицинский PROTAB очень простое и удобное в использовании изделие медицинского назначения.

3. Противопоказания к применению

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав пластыря, не рекомендуется к применению беременным женщинам и детям младше 15 лет.

Внимание! Не использовать на открытых ранах и слизистых оболочках, а также на очень чувствительной коже, при попадании в глаза - промыть водой, при попадании внутрь - обратиться к врачу. Пластырь предназначен только для наружного применения. Беречь от детей.

4. Подготовка к работе

Перед применением пластыря медицинского PROTAV, его необходимо достать из индивидуального герметичного пакетика и наклеить на чистую кожу в области груди утром. Снимают пластырь вечером, перед сном. Длительность курса зависит от индивидуальных особенностей организма и может составлять от трех до десяти недель.

5. Порядок работы изделия

Принцип действия пластыря медицинского PROTAV основан на том, что входящий в его состав экстракт Хауттуйния Херба (соникотинель), всасывается через кожу и оказывает действие на те же рецепторы и биологические субстраты, что и никотин, тем самым, отвлекая от никотиновой зависимости. Замена никотина растительным экстрактом – безопасный способ снижения никотиновой зависимости.

Входящие в состав пластыря компоненты улучшают работу дыхательных путей, делают вкус табака неприятным (вызывают изменение «вкуса» табака), очищают организм от токсинов, способствуя более легкому отказу от курения.

Пластырь медицинский PROTAV в отличие от своих аналогов не содержит в своем составе никотин и является безопасным средством для снижения никотиновой зависимости. К преимуществам данного пластыря так же можно отнести и способ его применения: в отличие от никотиновых аналогов он крепится в области груди, а не на руках, что позволяет носить его даже с открытой одеждой и не мешает в условиях повседневной жизни. Важным аспектом является тот факт, что данный пластырь не имеет побочных эффектов, поскольку не содержит никотин и его производные.

Пластырь медицинский PROTAV оказывает мягкое воздействие и разрешен к применению за рулем из-за отсутствия воздействия на сознание человека. Не вызывает сонливости, способствует постепенному уменьшению тяги к никотину.

Благодаря нетканой основе пластырь медицинский PROTAV позволяет коже дышать и не вызывает дискомфорта (раздражения).

Таким образом, пластырь медицинский PROTAV уменьшает стремление к курению и облегчает проявления абстинентного синдрома, связанного с прекращением курения. Однако, как и любое средство от курения, для достижения положительного результата его необходимо использовать при сформированной личной мотивации курящего человека.

6. Правила хранения и использования

Пластырь медицинский PROTAB очень простое и удобное в использовании изделие медицинского назначения.

Пластырь медицинский PROTAB следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре не выше 35°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности пластыря медицинского PROTAB - 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.