




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»

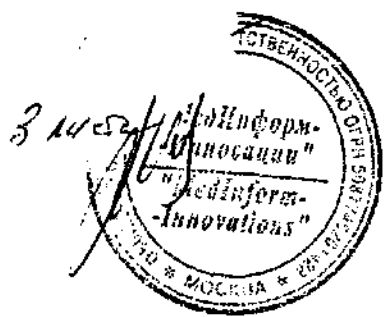

О. Е. Макарова

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Спрей назальный Африн Чистое Море (Afrin PureSea)
производства LABORATOIRE DE LA MER, Франция.

Назначение

Спрей назальный Африн Чистое Море (Afrin PureSea) предназначен для орошения, промывания и очищения полостей носа, восстановления свободного носового дыхания, профилактики инфекций верхних дыхательных путей. Изделие способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, разжижению слизи.

- удаляет аллергены и болезнетворные микробы; избыточную слизь, корочки, пыль и мельчайшие частицы, засоряющие носовые ходы и затрудняющие дыхание;
- способствует удалению чешуек и корок после операций без риска кровотечения;
- уменьшает выделения, снимает отечность слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание;
- снижает риск возникновения отита;
- сокращает период течения респираторных заболеваний;
- не содержит консервантов.

При аллергических и вазомоторных ринитах спрей способствует смыванию и удалению аллергенов и гапленов со слизистой оболочки носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

Afrin PureSea, применяемый с гигиеническими целями, способствует очищению слизистой от осевшей на ней уличной и комнатной пыли.

Показания к применению

Туалет носа и улучшение носового дыхания:

- в качестве гигиенического средства для промывания носовой полости;
- профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период;
- пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением (с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях);
- людям, постоянно подвергающим воздействиям слизистую оболочку верхних дыхательных путей (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся с суровыми климатическими условиями).

Описание: Бесцветный раствор.

Концентрация и состав:

Afrin PureSea Nasal Hygiene, Afrin PureSea Baby - 9% солевой раствор

Afrin PureSea Nasal Decongestant – 10% солевой раствор

Раствор содержит (мг/л)

Натрий 10000-11500

Магний 1100-1500

Кальций 330-460

Калий 360-460

Хлориды 18100-21100

Способ применения и дозы

Интраназально (в носовые ходы).

Рекомендован для использования детей с 6 месяцев и взрослых.

Обычно назначают по одному впрыскиванию в каждую ноздрю до 4 раз в сутки.

Снимите защитную крышку.

Оденьте наконечник (аппликатор) на флакон.

Наклоните голову в бок. Вставьте наконечник вертикально в каждое носовое отверстие и впрыскивайте раствор морской соли в каждую ноздрю в соответствии с рекомендуемой дозировкой и способом применения.

Ути месячного возраста и далее

Использование спрея у взрослых



Использование у детей



Снимите аппликатор, после процедуры следует очистить и высушить насадку и закрыть флакон защитной крышкой.

Для соблюдения правил гигиены каждый флакон следует использовать только для одного пациента.

Побочное действие

Не выявлены.

Упаковка

По 25, 75мл во флаконы, с насадкой-распылителем. Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

О любом нежелательном явлении, связанном с изделием, следует немедленно оповещать компанию

 Шеринг-Плау

Представительство в России
ООО "МСД Фармасьютикалс"

119049 Москва
Шаболовка ул. 10, стр.2
Тел.: (495) 916-71-00, 916-71-01
Факс: (495) 916-70-94, 916-71-08