


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Крафтвэй Медикал»

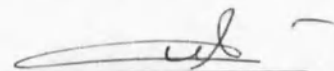

Комолова Е.В.

«20» декабря 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стержни Gutta Percha Obturator и Temporary Stopping.

Штифты стоматологические гуттаперчевые Gutta Percha Points ML.029, Gutta Percha Points, Dia-ProISO.04 Plus Gutta Percha Points ML.029 .04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Gutta Percha Points ML.029 .06 Taper, Gutta Percha Points Dia-ProT Plus, 100 DIADENT PINK, Gutta Percha Points Dia-Gtp.

Штифты стоматологические бумажные_Paper Points MMPP, Absorbent Paper Points Feathered Tip, Dia-ProISO.04 Plus Paper Points MMPP.04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Paper Points MMPP.06 Taper, Paper Points MMPP Dia-ProT, Absorbent Paper Points Dia-Gtp.

Линейка для гуттаперчи Dia-GP Gauge.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Изделия Gutta Percha Obturator, Temporary Stopping, Gutta Percha Points ML.029, Gutta Percha Points, Dia-ProISO.04 Plus Gutta Percha Points ML.029 .04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Gutta Percha Points ML.029 .06 Taper, Gutta Percha Points Dia-ProT Plus, 100 DIADENT PINK и Gutta Percha Points Dia-Gtp предназначены для пломбирования корневых каналов.

Изделия Paper Points MMPP, Absorbent Paper Points Feathered Tip, Dia-ProISO.04 Plus Paper Points MMPP.04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Paper Points MMPP.06 Taper, Paper Points MMPP Dia-ProT и Absorbent Paper Points Dia-Gtp предназначены для высушивания корневых каналов.

Линейка для гуттаперчи Dia-GP Gauge предназначена для измерения гуттаперчевых и бумажных штифтов.

АССОРТИМЕНТ:

Ассортимент стержней Gutta Percha Obturator:

	<u>Наименование изделия</u>	<u>Количество в упаковке</u>	<u>Разновидность изделия</u>
▪	Gutta Percha Obturator	100 шт.	Soft type
▪	Gutta Percha Obturator	100 шт.	Medium type
▪	Gutta Percha Obturator	100 шт.	Hard type

Ассортимент стержней Temporary Stopping:

	<u>Наименование изделия</u>	<u>Цвет изделия</u>	<u>Вес изделия</u>
▪	Temporary Stopping	white	30 г, 120 г, 250 г, 500 г
▪	Temporary Stopping	yellow	30 г, 120 г, 250 г, 500 г
▪	Temporary Stopping	pink	30 г, 120 г, 250 г, 500 г
▪	Temporary Stopping	assorted	30 г, 120 г, 250 г, 500 г

Ассортимент гуттаперчевых штифтов

	<u>Наименование изделия</u>	<u>Размер</u>	<u>Количество в упаковке</u>
▪	Gutta Percha Points ML.029	8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140	120 шт
▪	Gutta Percha Points ML.029	XF, FF, MF, F, FM, M, ML, L, XL, XF/M	100 шт
▪	Gutta Percha Points	8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140	120 шт
▪	Gutta Percha Points	XF, FF, MF, F, FM, M, ML, L, XL, XF/M	100 шт
▪	Dia-ProISO.04 Plus Gutta Percha Points ML.029 .04 Taper	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80	60 шт
▪	Dia-ProISO.06 Plus Gutta Percha Points ML.029 .06 Taper	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80	60 шт
▪	Gutta Percha Points Dia-ProT Plus	F1, F2, F3, F4, F5, F1/F3, F4/F5, F1/F5	60 шт
▪	100 DIADENT PINK	XXF, XF, F, M, L, XXF/M	100 шт
▪	Gutta Percha Points Dia-Gtp	.06#20, .08#20, .10#20, .12#20, .06/.12#20	60 шт

Ассортимент бумажных штифтов

	<u>Наименование изделия</u>	<u>Размер</u>	<u>Количество в упаковке</u>
▪	Paper Points MMPP	8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140	200 шт
▪	Absorbent Paper Points Feathered Tip	XXF, XF, F, M, ML, C, XC, XXF/XC	200 шт
▪	Dia-ProISO.04 Plus Paper Points MMPP.04 Taper	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80	100 шт
▪	Dia-ProISO.06 Plus Paper Points MMPP.06 Taper	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80	100 шт
▪	Paper Points MMPP Dia-ProT	F1, F2, F3, F4, F5, F1/F3, F4/F5, F1/F5	100 шт
▪	Absorbent Paper Points Dia-Gtp	.06#20	100 шт
▪	Absorbent Paper Points Dia-Gtp	.08#20	100 шт
▪	Absorbent Paper Points Dia-Gtp	.10#20	60 шт
▪	Absorbent Paper Points Dia-Gtp	.12#20	60 шт
▪	Absorbent Paper Points Dia-Gtp	.06/.12#20	60 шт

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Температура, идеальная для разогрева и подготовки изделия Gutta Percha Obturator – 160-200С, выставляется на приборе Dia-Gun.

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

Препарирование зуба

Сохраняйте естественную форму полости зуба после удаления кариозных тканей и существующих пломбировочных материалов.

Подготовка корневого канала

1. Препарирование корневого канала: предварительно обработайте каналорасширителем, в зависимости от требуемого диаметра проводите расширение, химическую и механическую обработку корневого канала.
2. Измерьте корневой канал.
3. Высушите корневой канал при помощи бумажных штифтов.

Пломбирование корневого канала и восстановление коронковой части

1. Пломбируйте корневой канал при помощи гуттаперчевых штифтов, используя прибор Dia-Gun и стержни Gutta Percha Obturator или проведите временную пломбировку канала используя Temporary Stopping. Учитывайте измеренную заранее длину корневого канала.
2. Восстановите коронковую часть зуба.

ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ 3 ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО КРАФТВЭЙ МЕДИКАЛ



Е.В. Комолова