


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Крафтвэй Медикал»

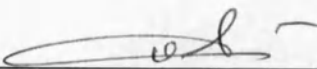

Комолова Е.В.

«20» декабря 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы пломбировочные стоматологические в наборах: Diapex Plus, Diapaste, DiaFil, DiaFil Flow, DiaFil Core и DiaSeal.

Материалы пломбировочные стоматологические в отдельных упаковках: Diapex Plus, Diapaste, DiaFil, DiaFil Flow, DiaSeal и Dia-Temp.

Принадлежности: наконечники, бондинговый агент Dia Plus, гель Dia-Prep Plus, гель DiaEtch, чашка для замешивания Disposable Plastic Bowl и шприцы для ирригации корневого канала Diaflex.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Изделия Diapex Plus, Diapaste, DiaFil, DiaFil Flow, DiaFil Core, Dia-Temp и DiaSeal предназначены для пломбирования корневого канала зуба или кариозных полостей после их обработки.

Наконечники предназначены для работы с материалами Diapex Plus, Diapaste, DiaFil Flow и DiaSeal.

Бондинговый агент Dia Plus предназначен для обработки предварительно обработанных механически кариозных полостей для создания связующего слоя между поверхностью зуба и пломбировочным материалом.

Изделия Dia-Prep Plus и DiaEtch предназначены для химической обработки предварительно обработанных механически кариозных полостей. Данные гели протравливают эмаль и/или дентин зуба для удаления смазанного слоя и улучшения адгезии пломбировочного материала к тканям зуба.

Чашки Disposable Plastic Bowl предназначены для замешивания гипса.

Шприцы Diaflex предназначены для ирригации корневого канала.

АССОРТИМЕНТ:

Ассортимент материалов пломбировочных стоматологических:

	<i>Наименование изделия</i>	<i>Тип упаковки</i>	<i>Состав упаковки</i>
▪	Diapex Plus	Regular Kit Type A	Шприц с материалом Diapex Plus (1 шт.), сменные наконечники (20 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapex Plus	Regular Kit Type B	Шприц с материалом Diapex Plus (1 шт.), сменные наконечники (10 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapex Plus	Regular Kit Type C	Шприц с материалом Diapex Plus (1 шт.), сменные наконечники (4 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapex Plus	Refill Kit	Шприц с материалом Diapex Plus (1 шт.)
▪	Diapex Plus	Intro Kit	Шприц с материалом Diapex Plus (1 шт.) и сменные наконечники (4 шт.)

	<i>Наименование изделия</i>	<i>Тип упаковки</i>	<i>Состав упаковки</i>
▪	Diapaste	Regular Kit Type A	Шприц с материалом Diapaste (1 шт.), сменные наконечники (20 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapaste	Regular Kit Type B	Шприц с материалом Diapaste (1 шт.), сменные наконечники (10 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapaste	Regular Kit Type C	Шприц с материалом Diapaste (1 шт.), сменные наконечники (4 шт.) и колпачок защитный (1 шт.)
▪	Diapaste	Refill Kit	Шприц с материалом Diapaste (1 шт.)
▪	Diapaste	Intro Kit	Шприц с материалом Diapaste (1 шт.) и сменные наконечники (4 шт.)

	Наименование изделия	Тип упаковки	Состав упаковки
▪	DiaFil	Start Kit	Шприц с материалом DiaFil (5 шт.), флакон с бондинговым агентом Dia Plus (1 шт.), шприц с гелем для протравливания DiaEtch (1 шт.), наконечники – щеточки (50 шт.), держатель для щеточек (1 шт.), пластинка для замешивания (1 шт.), блок для замешивания (1 шт.), наконечники (10 шт.)
▪	DiaFil	Refill Package	Шприц с материалом DiaFil (1 шт.)
▪	DiaFil	Capsule Type	Капсулы с материалом DiaFil (20 шт.)

	Наименование изделия	Тип упаковки	Состав упаковки
▪	DiaFil Flow	Economic Package	Шприц с материалом DiaFil Flow (4 шт.), наконечники (40 шт.), блок для замешивания - опционально
▪	DiaFil Flow	Refill Package	Шприц с материалом DiaFil Flow (2 шт.), наконечники (10 шт.)

	Наименование изделия	Состав упаковки
▪	DiaFil Core	Флакон с основой (1 шт.), флакон с катализатором (1 шт.), шпатели (30 шт.), пластинки для замешивания (50 шт.), наконечники (10 шт.), колпачки защитные (10 шт.)

	Наименование изделия	Тип упаковки	Состав упаковки
▪	DiaSeal	Regular Package	Шприц с материалом DiaSeal (2 шт.), шприцы с гелем для протравливания DiaEtch (2 шт.), наконечники для шприцев с материалом (10 шт.), наконечники для шприцев с гелем для протравливания (10 шт.)
▪	DiaSeal	Refill Package	Шприц с материалом DiaSeal (1 шт.),

		наконечники для шприцев с материалом (5 шт.)
--	--	--

	<i>Наименование изделия</i>	<i>Состав упаковки</i>
▪	Dia-Prep Plus	Шприц с материалом Dia-Prep Plus (2 шт.), наконечники (10 шт.), колпачок защитный (1 шт.)
▪	Dia-Prep Plus	Шприц с материалом Dia-Prep Plus (2 шт.), наконечники (20 шт.), колпачок защитный (1 шт.)

	<i>Наименование изделия</i>	<i>Тип упаковки</i>	<i>Состав упаковки</i>
▪	DiaEtch	Economic Package Type A	Шприц с материалом DiaEtch (5 шт. по 5 мл), наконечники для шприцев (20 шт.)
▪	DiaEtch	Economic Package Type B	Шприц с материалом DiaEtch (5 шт. по 3 мл), наконечники для шприцев (20 шт.)
▪	DiaEtch	Regular Package	Шприц с материалом DiaEtch (2 шт.), наконечники для шприцев (10 шт.)
▪	DiaEtch	Refill Package Type A	Шприц с материалом DiaEtch (1 шт.), наконечники для шприцев (5 шт.)

	<i>Наименование изделия</i>	<i>Состав упаковки</i>
▪	Diaflex	Шприц для ирригации корневого канала (3 шт.), наконечники (20 шт.), флакон с маслом силиконовым (1 шт.)
▪	Diaflex	Шприц для ирригации корневого канала (5 шт.), наконечники (20 шт.), флакон с маслом силиконовым (1 шт.)

DiaPrex Plus

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пломбирование корневого канала
- Апексификация и воссоздание твердых тканей зуба
- Апексогенезис
- Лечение резорбции корня зуба
- Травмы корня у детей

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

А. Для пломбирования корневого канала без использования гуттаперчевых штифтов

1. После механической и химической подготовки корневого канала промойте его и высушите.
2. Вставьте кончик шприца Diapex Plus отступя от апекса 1/5 длины корневого канала. Наконечник на шприце обеспечивает более удобное введение материала.
3. Наполняйте корневой канал пастой, нажимая на поршень шприца.
4. Медленно поднимайте шприц по мере заполнения канала пастой.
5. После того, как корневой канал полностью заполнится, и вы извлечете шприц, следует убрать излишки материала.
6. После каждого применения снимайте наконечник со шприца, а перед каждым новым применением надевайте новый.

В. Пломбирование корневого канала комбинированным методом, используя гуттаперчивые штифты и пасту

1. Традиционный метод или метод Crown Down
 - 1) После того, как корневой канал будет подготовлен и очищен, опустите кончик шприца Diapex Plus на всю глубину корневого канала.
 - 2) Нажмите на поршень для выведения небольшой порции пасты в области апекса. Паста, покрыв область апекса, будет проявлять свои дезинфицирующие свойства и стимулировать образование твердых тканей зуба.
 - 3) Подберите соответствующий гуттаперчивый штифт DiaDent - его размер должен соответствовать размеру последнего эндодонтического инструмента, которым обрабатывался корневой канал.
 - 4) После того, как будет установлен штифт, поместите наконечник шприца Diapex Plus между штифтом и стенкой корневого канала и заполняйте этот промежуток пломбировочной пастой.
 - 5) Медленно поднимайте шприц по мере заполнения канала пастой.
2. Временные зубы: пульпэктомия или случаи с инфицированием корневого канала.
 - 1) Пломбируйте корневой канал, как указано в пункте А.
 - 2) В многокорневых каналах также начинайте движение от области апекса сверху. Когда паста заполнит корневые каналы и начнет заполнять пульповую камеру, медленно извлеките шприц. Надо быть внимательным, чтобы не вывести материал за пределы верхушки корня.

- 3) В случае резорбции верхушки корневого канала, пломбировочные материал поможет в восстановлении твердых тканей зуба.

ВНИМАНИЕ:

- Не выводите материал из шприца слишком быстро. В противном случае пациент может почувствовать острую боль.
- Обращайте внимание на градуировку шприца, чтобы не вывести материал за верхушку корневого канала.
- Помните о топографии нижнечелюстного канала.
- Помните о взаиморасположении верхнечелюстного синуса и верхних моляров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Храните в сухом прохладном месте (температура не должна превышать 25°C).
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.
- Срок годности: 3 года от даты производства.
- Закрывайте шприц защитным колпачком после завершения работы.

Diapaste

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Лечение инфицированных корневых каналов
- Временное пломбирование корневых каналов
- Пломбирование корневых каналов временных зубов
- Лечение корневых каналов после экстирпации пульпы
- Пломбирование после пульпотомии
- Временное покрытие пульпы

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. После механической и химической подготовки корневого канала промойте его и высушите.
2. Вставьте кончик шприца Diapaste в корневой канал.
3. Аккуратно нажимайте на поршень шприца и медленно вводите пасту в корневой канал. Обращайте внимание на градуировку на шприце.
4. Медленно поднимайте шприц по мере заполнения канала пастой.
5. Удалите излишки материала с поверхности зуба.

6. Отсоедините наконечник от шприца и закройте шприц защитным колпачком для хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Diaraste должна применять стоматологами-профессионалами только в лечебных стоматологических целях. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного препарата перед его использованием.
- Не используйте Diaraste у пациентов с воспалительными процессами и с аллергией.
- Не вводите материал в корневой канал слишком быстро. В противном случае пациент может почувствовать острую боль.
- В случае попадания материала в глаза, промойте их большим количеством воды.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.
- Для наружного применения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Храните в сухом прохладном месте (температура: 10°C - 25°C).
- Закрывайте шприц защитным колпачком после завершения работы.
- Не используйте по истечении даты срока годности.

DiaFil

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Светоотверждаемый микрогибридный композитный материал, используемый для реставрация как фронтальной, так и боковой группы зубов
- Обладает минимальной усадкой
- Обеспечивает идеальное краевое прилегание
- Рентгеноконтрастен
- Оптимальное рабочее время
- Цвет материала стабилен во времени

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Прямые реставрации фронтальной и боковой группы зубов
- Может являться основой для дальнейших реставрационных работ
- Может использоваться для шинирования подвижных зубов

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. Подбор цвета

Очистите зуб от мягкого и твердого зубного налета. Помните, что цвет зуба не однотонен. Определите величину предполагаемой реставрации и ее предполагаемый цвет. Лучше

всего подбирать цвет, поднося цветовую шкалу к зубу. Например, можете использовать шкалу Vita Lumin Dia shade. При проведении реставраций рекомендуется использовать раббер дам.

2. Подготовка отпрепарированной кариозной полости

Реставрации во фронтальном отделе:

Используя обычную технику протравливания, подготовьте полости по III, IV или V классу.

Реставрация боковой группы зубов:

Отпрепарируйте кариозную полость. После механической обработки на дне полости не должно остаться следов амальгамы или другого базового материала, который может помешать полимеризации DiaFil.

3. Защита пульпы

При наличии глубокой кариозной полости покрывайте дентин небольшим количеством гидроксида кальция в месте наиболее близкого расположения пульпы. Остальную часть полости оставьте для проведения бондинга. Можно использовать стеклоиономерный цемент или безэвгенольные базы.

4. Установка матрицы

Используйте матриц-систему. Предпочтительнее использование прозрачных матриц и клинышков для создания хороших апксимальных контактов. Вы можете использовать клинышки до установки матрицы, создав тем самым достаточное пространство между зубами для установки матрицы.

5. Лечение эмали и дентина

Следуйте инструкциям производителя относительно протравливания, обработки полости праймером и адгезивом и полимеризации. Рекомендуется использовать пломбировочный материал DiaFil совместно с кислотой для протравливания и бондинговым агентом фирмы DiaDent.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ:

Нанесите достаточное количество геля DiaEtch на зуб. Смойте его достаточным количеством воды через 20 секунд. Высушите полость в течении 2 секунд.

ПРОВЕДЕНИЕ БОНДИНГА В 2 ШАГА:

Нанесите праймер на протравленную поверхность эмали и/или дентина последовательно 3 раза.

Нанесите адгезив на поверхность эмали и/или дентина. Отсветите адгезив в течении 10 секунд для его полной полимеризации.

ПРОВЕДЕНИЕ БОНДИНГА В 1 ШАГ:

Нанесите бондинговый агент DiaFil на поверхность эмали и/или дентина последовательно 2 раза. Подождите 15 секунд. Аккуратно подсушите бондинговый агент DiaFil струей воздуха в течение 3 секунд. Отсветите адгезив в течении 20 секунд для его полной полимеризации.

6. Распределение реставрационного материала

НАНЕСЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ШПРИЦА:

Нанесите необходимое количество материала из шприца на блок для замешивания. Вращайте шприц по часовой стрелке во время выведения материала. Сразу же закройте шприц защитным колпачком. Если вы закрываете его не сразу, защитите его от попадания на него света. Возьмите нужное количество материала с блока для замешивания и нанесите его в полость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПСУЛ С ОДНОЙ ДОЗОЙ МАТЕРИАЛА:

Вставьте капсулу в диспенсер и поверните ее под таким углом, который будет наиболее удобен для дальнейшей работы. Нанесите материал непосредственно в обработанную кариозную полость. Вводите материал медленно, без излишнего давления.

7. Завершение внесения материала

Вносите светоотверждаемый материал слоями по 2,5 мм или меньше. Для того, чтобы прилегание материала к тканям зуба было больше, нанесите немного больше материала, для полного перекрытия полости. Избегайте воздействия непосредственного и интенсивного воздействия света на рабочую область.

8. Полимеризация

Полимеризуйте каждую часть реставрации при помощи полимеризующей лампы (>400mW/cm²). При проведении полимеризации держите кончик лампы настолько близко к реставрации, насколько это возможно. Рекомендуемое время полимеризации материала при использовании лампы DiaDent Q-Lite указано ниже:

Цвет материала	Толщина слоя	Время экспозиции
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3	2,5 мм	20 секунд
A4	2,5 мм	30 секунд

9. Обработка пломбы

Непосредственно после полимеризации пломбировочного материала обработайте его соответствующими финишными борами или камнями. При убиении лишнего материала всегда обращайтесь внимание на соблюдение окклюзионных контактов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Не хранить при повышенной температуре или при интенсивном воздействии света
- Хранение материала в холодильнике может продлить его срок годности
- Перед применением дайте возможность материалу принять комнатную температуру.
- Не храните материал рядом с материалами, содержащими эвгенол
- Реставрационные материалы изготовлены с учетом того, что они будут использоваться при комнатной температуре (21-24°C)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Материал должен применяться стоматологами-профессионалами только в лечебных стоматологических целях. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного препарата перед его использованием.
- При появлении чувствительности или аллергической реакции на препарат, прекратите его использование. При контакте материала с кожей, смойте его обильным количеством воды.
- Используйте защитные перчатки.
- В случае попадания материала в глаза или продолжительного контакта материала со слизистой в полости рта, смойте материал большим количеством воды.

DiaFil Flow

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Реставрации по III и V, а также при незначительной глубине полости по IV классу
- Основа/ прокладка для реставраций по I и II классу
- Восстановление коронки зуба после применения временных пломбировочных материалов.
- В качестве силанта для запечатывания фиссур и естественных углублений коронки зуба
- Реставрация коронки зуба после минимального препарирования

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. Подбор цвета

Очистите зуб от мягкого и твердого зубного налета. Помните, что цвет зуба не однотонен. При проведении реставраций рекомендуется использовать раббер дам. Выберите цвет перед изоляцией зуба.

2. Подготовка отпрепарированной кариозной полости

Отпрепарируйте кариозную полость. После механической обработки на дне полости не должно остаться следов амальгамы или другого базового материала, который может помешать полимеризации DiaFil Flow.

3. Защита пульпы

При наличии глубокой кариозной полости покрывайте дентин небольшим количеством гидроксида кальция в месте наиболее близкого расположения пульпы. Остальную часть полости оставьте для проведения бондинга. Можно использовать стеклоиономерный цемент или безэвгенольные базы.

4. Лечение эмали и дентина

Следуйте инструкциям производителя относительно протравливания, обработки полости праймером и адгезивом и полимеризации. Рекомендуется использовать пломбировочный материал DiaFil Flow совместно с кислотой для протравливания и бондинговым агентом фирмы DiaDent.

5. Распределение реставрационного материала

Откройте защитный колпачок, закрепите наконечник на шприце. Перед нанесением материала обратите внимание на то, что бы в наконечнике не было ничего, мешающего выходу материала. Если в наконечнике есть затвердевший материал, мешающий прохождению жидкого, удалите пробку из наконечника. Снова установите наконечник на шприц. DiaFil Flow также можно нанести в контейнер-диспенсер и забирать материал уже из него при помощи браша или удобного для Вас инструмента.

6. Завершение внесения материала

Вносите светоотверждаемый материал слоями по 2,0 мм или меньше. Сразу после использования закройте шприц защитным колпачком.

7. Полимеризация

Полимеризуйте каждую часть реставрации при помощи полимеризующей лампы ($>400\text{mW}/\text{cm}^2$) в течении 20 секунд. При проведении полимеризации держите кончик лампы настолько близко к реставрации, насколько это возможно. Рекомендуется применять лампы DiaDent Q-Lite.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При появлении чувствительности или аллергической реакции на препарат, прекратите его использование. При контакте материала с кожей, смойте его обильным количеством воды.
- Используйте защитные перчатки и защиту для глаз.
- В случае попадания материала в глаза смойте материал большим количеством воды.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Не хранить при повышенной температуре или при интенсивном воздействии света
- Хранение материала в холодильнике может продлить его срок годности
- Перед применением дайте возможность материалу принять комнатную температуру.
- Не храните материал рядом с материалами, содержащими эвгенол

DiaFil Core

ОПИСАНИЕ:

DiaFil Core является самоотверждаемым композитным материалом, состоящим из двух компонентов: базы и катализатора. Материал используется для восстановления целостности зуба, долгое время выделяет фториды.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- В качестве основы при восстановлении целостности зуба

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. Изолируйте зуб. Рекомендуется использовать раббер дам.
2. Очистите зуб, уберите ненужный материал.
3. Проведите стандартное протравливание (используйте 37% фосфорную кислоту). Рекомендуется использование DiaEtch.
4. Полностью смойте протравливающий гель, высушите. Избегайте пересушивание дентина.
5. Используйте гидрофильный праймер и соответствующую бондинговую систему. Использование системы праймер-адгезив в одной бутылочке противопоказано.
6. Нанесите необходимое количество базы и катализатора на блок для замешивания. При помощи шпателя для замешивания цемента смешайте пасты до однотонного оттенка. Замешивание материала должно быть проведено в течении 30-45 секунд. Минимальное рабочее время – начина с 1 минуты.
7. Внесите материал. Время отвердевания материала в полости рта – 4 минуты.
8. Проверьте твердость материала. После затвердевания материала можете начать его финишную обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При появлении чувствительности или аллергической реакции на препарат, прекратите его использование. При контакте материала с кожей, смойте его обильным количеством воды.
- Используйте защитные перчатки и защиту для глаз.
- В случае попадания материала в глаза смойте материал большим количеством воды.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Не хранить при повышенной температуре или при интенсивном воздействии света
- Хранение материала в холодильнике может продлить его срок годности
- Перед применением дайте возможность материалу принять комнатную температуру.
- Не храните материал рядом с материалами, содержащими эвгенол

DiaSeal

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Запечатывания фиссур и естественных углублений коронок зубов

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. Перед нанесением силанта поверхность зуба должна быть очищена пемзой, не используйте материалы, содержащие масло.
2. Промойте зуб большим количеством воды.
3. Изолируйте рабочее поле – используйте ватные валики или раббер дам. Просушите поверхность. Воздух не должен содержать примеси масла.
4. Проведите стандартное протравливание (используйте 37% фосфорную кислоту). Рекомендуется использование DiaEtch.
5. Полностью смойте протравливающий гель, высушите. Если поверхность зуба не приобретает белый цвет, повторите протравливание. Избегайте попадание слюны.
6. Нанесите DiaSeal на протравленную поверхность зуба.
7. Отсветите материал минимум 20 секунд до полной полимеризации. Рекомендуется применять лампу DiaDent Q-Lite.
8. Выверите окклюзионные контакты после затвердевания материала. Уберите излишки материала и финишно обработайте поверхность зуба.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Закрывайте защитный колпачок после использования материала
- Берегите от прямого воздействия света.
- Рекомендуется хранить в холодильнике.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При появлении чувствительности или аллергической реакции на препарат, прекратите его использование. При контакте материала с кожей, смойте его обильным количеством воды.
- Используйте защитные перчатки и защиту для глаз.
- В случае попадания материала в глаза смойте материал большим количеством воды.

Dia-Temp

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Временное пломбирование сменных зубов
- Временное пломбирование постоянных зубов, использование в качестве силанта
- Изготовление временных вкладок inlay и onlay

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

1. Изолируйте зуб. Рекомендуется использовать раббер дам.
2. Очистите поверхность зуба.
3. Нанесите необходимое количество Dia-Temp при помощи шпателя или любого другого инструмента.
4. Засветите материал в течении 40 секунд стандартной лампой для световой полимеризации ($>400\text{mW}/\text{cm}^2$). Рекомендуется применять лампу DiaDent Q-Lite.
5. Выверите окклюзионные контакты после затвердевания материала.
6. Уберите излишки материала и финишно обработайте поверхность зуба.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Материал должен применяться стоматологами-профессионалами только в лечебных стоматологических целях. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного препарата перед его использованием.
- В случае, если Вы храните материал в холодильнике, достаньте его за 30 минут до начала работы. После применения материала закрывайте шприц защитным колпачком.
- В случае, если материал не отвердевает или отвердевает медленно, вначале проверьте полимеризующую лампу. В случае ее исправности, свяжитесь с ближайшим дилером.
- Используйте защитные перчатки.
- В случае попадания материала в глаза смойте материал большим количеством воды.

Dia Plus

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Бондинг прямых реставраций из композитного материала
- Бондинг реставраций из композита и амальгамы
- Бондинг непрямых реставраций – керамика, композитные материалы (вкладки inlay, onlay, виниры, коронки)
- Покрытие гиперчувствительных участков зуба

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

Бондинг прямых реставраций из композитного материала

1. Обработайте и очистите кариозную полость. Если произошло обнажение пульпы, нанесите на нее небольшое количество гидроксида кальция.
2. Протравите эмаль и дентин в течении 15 секунд. Полностью смойте протравливающий гель, подсушите полость в течении 1 - 2 секунд. Таким образом Вы удалите излишнюю влагу, но не пересушите зуб. Избегайте пересушивания: оно может послужить

возникновению более плохой адгезии пломбировочного материала, а также болевой чувствительности.

3. Нанесите 2 капли бондингового агента Dia Plus в специально предназначенную чашечку-форму. Полностью погрузите головку браша в адгезив, после чего нанесите на поверхность зуба 1 слой. Снова полностью окуните браш в адгезив и нанесите еще один слой. Подождите 10 секунд. Аккуратно раздуйте адгезив в течении 2 – 5 секунд. Для равномерного покрытия можете нанести еще один слой бонда и снова раздуть его. Засветите материал в течении 20 секунд стандартной лампой для световой полимеризации ($>400\text{mW}/\text{cm}^2$). Рекомендуется применять лампу DiaDent Q-Lite.
4. Нанесите реставрационный материал, распределите его, далее следуйте инструкция производителя.

Бондинг реставраций из композита и амальгамы

1. Раббер дам рекомендуется для изоляции зуба
2. Уберите ненужный материал – амальгаму или композит
3. Протравите эмаль, дентин и оставшийся в течении 15 секунд. Полностью смойте протравливающий гель, подсушите полость в течении 1 - 2 секунд. Таким образом Вы удалите излишнюю влагу, но не пересушите зуб. Избегайте пересушивания: оно может послужить возникновению более плохой адгезии пломбировочного материала, а также болевой чувствительности.
4. Нанесите 2 капли бондингового агента Dia Plus в специально предназначенную чашечку-форму. Полностью погрузите головку браша в адгезив, после чего нанесите на поверхность зуба 1 слой. Снова полностью окуните браш в адгезив и нанесите еще один слой. Подождите 10 секунд. Аккуратно раздуйте адгезив в течении 2 – 5 секунд. Для равномерного покрытия можете нанести еще один слой бонда и снова раздуть его. Засветите материал в течении 20 секунд стандартной лампой для световой полимеризации ($>400\text{mW}/\text{cm}^2$). Рекомендуется применять лампу DiaDent Q-Lite.
5. В случае использования амальгамы покройте металлическую поверхность соответствующим агентом тонким слоем (0,25 – 0,5 мм). Отсветите каждый слой по 20 секунд. Рекомендуется применять лампу DiaDent Q-Lite.

Бондинг не прямых реставраций

1. Удалите временную реставрацию. Подготовьте и очистите поверхности стандартными методами. Примерьте вкладку, проверьте соответствие цвета.
2. Протравите эмаль, дентин и оставшийся в течении 15 секунд. Полностью смойте протравливающий гель, подсушите полость в течении 1 - 2 секунд. Таким образом Вы удалите излишнюю влагу, но не пересушите зуб. Избегайте пересушивания: оно может

послужить возникновению более плохой адгезии пломбировочного материала, а также болевой чувствительности.

3. Нанесите 2 капли бондингового агента Dia Plus в специально предназначенную чашечку-форму. Полностью погрузите головку браша в адгезив, после чего нанесите на поверхность зуба 1 слой. Снова полностью окуните браш в адгезив и нанесите еще один слой. Подождите 10 секунд. Аккуратно раздуйте адгезив в течении 2 – 5 секунд. Для равномерного покрытия можете нанести еще один слой бонда и снова раздуть его. Засветите материал в течении 20 секунд стандартной лампой для световой полимеризации ($>400\text{mW}/\text{cm}^2$). Рекомендуется применять лампы DiaDent Q-Lite.
4. Нанесите силан на протравленную или подготовленную при помощи пескоструйки реставрацию. Высушите. Для композитной реставрации использование силана опционально.
5. Нанесите 1 слой бондингового агента Dia Plus на слой силана.
6. Аккуратно раздуйте материал. Отсвечивание не требуется.
7. Замешайте и нанесите цемент двойного отверждения на реставрацию. Избыток материала легко удалить, если отсвечивание происходит послойно (около 10 секунд).
8. Установите реставрацию, далее следуйте инструкциям производителя.

Уменьшение чувствительности в области корня

1. Аккуратно очистите поверхность корня. Промойте ее и высушите.
2. Нанесите протравливающий агент. Подождите 15 секунд. Промойте в течение 10 секунд. Удалите излишнюю влагу, но не пересушите зуб. Избегайте пересушивания: оно может послужить возникновению более плохой адгезии пломбировочного материала, а также болевой чувствительности.
3. Нанесите 2 слоя бонда на дентин. Высушите в течении 2 секунд и осветите 20 секунд.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Не хранить при повышенной температуре или при интенсивном воздействии света
- Храните при комнатной температуре (21-24°C)
- Хранение материала в холодильнике может продлить его срок годности
- Перед применением дайте возможность материалу принять комнатную температуру.
- Не храните материал рядом с материалами, содержащими эвгенол

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Закрывайте защитный колпачок после использования материала
- Материал должен применяться стоматологами-профессионалами только в лечебных стоматологических целях. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного препарата перед его использованием.

- При появлении чувствительности или аллергической реакции на препарат, прекратите его использование. При контакте материала с кожей, смойте его обильным количеством воды.
- Используйте защитные перчатки.
- В случае попадания материала в глаза или продолжительного контакта материала со слизистой в полости рта, смойте материал большим количеством воды.

Dia-Prep Plus

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Очищение, подготовка корневого канала
- Растворение остатков пульпы
- Удаление смазанного слоя
- Улучшает движение инструментов в корневом канале
- Бактерицидная обработка внутри корневого канала
- Очищение дентинных трубочек и апикальной области

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

- ЭДТА удаляет смазанный слой, размягчает дентин и помогает удалить просити кальцифицированные обструкции
- Пероксид мочевины с гипохлоридом соды образуют пузырьки воздуха, которые механически очищают корневой канал
- Материал является смазкой, помогающим продвижению эндодонтических инструментов, препятствуя их застреванию и перелому
- Материал открывает дентинные трубочки и апикальное отверстие, помогая веществам для медикаментозной обработки канала и пломбировочному материалу лучше проникать внутрь

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

- Изолируйте зуб. Рекомендуется использование раббер дама
- Вскройте и прочистите пульповую камеру обычными методами
Нанесите нужное количество Dia-Prep Plus на пульповую камеру или непосредственно на эндодонтический инструмент
- Обрабатывайте корневой канал по обычной методике
- При необходимости используйте раствор гипохлорида соды для очищения канала
- Повторяйте шаги 3 – 5 до тех пор, пока канал не будет полностью очищен и подготовлен

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 18 ЛИСТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО КРАФТВЭЙ МЕДИКАЛ



Е.В. Канюкова