



Регистрация лекарственных
средств и медтехники

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

**Экспресс - тесты для определения времени овуляции производства Хельм Медикал ГмбХ,
Германия.**

Одноступенчатый тест для определения времени овуляции производства Хельм Медикал ГмбХ, Германия является качественным тестом, используемым для определения выброса ЛГ в организме, а следовательно, определения времени овуляции.

Принцип действия:

ЛГ (лютеинизирующий гормон) содержится в моче каждой здоровой женщины. Его количество резко возрастает в середине менструального цикла. Увеличение количества ЛГ запускает овуляцию, во время которой высвобождается яйцеклетка. Овуляция происходит после 24-48 ч после позитивного теста. Когда капли анализируемого образца мочи попадают на кассету, капиллярные силы вынуждают жидкость двигаться вдоль мембраны. Когда ЛГ, содержащийся в образце, достигает зоны тестирования на мембране, образуется цветная линия. Отсутствие такой линии означает негативный результат.

Чтобы обеспечить контроль во время тестирования, в зоне контроля, если тест правильно выполнен, появляется цветная линия.

Проведение теста:

1. Вынуть набор для тестирования из упаковки, оторвав полоску по специальной метке, и положить его на ровную поверхность.
2. Держа пипетку с образцом мочи вертикально, добавить ровно 4 капли в емкость, отмеченную стрелкой.
3. Оценить результат через 5 минут, но не позже!

Оценка результата:

Выброс ЛГ произошел (положительный тест)

В том случае, когда видны обе цветные полосы и тестовая полоска такая же или темнее, чем контрольная, овуляция наиболее вероятна в следующие 24-48 ч. Для успешного зачатия половой контакт предпочтительнее всего в период с 24 до 48 ч после теста.

Выброса ЛГ не произошло (отрицательный тест)

В контрольной зоне появилась только одна цветная полоса либо тестовая полоса светлее контрольной. Это говорит о низком уровне ЛГ.

Тест ошибочный

Цветные полосы отсутствуют либо цветная полоса видна только в зоне тестирования, а в контрольной зоне ее нет. Повторить тест с новым набором для тестирования. Если тест опять ошибочен, обратитесь к продавцу или фармацевту, который продал вам тест.

Условия хранения

1. Хранить при температуре 4-25°C в закрытом пакете вплоть до окончания срока годности.
2. Хранить вдали от прямых солнечных лучей, влаги и тепла.
3. Не замораживать!
4. Лучше открывать непосредственно перед использованием.

Генеральный директор
ООО «Медэкс-консалт»



«05» сентября 2008 г.