

Руководство по эксплуатации

Тележка транспортная для транспортировки трупа «Tanartis» по ТУ

9451-003-89079081-2015, с принадлежностями



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

«07»

2015 г.



Уважаемый Заказчик,

спасибо за покупку нашей транспортной тележки. Прежде чем начать работу с прибором, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы узнать, как правильно им пользоваться, его функции.

Этот прибор должен использоваться только согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве. Любое другое использование является несоответствующим процессом эксплуатации.

Только квалифицированный или специально обученный персонал должен обслуживать данную тележку.

Выполняйте инструкции и предупреждения в этом руководстве. Неправильное обращение может привести к повреждению прибора, или ущербу здоровью.



Скопируйте серийный номер с Вашей тележки и запишите ниже в таблицу. Это ускорит Вашу связь с отделом обслуживания в случае любой поломки и может помочь при заказе запасных частей.

Серийный номер	
Дата установки	
поставщик	

■ Цель руководства по эксплуатации

Это руководство пользователя включает в себя всю техническую информацию, комплектацию и объясняет, как транспортировать и собирать транспортную тележку. Кроме того в ней объясняется, как привести Вашу тележку в рабочее состояние и как правильно использовать ее, а также приводится краткий обзор по безопасности.

Инженер-механик, устанавливающий тележку, должен полностью прочитать и понять все Руководство до установки, чтобы разобраться и обеспечить безотказную и безопасную работу прибора!

Операторы и пользователи тележки также должны полностью прочесть и понять все Руководство, чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу прибора!

■ Варианты исполнения

1. Тележка транспортная для съемных поддонов на колесах
2. Тележка транспортная для съемных скользящих поддонов
3. Тележка транспортная с несъемным ложем для перевозки трупов
4. Тележка транспортная для перевозки гробов
5. Стеллаж мобильный подкатной двухуровневый для хранения трупов
6. Стеллаж мобильный подкатной трехуровневый для хранения трупов
7. Стеллаж мобильный подкатной четырехуровневый для хранения трупов
8. Стеллаж мобильный подкатной пятиуровневый для хранения трупов

Принадлежности:

1. Поддон на колесах, для хранения трупа
2. Поддон скользящий, для хранения трупа
3. Поддон плоский на колесах, для хранения трупа
4. Поддон плоский скользящий, для хранения трупа
5. Поддон на колесах, для гроба
6. Поддон скользящий, для гроба

■ Пример комплекта поставки

Тележка поставляется в сборе, с установленными направляющими для транспортировки поддона и установленными колесами для перемещения.

1. Тележка транспортная для съемных скользящих поддонов.

Принадлежности:

1. Поддон скользящий, для хранения трупа.

✓*Комплект поставки может меняться по согласованию с заказчиком

■ Гарантийная информация:

- Стандартный гарантийный срок - 12 месяцев.
- Средний срок эксплуатации - 15 лет.
- Гарантия прерывается если:
 - Тележка перевозилась ненадлежащим образом
 - Тележка повреждена из-за неправильного обращения
 - Используются неоригинальные запасные части
 - Обслуживание выполняется не утвержденным персоналом

- Тележка подвергается воздействию кислот или высоких концентраций хлора в течение длительного времени (см. главу «Обслуживание и стойкость к воздействию химикатов»)
- Обслуживание выполняется не утвержденным персоналом

■ Цель использования

Тележка транспортная для транспортировки трупа «Tanartis» по ТУ 9451-003-89079081-2015, с принадлежностями предназначена для транспортировки трупов и гробов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов (далее по тексту – тележка).

Показания: Необходимость транспортировки тел умерших между секционными помещениями и помещениями для хранения трупов

Противопоказания: известные противопоказания при применении изделий в соответствии с руководством по эксплуатации, а также исходя из практики применения изделий данного типа отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

Транспортная тележка не предназначена для использования в качестве тележки для транспортировки грузов массой больше 200 кг. Транспортная тележка не предназначена для использования в качестве тележки для транспортировки грузов по улице, по неоднородным покрытиям с высокой степенью неровностей и перепадов высоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

1. Тележка транспортная для съемных поддонов на колесах

Транспортная тележка для съемных поддонов на колесах предназначена для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Тележка изготовлена из нержавеющей стали марки аisi 304, оснащена колесами для перемещения.

Габариты

Ширина (+/-5мм)	0.60 м
Высота (+/-5мм)	0,65 м
Длина (+/-5мм)	1.61 м

Масса тележки (+/- 1 кг)	34 кг
Допустимая нагрузка (+/-10 кг)	200 кг
Материал изготовления	нержавеющая сталь аisi 304
Толщина стали (+/- 0,01 мм)	0,7 мм

2. Тележка транспортная для съемных скользящих поддонов

Транспортная тележка для съемных скользящих поддонов на колесах предназначена для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Тележка изготовлена из нержавеющей стали марки аisi 304, оснащена колесами для перемещения с тормозной системой. Тележка оснащена поперечными роликами для загрузки/выгрузки поддона.

Габариты

Ширина (+/-5мм)	0.51 м
-----------------	--------

Высота (+/-5мм)	0,60 м
Длина (+/-5мм)	1.50 м
Масса тележки (+/- 1 кг)	34 кг
Допустимая нагрузка (+/-10 кг)	200 кг
Материал изготовления	нержавеющая сталь aisi 304
Толщина стали (+/- 0,01 мм)	0,7 мм

3. Тележка транспортная с несъемным ложем для перевозки трупов

Транспортная тележка с несъемным ложем для перевозки трупов предназначена для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Тележка изготовлена из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащена колесами для перемещения с тормозной системой. Тележка оснащена несъемным ложем для перевозки трупа. Небольшие ручки по бокам делают транспортировку тележки удобной.

На ложе имеется углубление для стока жидкости при транспортировке трупа.

Габариты

Ширина (+/-5мм)	0.60 м
Высота (+/-5мм)	0,80 м
Длина (+/-5мм)	2.10 м

Масса тележки (+/- 1 кг):	41 кг
Допустимая нагрузка (+/-10 кг)	200 кг
Материал изготовления	нержавеющая сталь aisi 304
Толщина стали (+/- 0,01 мм)	0,7 мм

4. Тележка транспортная для перевозки гробов

Транспортная тележка для перевозки гробов предназначена для транспортировки гробов по отделению патоморфологии, до кремационных печей.

Тележка изготовлена из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащена колесами для перемещения с тормозной системой. Тележка оснащена несъемным ложем для перевозки трупа. Небольшие ручки по бокам делают транспортировку тележки удобной.

Габариты

Ширина (+/-5мм)	0.60 м
Высота (+/-5мм)	0,80 м
Длина (+/-5мм)	2.10 м

Масса тележки (+/- 1 кг):	41 кг
Допустимая нагрузка (+/-10 кг)	200 кг
Материал изготовления	нержавеющая сталь aisi 304
Толщина стали (+/- 0,01 мм)	0,7 мм

5. Стеллаж мобильный подкатной двухуровневый для хранения трупов

Стеллаж мобильный подкатной двухуровневый для хранения трупов предназначен для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащен колесами для перемещения с тормозной системой. Каркас стеллажа выполнен из профильной трубы. Двухуровневый стеллаж позволяет осуществлять транспортировку сразу 2 трупов.

Габариты	
Ширина (+/-5мм)	0.66 м
Высота (+/-5мм)	1.26 м
Длина (+/-5мм)	2.54 м
Масса стеллажа (+/-1 кг)	33 кг
Допустимая нагрузка на каждый уровень стеллажа (+/-10 кг)	125 кг
Допустимая нагрузка на стеллаж (+/-10 кг)	250 кг
Материал изготовления крепления колеса к стеллажу и колесного диска	нержавеющая сталь aisi 304.

6. Стеллаж мобильный подкатной трехуровневый для хранения трупов

Стеллаж мобильный подкатной трехуровневый для хранения трупов предназначен для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащен колесами для перемещения с тормозной системой. Каркас стеллажа выполнен из профильной трубы. Трехуровневый стеллаж позволяет осуществлять транспортировку сразу 3 трупов.

Габариты	
Ширина (+/-5мм)	0.66 м
Высота (+/-5мм)	1.56 м
Длина (+/-5мм)	2.54 м
Масса стеллажа (+/-1 кг)	49,5 кг
Допустимая нагрузка на каждый уровень стеллажа (+/-10 кг)	125 кг
Допустимая нагрузка на стеллаж (+/-10 кг)	375 кг
Материал изготовления крепления колеса к стеллажу и колесного диска	нержавеющая сталь aisi 304.

7. Стеллаж мобильный подкатной четырехуровневый для хранения трупов

Стеллаж мобильный подкатной четырехуровневый для хранения трупов предназначен для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащен колесами для перемещения с тормозной системой. Каркас стеллажа выполнен из профильной трубы. Четырехуровневый стеллаж позволяет осуществлять транспортировку сразу 4 трупов.

Габариты	
Ширина (+/-5мм)	0.66 м
Высота (+/-5мм)	1.86 м

Длина (+/-5мм)	2.54 м
Масса стеллажа (+/-1 кг)	66 кг
Допустимая нагрузка на каждый уровень стеллажа (+/-10 кг)	125 кг
Допустимая нагрузка на стеллаж (+/-10 кг)	500 кг
Материал изготовления крепления колеса к стеллажу и колесного диска	нержавеющая сталь aisi 304.

8. Стеллаж мобильный подкатной пятиуровневый для хранения трупов

Стеллаж мобильный подкатной пятиуровневый для хранения трупов предназначен для транспортировки трупов по отделению патоморфологии, загрузки и выгрузки трупов в холодильную камеру для хранения трупов.

Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали марки aisi 304, оснащен колесами для перемещения с тормозной системой. Каркас стеллажа выполнен из профильной трубы. пятиуровневый стеллаж позволяет осуществлять транспортировку сразу 5 трупов.

Габариты	
Ширина (+/-5мм)	0.66 м
Высота (+/-5мм)	2.16 м
Длина (+/-5мм)	2.54 м
Масса стеллажа (+/-1 кг)	82,5 кг
Допустимая нагрузка на каждый уровень стеллажа (+/-10 кг)	125 кг
Допустимая нагрузка на стеллаж (+/-10 кг)	650 кг
Материал изготовления крепления колеса к стеллажу и колесного диска	нержавеющая сталь aisi 304.

Принадлежности:

№	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг (±0,5 кг)
1.	Поддон на колесах для хранения трупа	2000	580	150	17
2.	Поддон скользящий для хранения трупа	2000	580	50	15,8
3.	Поддон плоский на колесах для хранения трупа	2000	580	150	16,8
4.	Поддон плоский скользящий для хранения трупа	2000	580	50	15,6
5.	Поддон на колесах для гроба	2000	580	150	16,8
6.	Поддон скользящий для гроба	2000	580	50	15,6

■ Основные части и этапы сборки прибора

Тележка пользователю поставляется в собранном виде.

После снятия упаковки, тележка готова к работе.

Необходимо проверить целостность и устойчивость конструкции.

В качестве принадлежностей к тележкам могут поставляться:

1. Поддон на колесах, для хранения трупа
2. Поддон скользящий, для хранения трупа
3. Поддон плоский на колесах, для хранения трупа
4. Поддон плоский скользящий, для хранения трупа
5. Поддон на колесах, для гроба
6. Поддон скользящий, для гроба


*Комплектность поставки формируется по согласованию с заказчиком.

■ Транспортировка и хранение


Каждая тележка доставляется отдельной упаковкой на грузовом поддоне. Поскольку грузовые поддоны тяжелые и не годятся для ручной переноски, всегда используйте автопогрузчик или устройство для подъема грузового поддона при перемещении и транспортировке тележки на площадку для установки.



Внимание: грузовые поддоны тяжелые. Обеспечьте достаточное количество людей для эффективной установки. Перемещайте грузовые поддоны посредством устройства для подъема грузового поддона или автопогрузчиком. Обращайтесь с грузом осторожно, чтобы не повредить стол. Всегда транспортируйте грузовой поддон в оригинальной упаковке, не удаляйте упаковку перед транспортировкой. Если упаковка удалена, обеспечьте неподвижность станции на деревянном грузовом поддоне, закрепив ее ремнями. Транспортировка и обращение, отличающиеся от рекомендуемых, не покрываются гарантией.

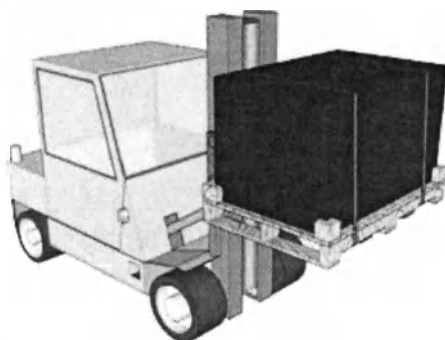

Автопогрузчик

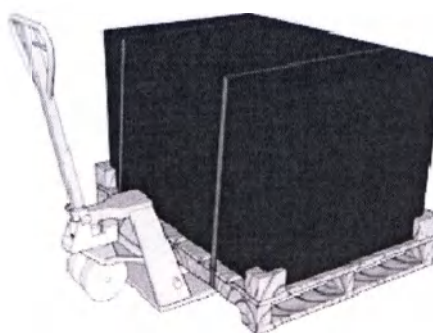

Устройство для подъема поддона

Условия транспортирования тележки должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

Условия хранения тележки в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и относительной влажности до 98%).

■ Информация об упаковке:

Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.


Тележку упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и помещают в потребительскую тару - ящики по ГОСТ 9142 или по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198. Изделия в коробке закреплены с помощью амортизирующих вставок, исключающих свободное перемещение содержимого.

При отгрузке тележек в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка производится в соответствии с ГОСТ 15846.

Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту тележки и ее частей от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ. Для защиты тележек от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

■ Распаковка

Чтобы распаковать тележку, ослабьте крепежные ремни и сорвите покрытие из полиэтиленовой пленки с тележки. Не используйте нож или острые предметы для разрезания полиэтилена, иначе Вы рискуете поцарапать изделие.

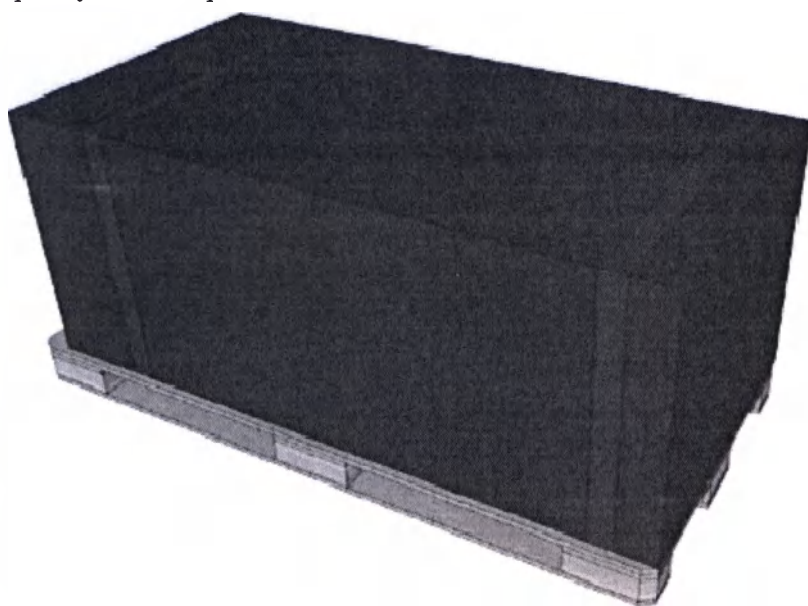

Упакованный поддон с крепежными ремнями и черной пленкой

■ Маркировка

На каждой тележке маркировка представлена табличкой по ГОСТ 12969, содержащей:

- наименование и/или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- месяц и год выпуска
- заводской номер;

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и надписи «Условия хранения – 2», «Верх».

■ Информация о безопасности

Установленная тележка предназначена для транспортировки и осмотра трупов. Основная цель – снизить физическую нагрузку на персонал, обеспечить безопасную работу. Любые изменения, внесенные в конструкцию без предварительного письменного согласия производителя, не покрываются гарантией и могут привести к повреждению изделия, или ущербу для здоровья. Производитель не несет ответственности за такой вред. Если пользователя интересует не только рекомендуемое использование, ему следует проконсультироваться с производителем перед таким использованием.



Внимательно прочитайте все инструкции, помеченные таким символом.

■ Предупреждение, соблюдайте следующие пункты!

- Вращающиеся детали и/или подвижные части могут вызвать травму или повреждение прочего оборудования в помещении. Все ниже перечисленные пункты должны строго соблюдаться:
 - о всегда следуйте рекомендациям этого руководства.
 - о всегда соблюдайте все местные законы и инструкции относительно безопасности и профилактики.
 - о Никогда не используйте неисправное устройство.
 - о Замена частей должна выполняться специализированным техником. Используйте только оригинальные части.
 - о В случае поломки, которую пользователь не может устранить сам, он должен обеспечить соответствующие меры защиты, чтобы не пострадали люди и оборудование.
 - о В случае если кислоты или высокие концентрации растворов хлора соприкасаются с материалом поверхности, промойте ее тщательно водой и вытрите тканью.

■ Требования утилизации и охраны окружающей среды

Утилизация осуществляется в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790.

Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 тележка относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

Перед утилизацией тележка должен быть подвергнута санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

Тележка подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медра-ботников, пациентов и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

• Устранение неполадок



- Поврежденным прибором **НЕЛЬЗЯ** пользоваться!

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Тележка транспортная для съемных поддонов на колесах

Используется в помещении с ровным полом, с отсутствием неровностей или перепадов высоты. Пренебрежение данного условия эксплуатации, возможен выход из строя подшипникового механизма колес и дальнейшая эксплуатация тележки будет невозможна. При данном типе повреждения, неисправное колесо подлежит замене

Тележка транспортная для съемных скользящих поддонов

Используется в помещении с ровным полом, с отсутствием неровностей или перепадов высоты. Пренебрежение данного условия эксплуатации, возможен выход из строя подшипникового механизма колес и дальнейшая эксплуатация тележки будет невозможна. При данном типе повреждения, неисправное колесо подлежит замене

Тележка транспортная с несъемным ложем для перевозки трупов

Тележка транспортная для перевозки гробов

Используются в помещении с ровным полом, с отсутствием неровностей или перепадов высоты. Пренебрежение данного условия эксплуатации, возможен выход из строя подшипникового механизма колес и дальнейшая эксплуатация тележки будет невозможна. При данном типе повреждения, неисправное колесо подлежит замене.

Тележка транспортная мобильная двухуровневая для хранения трупов

Тележка транспортная мобильная трехуровневая для хранения трупов

Тележка транспортная мобильная четырехуровневая для хранения трупов

Тележка транспортная мобильная пятиуровневая для хранения трупов

Используются в помещении с ровным полом, с отсутствием неровностей или перепадов высоты. Пренебрежение данного условия эксплуатации, возможен выход из строя подшипникового механизма колес и дальнейшая эксплуатация тележки будет невозможна. При данном типе повреждения, неисправное колесо подлежит замене.

Поддон на колесах для хранения трупа

Поддон скользящий для хранения трупа

Поддон плоский на колесах для хранения трупа

Поддон плоский скользящий для хранения трупа

Поддон на колесах для гроба

Поддон скользящий для гроба

Используются совместно с транспортной тележкой для съемных поддонов на колесах. При

совместном использовании с транспортной тележкой, поддон необходимо закреплять крепежным приспособлением, во избежание падения поддона и повреждения конструкции поддона, нанесения травмы персоналу.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии 12 месяцев с момента покупки.

Средний срок службы изделия – 15 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие инструментов требованиям технических условий при соблюдении правил применения, транспортирования и хранения. При обнаружении неисправности инструментов, возникшей в течение гарантийного срока, приведшей к нарушению их характеристик, данные изделия заменяются предприятием-изготовителем безвозмездно.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «ЭргоПродакшн», Россия, юридический адрес/фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литера Н, тел 8-495-787-40-46, e-mail: info@biovitrum.ru

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

На изделие дается гарантия сроком на 12 месяцев со дня приобретения, гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода. Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за изделием или несоблюдения инструкции. В случае возникновения неисправности при соблюдении требований по эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, производитель производит текущий ремонт либо замену изделия. Техническое обслуживание изделия должен производить специалист. По всем вопросам технического обслуживания обращаться: По вопросам гарантии обращаться: ООО «ЭргоПродакшн», Россия, юридический адрес/фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литера Н, тел 8-495-787-40-46, e-mail: info@biovitrum.ru

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

Транспортирование оборудования и принадлежностей осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку оборудования и принадлежностей производят в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Категория изделия _____

Производитель _____

Модель _____

Серийный номер/артикул _____

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Штамп
продавца

Изделие проверено, повреждений не имеет.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Срок гарантии – 12 месяцев.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «ЭргоПродакшн», Россия, юридический адрес/фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литер А, тел 8-495-787-40-46, e-mail: info@biovitrum.ru ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.

Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

ОТМЕТКА ГАРАНТИЙНОГО ЦЕНТРА

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР

ОШИТО
КОЛИЧЕСТВЕ 13 ЛИСТО

12 » 12 20 15 год

еральный директор

О « ЭргоПродакшн»

рсов Р. В.

