

УТВЕРЖДАЮ

Дир.

О.

Республика Беларусь

Могилевский район

О.А.Апанасевич

4.2015 г.

«Ривекс»

О.А.Апанасевич

ИНСТРУКЦИЯ

по применению салфеток медицинских марлевых

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Салфетки медицинские марлевые стерильные;
Салфетки медицинские марлевые нестерильные;
Салфетки медицинские марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью;
Салфетки медицинские марлевые нестерильные с рентгеноконтрастной нитью.

Примечание: Салфетки изготовлены по СТБ 2282-2012 «Салфетки медицинские. Общие технические условия»

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Салфетки медицинские предназначены для применения в учреждениях здравоохранения при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции и реализации потребителю.

Стерильные салфетки применяются в медицинских учреждениях в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Используются при прямом контакте с открытой раневой поверхностью.

Салфетки с рентгеноконтрастной нитью предназначены для остановки кровотечений и обработки ран, для удерживания и отведения органов и тканей тела, для возможности быстрого и не инвазивного обнаружения заражения в случае, если перевязочный материал стал его источником.

Салфетки нестерильные используют для удаления всевозможных загрязнений, а также в качестве материала, отлично впитывающего влагу (не предназначены для работы с раневой поверхностью, а также в операционных блоках).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Салфетки медицинские изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412-93.

4.2 Салфетки медицинские изготавливаются однослойными.

4.3 Салфетки медицинские изготавливаются в 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 32 сложения. При складывании марлевых салфеток их продольные и поперечные края

загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.

4.4. Салфетки могут иметь рентгеноконтрастную нить.

4.5. Салфетки медицинские выпускаются 14-ти типоразмеров 50 мм х 50 мм, 50 мм х 75 мм, 50 мм х 100 мм, 75 мм х 75 мм, 75 мм х 100 мм, 100 мм х 50 мм, 100 мм х 60 мм, 100 мм х 75 мм, 100 мм х 100 мм, 100 мм х 150мм, 100 мм х 200 мм, 150 мм х 100мм, 200 мм х 100мм, 200 мм х 200 мм.

4.6 Салфетки упаковываются в упаковку, выполненную из бумаги, комбинированной по ТУ 2245-010-21683836-2009 или полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007 или пленка полипропиленовая ТУ 2245-003-70378591-2011 или ТУ РБ 00204079.164-97 или DIN EN ISO 11607.

4.7. Упаковка стерильных салфеток герметична и обеспечивает стерильность салфеток в течении срока годности до вскрытия упаковки.

4.8. Стерилизация салфеток осуществляется радиационным методом.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Салфетки медицинские марлевые стерильные;

Салфетки медицинские марлевые нестерильные;

Салфетки медицинские марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью;

Салфетки медицинские марлевые нестерильные с рентгеноконтрастной нитью

серия/партия соответствует СТБ 2282-2012 и ГОСТ 16427-93 и признана годной к эксплуатации.

Зам. Директора по качеству

ФИО

Подпись

Отдел контроля качества

ФИО

Подпись

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеет.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Проверить целостность упаковки салфетки.

7.2. Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям СТБ 2282-2012, (ГОСТ 16427-93 в части пунктов 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3; п. 1.4.2 абзац третий; пунктов 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2, 2, 3.3, 4, 5.1) при соблюдении потребителем условий при транспортировании, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок годности стерильных салфеток – 5 лет с даты стерилизации.

9.3. Гарантийный срок годности нестерильных салфеток – 5 лет с даты изготовления.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные салфетки на территории РБ утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 20 октября 2005 № 147)

Использованные салфетки на территории РФ утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 № 163)

11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Изготовитель: ООО «Ривекс», 213134, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский р-н, агр. Буйничи, ул. Промышленная 1, к. 7, УНП 790762789
E-mail: rivex.net@gmail.com тел./факс +375 17 254 74 04

Уполномоченная организация в РФ: ООО "АНКОН", 214013, Смоленская область, Смоленск, Тульский переулок, д. 9 ОГРН 1156733011698 ИНН 6732108684
E-mail: ankon-rus@mail.ru
Тел. 89107827234

В данном документе прошито
Скреплено печатью на 23 листах

Директор А.А.Апанасевич

