



«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Амарант»

Н.Ю. Сильнова

_____ 2016 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АМАР.269290.001РЭ

Бахилы медицинские

по ТУ 9398-001-89972233-2016

2016 г.

Содержание

I. Описание и работа:	
1.1. Назначение изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.3
1.3. Состав изделия.....	стр.5
1.4. Устройство и работа изделия.....	стр.5
1.5. Маркировка.....	стр.5
1.6. Упаковка.....	стр.6
II. Показания к применению.....	стр.7
III. Противопоказания к применению.....	стр.7
IV. Использование по назначению:	
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.7
4.2. Подготовка изделия к работе.....	стр.7
4.3. Использование изделия.....	стр.7
V. Техническое обслуживание.....	стр.7
VI. Хранение:	
6.1. Условия хранения.....	стр.7
6.2. Гарантийные сроки хранения.....	стр.7
VII. Транспортирование.....	стр.8
VIII. Утилизация.....	стр.8
IX. Контактные данные производителя.....	стр.8
X. Лист регистрационных изменений.....	стр.9

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на бахилы медицинские (далее бахилы) для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

I. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Бахилы медицинские использования для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

Область применения: широкого применения.

1.2. Технические характеристики

Бахилы трех типов в зависимости от применяемого материала: ПНД; НПП; ПНД с дополнительной подошвой (из ПНД).

Бахилы отличаются:

- цветом;
- толщиной;
- размером (длина x ширина);
- массой.

По типу поверхности все бахилы гладкие.

Основные технические характеристики бахил (масса, толщина, размеры), цвет представлены таблице № 1 – ПНД, таблице № 2 - НПП, таблице № 3 – ПНД с дополнительной подошвой.

Таблица № 1

Основные характеристики бахил из ПНД

Артикул	Цвет	Масса* в г.(пара)	Толщина** в мкм.	Размер*** (длина*ширина) в мм
0009С	Синий	2,6	9	400*150
0009З	Зеленый	2,6	9	400*150
0009Ж	Желтый	2,6	9	400*150
0014С	Синий	3,2	14	400*150
0014З	Зеленый	3,2	14	400*150
0014Ж	Желтый	3,2	14	400*150
0017С	Синий	3,8	17	400*150
0017З	Зеленый	3,8	17	400*150
0017Ж	Желтый	3,8	17	400*150

* и ** допустимое отклонение $\pm 10\%$

*** допустимое отклонение ± 10 мм

Основные характеристики бахил из НПП

Артикул	Цвет	Толщина* г/м ²	Размер** (длина*ширина) в мм
0117Б	Белый	17	280*120
0117Г	Голубой	17	280*120
0120Б	Белый	20	280*120
0120Г	Голубой	20	280*120
0217Б	Белый	17	320*120
0217Г	Голубой	17	320*120
0220Б	Белый	20	320*120
0220Г	Голубой	20	320*120
0317Б	Белый	17	360*120
0317Г	Голубой	17	360*120
0320Б	Белый	20	360*120
0320Г	Голубой	20	360*120
0417Б	Белый	17	390*120
0417Г	Голубой	17	390*120
0420Б	Белый	20	390*120
0420Г	Голубой	20	390*120
0035Б	Белый	35	390*150
0035Г	Голубой	35	390*150

Масса 1 пары бахил из НПП должна быть не более 10 г.

* допустимое отклонение $\pm 10\%$

** допустимое отклонение ± 10 мм

Основные характеристики бахил из ПНД с двойной подошвой

Артикул	Цвет	Масса* в г.(пара)	Толщина** , основа/подошва в мкм.	Размер*** (длина*ширина) в мм
0909БС	Белый/Синий	3,1	9/9	400*150
0909БО	Белый/Оранжевый	3,1	9/9	400*150
0909СС	Синий/Синий	3,1	9/9	400*150
0914БС	Белый/Синий	3,6	9/14	400*150
0914БО	Белый/Оранжевый	3,6	9/14	400*150
0914СС	Синий/Синий	3,6	9/14	400*150
1414БС	Белый/Синий	4,3	14/14	400*150
1414БО	Белый/Оранжевый	4,3	14/14	400*150
1414СС	Синий/Синий	4,3	14/14	400*150
1417БС	Белый/Синий	4,6	14/17	400*150
1417БО	Белый/Оранжевый	4,6	14/17	400*150
1417СС	Синий/Синий	4,6	14/17	400*150
1717БС	Белый/Синий	5,1	17/17	400*150
1717БО	Белый/Оранжевый	5,1	17/17	400*150
1717СС	Синий/Синий	5,1	17/17	400*150

* и ** допустимое отклонение $\pm 10\%$

*** допустимое отклонение ± 10 мм.

Бахилы из ПНД с дополнительной подошвой имеют размер подошвы (длина x ширина) 400 x 130 мм с допустимым отклонением ± 10 мм.

1.3. Состав изделия

В качестве основного материала используется ПНД (полиэтилен низкого давления) марки Н и НПП (нетканое полипропиленовое полотно) марки СС.

Резинка из нити латексной оплетенной 44x150.

В таблице № 4 представлена комплектность изделия.

Таблица № 3

Комплектность изделия

	Наименование	Кол-во, пар.
1	Бахилы медицинские из ПНД арт. _____	От 1000 до 5000
	Руководство по эксплуатации	1
	Упаковка	1
2	Бахилы медицинские из НПП арт. _____	От 1000 до 5000
	Руководство по эксплуатации	1
	Упаковка	1
3	Бахилы медицинские из ПНД с двойной подошвой арт. _____	От 1000 до 5000
	Руководство по эксплуатации	1
	Упаковка	1

1.4. Устройство и работа

Бахилы представляет собой одноразовое изделие для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

Для закрепления изделия на обуви бахилы имеет резинку.

Бахилы не оказывают вредного воздействия на человека, при использовании их в нормальных комнатных и атмосферных условиях (температура — от минус 20 °С до плюс 30°С, давление -760 мм рт.ст.).

1.5. Маркировка

Маркировка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444.

Маркировка приклеиваться к потребительской упаковке в виде информационного листа или вкладываться в транспортную тару.

На каждом упаковочном листе указаны:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- условное обозначение изделия;
- цвет;
- тип поверхности;
- толщина;
- размер бахил;
- номер партии;
- год изготовления (или две последние цифры);
- обозначение настоящих технических условий;
- для однократного применения.

Также допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (например, сведения о сертификации, число изделий и др.)

На каждом ящике из гофрированного картона указаны:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- год изготовления (или две последние цифры);
- обозначение настоящих технических условий;
- для однократного применения;
- число изделий;
- надпись: "годен до _____".

1.6.Упаковка

Упаковка бахил соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.

Бахилы одного типа, цвета, массы, размера и толщины из одной партии одной пары должны быть уложены в полиэтиленовый пакет или в капсулу или в коробочку.

Групповая упаковка бахил одного типа, цвета, массы, размера и толщины из одной партии в количестве от 10 до 50 пар в потребительской упаковке уложены в пакете из полиэтилена, картонную коробку или пластиковую упаковку.

Бахилы одного типа, цвета, массы, размера и толщины из одной партии в кол-ве от 1000 до 5000 пар уложены в транспортную упаковку из картона.

Транспортная упаковка достаточно прочная и надежная, чтобы предохранить содержимое упаковки при транспортировании и хранении.

VI. Транспортирование

Бахилы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Ящики с бахилами формируют в транспортные мешки и транспортируют по ГОСТ 26663.

Ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

VII. Утилизация

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

IX. Контактные данные

Производитель: ООО «Амарант»

Юридический адрес: 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д 298, помещение 1

Место производства: Удмуртская республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, д 298, помещение 1

Тел: +7(3412) 55- 44-40; 918-334; 47-39-93

E-mail: 1amarant@mail.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения																			Номера страниц
																			заменённых
																			дополнительных
																			исключённых
																			изменённых
																			Всего страниц после внесения изменения
																			Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного документа)
																			Подпись лица, внесшего изменения
																			Фамилия этого лица и дата внесения изменения

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 9 (906976) листа (ов)
Директор
ООО «АМАРАНТ» Am
Н. Ю. Сильнова

