



Изделие медицинское «Подушка анатомическая с микросферами»  
Руководство по эксплуатации

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ООО «Альсария»

Е.В. Шураева



2015 г.

**Руководство по эксплуатации**

**Изделие медицинское «Подушка анатомическая с микросферами»**  
по ТУ 9396-003-89742898-2013



**Описание**

Изделие представляет собой подушку, состоящую из двух наволочек: внешней и пришитой к ней внутренней наволочкой из водонепроницаемой ткани с заклеенными герметичной лентой швами и наполненной микросферами.

Наполнитель изделия (микросферы) изготовлен из природных минералов, химически нейтрален, гидрофобизирован, не сохраняет запах, не является средой обитания для насекомых и вредных микроорганизмов, не аллергенен, обладает антибактериальными свойствами, имеет высокую стойкость к разрушению.

**Принцип действия**

Наполнитель легко перемещается под все располагающиеся на нем части тела человека и оказывает пассивную ортопедическую поддержку – образует валик, повторяющий контур головы, шеи и других частей тела. Подушка принимает индивидуальную для каждого анатомическую форму.

**Назначение**

Подушка может применяться под голову во время сна, отдыха, под ноги, на область поясницы, живота, суставов грудной клетки для комфортного отдыха, при нарушении засыпания, нарушении мозговой деятельности, при наличии болей, тяжести в ногах, суставных заболеваниях, варикозной болезни вен нижних конечностей, болях в области спины, живота, воспалительных и простудных заболеваниях и т.д. на соответствующие области тела. Для оказания косметического эффекта (улучшения цвета лица, уменьшения отеков, разглаживания мелких морщин).

Подушки выполнены в разных размерах, что позволяет подобрать размер, подходящий



## Изделие медицинское «Подушка анатомическая с микросферами» Руководство по эксплуатации

именно Вам.

### Эксплуатация

Перед применением встряхнуть, равномерно разгладить изделие. В процессе эксплуатации, при необходимости, просушивать изделие для поддержания нормальной влажности. При использовании изделий рекомендуется применять наволочку. Изначально применять подушку по 15 минут с перерывами не менее 60 минут 2-3 раза в день. Перед сеансом выпить стакан воды. Постепенно увеличивать время и частоту использования, ориентируясь на собственные ощущения. При наличии в организме хронических заболеваний возможны реакции обострения. В таком случае в использовании изделия сделать перерыв 1-2 дня, пить больше воды. При затвердении встряхнуть, поместить у источника тепла (на солнце, у батареи). Для большего срока службы необходимо бережное обращение.

### Уход за изделием

Не стирать с использованием синтетических моющих средств. При необходимости в чистке изделия почистить влажной тряпочкой, смоченной в растворе детского мыла. Противопоказаний к использованию не имеет.

### Меры предосторожности

Не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения и т. п.) для сохранения целостности шва;

### Транспортировка и хранение

Транспортировку изделий и их хранение допускается производить при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

### Утилизация

Утилизировать изделие обычным способом, исключая канализацию.

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии 3 месяца. При браке по вине производителя производится бесплатная замена.

Наименование изделия - Подушка анатомическая с микросферами

Технические условия - ТУ 9396-003-89742898-2013

Регистрационное удостоверение - РЗН 2014/2257

Сертификат соответствия - РОСС RU.ИМ25.Н09049

Состав ткани - полиэстер 100 %

Изготовитель - ООО «Альсария»

Страна - Россия

Адрес - 302008, Орловская область, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 2а



Сшито, проэктовано и

прошнуровано

листов

Генеральный директор

ООО «Альсария»

Шураева Е. В.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ООО «Альсария»

Е.В. Шураева



2015 г.

**Руководство по эксплуатации**

**Изделие медицинское «Подушка анатомическая с микросферами»**  
**по ТУ 9396-003-89742898-2013**



**Размеры подушек:**

подушка 40 x 50 см, масса 1200 г ± 240 г

подушка 40 x 62 см, масса 1900 г ± 250 г

подушка 70 x 50 см, масса 1500 г ± 300 г

подушка плоская 100 x 70 см, масса 3000 г ± 600 г

**Описание**

Изделие представляет собой подушку, состоящую из двух наволочек: внешней и пришитой к ней внутренней наволочкой из водонепроницаемой ткани с заклеенными герметичной лентой швами и наполненной микросферами.

Наполнитель изделия (микросферы) изготовлен из природных минералов, химически нейтрален, гидрофобизирован, не сохраняет запах, не является средой обитания для насекомых и вредных микроорганизмов, не аллергенен, обладает антибактериальными свойствами, имеет высокую стойкость к разрушению.

**Принцип действия**

Наполнитель легко перемещается под все располагающиеся на нем части тела человека и оказывает пассивную ортопедическую поддержку – образует валик, повторяющий контур головы, шеи и других частей тела. Подушка принимает индивидуальную для каждого анатомическую форму.

**Назначение**

Подушка может применяться под голову во время сна, отдыха, под ноги, на область поясницы, живота, суставов грудной клетки для комфортного отдыха, при нарушении засыпания, нарушении мозговой деятельности, при наличии болей, тяжести в ногах, суставных заболеваниях, варикозной болезни вен нижних конечностей, болях в области

спины, живота, воспалительных и простудных заболеваниях и т.д. на соответствующие области тела. Для оказания косметического эффекта (улучшения цвета лица, уменьшения отёков, разглаживания мелких морщин).

Подушки выполнены в разных размерах, что позволяет подобрать размер, подходящий именно Вам.

#### Эксплуатация

Перед применением встряхнуть, равномерно разгладить изделие. В процессе эксплуатации, при необходимости, просушивать изделие для поддержания нормальной влажности. При использовании изделий рекомендуется применять наволочку.

Изначально применять подушку по 15 минут с перерывами не менее 60 минут 2-3 раза в день. Перед сеансом выпить стакан воды. Постепенно увеличивать время и частоту использования, ориентируясь на собственные ощущения. При наличии в организме хронических заболеваний возможны реакции обострения. В таком случае в использовании изделия сделать перерыв 1-2 дня, пить больше воды.

При затвердении встряхнуть, поместить у источника тепла (на солнце, у батареи). Для большего срока службы необходимо бережное обращение.

#### Уход за изделием

Не стирать с использованием синтетических моющих средств. При необходимости в чистке изделия почистить влажной тряпочкой, смоченной в растворе детского мыла. Противопоказаний к использованию не имеет.

#### Меры предосторожности

Не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения и т. п.) для сохранения целостности шва;

#### Транспортировка и хранение

Транспортировку изделий и их хранение допускается производить при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

#### Утилизация

Утилизировать изделие обычным способом, исключая канализацию.

#### Гарантийные обязательства

Срок гарантии 3 месяца. При браке по вине производителя производится бесплатная замена.

Наименование изделия - Подушка анатомическая с микросферами

Технические условия - ТУ 9396-003-89742898-2013

Регистрационное удостоверение - РЗН 2014/2257

Сертификат соответствия - РОСС RU.ИМ25.Н09049

Состав ткани - полиэстер 100 %

Изготовитель - ООО «Альсария»

Страна - Россия

Адрес - 302008, Орловская область, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 2а



Сшито, пронумеровано и  
прошнуровано  
участков

Генеральный директор  
ООО «Альсария»  
Шураева Е. В.

