

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20 ____ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России


« 13 » 05 2013 г. В.Ф. Руденко

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Набора реагентов

Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий
туберкулеза, готовая к применению (среда Финн-2)

Набор реагентов Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, готовая к применению (среда Финн-2) представляет собой однородную массу, которую получают смешиванием водных растворов солей, малахитового зеленого с глицерином и яичной массой.

Состав:

Магний сернокислый -7 водный	0,16 г;
Натрий лимоннокислый 5,5-водный	0,33 г;
Железоаммонийные квасцы	0,016 г
Калий дигидроортофосфат для пищевой, медицинской и микробиологической промышленности	6,6 г;
Аммоний лимоннокислый однозамещенный	1,6 г;
Натрий глутаминовокислый кислый	3,3 г;
Малахитовый зеленый (2 % водный раствор)	11,0 мл;
Глицерин	6,6 мл;
Крахмал растворимый	4,74 г;
Яйцо куриное в виде яичной массы	666,0 мл;
Вода дистиллированная	316,4 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза готовая к применению (среда Финн-2) предназначена для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, атипичных микобактерий из инфицированного материала (мокрота, моча и др).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Оборудование и материалы, необходимые для анализа.

- Термостат, обеспечивающий температуру $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$;
- Автоклав;
- Пробирки стеклянные;
- Микроскоп
- Спиртовка
- Вода дистиллированная;
- Петля бактериологическая
- Спиртовка;
- Пипетки;
- Пробки резиновые;
- 0,9 % раствор натрия хлорида;
- Вата медицинская гигроскопическая
- Марля медицинская.

2. Меры предосторожности.

Соблюдение Приказа МЗ РФ № 109 от 21.03.03 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», а также санитарных правил СП 1.3.2322-08 «Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности)».

3. Подготовка питательной среды для использования.

Питательная среда Финн-2 готова к применению.

4. Проведение анализа.

Посев исследуемого материала проводить согласно «Инструкции по унифицированным методам микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза», утвержденной приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Регистрацию и учет результатов анализа проводят визуально, по наличию роста колоний. Учет результатов производят согласно «Инструкции по унифицированным методам микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза», утвержденной приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

ФОРМА ВЫПУСКА

Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза готовая к применению (среда Финн-2)» выпускается в пробирках стеклянных по 6,5 мл, закрытых резиновыми пробками, по 10 штук во вкладыше из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

Транспортирование - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25 °С.

Срок годности – 3 мес. По истечению срока годности набор реагентов использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности направлять в адрес предприятия – производителя ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России: Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 710-37-87.

Адрес производства: Россия, 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д.24, тел. (8722)62-47-79.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 листа(ов)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФГУП «НПО «МИКРОГЕН»
МИНИСТРАВА РОССИИ
В.Ф.РУДЕНКО