

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «С.М.С.»



Перышкова О.Е.

26 сентября 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по применению ЗОНДОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
производства фирмы «SMITHS MEDICAL INERNATIONAL LIMITED» UK.**

ЗОНДЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ

1. Назначение.

Зонды желудочно-кишечные – расходуемое медицинское изделие предназначенное в зависимости от глубины введения для зондирования желудка или кишечника через естественные пути доступа с целями эвакуации содержимого (декомпрессия), введения питательных смесей и лекарственных веществ.

2. Основные технические характеристики.

Зонд представляет собой полую трубку с оливой и шестью отшлифованными отверстиями на дистальном конце. Во избежание прилипания к слизистым оболочкам органов и окклюзии фрагментами содержимого отверстия расположены по спирали. Зонды Роялса (Рильса) имеют четыре стальных шарика в оливе. На противоположном конце расположен павильон для подключения дополнительной оснастки, обычно закупоренный конусной притёртой пробкой.

Предназначено для применения у одного пациента не дольше 30 суток.

Стерильно, пока упаковка не открыта или не повреждена.

3. Противопоказания к применению.

Известные перфорации пищевода.

4. Подготовка изделия к работе.

Изучить инструкцию пользователя. Взять изделие в упаковке и проверить целостность последней. Подготовьте рабочее место согласно правилам асептики. Открыть упаковку.



5. Порядок работы изделия.

- Смазать кончик зонда и зонд на протяжении 40-50 см лубрикантами на водной основе.
- Установить зонд через рот или нос пациента в желудок.
- При необходимости провести зонд в двенадцатиперстную кишку.
- В трудных случаях рекомендуется произвести рентгенографические исследования для подтверждения правильности установки зонда.
- Зафиксировать зонд пластырем в определенном положении.
- При необходимости соедините зонд с дренажной системой.
- По окончании эксплуатации аккуратно извлечь зонд.
- Уход за установленным зондом проводить согласно общепринятой методике.

Меры предосторожности

1. Блокированная или частично блокированная или перегнутая дренажная трубка может привести к грозным осложнениям: регургитация содержимого, аспирационный синдром.
2. Максимальный срок использования без замены дренажной трубки рекомендуется 30 дней. Однако следует принимать во внимание травмирующее свойство твёрдых тел на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

6. Правила хранения и использования.

Транспортировать и хранить при температуре окружающей среды от -20,0 до +70,0°C, при относительной влажности 0-90% без парения и образования конденсата. Допустима транспортировка при температурном режиме ниже -20,0 °C при соблюдении правил: 1) бережного обращения, 2) перед употреблением по назначению выдерживание изделий в упаковке в течение 24 часов в помещении с комнатной температурой от +15,0 до +25,0°C.